


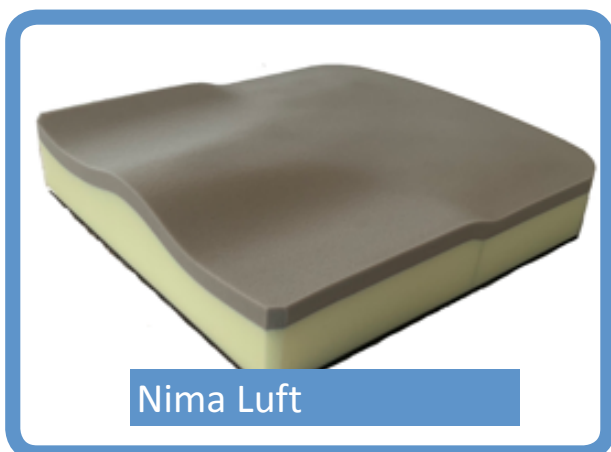

Nima Luft

Lätt, luftig och skön dyna med mjuk och stötdämpande sits.

Teknisk specifikation/

Varudeklaration

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Botten i hård cellplast gör dynan formstabil

Fjäderkassett i sittgropen gör dynan luftig och komfortabel och ger utmärkt tryckavlastning. Den fördelar trycket under sittbensknölar och svanskotan.

Mjukt sittskikt som ger komfort.

Material i dynbas: Polyeter, cellplast, X-Pocket-fjäderkassett

Ytskikt: Högelastisk polyeter 50kg/m³

Tvättråd

Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,5-1,3 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg

Beskrivning

Nima luft är en skumdyna med fjäderkassett i sittgropen.

Dynan är väldigt lätt och luftig samtidigt som den ger ett mjukt sittande och hög tryckavlastning under sittbensknölar

Dynans bas andas mycket väl vilket ger brukaren ett bra mikroklimat.

Överdraget är ett distansöverdrag i 3D mesh vilket ger förhöjd komfort och luftighet.

Tillbehörsförteckning

- Överdrag standard 3d mesh ej ink skyddat.
- Inkontinensskyddat överdrag.
- Hygienhätta

Produkten är CE Märkt

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och både dynan och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Iakttag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. **Rengöring och skötsel** Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. **Skrotningsanvisning.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart
6. **Anpassning.** Anpassning av mått, sitsvinkel, benlängdsskillnad, (m.m.) görs enligt beskrivning/ skiss i fabrik. Mindre beskärning går att göra i skummet för att uppnå extra avlastning.