



## Beskrivning

Nima Basic är en dyna för brukare som kan variera sitt sittande men behöver rullstol för transporter.

Nima Basic passar i såväl hängmattesits som plansits.

Överdrag och bas andas mycket väl vilket ger ett bra mikroklimat till brukaren. Skumbasens mjuka karaktär ger brukaren ett komfortabelt sittande.

### Tillbehörsförteckning

- Överdrag standard ej inkontinens.  
Inkontinensskyddat överdrag.

## Dyna Nima Basic

Rullstolsdyna för korttidsanvändning. Skuren kant för att passa både hängmattesits och plansits. Urtag i bakkant för rullstolens rör.

## Teknisk specifikation/ Varudeklaration

### Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

### Material

*Dyna: Brandskyddat Högelastiskt kallskum*

*Överdrag: Brandskyddad polyester som andas.*

### Tvättråd

*Dynan kan ytdecinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.*

*Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.*

### Dynans vikt

0,5-1 kg, beroende på storlek.

### Brukarvikt

Max 150 kg

**Produkten är CE Märkt**

## Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och både dynan och överdraget är märkt med etiketter som visar

hur dynan skall placeras på stolen. Iakttag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.

2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.

3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.

**4. Rengöring och skötsel** Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon.

Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

**5 Skrotningsanvisning.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart