



## Rekonditioneringsanvisning Elektriska rullstolar

- **Rengöring**

Rengör rullstolen med fuktig trasa om så måstes, spola inte med vatten. Använd en mjuk borste och mildt, miljömärkt rengöringsmedel om så krävs. Använd inte alkohol, skur- eller blekmedel.

- **Säkerhet**

Kontrollera belysning och körriktningssvisare.  
Kontrollera att signalhornet fungerar felfritt.

- **Bromsar och bromsprov**

När motorernas frikopplingsspak står i drivläge skall det inte vara möjligt att skjuta rullstolen framåt eller bakåt. Kontrollera också att rullstolen inte går att köra när spaken står i friläge.

Prova att skjuta joystick sakta framåt, båda motorernas magnetbromsar skall släppa (klicka till) samtidigt. Då joystick släpps skall bromsarna aktiveras igen inom någon sekund. Denna test kan upprepas och då påverka joystick i olika riktningar.

- **Joystick**

Kontrollera med avslagen stol att joysticken inte är krökt eller på annat sätt skadad och att den återgår till neutralläge när den släpps. Det ska inte vara möjligt att slå på rullstolen när joysticken är påverkad.  
Kontrollera att gummibälgen runt joystick är hel.

- **Hjul**

Kontrollera att hjulbultarna är ordentligt åtdragna

- **Däcktryck**

Kontrollera att hjulen har ett jämt däcktryck. Knappt 2,0 bar är lämpligt, maximalt 2,1 till 2,5bar, beroende på modell. Kontrollera att de är jämt slitna och slitbana.

- **Chassi**

Kontrollera chassi så att inga sprickbildningar uppstått.

- **Mekanik**

Kontrollera och efterdrag om nödvändigt skruvar och muttrar på t.ex. armstöd, benstöd, manöverbox, och tillbehör

Kontrollera att tippskydden är hela och att hjulen rullar utan stor påverkan.

Kontrollera att motorerna inte läcker olja.

Kontrollera att motorer och växellådor inte låter onaturligt mycket.



- **Elektronik**

Kontrollera att kablage och kontakter är oskadade och korrosionsfria.

Kontrollera att batterierna sitter fast ordentligt.

Kontrollmät att batterierna ej har några skadade eller defekta celler.

Kontrollera att alla eventuella elektriska ställdon fungerar tillfredställande och att inga kablage kan komma i kläm och skadas.

- **Smörjning**

Smörj om nödvändigt rörliga delar t.ex. sitslyft, tilt och liknande. Använd ett syrafritt och miljömärkt fett.

- **Provkörning**

Kontrollera att rullstolen har en jämn och balanserad gång.

- **Laddning**

Ladda stolen, kontrollera att stolen tar laddning



## Rekonditioneringsanvisning Elektriska rullstolar

Modell ..... Sits.....

Serienummer.....

Löp-/individnummer.....

Underhållspunkt	OK	Anmärkning
<b>Hel &amp; ren</b>		
<b>Säkerhet</b>		
Belysning		
Signalhorn		
Bromsprov inkopplad		
Bromsprov frikopplad		
Magnetbromsar släpper		
Magnetbromsar aktiveras		
Med joystick i olika riktningar		
Joystick		
Gummibälg		
Däckstryck		
Hjulbultar		
<b>Chassi</b>		
Kontrollera att inga sprickor finns		
<b>Mekanik</b>		
Skrivar och muttrar		
Tippskydd		
Oljeläckage		
Missljud		
<b>Elektronik</b>		
Kablage		
Kontakter/Kabelskor		
Batterier fastsatta		
Batteri status		
Elektriska ställdon		
<b>Provkörning</b>		
<b>Laddning</b>		
Övrigt		

Datum.....

Signatur.....