

Manual

Tango XL | 5100 5705



Innehållsförteckning

Viktig information	2
1.Introduktion	3
1.1.Introduktion.....	3
1.2.Säkerhet.....	3
1.3.Garanti.....	4
2.Användning	4
2.1.Första användning.....	4
2.2.Arbeta med Tango XL.....	5
3.Inställning	6
3.1.1Hjulblockering.....	6
3.2. Riktat/bromsat hjul.....	6
3.3.Fotstöd.....	7
3.4.Armstöd.....	9
3.5.Toalettfunktion.....	9
3.5.1.I kombination med toalett.....	9
3.5.2Användning av bäcken eller potta.....	9
3.6.Avtagbar sittdyna.....	10
4.Rengöring och underhåll	11
5.Förvaring och transport	12
6.Avlägsnande av delar	13
7.Tekniska specifikationer	13
7.1.Struktur.....	13
7.2.Mått.....	13
8.Egna noteringar	15

Viktig Information

Läs dessa instruktioner noga före användning av Tango XL.

Datum vid första användning

Användare

Namn

Adress

Tillverkare

Lopital

Laarakkerweg 9
5061 JR. Oisterwijk

Nederländerna

T +31 (0)13 5239300

F +31 (0)13 5239301

www.lopital.com

info@lopital.nl

Återförsäljare

Now Boarding AB

Skeppargatan 9

93130 Skellefteå



Sverige

070-3850710

Info@nowboarding.se

2

www.northerncare.se

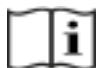Symboler	
	Läs instruktionerna för användning
	Notera

1.Introduktion

1.1. Introduktion

Tango XL dusch-toalettstol är en medicinsk produkt för vård av personer på ett ergonomiskt ansvarsfullt sätt. Komfort är primärt för både klienten och vårdgivaren. Tango XL kan också användas som en toalettstol i kombination med ett bäcken. Tango XL är en dusch-toalettstol med fällbara armstöd, polypropen 2-delad borttagbar sits, skenor för ett bäcken och roterande, vikbara fotstöd. Dessa funktioner är av hög kvalitet.

Tango XL:s genomsnittliga livslängd är 10 år, förutsatt att den rengörs dagligen och underhålls regelbundet enligt det underhållsschema som bifogas.. (Se kapitel 4 Rengöring och underhåll).

Tango XL är en klass 1-produkt med CE-märkning. Denna märkning motsvarar direktiv 93/42/EG och det reviderade direktivet (2017/745, MDR) som trädde i kraft 25 maj 2017.

1.2. Säkerhet

Var noga med att läsa och gå igenom nedanstående punkter före och under användning. Detta av säkerhetsskäl för klient och vårdgivare.

Användning:

- Se till att Tango XL-bromsen är applicerad före överföring av klienter.
- Meddela klienten innan du flyttar Tango XL.
- Se till att klienten alltid placerar armarna på ett lämpligt sätt över armstöden för att undvika att fastna.
- Håll armstöden nedvikta när du flyttar Tango XL.
- Försök alltid att transportera stolen bakåt över hinder (i stället för framåt).
- Det är inte tillåtet att använda Tango XL med en användarvikt över 250 kg.
- Tango XL får inte användas för att transportera andra laster än människor.
- Använd endast originaldelar, levererade av Lopital (Now Boarding AB).
- Använd Tango XL i en ren och städad arbetsmiljö.
- Tango XL får endast användas av en auktoriserad person.
- Poolområden anses inte vara "normala förhållanden" och kommer förkorta livslängden för vissa komponenter.
- Vid användning av Tango XL får vattentemperaturen inte överstiga 43 °C.

Underhåll:

- Tango XL måste inspekteras och underhållas minst en gång per år.
- Service och underhåll av Tango XL får endast utföras av personer godkänd av Lopital.
- Konstruktiva komponenter i Tango XL får endast ersättas av godkänd Lopital-personal.
- Om felaktig användning, transport, olycka eller felaktigt underhåll leder till deformation av Tango XL, kan den inte längre användas och du måste kontakta leverantören.

Vid fel kan du kontakta Lopital eller din lokala leverantör.

E-post: service@lopital.nl eller info@nowboarding.se



Tango XL dusch-toalettstol får endast drivas av personer som har tillräcklig utbildning och expertpersonal som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.



Tango XL måste användas i klinisk miljö.



Att göra ändringar i konstruktionen kan påverka säkerheten hos Tango XL. Detta kommer också leda till att Lopitals ansvar och garantivillkor ogiltigförklaras. Som ett resultat kommer Tango XL inte längre att följa riktlinjerna för medicinsk utrustning.

1.3. Garanti

Lopital garanterar 2 års garanti avseende materialfel. I händelse av olika garantitillstånd kommer den exakta perioden att anges på din faktura.


Detta tjänar också som själva garantin.

Komponenter som utsätts för slitage kommer inte att omfattas av garantin om det inte finns ett tydligt materialfel.

2. Användning

2.1. Första användningen

Innan du använder Tango XL måste du kontrollera att följande komponenter är närvarande. Dessa komponenter kan ersättas av behöriga personer vid skada. Dessa komponenter är de applicerade delarna av Tango XL. Dessa komponenter kan komma i kontakt med användaren medan Tango XL används.

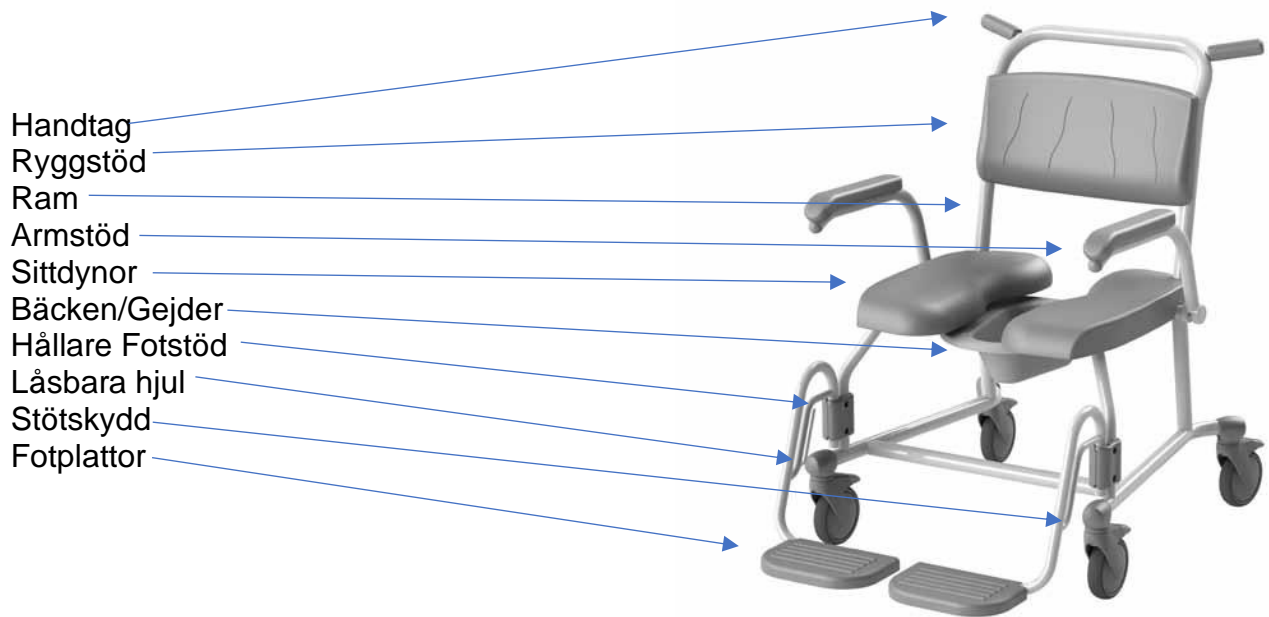

2.2. Arbeta med Tango XL

Steg 1

Vid behov, fäll upp armstöden upp (se punkt 3.3, armstöd).

Steg 2

Vänd fotstöden ur sin position (se punkt 3.3. Fotstöd).

Steg 3

Lås bromsarna före överföring av personer (Se punkt 3.1. Blockering av hjul).

Steg 4

Klienten kan sitta i stolen. Stöd klienten om det behövs.

Steg 5

Vänd fotstöden på plats och placera båda fötterna på fotstöden (se punkt 3.3 fotstöd).

Steg 6

Fäll ned armstöden igen när klienten har satt sig i stolen (se punkt 3.4. Armstöd).

Steg 7

Meddela klienten om de processer du ska utföra.


Steg 8

Lås upp bromsen när du vill flytta stolen (se punkt 3.1. Hjulblockering).

3. Inställning

3.1. Hjulblockering


- Bromsen kan appliceras på Tango XL genom att trycka den blå spärren (1) på hjulet nedåt (se figur 1).
- För att låsa upp Tango XL från bromsen, måste samma spärr på hjulet flyttas uppåt genom att trycka på spärrens övre sida (2) (se figur 1).

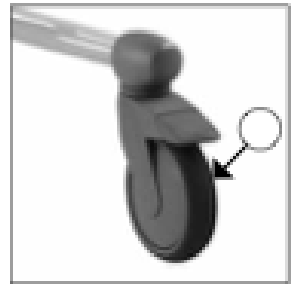

Figur 1

3.2. Riktat/bromsat hjul

Tango XL har en standarddesign med ett riktning/bromsat hjul. Detta gör det lättare att skjuta längs större avstånd eftersom stolen kommer rullar mer stabilt framåt. Det riktning/bromsade hjulet är fäst fram.

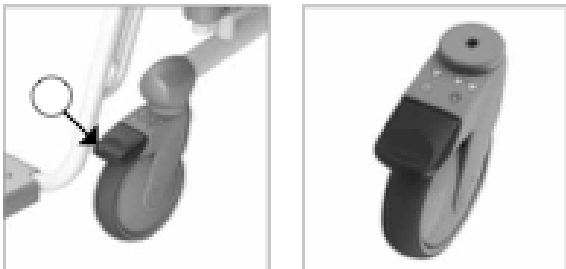

Figur 2

För att blockera hjulriktningen trycker du ner den svarta spärren. N. B. Se till att den svarta spärren 1 håller sig nedåt (1) (Se figur 2) för att låsa riktningen. När den svarta spärren 2 rör sig nedåt, kommer hjulet att blockeras. För att låsa Riktningen igen, samma spärr på hjulet måste flyttas uppåt genom att knacka på på övre sidan av den svarta spärren (2) (Se figur 2).

3.3. Fotstöd

Innan klienten placerar sig själv på Tango XL måste fotstöden lyftas något och vändas utåt. Detta ger tillräckligt med utrymme framför sitsen så att klienten på ett enklare sätt kan placera sig i stolen.



Figur 3



Figur 4

När klienten satt sig, behöver denne, med eller utan hjälp av vårdgivaren först lyfta ett ben, då vänder vårdaren fotstödet framåt tills det faller i låset. Klienten vilar sedan sin fot på fotstödet.



Sätt alltid tillbaka fotstöden på stolen när du är färdig med att använda dessa. Detta förhindrar att fotstöden försvinner.

Alternativ: Om det längdjusterbara fotstödet används, justera benstödens längd genom att dra ut den grå brickan, justera längden och lås sedan läget genom att sätta tillbaka brickan. (Se bilder)




Glöm ej att sätta tillbaka låsbrickan på fotstöden för att undvika att den försvinner.


Alternativ: Komfortbenstöd/Amputationsbenstöd (Artikelnummer 6960 8026).
 Bekvämt benstöd ger benen ytterligare stöd. Komfortbenstödet kan justeras i längd såväl som i vinkel. Vinkeln på benstödet kan justeras till 4 lägen, som visas i figurerna 5, 6, 7 och 8. För att ändra vinkeln behöver du dra ut låsknappen på sidan av stödet, när du har bestämt rätt läge, lås benstödet genom att släppa på låsknappen. (se bild 9).



Se till att låsknappen fastnar i läge i ett av det fyra hålen.

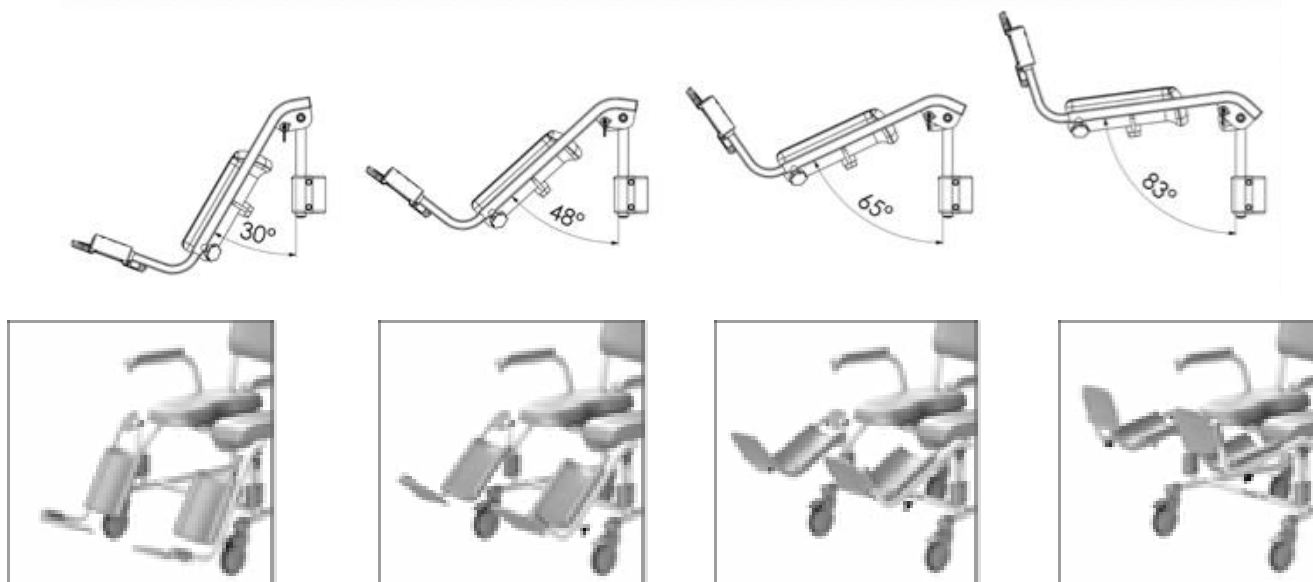


Figur 5 till 8: Justerbara vinklar

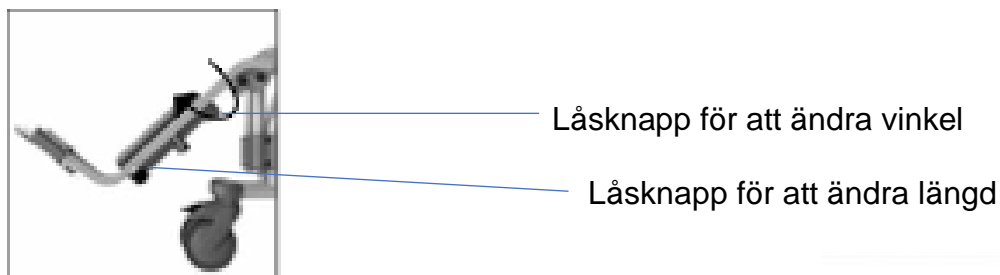

Figur 9: Låsknappar

För att justera längden på benstödet, dra ut låsknappen, justera längden på benstödet och lås sedan fast stödet genom att dra åt knappen. Se figur 9

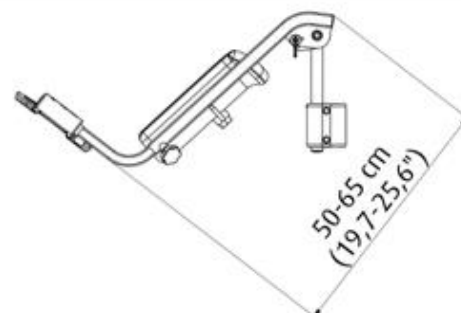

Se till att benstödet längd och vinkel är fastlåst ordentligt innan belastning.



Se till att placera benstöden på eller i närheten av stolen efter användning för att undvika att dessa försvinner.

3.4. Armstöd

- Armstöden är enkla att vika upp och ner
- Skydda användaren när du justerar armstöden uppåt och nedåt.
- I uppfällt läge bör armstöden inte falla ned av sig själv, i annat fall kontakta din leverantör.



Figur 10: Nedvikt



Figur 11: Uppfällt



Vid uppfällning av armstöden, håll uppsikt så armstöden inte fastnar i något.



När du viker upp armstöden, undvik att händer eller kroppsdelar fastnar mellan armstödet och ryggstödet.



Armstöden får inte användas till att dra eller slita i (t.ex. när du flyttar stolen över ett hinder) eller som en tryck- / dragstång. Du får inte heller sitta på den. Detta kan skada stolen.

3.5. Toalettfunktion

3.5.1. I kombination med toalett

- Tango XL kan flyttas bakåt över en toalettstol.



Tango XL passar inte över alla toalettstolar

3.5.2. Användning av bäcken eller potta

- Om Tango XL används som toalettstol, kan det monterade bäckengeijder under sitsen användas för att rymma ett bäcken, potta eller liknande i någon form.
- Dessa placeras från stolens baksida (se bild 12).
- Om du använder Lopitals potta/bäcken måste du placera denna så långt fram som möjligt (se bild 13).
- Om du använder någon annan typ av potta eller bäcken av rostfritt stål, kan denna placeras långt fram (se bild 14) eller långt bak under sitsen (se bild 15).



Figur 12: Bäcken



För att undvika skador rekommenderar vi vårdgivaren att sätta in pottan eller bäckenet innan klienten sätter sig på stolen.



Lopitals bäcken eller rostfria potta måste rengöras och desinficeras efter användning, till exempel i en dekontaminator.



Om Lopitals bäcken eller rostfria potta har använts, måste den avlägsnas från stolen innan stolen flyttas.

3.6. Avtagbar Sittdyna

Vid behov kan sittdynorna på Tango XL tas bort från ramen. Genom att göra så kan ramen rengöras ännu bättre. Dessa kan tas bort från ramen utan att använda verktyg. Drag dynorna uppåt (se bild 16). För att sätta tillbaka dessa trycker du fast dynorna på ramen. Se till att de passar bra och fastnar ordentligt runt ramen.



Figur 13 Bäcken



Figur 14 Potta Fram



Figur 15 Potta Bak



Figur 16 Sittdyna

4. Rengöring och underhåll


Tango XL måste rengöras efter varje användning, med vatten och vanliga hushålls rengöringsmedel. Ta bort överskott av tvålrester. PUR-integrerade skumkomponenter med IMC-beläggning ska gnidas rent och desinficeras. Använd inte slipmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel (t ex klorblekmedel). Praktiska erfarenheter har visat

att vanliga hushållsrengöringsmedel med begränsat alkoholnehåll (max 5%) är mest lämpade för detta ändamål. Produkten Neoquat combi® rekommenderas för desinfektionsändamål (på grundval av långvarig testning). Om nödvändigt kan PUR-komponenterna rengöras med en lösning av 70% etanol eller propanol.

Se till att både desinfektions- och rengöringsprocesserna innebär att komponenterna rengörs ordentligt. Lämna inte medlen som används kvar på komponenterna för länge detta har en signifikant inverkan på PUR-komponenternas livslängd. Som ett resultat av PURs materialegenskaper måste kontakt med skarpa föremål undvikas. Detta kan leda till skador eller tårar i materialet. Slutligen skulle vi vilja påpeka att icke-kritiska delar av PUR-komponenterna också måste rengöras och dekontamineras. Tango XL kan dekontamineras i upp till 90 grader i standardutförandet, detta gäller även bäcken och bäckengeijder.

Kontrollera hjulen regelbundet för hår, damm och tvålrester och ta bort vid behov. Underhåll och reparationer av Tango XL får endast utföras av auktoriserad personal.

Rekommenderat underhållsschema för långsiktig hållbarhet

Efter varje användning	<ul style="list-style-type: none">• Rengör stolen med vatten och vanligt förekommande hushållsprodukter
Varje Dag	<ul style="list-style-type: none">• PUR-skumkomponenterna måste rengöras och desinficeras.• Kontrollera att alla delar av Tango XL är närvarande, inklusive fotstöd.
Varje Vecka	<ul style="list-style-type: none">• Rengör Ramen• Kontrollera hjul för hår, damm och tvålrester och ta bort om nödvändigt.• Kontrollera att stolen fortfarande fungerar korrekt.
Varje År	 <p>• Enligt reglerna för medicinsk utrustning måste en stol upprätthållas i enlighet med tillverkarens instruktioner. Denna process görs företrädesvis av Lopital eller annan företrädare för Lopitals produkter som exempelvis i Sverige din hjälpmedelscentral. Lopital erbjuder möjligheten att få stolen noggrant inspekterad och service en gång om året via periodiskt förebyggande underhåll.</p> <p>För mer information om underhållsavtalet, kontakta Lopital service@lopital.nl eller tala med din leverantör.</p>

5. Förvaring och transport

Under transport och förvaring måste omgivningsförhållandena vara måttliga. Med andra ord bör temperaturen vara mellan -40 och +55 grader Celsius (-40 till 130 grader Fahrenheit) och fuktighetsnivåerna bör hållas så låga som möjligt. Vibration under transport måste hållas till ett minimum för att undvika att de svängbara mekanismerna på stolen skadas.

6. Avlägsnande av delar

Alla delar som ersätts eller tas bort kan skickas tillbaka till Lopital BV. Du kan också erbjuda delarna till ingenjören för destruktion. Vi ska se till att alla delar bearbetas på ett miljövänligt sätt.

7. Tekniska Specifikationer

7.1 Struktur

Ram: rostfritt stål, stålrör och plattor som är pulverlackerade i 2-lager.

Kopplingspunkter: Rostfritt stål, Knappar i plast V0

Hjul: Plast 12.5cm

Rygg och sits: PUR

Vikt: 21.5 kg

Max användarvikt: 250 kg




Komfortbenstöd vikt: 3.6 kg per enhet

7.2. Mått

Utsidans mått: Bredd 69cm, Djup 102cm

Sitthöjd: 53cm

Se mått specificerade i bildformat nedan.

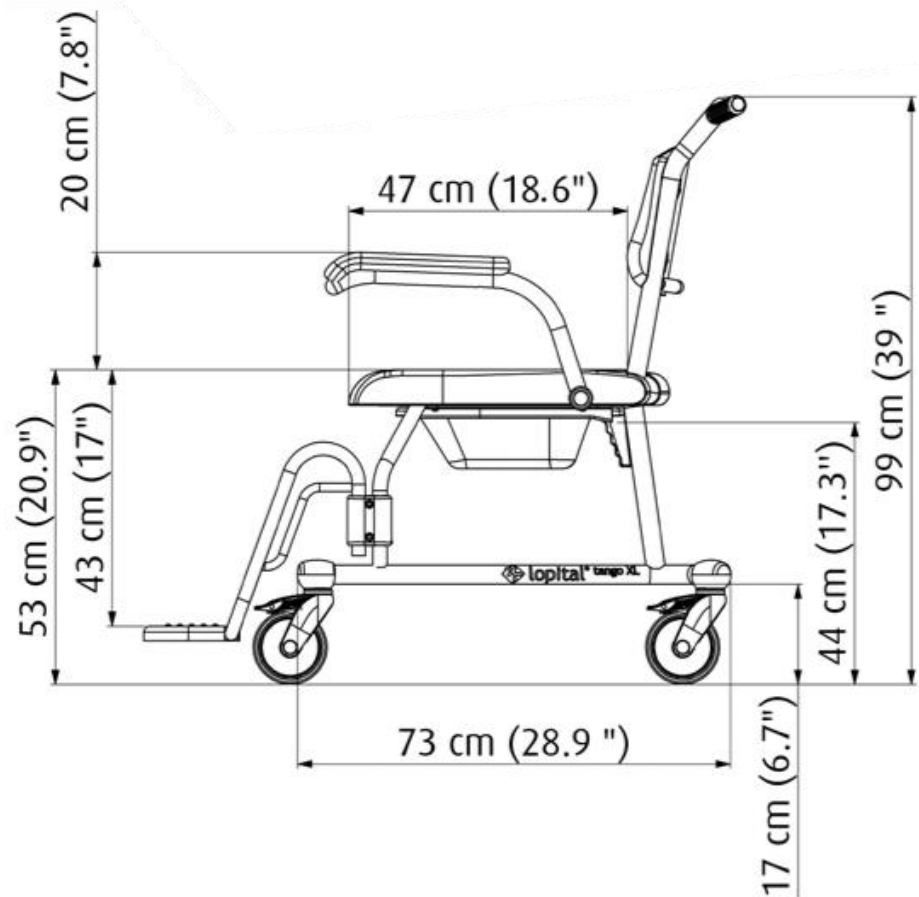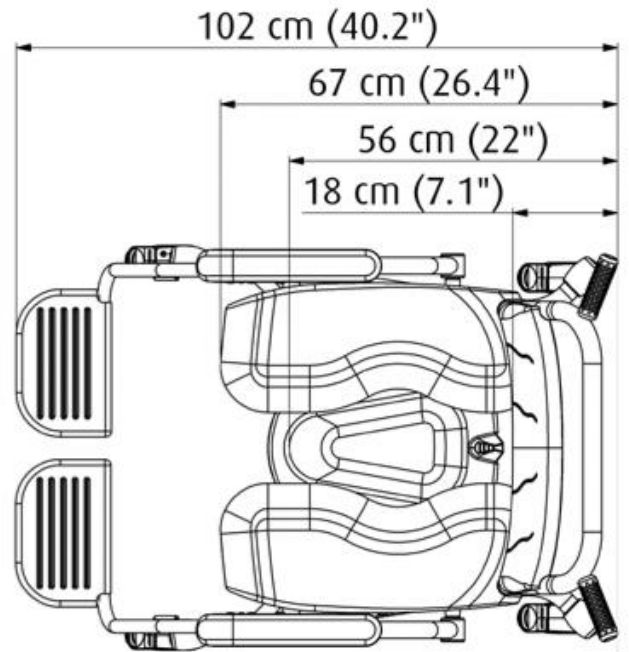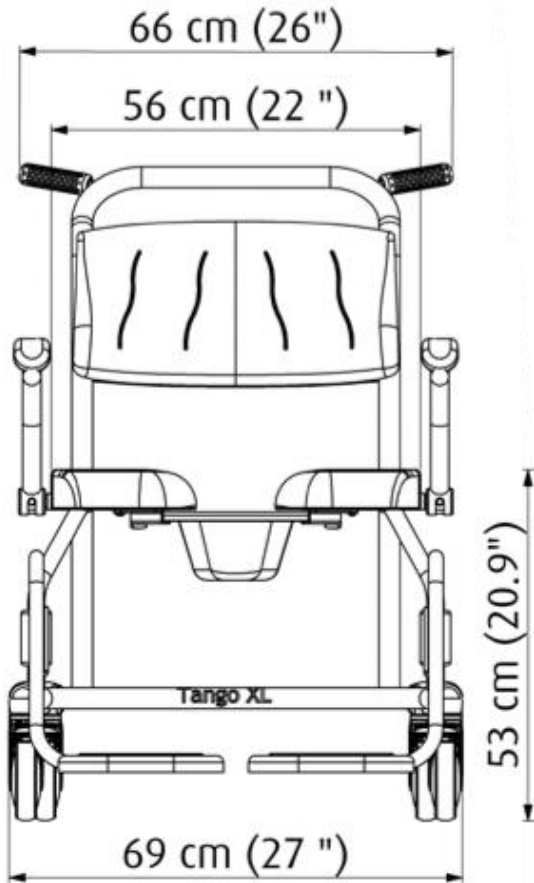

8. Egna Noteringar