

Bruksanvisning och skötselråd

Ultraflex teknikkäpp, ihopfällbar avancerad

Att fälla ut käppen

Lossa kardborrbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet. Håll räfflad del mellan tumme och pekfinger. Vrid handtaget ett kvarts varv moturs. Dra ut eller ihop käppen så den får önskad längd. Vrid handtaget medurs för att låsa fast det igen.

Att fälla ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Fäst kardborrbandet runt den ihopvikta käppen.



Skötsel

Se till att käppen är ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – ej olja). Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Byte av doppsko

Vrid doppskon medurs. Använd den medföljande skifsnycklen. Fäst den nya doppskon genom att gånga på den på käppen moturs.

Byte av handlovsrem

Lossa skruven i trähandtagen. Stick i den nya handlovsremmen och fäst skruven igen.

Byte av kardborreband som sitter fast på käppen

Lossa skruven i trähandtagen. Sätt på kardborrebandet på käppen med den lilla öglan på käppen. Sätt på handtaget och fäst skruven igen.

Byte av gummisträckband i Ultraflex

Verktyg som behövs:

- Plattång
- Monteringssats, som består av ett 5-delat mässingsrör (längd 150 cm, diameter 3 mm) med 0,5 mm stålrepögla och fastsättningsring (för att dra igenom gummibandet).
- Sexkantnyckel 2 mm till M4 sexkantskruv
- Virknål 1 mm
- M8 sexkantsmutter
- 1,5 meter gummiband (OBS använd endast original gummiband).

Borttagning av felaktigt gummiband

- Skruva av trähandtaget genom att vrida den räfflade metallbussningen.
- Klipp av gummibandet mellan rör II och III, skruva av doppskon. Knuten som finns längst fram i röret kan lossas med en virknål. Spännskruven är säkrad med en M4 sexkantskruv. Skruva loss M4-skruven med en 2 mm sexkantsnyckel och ta bort spännskruven. Om det inte går; skruva på en M8-mutter på spännskruven och vidrör endast muttern för att undvika skador på precisionsgängorna. Tag bort resten av gummibandet.

Att sätta in nytt gummiband

Tryck ihop rören VI, V, IV, III och II (för att undvika skador på rörfogarna).

- Drag med plattången ut en bandslinga på cirka 3 cm och drag igenom tyget runt gummibandet genom slingan/öglan. För att få tillräckligt med tyg; tryck ner tyget från gummibandet och klipp av gummibandet ungefär 3 mm, drag sedan tillbaka tyget.

Tillbehör och reservdelar

På vår hemsida och i nationella produktkatalogen finner ett stort sortiment av olika doppskor och tillbehör utifrån brukarens behov. Här finner du även original reservdelar.

Godkännanden

Alla käppar från Comde (Ultraflex, Telescopic, Childrens canes) är godkända medicinsktekniskt godkända.