
Manual och skötselråd

Svensk Markeringskäpp med knapp, Standard och Light

Fäll ut käppen

Lossa handlovsbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna med handen. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Skaka käppen lätt två till tre gånger. Kontrollera att alla skarvarna går in i varandra innan användandet.

Fäll ihop käppen

Tag tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Dela handlovsremmen så att den sätts delad runt den hopvikta käppen och sno den några varv så att käppen hålls ihop.

Skötsel

Se till att käppen är ren. Rengöringen kan enklast genomföras med käppen utfälld. Den bör regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – OBS ej olja). Om någon skarv har fastnat försök att dra isär rören – vrid dem inte. Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Tillbehör/reservdel	Art. nr
Doppsko m nylonpinne	50100-21
Gummiband	50100-23
Reflexband.....	50100-24
Låsanordning	50100-37




Byte av doppsko

Doppskon sitter fast i gummibandet som med en krok. Gör så doppsko:

det genomgående håller ihop käppen här för att byta

1. Dra ut doppskon så mycket att gummibandet kommer utanför käppen.
2. För in en penna eller motsvarande så att gummibandet inte åker in i käppen igen.
3. Kroka av den gamla doppskon och fäst den i det nya gummibandet.
4. Dra doppskon så att gummibandet spänns. Ta bort pennan. För den nya doppskon på plats i käppen.

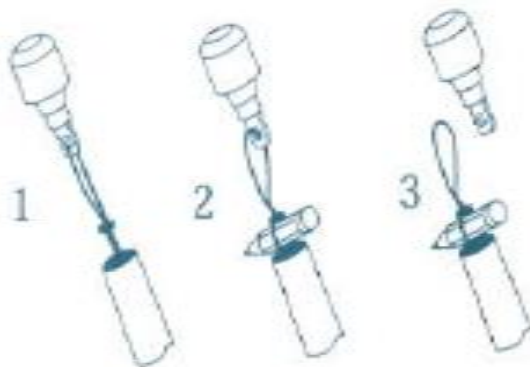

Byte av Handlovsrem/gummiband

Dra befintligt gummiband över handtagsknoppen. Sätt dit det nya gummibandet med den minsta öglan precis nedanför handtagsknoppen.

Godkännanden

Samtliga Svenska Markeringskäppar är CE-märkta enligt medicinsktekniskt direktiv.