
Manual och skötselråd

Teknikkäpp Teleskop Ultralätt



Konstruktion – värt att veta

För att göra käppen lätt så är den tillverkad av kolfiber. Kolfiber är starkt men kan vara känsligt för hårda stötar, framförallt när det är minusgrader. Kyla gör materialet känsligare för stötar.

Käppen består av 2 delar. Greppa doppskon med vänster hand. Vrid överdelen moturs ett halvt varv. Dra ut till önskad längd. Håll i underdelen och vrid överdelen försiktigt medurs tills den sitter fast.

Dra ut eller tryck ihop käppen

Håll i underdelen. Vrid överdelen moturs. Dra ut eller tryck ihop. Lås genom att försiktigt vrida överdelen medurs.

Skötsel

Se till att hålla käppen så ren som möjligt. Rengöringen bör genomföras med käppen utdragen. Rengör uppifrån och ned med doppskon riktad nedåt. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel).

Byte av doppsko

Håll käppens nedre del med vänster hand. Vrid doppskon moturs. Fäst den nya doppskon genom att gänga på den på käppen medurs. Kontrollera alltid att doppskon sitter fast ordentligt innan användandet.

Denna käpp har europastandard för doppsko. Det betyder att de flesta av våra doppskor går att använda till denna käpp. Sortimentet av doppskor finner du på vår hemsida. Det finns olika doppskort utifrån brukarens kätpteknik och andra behov.

Godkännanden

Käppen är MDD-märkt som medicintekniskt hjälpmedel