

Underhåll Perkins punktskriftsmaskiner

- 1) Skydda alltid maskinen när den inte används (skyddshuv eller en handduk typ). Skyddshuv finns som tillbehör, art nr 52020-10. Passar alla Perkins.
- 2) Håll den ren i största möjliga mån
- 3) Om maskinen inte används på ett tag – rör skrivhuvudet fram och tillbaka och gör några radmatningar. Vrid på rattarna så att valsens snurrar och inte står stilla i samma läge. All mekanik gillar att röra på sig.
- 4) Om maskinen kärvar behöver en kunnig personal öppna Perkins och göra rent. Iris Hjälpmedel kan utbilda personal för att klara en bra rekonditionering. Perkins rengörs först med lufttryck/kompressor. Därefter torkas allt gammalt fett bort och delarna smörjs på nytt. OBS. Det går inte att använda vilket fett som helst. Det kan få motsatt effekt. Kontakta Iris Hjälpmedel för mer information.
- 5) För att göra en total rekonditionering av en Perkins behövs specialistkompetens och vi rekommenderar att det genomförs av Iris Hjälpmedel i Sverige. Vi kan tillhandahålla korrekt fraktemballage som skydda skrivaren för frakt och eventuell omild hantering.

Övriga tillbehör till Perkins

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Dymotapehållare i metall | 52020-03 |
| • Dämpande underlägg | 52020-01 |
| • Iris överdragsskydd | 52020-10 |
| • Vibrerande radslut | 52029* |

*Anpassning på befintlig eller nybeställd Perkins Standard 52020.

