

Bruksanvisning och skötselråd

Svensk Markeringskäpp med knopp

<i>Art nr</i>	<i>Markeringskäpp med knopp 1</i>
50173	Markeringskäpp 100 cm 6-delad
50174	Markeringskäpp 105 cm 6-delad
50175	Markeringskäpp 110 cm 6-delad
50176	Markeringskäpp 115 cm 6-delad
50177	Markeringskäpp 120 cm 6-delad
50179	Markeringskäpp 125 cm 6-delad
50169	Markeringskäpp 85 cm 6-delad
50171	Markeringskäpp 90 cm 6-delad
50172	Markeringskäpp 95 cm 6-delad
	<i>Markeringskäpp med knopp 2</i>
50382-90	Markeringskäpp med knopp 90 cm
50382-95	Markeringskäpp med knopp 95 cm
50382-100	Markeringskäpp med knopp 100 cm
50382-105	Markeringskäpp med knopp 105 cm
50382-110	Markeringskäpp med knopp 110 cm
50382-115	Markeringskäpp med knopp 115 cm
50382-120	Markeringskäpp med knopp 120 cm
50382-125	Markeringskäpp med knopp 125 cm
	<i>Markeringskäpp med knopp B3</i>
50378-90	Markeringskäpp med knopp 90 cm

50378-95	Markeringskäpp med knopp 95 cm
50378-100	Markeringskäpp med knopp 100 cm
50378-105	Markeringskäpp med knopp 105 cm
50378-110	Markeringskäpp med knopp 110 cm
50378-115	Markeringskäpp med knopp 115 cm
50378-120	Markeringskäpp med knopp 120 cm
50378-125	Markeringskäpp med knopp 125 cm

Fäll ut käppen

Lossa gummibandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet.

Fäll ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Dela handlovsremmen så att den sätts delad runt den hopvikta käppen och sno den några varv så att käppen hålls ihop.

Skötsel

Se till att käppen är ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – ej olja). Om någon skarv har fastnat försök att dra isär rören – vrid dem inte. Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Tillbehör/reservdel

Art. nr

Doppsko m nylonpinne	50100-21
Gummiband	50100-23
Reflexband.....	50100-24

Byte av doppsko


Doppskon sitter fast i det genomgående gummibandet som håller ihop käppen med en krok. Gör så här för att byta doppsko:

1. Dra ut doppskon gummibandet käppen.
2. För in en penna så att åker in i käppen
3. Kroka av den och fäst den i det
4. Dra doppskon så att gummibandet spänns. Ta bort pennan. För den nya doppskon på plats i käppen.



så mycket att kommer utanför

eller motsvarande gummibandet inte igen.
gamla doppskon nya gummibandet.

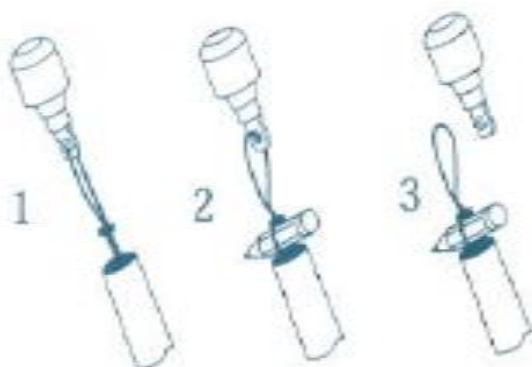

Byte av Handlovsrem/gummiband

Dra befintligt gummiband över handtagsknoppen. Sätt dit det nya gummibandet med den minsta öglan precis nedanför handtagsknoppen.