



BRUKSANVISNING

Fibertäcket™ är patenterat och klassas som medicintekniskt hjälpmedel. Det lindrar sömnproblem som uppstått av olika anledningar. Fibertäckena Futura™ & Nova™ används vid varierande diagnoser och problematik. Storlek på våra täcken: stora 150x200 cm och små 110x125 cm. Bruksanvisningen avser följande artiklar:

Stora	FUTURA™		NOVA™
Art.nr 008131080	4 kg	Art.nr 008131090	4 kg
Art.nr 008131081	6 kg	Art.nr 008131091	6 kg
Art.nr 008131082	8 kg	Art.nr 008131092	8 kg
Art.nr 008131083	10 kg	Art.nr 008131093	10 kg
Art.nr 008131084	12 kg	Art.nr 008131094	12 kg
Art.nr 008131085	14 kg	Art.nr 008131095	14 kg
Små			
Art.nr 008131086	2,3 kg	Art.nr 008131096	2,3 kg
Art.nr 008131087	3,7 kg	Art.nr 008131097	3,7 kg
Art.nr 008131088	5,0 kg	Art.nr 008131098	5,0 kg

NOVISTA



ATT ANVÄNDA FIBERTÄCKET™

- Använd Fibertäcket™ med påslakan och/eller hygienöverdrag.




ATT TVÄTTA FIBERTÄCKET™

- Novistas fibertäcken Futura™ & Nova™ tvättas i en vanlig tvättmaskin.
- Dela täcket (gäller inte små täcken) och tvätta/torktumla delarna separat, oavsett täckets vikt.
- Täcket tvättas i max 70° C vid rekonditionering, annars skontvätt i 60° C.
- Centrifugera med lägsta varvantal (400).
- Kan torktumlas på låg-/medeltemperatur.
- Häng upp täcket på tork.
- Sträck ut täcket på längden och bredden efter tvätt eller torktumling*.
- Täcket får inte strykas!




* Täcket krymper inte och ska ha sitt ursprungsmått efter tvätt och utsträckning.


ATT VIKA FIBERTÄCKET™

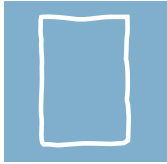

1. Placera täcket på en plan yta

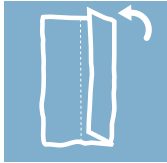

2. Vik täckets långsida mot mitten (5 kanaler in)

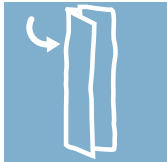

3. Vik den andra långsidan över den första



4. Vik ena kortsidan mot mitten



5. Vik andra kortsidan mot mitten



6. Vik ihop kortsidorna



7. Stoppa ner täcket i väskan

Tack för att du valde Fibertäcket!

Vi hoppas att det ska få dig att må bättre.



EFFEKTER AV FIBERTÄCKET™

Fibertäcket™ är tungt och ökar därför förmågan att slappna av och förbättrar djupsömnen. Det ger ett naturligt energitillskott och ökar kroppsuppfattningen. Användaren får, genom den goda spiralen som Fibertäcket™ utlöser, en generellt bättre livskvalitet.

FIBERTÄCKENA FUTURA™ OCH NOVA™

I Fibertäcket™ Futura™ utgörs vikten av långsgående polyester-fiber som gör det mjukt och följsamt, samtidigt som det ger en känsla av trygghet och lugn. Ena sidan av täcket är vadderad.

Nova™ är framtaget för personer som vill ha ett svalare och mer omslutande täcke. Nova™ är liksidigt, utan vaddering, i övrigt är det samma utförande som Futura™.

Fibertäckena Futura™ och Nova™ är CE-märkta medicintekniska klass 1 hjälpmedel som tillverkas i Europa. Produkterna är patenterade av Novista of Sweden AB.

TÄNK PÅ ATT...

Fibertäcket™ Futura™ upplevs olika beroende på vilken sida av täcket man vänder mot kroppen eftersom ena sidan är vadderad. Använd alltid täcket med påslakan och/eller våra hygienöverdrag.

SAMMANFATTNING TVÄTTRÅD FIBERTÄCKET™



Skontvätt 60° C, rekonditionering max 70° C.

GENERELLA GARANTIVILLKOR FIBERTÄCKET™

- Garantin för Novistas Fibertäcken gäller i 2 år eller 20 tvättar, beroende på vilket som infaller först.
- För Novistas tillbehör gäller 1 års garanti.
- Garantin gäller ej vid omild behandling eller om skötselråd ej följts.
- Vid en ev. reklamation hänvisar vi i första hand till din lokala kontaktperson (t ex din förskrivare). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, se baksidan för uppgifter.

VARNINGAR FIBERTÄCKET™

Om du har en nedsatt andningskapacitet ska du rådgöra med din arbetsterapeut innan du börjar använda ett tungt Fibertäcke™. Särskild försiktighet skall iakttagas vid användning av tunga fibertäcken tillsammans med små barn. Rådfråga sakkunnig om du är osäker.

Gå inte runt med Fibertäcket™ på dig. Det finns en risk för att du snubblar pga tyngden. Vid transport av Fibertäcket™ skall alltid medföljande bärväska användas.

FRÅGOR?

Kontakta vår kundtjänst, se baksidan.



HYGIENÖVERDRAG **ECOVERDE®**

Hygienöverdraget Ecoverde® är ett organiskt inkontinensskyddande påslakan som håller täcket rent och torrt vid vätskeläckage. Vätskespärren är helt vattentät men bäddmiljön blir ändå behaglig eftersom membranet släpper ut kroppsvärme och fukt. Ecoverde® har även en kvalster- och svampbarriär.

Dragkedjor på tre sidor av överdraget underlättar att stoppa i och ta ur tyngdtäcket. Hygienöverdraget finns tillgängligt i två storlekar, stort 150x200 cm och litet 110x125 cm.

Hygienöverdraget är naturligt flamskyddat, även efter tvätt.

SKÖTSELRÅD HYGIENÖVERDRAG



Ecoverde® tål att tvättas i upp till 95° men kan tvättas i 60° för längre livslängd. Hygienöverdraget Ecoverde® tillverkas i Europa. Hygienöverdraget ska tvättas med dragkedjan 10 cm öppen.

VARNINGAR HYGIENÖVERDRAG

Observera att risk för kvävning föreligger om överdraget ligger så att användarens luftvägar blockeras. Små barn och personer som är oförmögna att själva flytta täcket skall därför inte använda Fibertäcket™ med Ecoverde®.

VI UTBILDAR FÖRSKRIVARE

Är du arbetsterapeut eller förskrivare och verksam i en upphandlad region kan du få kostnadsfri utbildning från våra experter. Kontakta våra arbetsterapeuter med förfrågan via vår hemsida.



NOVISTA

Kunskap & trygghet

Kontakta oss för mer information

Novista of Sweden AB
Telefon 0431-49 13 10
info@novista.se

www.novista.se