



Snabbguide för programmering av SpeechEasy PRO

Starta SpeechMaster II


Dubbelklicka på den röda SpeechMaster-ikonen, för att öppna programmet.

Inloggning

"admin" är redan registrerat som användarnamn. Klicka bara på Logga in

Programmera SpeechEasy PRO

- Anslut SpeechEasy PRO med programmeringskabeln från Audio Pro C
- Tryck på Connect

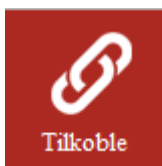

- Sparade inställningar läses automatiskt från den anslutna SpeechEasy PRO.
- Välj det antal program som ska användas (upp till 6 program).
Kom ihåg att Standard möjliggör att lanseringsprogrammet kan väljas (det program som SE PRO startar i, när den slås på).




- Kom ihåg att välja FAF-område, innan DAF och FAF justeras.
- För FAF-området ges 2 valmöjligheter, 0 - 4000 Hz och 4000 - 8000 Hz.
Om 0-4000Hz väljs, beräknas FAF enbart för frekvensområdet 0 - 4000Hz.
Frekvenserna från 4000 - 8000Hz ingår inte vid beräkningen och upplevs som naturligt ljud.
Vid valet 4000 - 8000Hz ingår allt ljud i beräkningen av FAF.



The screenshot shows two main control panels. The top panel is for DAF (ms), featuring a horizontal slider from 0 to 500 ms with a green marker at 100 ms and a numeric input field set to 100 ms. To the right is a dropdown menu for 'FAF område' currently set to '0-4000 Hz'. The bottom panel is for FAF (Hz), displaying a grid of radio buttons for various frequency values: -500, -375, -250, -125, 0, 125, 250, 375, 500, -1000, -875, -750, -625, 625, 750, 875, and 1000. The 500 Hz option is selected.

Viktiga tips vid utprovning av SpeechEasy PRO

Frekvensoptimering (Hz) används endast i en bullrig miljö

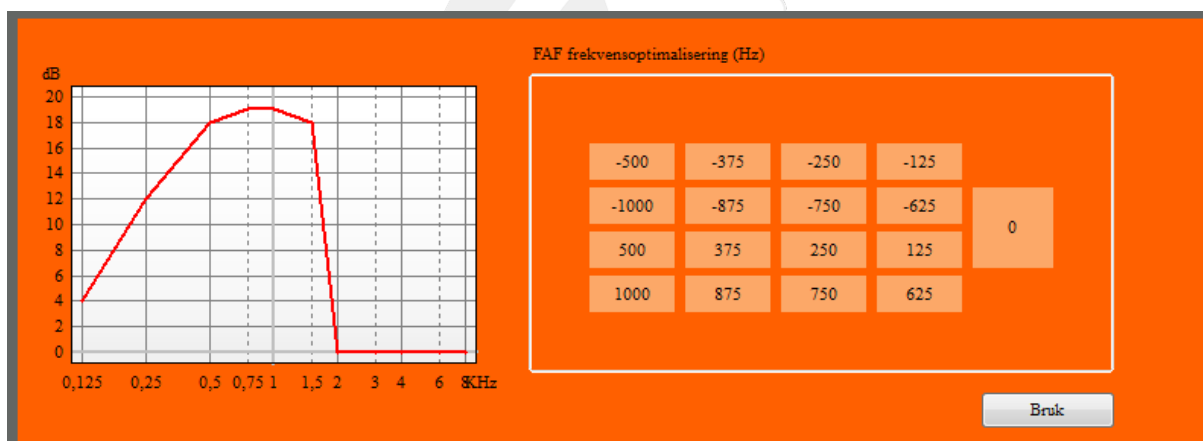


- FAF frekvensoptimering (Hz) förbättrar talsignalen, när FAF (Hz) används.
När FAF ställs in på 250 Hz, används 250 i FAF frekvensoptimering (Hz)
Vid FAF inställd på 125Hz används 125 i FAF frekvensoptimering, o.s.v.

Kom ihåg att trycka på Apply, för att aktivera inställningarna!

Val av standardljudprogram

- Standardljudprogrammen D1, D3 och D4 finns med 3 förprogrammerade inställningar, för att passa olika ljudmiljöer.
- *Välj D2 endast i de fall då användaren har en liten hörselnedsättning som finns dokumenterad i ett hörseltest.*
- *OBS! Programmen D5 och D6 används inte vid normal utprovning. De utnyttjas enbart av tekniker, för testning av SE PRO.*

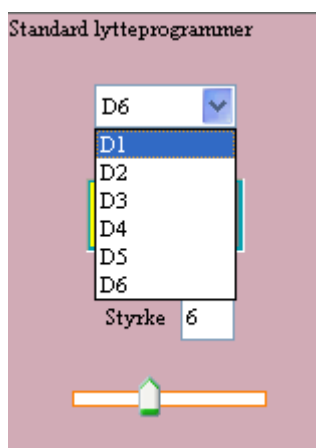


Programmen D1, D3 och D4 ger olika förstärkning i frekvensområdena 800, 1500 och 2500Hz.

| Alternativ | Användning och genomsnittlig förstärkning i högfrekvensområdet = dB |
|------------|---|
| D1 | Vanliga avlyssningssituationer ger mer naturligt ljud = 108 dB |
| D2 | Extra förstärkning för användare med en liten hörselnedsättning = 118 dB (användaren måste lämna in ett audiogram) |
| D3 | Förstärkning av detaljer i svaga inkommande ljudsignaler = 115 dB |
| D4 | Skyddar din hörsel, begränsar förstärkningen på utnivån = 95 dB |
| D5 | Endast för tekniker vid test av SE PRO |
| D6 | Endast för tekniker vid test av SE PRO |

Val av styrka för valda 1-6 program


- Kom ihåg att styrkan kan justeras på olika sätt i de olika programmen (1-6).
- När programmet D4 används, kan den egna rösten upplevas som något svagare än när man använder D3.

För att få bättre balans mellan de olika programmen, utan att justera förstärkningen med volymkontrollen, kan styrkan justeras något olika uppåt och nedåt i 1-6 program

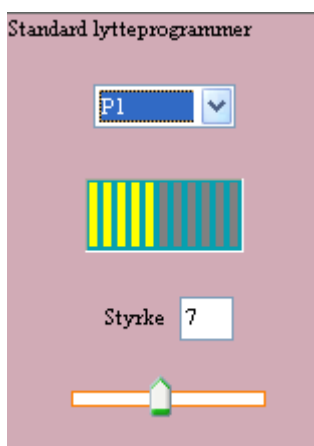

Innan utprovningen slutförs

- Ljudstyrkeregulatorns känslighet kan väljas mellan 10dB och 30dB.
- 10 dB är standardvalet.
- Justera nivån (ljudstyrkan) vid varningssignal för låg batterinivå och vid varningssignal vid programbyte. Välj mellan 8 nivåer - från 1 till 8 (steg 1 är den svagaste nivån.)
- **Kom ihåg: Vid utprovning bör alltid varningssignalen stängas AV.**
- Varningssignalen för batteri och program kan varieras med hjälp av olika 3 frekvenser, 500Hz, 1000Hz eller 2000Hz.

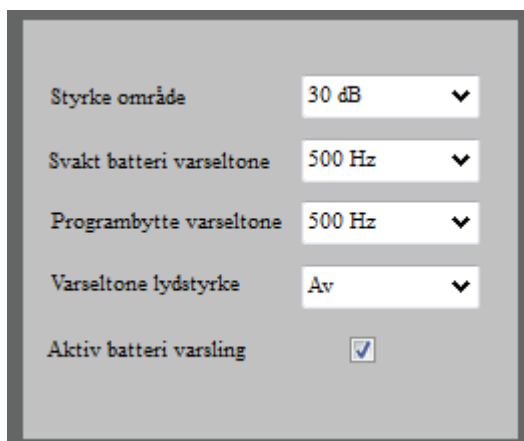

Felsökning och åtgärder

| SYMPTOM | MÖJLIG ORSAK | ÅTGÄRDER |
|--|--|--|
| Ingen kontakt med SpeechEasy PRO erhålls, när du trycker på "Connect"-knappen. | Kontrollera om SpeechEasy PRO är ansluten till samma sida (vänster/vänster eller höger/höger), på både kopplingsdosan och programtillpassning. | Ändra anslutningsplats antingen på program tillpassning eller på kopplingsdosan (AudioPRO C). Tryck på "Connect" igen. |
| Fortfarande erhålls ingen kontakt med SpeechEasy PRO, efter att man bytt sida och åtgärdat enligt ovan eller SE PRO kopplas ifrån under tillpassning och återansluts inte då man trycker på "Connect". | Tillpassningsprogrammet har förlorat kontakten med SpeechEasy PRO. | Byt sida (d.v.s. om SpeechEasy PRO är ansluten vänster/vänster, växla till höger/höger eller vice versa). Gör detta både på kopplingsdosan (AudioPro C) och i tillpassningsprogrammet. Tryck sedan "Connect" igen. |