


# Atrauman®

## Salvkompress

Vid såromläggningar finns en risk att sår-  
bädden rivs upp gång på gång. Detta  
orsakar smärta som kan leda till ovilja hos  
patienten att byta förband. För att förhin-  
dra detta används Atrauman salvkompress  
som kan kombineras med flera olika typer  
av förband för att förhindra vidhäftning.  
Atrauman innehåller triglycerider som  
skyddar såret mot uttorkning samt skyddar  
sårets friska kanter. Salvkompressen tillåter,  
genom sitt finmaskiga nät, vätska att  
tränga igenom från såret upp i det  
sekundära förbandet.

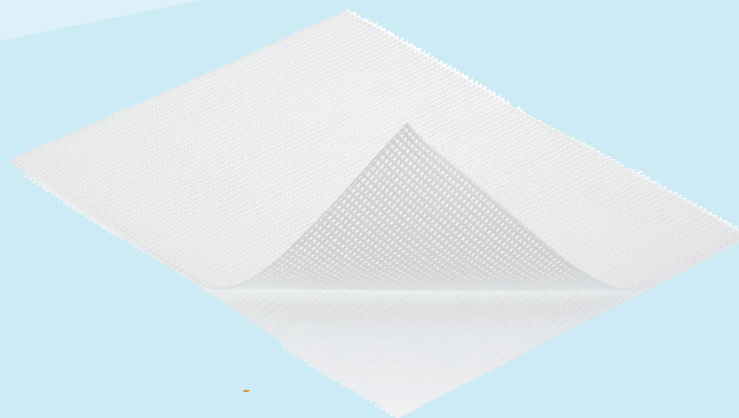

- 1 Många användningsområden
- 2 Förhindrar vidhäftning
- 3 Skyddar sårkanterna

## Fördelar:

Icke vidhäftande  
Hög patientkomfort  
Ekonomisk  
Skyddar såret  
Många användningsområden  
Vårdar sårkanterna



## Egenskaper

Den tunna mjuka väven av hydrofoba polyesterfibrer har en slät ytstruktur som förhindrar att nybildad vävnad växer in i kompressen. På så sätt motverkas tendensen att kompressen fastnar i såret. Inga salvrester lämnas kvar i såret vilket underlättar rengöring och bedömning av sårets tillstånd. Atrauman håller sårytan och dess kanter smidiga och skyddar såret mot uttorkning. Salvmassan är gaspermeabel och genomsläpplig för exsudat. Detta gör att exsudat snabbt kan transporteras från såret. För att absorbera överflödigt exsudat bör ett absorptionsförband appliceras i kombination med Atrauman. Eftersom salvan saknar verksamma ämnen kan den även användas inom dermatologin, samt för läkemedelskänsliga och patienter med känslig hud. Terapeutiskt verksamma substanser kan tillsättas efter läkarens bedömning. Atrauman bör bytas vid varje sårömläggning om läkare ej ordinerar annat.

## Material

Väv av hydrofob polyester, impregnerad med en salvmassa utan verksamma ämnen. Salvan innehåller: fettsyror (triglycerider). **Salvan är inte sensibiliserande och innehåller inga tillsatser av vaselin, lanolin eller paraffin.**

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation och applicering

Till atraumatisk sårbehandling i sårläggningens alla faser vid t.ex. skrapsår, bensår, trycksår, mindre brännskador, strålskador, abscesser, hudtransplantationer och vid nagelextraktioner.

Kontraindikationer: Inga kända.

Eftersom Atrauman inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret. Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen exempelvis fixeras med en gasbinda.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman®	5 x 5 cm	499 510	10 st	40 Afp
Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	499 513	10 st	20 Afp
	20 x 30 cm	499 515	10 st	3 Afp
	10 x 20 cm	499 536	30 st	5 Afp
	5 x 5 cm	499 550	50 st	16 Afp
	7,5 x 10 cm	499 553	50 st	8 Afp