

Sittsystem för barn/ungdomar/vuxna

Zitzi

DELFI PRO



Zitzi

SHARKY PRO





Dynamiskt sittande

Zitzi Delfi Pro/Sharky Pro

Steg 1. Bäcken- & benpositionering

Kombinationen, rätt inställd sittdel, generös sittgrop, effektivt höftbälte och ett bra stöd för sacrum ger förutsättningarna för minskad skjuvning vilket underlättar för aktivitet och postural kontroll. Sittdelen är steglös ställbar i sittdjup och abduktion/adduktion vilket möjliggör optimal individuell sittställning och samtidigt låter patienten växa med sittsystemet.

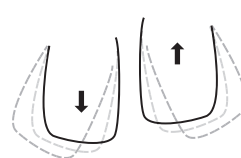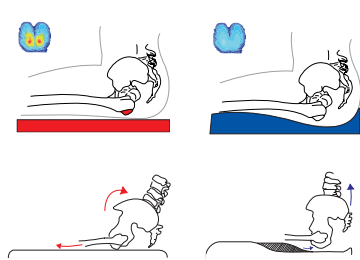

Abduktion/Adduktion/Windswept

Steg 2. Höftbältesplacering

Ett rätt insturerat positioneringsbälte ger förutsättning för att positionera bäckenet och minska risken för skjuvning. Vi erbjuder positioneringsbälten i en rad olika material, modeller och storlekar.




2-punktsbälte
En infästning.



4-punktsbälte
2 infästningar
på varje sida.




Antirotationsbälte
2 infästningar på
varje sida.

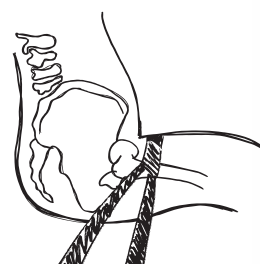

Rätt dragriktning

Steg 3. Trepunktspositionering

Justerbara bålstöden tillsammans med tex. höftstöd skapar en bra förutsättning för att positionera bålen vilket minskar risken för felställning. God postural kontroll leder till bättre huvudkontroll och ökar möjligheterna till aktivitet och vakenhet. Vi har därmed möjligheten att både korrigera samt bibehålla bålens positionering utifrån de förutsättningar vi står inför.

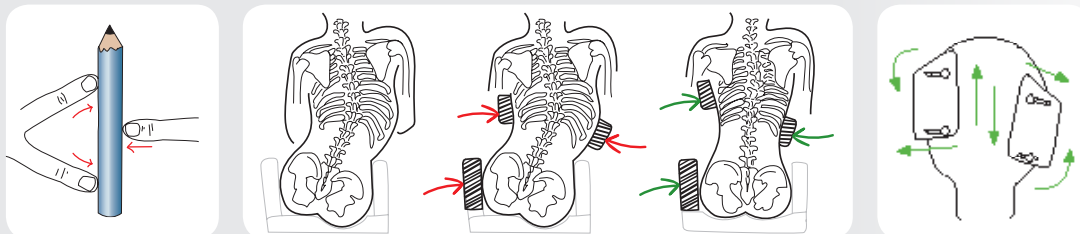


Positioneringsselar

Tillsammans med höftbältet ger selen ett bra stöd för att positionera bålen och ge förutsättningar för bättre huvudkontroll. Det finns två olika positioneringsselar; Sternumstöd och H-sele.



Sternumstöd


- Koncentrerat stöd över sternum
- Motverka fall framåt

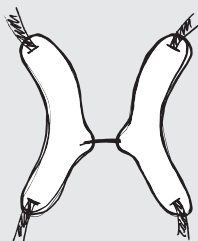

H-sele

- Skaffar bra uppsträck av axelpartiet samt motverkar rotation
- Passar bra till användare med tex. knapp

Steg 4. Flex-funktion/Höftvinkeljustering

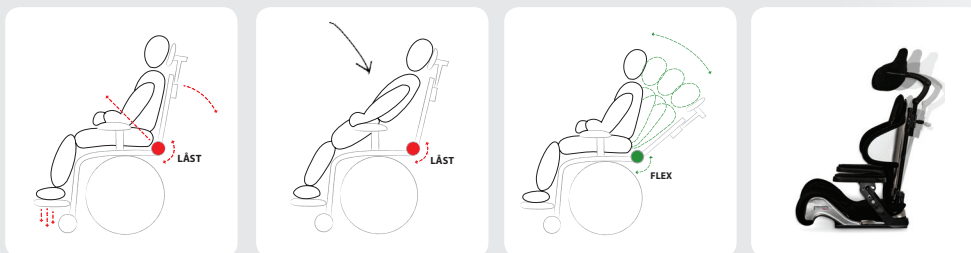

Dynamiska stöd ger rörelsefrihet, variation samt kan ge en lugnande effekt vid extensions-spasticitet. Sittsystemen är utrustad med en flex-led som gör ryggstödet följsam. Ryggen är ställbar i höftvinkel vilket bryter spasticitet och flex-leden fångar upp kraften samt behåller positionering i sittandet.

Steg 5. Huvudpositionering/Exempel



Aktivt pannband



HeadActive



Heads Up



Pro Serie



Zitzi Delfi Pro/Sharky Pro

Sittsystem för barn/ungdomar/vuxna

Sittsystemen är speciellt framtagna för användare med sittproblematik. Finns i 7 storlekar och många valmöjligheter för att kunna anpassa sig till en bred målgrupp, även de som är smala och långa. Stolen växer med brukaren.

Delfi Pro finns i 5 storlekar och passar patienter från ca. 60-170 cm

Sharky Pro finns i 2 storlekar och passar patienter från ca. 150-195 cm.



Alla våra foder är tvättbara i 60°

- Stort utbud av tillbehör.
- Stora justeringsmöjligheter, växer med patienten.
- Passar lika bra på inomhus- som utomhusunderreden.
- Användarvänligt.
- Krocktestade och godkända.
- Inga verktyg krävs för justering av bl.a. fotstöd, bålstöd och armstöd.

Tänk på!
Välj förstärkt rygg
vid hög tonus på patienten!



Zitzi Delfi Pro

Storlekar	5 st
Abduktion	-9/+18°
Max brukarlängd	170 cm
Max brukarvikt	90 kg
Axilhöjd	17-40 cm
Bålbredd	14-31 cm
Sittbredd	24-38 cm
Sittdjup	14-45 cm



Zitzi Sharky Pro

Storlekar	2 st
Abduktion	18°
Brukarlängd	150-195 cm
Max brukarvikt	130 kg
Bålbredd	27-38 cm
Båldjup	21-25 cm
Sittbredd	36-49 cm
Sittdjup	37-55 cm




Tillbehör Zitzi Delfi Pro



ProSerie enkel nedre



ProSerie Junior

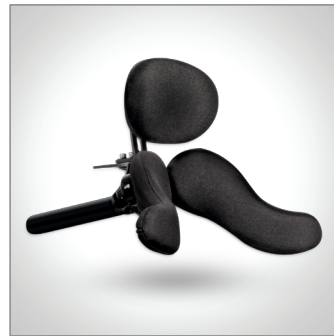

ProSerie Vuxen



ProSerie Mini



ProSerie Plush



Standard huvudstöd



Sternumstöd Pro



H-Sele Pro



Antirotationsbälte



Sittbelt



Bord




Överlägg till bord



Överarmsstöd



Armstöd

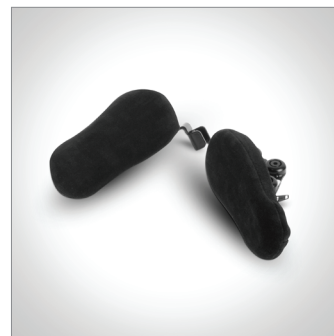

Bäckenstöd



Höftstöd



Fotstöd




Delat fotstöd



Justerbart fotstöd



Delat justerbart fotstöd

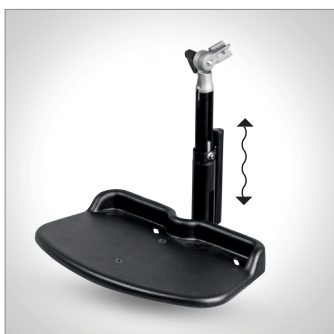

Flex fotstöd



Fotstödspolstring



Vadstöd



Fotlåda



Vadstödspolstring




Vrifthållare



Fotband



Armbindel

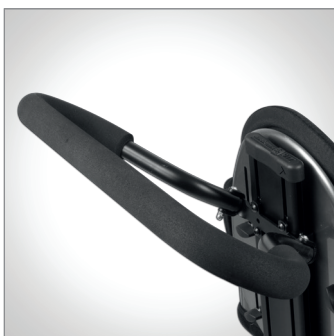

Körbåge



Adapterplatta



Fästplatta



Lekbåge

Tillbehör Zitzi Sharky Pro



Sternumstöd Pro



H-Sele Pro



Antirotationsbälte



Sittbelt



Justerbar rygg



Integrerat svankstöd



Armstöd från sittdel




Armstöd från rygg



Vikbara armstöd



Överarmsstöd

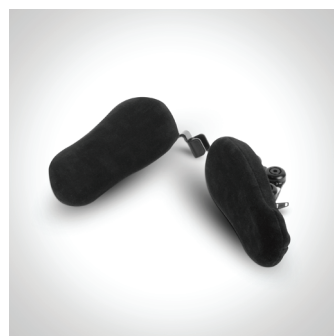

Bäckenstöd



Fotstöd delat uppfällbart



Fotstödspolstring



Vadstöd




Standardfoder (grå/brun)



Alcantarafoder (svart)



Huvudstöd

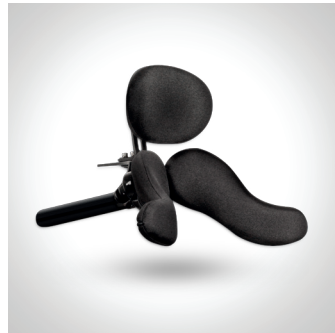

Pro Serie Vuxen



Pro Serie Plush



Pro Serie Mini



Pannband



Körbåge



Sufflett



Adaptersystem



Bord



Uppfällbart bord



Bord, förstärkt



Fotrem



Höftstöd



Regnskydd



Armstödsplatta special

Måttguide

Delfi Pro

Vilken storlek på stol bör jag välja?

Delfi Pro stl. 0 - ca. 14-20 cm i sittdjup / längd ca. 60-80 cm

Delfi Pro stl. 1 - ca. 17-27 cm i sittdjup / längd ca. 70-100 cm

Delfi Pro stl. 2 - ca. 23-33 cm i sittdjup / längd ca. 90-130 cm

Delfi Pro stl. 3 - ca. 30-40 cm i sittdjup / längd ca. 120-160 cm

Delfi Pro stl. 4 - ca. 35-45 cm i sittdjup / längd ca. 140-170 cm

Vilken storlek på underrede bör jag välja?

Delfi Pro stl. 0 - Flipper Pro stl. 1 / Guppy stl. 1

Delfi Pro stl. 1 - Flipper Pro stl. 1 / Guppy stl. 1

Delfi Pro stl. 2 - Flipper Pro stl. 2 / Snapper / Guppy stl. 1

Delfi Pro stl. 3 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Guppy stl. 1

Delfi Pro stl. 4 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Guppy stl. 2 / Seabass stl. 1

Sharky Pro

Vilken storlek på stol bör jag välja?

Sharky Pro stl. 1 - ca. 45-55 cm i sittdjup / längd ca. 150-180 cm

Sharky Pro stl. 2 - ca. 50-60 cm i sittdjup / längd ca. 170-195 cm

Vilken storlek på underrede bör jag välja?

Sharky Pro stl. 1 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Seabass stl. 2

Sharky Pro stl. 2 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Seabass stl. 3





Zitzi **PENGY**

Pengyvagnen har en inbyggd fjädring som gör att den rullar smidigt även på ojämna ytor. Bekväm körställning. Fälls ihop med ett enkelt handgrepp. Kan utrustas med terränghjul, vilket är en stor fördel på vintern eller under skogs promenaden.

Storlekar	1 st
Krocktestad	Godkänd
Färg	Svart
Vikt	12 kg
Belastningsvikt	50 kg
Tilt	-23° till +40°
Sitthöjd	54 cm
Hjul, svängbara	7", 12"



ZITZI GUPPY

Zitzi Guppy är utvecklad för att passa till de flesta sittsystem på marknaden samt anatomiska sitsar (formgjutna sitsar). Olika hjul för att möta många behov.

Storlekar	2 st
Hjul	16", 20", 22", 24"
Belastningsvikt	70 kg
Tilt	0-32°
Sitthöjd	46 cm
Färg	Svart
Vikt	14 kg
Krocktestad	Godkänd



Zitzi **SEABASS PRO**

Välbalanserat underrede som passar med flera olika sittsystem och individuellt tillverkade sitsar. Samtliga drivhjul har quick-releasefunktion och finns både som luft och massiva.

Storlekar	3 st
Hjul	12", 16", 20", 22", 24"
Belastningsvikt	135 kg
Tilt	35°
Sitthöjd	41/46 cm
Färg	Svart
Vikt	20 kg
Krocktestad	Godkänd



Zitzi **FLIPPER PRO FLEX**

Flipper Pro Flex är ett underrede som passar för både inomhus- och utomhusbruk. Välj mellan 12" eller 16" hjul. Underredet är också utrustat med gaskolv tilt. Finns i elektrisk eller manuell utgåva. Tilt in space förbättrar viktfordelningen.

Storlekar	1 st
Utföranden	2 st
Belastningsvikt	95 kg
Tilt	30°
Höjdjustering	29-65 cm*
Totalbredd	63 cm
Totallängd	81 cm
Vikt	31 kg

* Måtten anger chassiss höjd och ändras beroende på vilket sittsystem ni väljer



Zitzi **FLIPPER PRO**

Underredet är utrustat med 125 mm hjul för att enkelt kunna rulla över mattkanter, trösklar och andra hinder. Det finns två varianter på utförande av höj- och sänkmekanism, elektrisk eller manuell. Tilt in space förbättrar viktfordelningen.

Storlekar	3 st
Utföranden	6 st
Belastningsvikt	75 kg
Tilt	30°
Höjdjusterbar	Ja
Sitthöjd (min)	21 cm*
Sitthöjd (max)	61 cm*
Hjul, standard	125 mm

* Måtten anger chassiss höjd och ändras beroende på vilket sittsystem ni väljer



SNAPPER

Underredet är utrustat med 100 mm hjul för att enkelt kunna rulla över mattkanter, trösklar och andra hinder. Dessutom är hjulen utrustade med färdriktningsspärr. Tilt in space förbättrar viktfordelningen.

Storlekar	1 st
Utföranden	2 st
Belastningsvikt	50-75 kg
Tilt	+3/-22°
Höjdjusterbar	Ja
Sitthöjd (min)	46 cm*
Sitthöjd (max)	62 cm*
Hjul, standard	100 mm

* Måtten anger chassiss höjd och ändras beroende på vilket sittsystem ni väljer



Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Telefon +46 11-16 18 00

Email info@anatomicsitt.com

Web www.anatomicsitt.com