

VARILITE® Solo
VARILITE® Evolution
VARILITE® Zoid



Innehållsförteckning

- 2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter
- 3.1 Underhåll av din sittdyna
- 3.2 Att placera dynan rätt
- 4.1 Inställning av dynan
- 4.2 När du inte använder dynan
- 4.3 Anpassning av VARILITE sittdynor
- 5.1 Sköteselanvisning, tvättråd och rekonditionering
- 6.1 Återvinning och materialspecifikation
- 6.2 Garanti
- 6.3 Kombinationer
- 7.1 Brukar- och dynvikter
- 7.2 Brandtester



Tillverkare Cascade Design Limited,
Dwyer Road Midleton Co. Cork, Republic of Ireland
Telefon +353-214-632-399





2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter

För att Ni ska kunna utnyttja din sittedyna till fullo är det viktigt att Ni läser igenom denna bruksanvisning. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.

När du byter sittedyna kan det vara nödvändigt att konsultera en terapeut eller annan medicinskt behörig person för att göra mindre justeringar på din rullstol.

Kontrollering av huden bör göras regelbundet för att övervaka eventuell hudrodnad, särskilt runt sittbensknölar. Kontakta din läkare omedelbart om ihållande rodnad noteras.

Om Ni behöver kompletterande uppgifter är Ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.



Telefon 011-16 18 00

Fax 011-16 20 05

E-postadress info@anatomicsitt.com

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

3.1 Underhåll av din sittdyna

Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd.

Vi rekommenderar att du återfyller din dyna, minst en gång i veckan för att bibehålla optimal prestanda.

Du bör dock kontrollera inställningen av din sittdyna dagligen för att säkerställa att sittdynan inte punkterats eller att ventilen av misstag råkat öppna sig.

Kontakta genast Anatomic SITT AB om du misstänker att din sittdyna har punkterats.

3.2 Att placera dynan rätt


Ventilen och handtaget på överdraget skall alltid placeras framåt.

Tänk på följande efter isärtagning vid exempelvis tvätt.

- Sätt i innerdynan med ventilen placerad framåt. Dynan kan vändas upp och ned, beroende på om ventilen ska sitta till höger eller vänster (gäller ej zoid-dynan)
- Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt).
- Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.

4.1 Inställning av dyna

1. Öppna ventilen **utan att sitta** på dynan så att dynan fylls med luft.
2. Stäng ventilen
3. Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.
4. Öppna ventilen och låt luften pysa ut tills brukaren får optimal tryckavlastning och positionering.
5. Stäng ventilen.

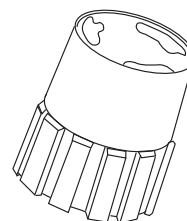

Stäng ventilen genom att vrida medurs.
Öppna ventilen genom att vrida moturs

4.2 När du inte använder dynan

1. Öppna ventilen så luften återfyller dynan till ursprunglig form och storlek.
2. Låt dynan ligga fritt utan belastning.



OBS! Vi rekommenderar att du återfyller din dyna, minst en gång i veckan för att bibehålla optimal prestanda.

4.3 Anpassning av VARILITE sittdynor

För att motverka skjuvning/framåtgång kan en kil placeras under innerdynan i framkant. Vid användande i så kallad "hängmattesits" kan dynan kombineras med en planskiva i botten. För att erhålla rätt artikelnummer på planskivan, skriv storleken ni önskar (bredd x djup), komplettera sedan med -528.

Exempel: Planskiva 30 x 30 cm = 3030-528.

5.1 Skötselansvisning, tvättråd och rekonditionering

Innerdynan och dess överdrag bör alltid användas i kombination med varandra. Överdraget är en väsentlig del av sittdynan genom att bidra till tryckfördelning och främja luftcirkulation för friska vävnader. Överdraget skyddar dessutom innerdynan från punktering, brännskador och smuts.

Utsätt aldrig din sittdyna för vassa föremål. Förvara aldrig vassa eller tunga föremål ovanpå din sittdyna. Förvara aldrig din sittdyna i extrem värme eller utsätt den för exponering av direkt solljus under en längre tid.

5.2 Tvättråd

När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan från överdraget genom att öppna dragkedjan. Innerdynan torkas av med en fuktig trasa, vid behov kan den tvättas med ett mildt tvättmedel. OBS! Se till att ventilen är stängd. Överdraget maskintvättas i max 60° C. Kan torktumlas på låg värme.

Torkas snabbast och bäst hängande! Övriga tillbehör som Wave baser och kilar kan rengöras med tvål och varmt vatten. Lufttorkas.



Se till att ventilen på din sittdyna är stängd vid tvätt!

5.3 Rekonditionering

Vid rekonditionering, torka noga av med ytdesinfektionsmedel för att sterilisera dynan.

5.4 Återvinning & materialspecifikation

Vid kassation	Dela upp dynan enligt nedan.
Innerdyna	Kallskum med öppna celler samt vinyl är brännbart
Överdrag	Polyester, nylon samt filterskumplast är brännbart

5.5 Garanti

Dynan och överdraget har garanti mot fabriktionsfel gällande två år från leveransdatum. Om Du har tveksamheter eller några som helst frågor gällande ditt Varilitesystem är du välkommen att ringa oss.

Våra kontaktuppgifter finner du här nedan. Det går även bra att skicka e-post.

OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

5.6 Kombinationer

VARILITE dynorna är avsedda för användning i på marknaden förekommande rullstolar samt sittsystem. VARILITE dynorna får endast kombineras ihop med VARILITES egna tillbehör och reservdelar. För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.

6.1 Brukar- och dynvikter

Max brukarvikt är beroende av dynans storlek och varierar från 100 kg upp till 300 kg. Praktiskt så kan man inte överstiga max brukarvikt om man rätt storlek på dynan till användaren. Dynans vikt är också beroende av dynans storlek.

Dyna	Brukarvikt	Dynvikt
Varilite Solo	< 250 kg	0.4 - 1.1 kg
Varilite Zoid	< 300 kg	350 - 560 gram
Varilite Evolution	< 300 kg	0.6 - 1.5 kg

6.2 Brandtester

Brandtestad och godkänd enligt standarden ISO 7176-17; BS5852; BSEN 7177; BS597-1&2.

Tack för att du valt en VARILITE® produkt!



Telefon 011-16 18 00

Fax 011-16 20 05

E-postadress info@anatomicsitt.com

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping