

# Vikningsguide

DryMax Soft ett superabsorberande förband för vätskande sår




## Tår och fingrar



**1** Vik förbandet 10x20 cm i hälften på längden.

**2** Väv in förbandet mellan tårna eller fingrarna.

## Häl och armbåge

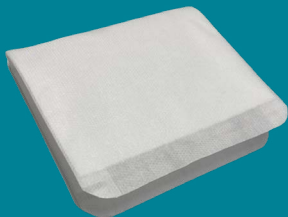

**1** Vik förbandet 10x20 cm i mitten på bredden.

**2** Vik de två övre hörnen inåt. Placera tejp för att hålla de vikta hörnen på plats.



**3** Öppna upp det vikta förbandet.

**4** Placera förbandet på hälen eller armbågen.

## Ben



**1** Placera förbandet under benet.



**2** Vik in förbandet från båda sidorna vid fotknölen så att foten täcks.



**3** Fortsätt att vika upp förbandet runt hela benet. Se till att sårområdet är täckt. Använd tejp för att hålla den vikta stövelformen på plats.



**4** Trä ett tubbandage som en strumpa över förbandet.



**5** Förbandet sitter på plats.

## Arm



**1** Placera förbandet runt armen så att sårområdet är täckt.



**2** Fixera förbandet genom att trä ett tubbandage över armen.



**3** Förbandet sitter på plats.

## Bröst



- 1** Placera förbandet över bröstet så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.



- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.\* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

**\*Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

## Buk



- 1** Placera förbandet över buken så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.



- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.\* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

**\*Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

## Rygg



- 1** Placera förbandet över ryggen så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.



- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.\* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

**\*Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

## Ljumske, lår och höft



**1** Placera förbandet runt låret eller höften så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppen.

**2** Klipp ett snitt till mitten i ett tubbandage.\*  
Trä på tubbandaget som en byxa. Förbandet sitter på plats.

**\*Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

## Beställningsinformation

Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft	7.5x7.5	F60011/10	10	60 ml
DryMax Soft	10x10	F60013/10	10	130 ml
DryMax Soft	10x15	F60012/10	10	230 ml
DryMax Soft	12.5x12.5	F60123/10	10	220 ml
DryMax Soft	10x20	F60015/10	10	330 ml
DryMax Soft	15x20	F60014/10	10	400 ml
DryMax Soft	20x20	F60016/10	10	600 ml
DryMax Soft	20x25	F60018/10	10	780 ml
DryMax Soft	20x30	F60017/10	10	960 ml
DryMax Soft	37x56	F60019/10	10	3000 ml

\*Enligt internationell standard EN 13726

**Vi finns här för att hjälpa dig!**  
**Mejl:** [kicki.hasselgren@absorbbest.se](mailto:kicki.hasselgren@absorbbest.se)  
**Telefon:** +46 768 81 10 07  
**www:** [absorbbest.se](http://absorbbest.se)

**BESTÄLL KOSTNADSFRIA PROVER!**  
Upplev skillnaden och jämför resultatet med vårt superabsorberande förband DryMax Soft.

