

Rekonditioneringsanvisning drivaggregat SmartDrive MX2+

Rengöring

Rengör drivaggregatet med fuktig trasa vid behov, spola inte med vatten. Använd en mjuk borste och mildt, miljömärkt rengöringsmedel om så krävs. Använd inte alkohol, skur- eller blekmedel.

Funktionskontroll

Provkör drivaggregatet och var uppmärksam på missljud och vibrationer.

Utför kontrollera enligt checklista. Gör en allmän besiktning av drivaggregatet med avseende på påkörningskador och onormalt slitage. Byt ut skadade eller slitna delar vid behov.

Modell: _____

Serienummer: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Kontrollpunkter	Beskrivning	Kontroll	Utbytt	Anmärkning
Servicemeddelanden	Kontrollera att åtgärder enligt aktuella Servicemeddelanden är utförda.			Rekommenderad åtgärd
Programuppdateringar	Ladda ner och installera de senaste programuppdateringarna.			Rekommenderad åtgärd
Drivaggregat	Allmän rengöring drivaggregat. Kontrollera kåpor, drivhjul, handtag. Byt ut trasiga/defekta detaljer.			Rekommenderad åtgärd
Rullar	Kontrollera slitage och skador. Bytes vid behov.			Funktion
Ladduttag	Kontrollera att drivaggregat inte kan köras med laddare inkopplad. Kontrollera att magnetkontakten fäster mot uttaget. Om kontakthylsorna är oxiderade eller brända byt ut kontakten. Tillse att ladduttaget är torrt och fritt ifrån skräp. Kontrollera att locket för ladduttaget fungerar.			Funktion
Batterier	Byts vid behov. Batteriet laddas upp till minst 75% innan längre förvaringsperiod (över 3 månader). Förvaring i torr miljö.			Funktion
Funktionstest	Drivhjulet skall kunna rulla lätt.			Funktion
Funktionstest	Vinkelgivare - drivmotor ska stanna om vinkeln på enheten är utanför intervallet 15-70 grader.			Funktion
Parameter inställning	Kontrollera inställda parametrar avseende hastighet, acceleration, läge (mode)			Rekommenderad åtgärd
PushTracker	Kontrollera skicket. Byt ut om skadad eller felande.			Rekommenderad åtgärd