

BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock placeras. Detta förhindrar att det färgade locket skruvas loss oavsiktligt.

Kasserade BIGmack och LITTLEmack kan återvinnas som elektronikavfall eller hanteras enligt lokala föreskrifter.

**Kontakta gärna RehabCenter AB
för ytterligare information**

**www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se**

Tel. 08 - 768 25 00

Fax. 08 - 792 49 49

e-mail: info@rehabcenter.se

Instruktioner och förslag till användning av

BIGmack® communicator

och

LITTLEmack™ communicator



BIGmack®



LITTLEmack™



Innehållsförteckning

Innehåll	Sidan
Förslag till användning	2
Ritningar	3
Att komma igång	4 - 5
Installera batteri	
Spela in meddelanden	
Spela upp meddelanden	
Snaplock	
Fler möjligheter	5 - 8
Spela upp meddelande med en extern kontakt	
Styra leksaker och apparater	
Batteridrivna saker	
Apparater som drivs med 220v	
LITTLEmack™ monteringsplatta	9
Andra monteringsmöjligheter	10 - 11
Garanti	12
Reparation / retur	12
Om den inte fungerar	13
Skötsel och lagring	14

Skötsel och lagring

BIGmack® och LITTLEmack™ kommer att fungera under lång tid med ett minimum av service.

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals meddelanden, lite beroende på meddelandelängden.

Använd alltid Alkaliska batterier. Enklare batterier kan ofta medföra sämre ljud och betydligt kortare drifttid.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

Om en BIGmack® eller LITTLEmack™ inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

BIGmack® och LITTLEmack™ får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

Observera! BIGmack® och LITTLEmack™ får ej dränkas i vatten!

Om din BIGmack® eller LITTLEmack™ inte fungerar.

Gå först igenom följande punkter.
Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB.
Tel 08 - 768 25 00.

Problem	Lösning
Apparaten återger ej inspelat meddelande	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.2. Spela in meddelandet på nytt.3. Skruva upp volymkontrollen till max.4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Koppla ur den och prova apparaten igen.5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”
Apparaten talar men säger fel meddelande.	Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 sek, sätt i batteriet och spela in på nytt.
Bara en del av meddelandet spelades in.	Meddelandet var längre än 75 sekunder. Spela in ett kortare meddelandet. Om inspelningsknappen (record) släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.
Dålig ljudkvalitet.	Byt batteri.
Talar långsammare.	Byt batteri
Meddelandet upprepas utan nya tryck på talknappen.	Byt batteri

Obs! För att undvika batteriproblem skall alltid Alkaliska (Alkaline) batterier användas.

Användning av BIGmack® och LITTLEmack™

De flesta människor lär sig saker genom att göra saker.

Detta gäller även förmågan att kommunicera.

Det är därför viktigt att alla får chansen att lära sig kommunicera genom att praktisera kommunikation.

BIGmack® och LITTLEmack™ är idealiska verktyg för:

- Någon som just börjat använda en switch.
- Den som just börjat utveckla sin kommunikationsförmåga.
- Att använda som en möjlighet att väcka uppmärksamhet.

BIGmack® och LITTLEmack™ är enkla att använda och har god ljudkvalitet. Det är enkelt att ändra talmeddelande för olika situationer.


Några exempel på användning:

- Att säga hej till kamrater och familj.
- Be om hjälp med olika saker.
- Beställa mat i cafeterian.
- Ropa på ett husdjur.
- Säga ett ord eller fras som upprepas i en sång eller lek.
- Berätta om morgonens/dagens väder.
- Berätta vad som hänt under dagen när man kommer hem.
- Berätta vad som hänt under helgen när man kommer till skolan.
- Ge kommentarer.


Att ofta ändra / byta meddelanden ger brukaren större möjligheter att använda sin talapparat.

När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för brukaren lämplig röst. T.ex. barnröst för barn.

BIGmack®

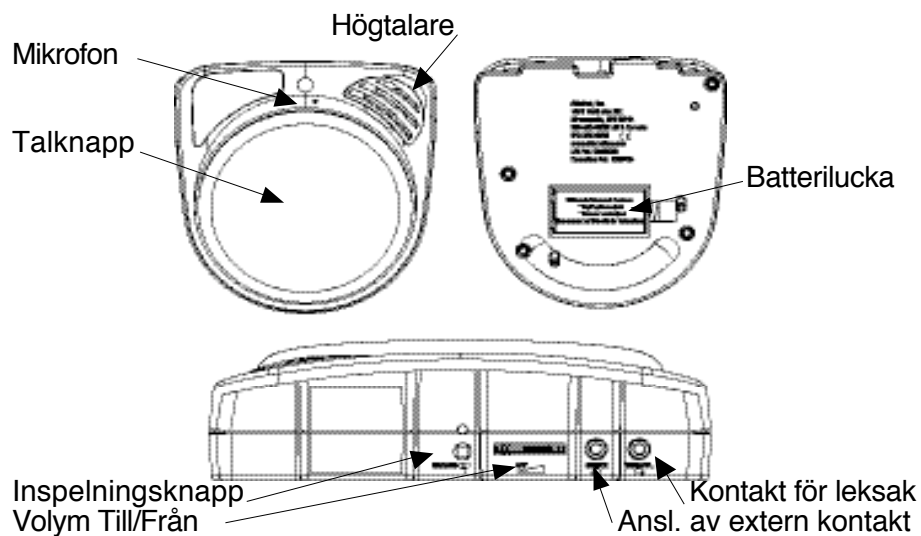

LITTLEmack™

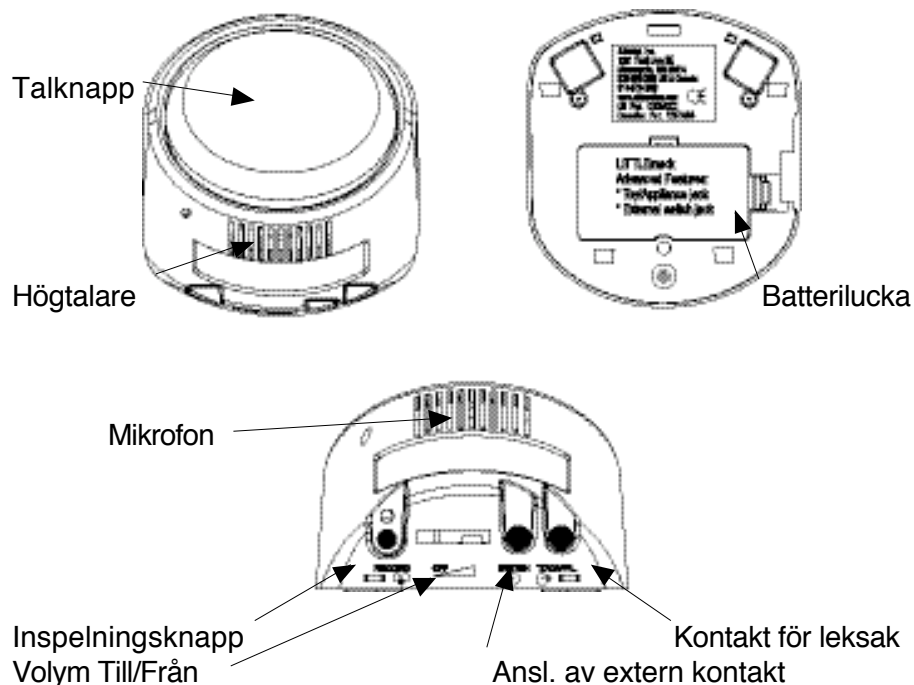

Garanti

BIGmack® och LITTLEmack™ har två års garanti mot fabrikationsfel.

Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.


Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. (Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.


Att fästa monteringsplattan på en liten triangulär platta

När LITTLEmack™ används tillsammans med en monteringsarm från AbleNet skall de skruvar och vingmuttrar som levererades med triangelplattan användas. LITTLEmack™ kommer då enkelt kunna monteras och demonteras från monteringsarmen.

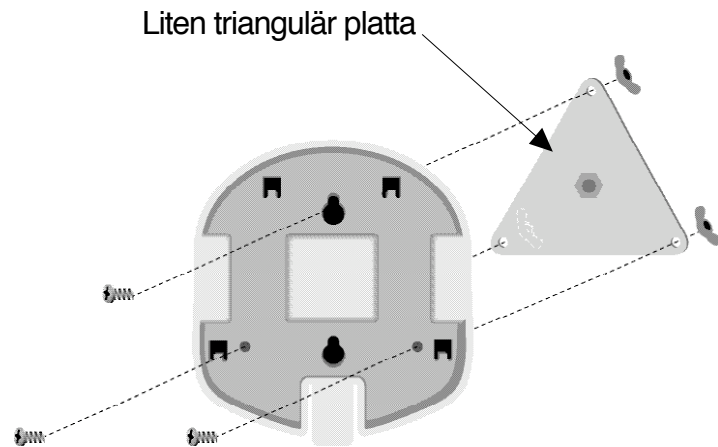

Andra monteringsmöjligheter (säljs separat)

- Ultrastick eller Dual Lock för montage på hårda, plana ytor.
- Bärrem för att bära apparaten över axeln eller runt midjan.
- Monteringsarm:
 - Universalarm med vred
 - Universalarm med spak
 - Slimarm
 - Sensitrac Flat Pad
 - Sensitrac med justerbar arm

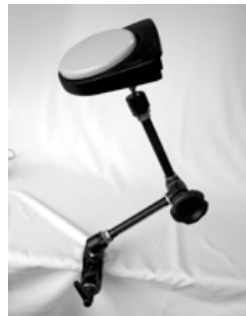

Obs! Glöm ej att uppge om det skall vara en stor eller liten monteringsplatta vid beställning av monteringsarm.

Att komma igång med BIGmack®/LITTLEmack™



BIGmack®



LITTLEmack™

Steg 1 - Installera batteri

Obs! På LITTLEmack™ måste först monteringsplattan avlägsnas.

- Ta bort batteriluckan.
- Sätt i ett 9 volt **Alkaline** batteri.
- Sätt tillbaka batteriluckan.



Steg 2 - Spela in ett meddelande

1. Sätt på apparaten.
2. Tryck ner och håll kvar den lilla inspelningsknappen till inspelningslampan tänds, släpp sedan knappen.
3. Håll ner den stora talknappen (loket) till ett pip hörs och tala sedan in ett meddelande och släpp talknappen.
4. Gör ett kort tryck på inspelningsknappen för att gå ur inspelningsläget.
5. Apparaten har totalt 2 min. inspelningstid. Inspekningslampan blinkar gult när 10. sekunder återstår.



Steg 4 - Spela upp meddelandet

Tryck på talknappen och ställ in lagom hög volym.

Snaplock

Ett Snaplock ingår i leveransen av BIGmack®/LITTLEmack™. Använd detta lock för att fästa symboler eller bilder på talknappen. Locket kan även användas som skydd om andra saker skall fästas (limmas eller tejpas) på tryckknappen.

Fler möjligheter



Spela upp ett meddelande med en extern kontakt

1. Koppla in en valfri kontakt med en 3,5 mm propp i uttaget för en extern kontakt .
2. Spela in ett meddelande.
3. Tryck på den externa kontakten för att spela upp meddelandet.



Andra monteringsmöjligheter


Löstagbar montering på vägg (bild 1)

1. Placera monteringsplattan på väggen och markera plats för de nyckelhålsformade skruvhålen.
2. Borra hål vid markeringarna och sätt i skruvarna.
3. Skruva in skruvarna i väggen men låt ca 5 mm sticka ut.

Bild 1: Löstagbar montering

Nyckelhålsformade skruvhål


Låsknapp för snabbfäste

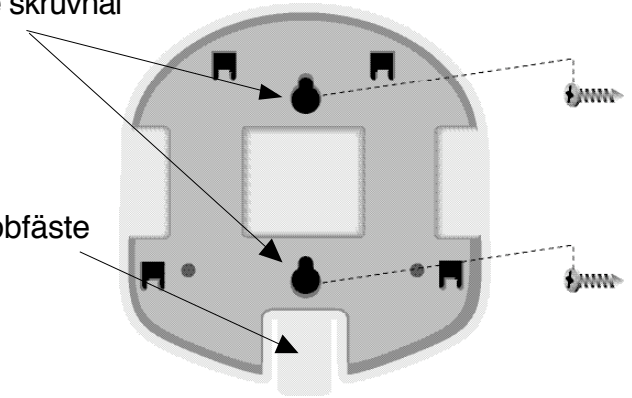

Permanent montering på vägg (bild 2)

För permanent bruk kan plattan skruvas fast med de två runda hålen samt det övre nyckelhålet.

Bild 2: Permanent montering

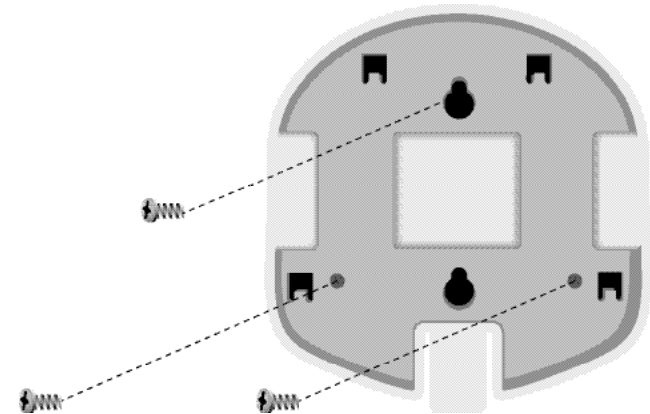

LITTLEmack™ monteringsplatta

LITTLEmack™ levereras med en borttagbar monteringsplatta.




Lossa monteringsplattan från LITTLEmack™

1. Tryck in låsknappen för snabbfästet.
2. Drag plattan mot apparatens baksida.

Fästa monteringsplattan på LITTLEmack™

1. Passa in de fyra klackarna på monteringsplattan i motsvarande hål i botten på LITTLEmack™.
2. För plattan framåt till den snäpper fast.

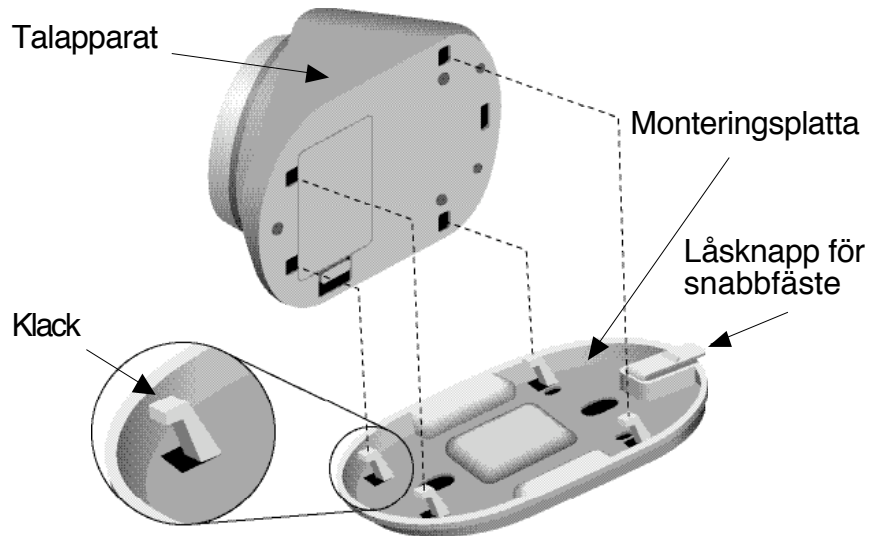

Att styra leksaker och andra apparater

Batteridrivna leksaker och apparater

Med denna funktion kan BIGmack®/LITTLEmack™ aktivera en batteridrivna leksak lika lång tid som ett inspelat ljud varar. Förutom en leksak behövs en fil och en kabel för batteridrivna leksaker (säljs separat). Gå vidare till punkt tre om din apparat redan är anpassad.



Batteridrivna leksak



Fil



Kabel för batteridrivna leksak


1. Öppna batteriluckan på leksaken och gör ett spår i den med filen. Detta för att kabeln för batteridrivna saker skall kunna placeras rätt.



2. Placera batterikabelns kopparplatta mellan antingen den positiva eller negativa polen på batteriet och dess kontakt. Stäng sedan batteriluckan



3. Spela in ett meddelande. T.ex. ”Titta, min pingvin dansar”

4. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget märkt toy/appliance på BIGmack®/LITTLEmack™. 



5. Koppla ihop kabelns andra ände med kabeln för batteridrivna leksaker och den inkopplade leksaken. Sätt på leksaken.



6. Tryck på den stora talknappen för att spela upp meddelandet och aktivera leksaken.



Om du vill att leksaken skall vara aktiverad en längre tid kan en timer användas




Switch Latch and Timer
(Timer)



Alla delar hopkopplade

Leksaker och apparater som drivs med 220v

Denna metod gör det möjligt att med BIGmack®/LITTLEmack™ på ett säkert sätt styra apparater som skall anslutas till 220v. En styrbox PowerLink®3 och en 220v apparat behövs för denna möjlighet.

1. Spela in ett meddelande i BIGmack® eller LITTLEmack™. T.ex. ” Här är det mörkt, jag tänder lampan”
2. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget märkt toy/appliance på BIGmack®/LITTLEmack™. 



3. Koppla in kabelns andra ände i kontakt märkt Switch 1 eller 2 på PowerLink®3.



4. Koppla in PowerLink®3 i vägguttaget.
5. Koppla in apparaten i motsvarande uttag på PowerLink®3. Kontrollera att apparaten är påslagen.
6. Ställ in önskad tid och timerfunktion på PowerLink®3.
7. Tryck på den stora talknappen för att spela upp meddelandet och aktivera leksaken.

