

Allora 2

Specifikationer

Batteri

- Lithium Ion, utbytbart batteri.
- Drifttid för batteri. Minst en dags drifttid på en laddning om batterisparfunktion aktiveras då Allora 2 inte används.
- 2 dagars standbytid.
- Vi rekommenderar att Allora 2 laddas var natt.

Ljud

- Dubbla inbyggda högtalare.
- Inbyggd högtalare även i bakre display.

Röster

- Levereras med Acapela svenskt röstpaket innehållande Elin/ Emma/Erik/Emil/Kal/Mia.
- Röster på andra språk finns som tillbehör.

Digital inspelning

- Inbyggd mikrofon för inspelning av röstmeddelanden.
- Upp till tre timmars inspelningstid.

Inbyggd display

- OLED Display som kan läsas i alla ljusförhållanden.
- Inställbar teckenstorlek
- Visar text, prediktion och status.

Bakre display

- OLED Display, läsbar i alla ljusförhållanden.
- Inställbar teckenstorlek.
- Löstagbar, fungerar på upp till 3 m avstånd från Allora 2.
- Inbyggd högtalare även i bakre display.
- Laddas vid anslutning till Allora 2.

Omgivningskontroll (Extra tillbehör)

- Allora 2 kan hantera upp till 150 kommandon för omgivningskontroll med IR-sändare.
- Beroende på olika kodning av olika fjärrkontroller kan det inte garanteras att alla fjärrstyrda apparater kan hanteras via Allora2.

GSM modul (Extra tillbehör)

- Oläst och användbar med valfri operatör.
- Endast avsedd för att hantera SMS.

Monteringsmöjligheter

- Kan monteras på Daessy stativ.
- Bärväskan kan användas för montering.

Dimensioner och vikt

- 250mm x 175mm x 20 - 60mm.
- Allora 2 utan bakre display - 965g.
- Bakre display - 60g.

Artikelnummer

8010-130	Allora 2 med svenskt röstpaket
8010-131	Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. GSM-modul och IR-modul
8010-132	Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. IR-modul
8010-133	Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. GSM-modul
8035-135	GSM-modul för Allora 2 för att hantera SMS
8035-136	IR-modul för omgivningskontroll
8035-137	Daessy monteringsplatta för bärväska
8035-138	Daessy monteringsplatta
8035-140	Extra språk. Välj bland holländska, danska, franska, tyska, italienska
till -146	spanska, och engelska

Allora 2

Samtalsapparat med tangentbord

Allora 2 är en ny samtalsapparat med inbyggd talsyntes. Allora 2 kan styras med tangentbord eller scanning. Allora 2 är konstruerad med tanke på personer som är läs och skrivkunniga men har reducerad eller ingen talförmåga samt motoriska svårigheter. Allora 2 kan anpassas till olika personliga behov och förutsättningar.



RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

Allora 2 - Liten och lätt men har stort ljud och många möjligheter

Allora 2 är lätt att bära med sig och att använda i olika situationer tack vare den smarta bärväskan. Bärväskan kan även förses med fästplatta för montering på olika bords eller rullstolsstativ.

Både talsyntes och inspelat tal kan användas för olika ändamål, t.ex. syntetiskt tal för samtal och inspelat tal för att påkalla uppmärksamhet, presentera sig, ställa vanliga frågor och svara på tilltal.



Två tydliga displayer

Allora 2 har två tydliga displayer, s.k. OLED - displayer, för visning av meddelanden. OLED-displayer är mkt tydliga och kan läsas i alla ljusförhållanden. Textstorleken kan ställas in separat för de två displayerna.

Den bakre displayen är löstagbar och fungerar trådlöst på upp till 3 m avstånd från Allora 2.

Ljudet kan ställas in för att höras från Allora 2 eller från den löstagbara displayen.

Den bakre löstagbara displayen

Den bakre displayen har knappar för volymkontroll och av/på.

Den löstagna displayen kan förses med en rem och bäras runt halsen för att de samtalande skall få ögonkontakt istället för att samtalspartnern tittar på Allora 2,

Alternativt kan samtalspartnern få displayen för att inte behöva placera sig alldeles intill den som använder Allora 2.



Tydlig och lätt att förstå

Allora 2 har två högtalarare med hög volym och bra ljud riktade mot samtalspartnern. Detta tillsammans med den tydliga bakre displayen gör det lätt att uppfatta och föra ett samtal.

Bakom fönstret ovanför den bakre displayen kan en IR-omgivningkontroll monteras som tillbehör. Med hjälp av IR-modulen kan många funktioner styras, t.ex. tv, stereo, video, lampor och telefon. Vissa funktioner som lampor, telefon och dörrar kan behöva kompletteras med IR-mottagare.

Flera genvägar till snabbare kommunikation

Allora 2 har flera tidsbesparande funktioner för enklare och snabbare kommunikation.

- Ordprediktion** Skriv en bokstav och få förslag på färdiga ord.
- Meningsprediktion** Skriv en bostav och få förslag på hela meningar.
- Frasminne** Färdiga fraser kan sparas och tas fram med några få tangenttryck.
- Förkortningar** Ofta använda fraser kan sparas som förkortningar. Skriv t.ex. mvh och gör ett mellanslag så skriver Allora 2, Med vänliga hälsningar.
- Inspelade talfraser** Fraser kan spelas in som ljud med röst och återges med två tangenttryck.



Tydligt och tåligt tangentbord

Allora 2 har ett gummitangenbord med bra kontrast mellan tecken och bakgrund. Gummitangentbordet är helt tätt och tål spill och väta utan att bli förstört. Tangentbordet är därför även lätt att hålla rent och tål att rengöras med lämpliga vätskor.

Tangentbordet kan även förses med ett raster som underlättar hanteringen för personer med nedsatt handfunktion. Allora 2 kan även styras med scanning via en eller två kontakter.

Allt som behövs ingår

Vid leveransen ingår allt som behövs för daglig användning av Allora 2. Som tillbehör finns en telefon-modul för att Allora 2 skall kunna skicka och ta emot SMS samt en IR-modul för omgivningskontroll.

Transportväska

Bärväska

Handbok



Allora 2 med rem för bakre display, lös bakre display, raster och laddare