



**ResMed**

**AirCurve™ 10** VAUTO

S



SD-kortshölje för att tillgå SD-kort

Knappen Hem för att när som helst gå tillbaka till skärmen Hem.

Start/stopp-knapp för att starta behandlingen

LCD-skärm som visar behandlingsparametrar och -data

Vred för att navigera och byta alternativ

Luftutlopp för anslutning av luftslangen


Klinisk snabbstartguide


Svenska

## Åtkomst till den kliniska menyn



För att tillgå den kliniska menyn, tryck och håll ned ratten och Hem-knappen i tre sekunder.


Hem-skärmen visas med en ikon för låst  i det övre högra hörnet på skärmen.

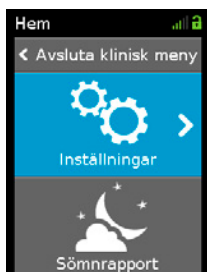


Den kliniska menyns hemskärm består av två områden:

- **Inställningar** – där du kan ändra behandlings- och apparatinställningar i enlighet med patientens behov.
- **Sömnrapport** – ger en sammanfattning av patientens behandlingssession.


## Justera inställningar

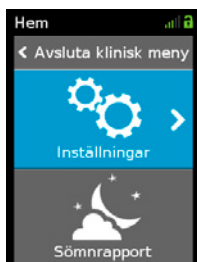

1. Markera **Inställningar** och tryck på ratten för att få åtkomst till den kliniska menyn. Menyn **Inställningar** visas.

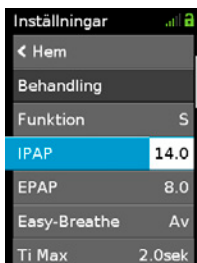


2. Vrid ratten för att markera den inställning som ska justeras och tryck sedan på ratten.

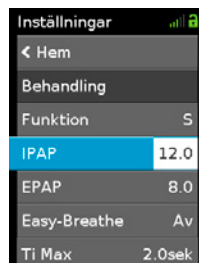

3. Vrid på ratten för att justera inställningen och tryck på ratten för att spara ändringen.

## Starta behandlingen

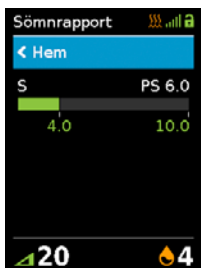

Tryck på knappen Start/Stop för att börja behandlingen. Så snart behandlingen börjar, visas skärmen Sömnrapport. Denna skärm kan se annorlunda ut beroende på apparatens och skärmarnas konfiguration.

- **Aktuella behandlingstryck.** Tryckstapeln visar inandnings- och utandningstrycken i grönt. Den gröna stapeln kommer att expandera och dras samman när patienten andas in och ut.
- **Tryckinställningar** (visar Funktion, IPAP, EPAP och tryckstöd).
- **Ikonen Befuktarpåvärmning** om en befuktare är ansluten.
- **Befuktarinställningar** om en befuktare är ansluten.
- **Rampinställning** om aktiverad.

## Sömnrapport





Så snart behandlingen avbryts, visas Sömnrapporten.



Skärmen **Sömnrapport** i den kliniska menyn visar sömnkvalitet, status för maskförslutning liksom detaljerade behandlingsdata.

De parametrar som visas beror på behandlingsfunktionen.

## Några parametrar för Sömnrapportskärmen

Parameter	Beskrivning
Användn. tim	Antal timmar som apparaten användes under den senaste sessionen.
Händel. (AHI) per timme	Uppmätta apnéer och hypopnéer per timme under en dag. En apné är när andningsflödet minskar med mer än 75 % under minst 10 s. En hypopné är när andningsflödet minskar till 50 % under minst 10 s. Apné index (AI) och apné hypopné-index (AHI) beräknas genom att dividera det totala antalet händelser som har inträffat med den totala behandlingsperioden med masken på i timmar. Obs! Under förhållanden med högt läcka med EPR aktiverad, är AHI-detektion eventuellt inte optimal.
Maskförslutning	 Bra – om läckaget vid 70:e percentilen är mindre än 24 l/min.  Masken måste justeras.
Befuktare	 Befuktare ansluten och fungerar.  Fel på befuktare, se avsnittet Felsökning.

# Menyn Inställningar

## Behandling

Parameter	Beskrivning	Funktion			Intervall
		VAuto	S	CPAP	
Funktion	Ställer in behandlingsfunktionen som finns på apparaten.	✓	✓	✓	
Inställt tryck	Ställer in fast behandlingstryck.			✓	4–20 cm H <sub>2</sub> O (4–20 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
IPAP	Ställ in trycket som ska levereras till patient när apparaten är triggad till inandning.		✓		4–25 cm H <sub>2</sub> O (4–25 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
EPAP	Ställer in trycket som ska levereras till patienten när apparaten cyklar in i utandning.		✓		2–25 cm H <sub>2</sub> O (2–25 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
Easy-Breathe	Aktivera/inaktivera Easy-Breathe-funktionen.		✓		På/Av
Ti Max	Ställer in den maximala begränsningen för tiden som apparaten spenderar i IPAP.	✓	✓		0,3–4,0 s, i steg om 0,1 s
Ti Min	Ställer in den minsta begränsningen för tiden som apparaten spenderar i IPAP.	✓	✓		0,1–[Ti Max] s, i steg om 0,1 s
Max IPAP	Ställer in maximalt inandningstryck som levereras av apparaten.	✓			4–25 cm H <sub>2</sub> O (4–25 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
Min EPAP	Ställer in minsta EPAP (minsta utandningstryck) som levereras av apparaten.	✓			4–25 cm H <sub>2</sub> O (4–25 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
Tryckstöd (PS)	Skilnaden mellan IPAP och EPAP. Justera för patientkomfort.	✓			0–10 cm H <sub>2</sub> O (0–10 hPa), i steg om 0,2 cm H <sub>2</sub> O (0,2 hPa)
Mask	Välj masktyp som används av patienten. Se Mask Device Compatibility List (listan över maskkompatibilitet) på <a href="http://www.resmed.com">www.resmed.com</a> .	✓	✓	✓	Helmask/Näsmask/Näskuddar/ Pediatrik

Se den kliniska guiden för information om stigtid, trigger och cykel.

## Komfort

Parameter	Beskrivning	Funktion			Intervall
		VAuto	S	CPAP	
Climate Ctrl	Tillgänglig när vattenbehållaren används och ClimateLineAir uppvärmd slang är ansluten.	✓	✓	✓	Manuell/Auto
Slangtemp.	Ställ in den lägsta temperaturen för luft som tillförs av ClimateLineAir uppvärmda luftslang.	✓	✓	✓	Av/16-30 °C, i steg om 1 °C
Befuktighetsnivå	Ställ in befuktighetsnivån.	✓	✓	✓	Av/1–8

Läs din hela AirCurve 10 kliniska guide före användning.

 **ResMed Ltd.**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australien

**DISTRIBUERAD AV**  
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
 ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Information om andra ResMed kontor hittar du på [www.resmed.com](http://www.resmed.com). För patentinformation, se [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirCurve, ClimateLine och HumidAir, SmartStart och EPR är varumärken som tillhör ResMed Ltd. ClimateLine är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office.  
© 2015 ResMed Ltd. 378672/1 2015-01

  
0123