



Lumis™ series

VPAP S

VPAP ST



SD-kortshölje för att tillgå
SD-kort

Knappen Hem för att när som helst
gå tillbaka till skärmen Hem


Start/Stopp-knapp för att starta behandlingen

LCD-skärm som visar
behandlingsparametrar och -data

Vred för att navigera och byta alternativ


Luftutlopp för anslutning av luftslangen

Åtkomst till den kliniska menyn

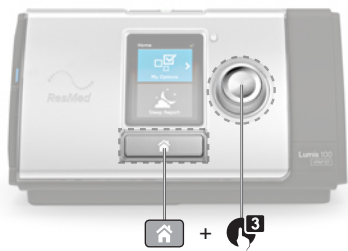

För att tillgå den **kliniska menyn**, tryck och håll ned ratten och **Hem**-knappen i tre sekunder.


Hem-skärmen visas med en ikon för låst i det övre högra hörnet på skärmen.

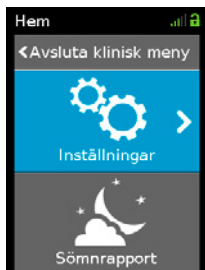


Hem-skärmen i den **kliniska menyn** består av två områden:

- **Inställningar** – där du kan ändra behandlings- och apparatinställningar i enlighet med patientens behov.
- **Sömnrapport** – ger en sammanfattning av patientens behandlingssession.


Justera inställningar

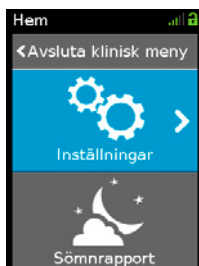

1. För att få åtkomst till den **kliniska menyn**, markera **Inställningar** och tryck på ratten. Menyn **Inställningar** visas.

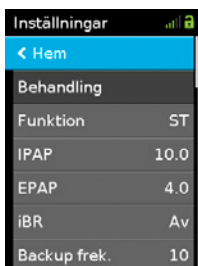


2. Vrid ratten för att markera den inställning som ska justeras och tryck sedan på ratten.

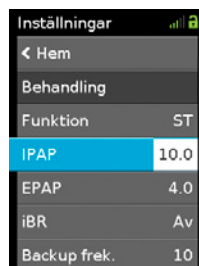

3. Vrid på ratten för att justera inställningen och tryck på ratten för att spara ändringen.

Starta behandlingen

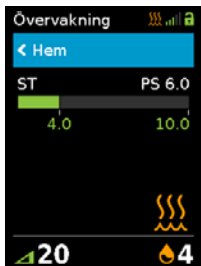


Tryck på knappen Start/Stopp för att börja behandlingen. Behandlingen börjar och skärmen **Övervakning** visas. Denna skärm kan se annorlunda ut beroende på apparatens och skärmarnas konfiguration.

- **Aktuella behandlingstryck** – Tryckstapeln visar inandnings- och utandningstrycken i grönt. Den gröna stapeln kommer att expandera och dras samman när patienten andas in och ut.
- **Tryckinställningar** – (visar Funktion, IPAP, EPAP och tryckstöd).
- **Ikonen Befuktarpuppvärmning** – om en befuktare är ansluten.
- **Befuktarinställningar** – om en befuktare är ansluten.
- **Rampinställning** – om aktiverad.

QuickNav

QuickNav är en funktion som ger snabb navigering mellan skärmarna **Övervakning** och menyn **Inställningar**. Ändringar kan göras på patientinställningar medan patienten får behandling. Använda QuickNav

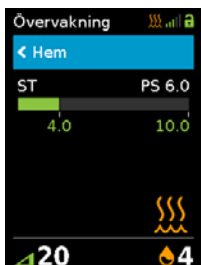

Dubbelklicka på hemknappen för att växla mellan skärmen **Inställningar** (där du kan göra justeringar i patientens behandling) och skärmen **Övervakning** (där du kan kontrollera hur dessa justeringar påverkar patientens behandling).

Granska sömnrapporten

Så snart behandlingen avbryts, visas skärmen **Sömnrapport**.



Sömnrapport-skärmen visar sömnkvalitet och maskförslutningsstatus för den senaste behandlingssessionen.

Rulla nedåt genom att vrida ratten för att visa mer data om användning.

De parametrar som visas beror på behandlingsfunktionen.

Se den kliniska guiden för ytterligare information om parametrarna på skärmen Sömnrapport.

Menyn Inställningar

Följande tabell listar inställningar för nyckelparametrar. Se den kliniska guiden för ytterligare information.

Behandling

Parameter	Beskrivning	S	ST	T	PAC	iVAPS	CPAP	Intervall
Funktion	Ställer in behandlingsfunktionen som finns på apparaten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IPAP	Ställer in trycket som ska levereras till patienten när apparaten är triggad till inandning.	✓	✓	✓	✓			4–25 cm H ₂ O (4–25 hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
EPAP	Ställer in trycket som ska levereras till patienten när apparaten cyklar in i utandning.	✓	✓	✓	✓	✓		2–[IPAP] cm H ₂ O (2–[IPAP] hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
Min PS	Ställer in minsta tryckstöd som levereras av apparaten.						✓	0–20 cm H ₂ O (0–20 hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
Max PS	Ställer in maximalt tryckstöd i iVAPS-funktion.						✓	0–23 cm H ₂ O (0–23 hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
Max EPAP	Ställer in maximalt EPAP som levereras av apparaten.						✓	2–25 cm H ₂ O (2–25 hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
Min EPAP	Ställer in minsta EPAP som levereras av apparaten.						✓	2–25 cm H ₂ O (2–25 hPa), i steg om 0,2 cm H ₂ O (0,2 hPa).
Ti Max	Ställer in den maximala begränsningen för tiden som apparaten spenderar i IPAP.	✓	✓				✓	0,3–4,0 s, i steg om 0,1 s.
Ti Min	Ställer in den minsta begränsningen för tiden som apparaten spenderar i IPAP.	✓	✓				✓	0,1–[Ti Max] s, i steg om 0,1 s.
Stigtid	Ställer in tiden för trycket att öka från EPAP till IPAP.	✓	✓	✓	✓	✓		Min/150-900 ms, i steg om 50 ms.
Mask	Välj masktyp som används av patienten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Helmask/Näsmask/Näskuddar/ Pediatrisk

Komfort

Parameter	Beskrivning	S	ST	T	PAC	iVAPS	CPAP	Intervall
Ramp ned	Akivera/avaktivera Ramp ned-funktionen	✓	✓	✓	✓	✓		På/Av
Climate Ctrl	Tillgänglig när HumidAir-befuktaren används och ClimateLineAir uppvärmd slang är ansluten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Manuell/Auto
Slangtemp.	Ställ in den lägsta temperaturen för luft som tillförs av den uppvärmda luftslangen som t.ex. ClimateLineAir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Av/16-30 °C, i steg om 1 °C
Befuktighetsnivå	Ställ in befuktighetsnivån.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Av/1–8

Läs din hela kliniska guide före användning.

 **ResMed Ltd.**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australien

DISTRIBUERAD AV
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
[EC][REP] ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien

Information om andra ResMed kontor hittar du på www.resmed.com. För patentinformation, se www.resmed.com/ip.
Lumis, ClimateLine och HumidAir är varumärken som tillhör ResMed Ltd. ClimateLine är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. © 2015 ResMed Ltd. 288343/1 2015-04

 0123