

Cutimed® Siltec®

Perfekt balans för olika nivåer

**Exsudat-
hantering**
kräver stark
support



Cutimed®

Cutimed Siltec

Perfekt samarbete mellan olika komponenter

En väl avvägd kombination av olika material gör Cutimed Siltec till ett polyuretanskumförband med hög kapacitet som ger en prestanda du kan lita på.

Förbandet är utformat för att ge utmärkt vätskehantering, samtidigt som den innovativa designen erbjuder patienterna viktiga fördelar för ökad livskvalitet och följsamhet till behandlingen.



Effektiv hantering av sårvätska tack vare vertikal absorption av olika typer och mängder sårvätska.



Tillförlitlig vidhäftning tack vare den heltäckande silikonbeläggningen.



Anatomisk form som anpassar sig efter kroppens konturer och för bästa komfort.

Indikationer*

Cutimed Siltec är utformad för att anpassa sig till sår med liten, måttlig eller riklig mängd sårvätska med varierande grad av viskositet, inklusive mycket hög.



Venösa eller arteriella sår



Trycksår



Fotsår hos diabetiker



Hudtransplantat



Tagställen för hudtransplantation

* För ytterligare indikationer, se bruksanvisning

Polyuretanfilm

Hög förmåga att andas



Cutimed Siltec ger tillförlitliga resultat oberoende av mängden sårvätska eller grad av viskositet. Polyuretanfilmen anpassar avdunstningen i takt med mättnadsgraden. Detta skyddar sårbädden från överskottsfukt samt säkerställer en optimal läkningsmiljö, även då vätskenivåerna ändras eller om vätskan har hög viskositet.



Säkerställer en relevant avdunstning oberoende av förbandets mättnadsgrad.

- Anpassar MVTR* i takt med förändrade vätskenivåer
- Förhindrar läckage
- Underlättar att se mättnadsgraden
- Förhindrar onödiga förbandsbyten
- Duschbart¹ och vattenavvisande^{1, 2}

1 Cutimed Siltec med häftkant
2 Cutimed Siltec utan häftkant

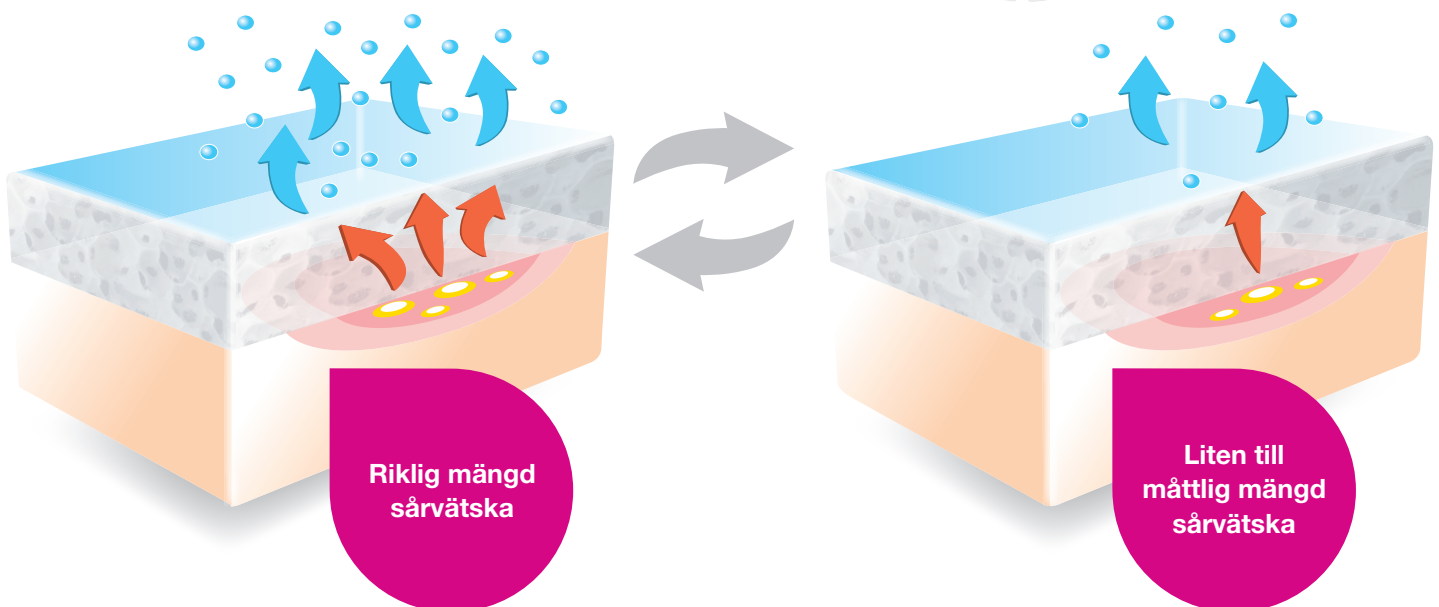
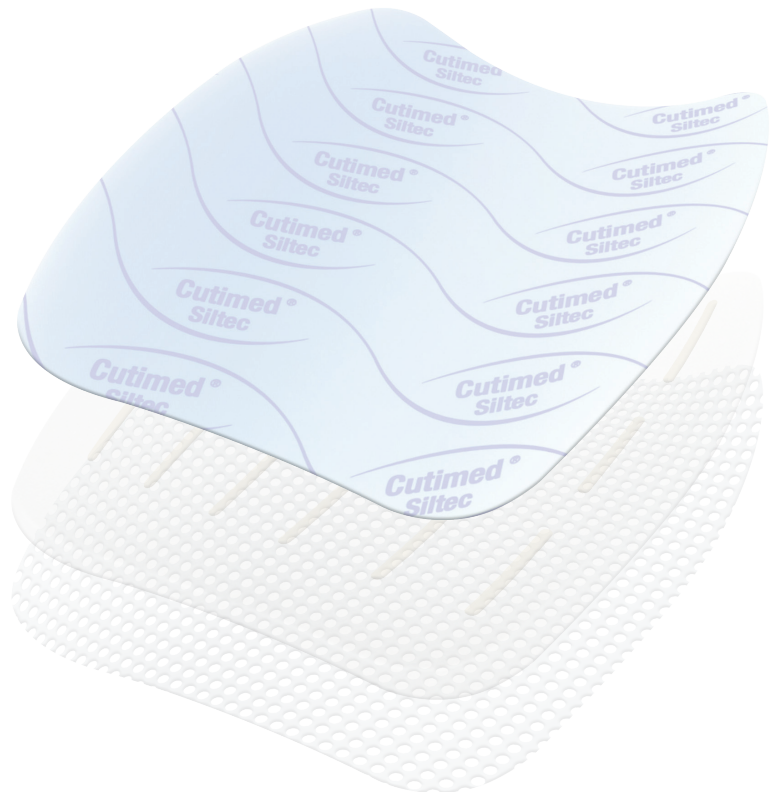


Superabsorbenter

Absorberar och binder sårvätska

Tack vare teknologin med superabsorbenter binds sårvätskan på ett säkert sätt även under kompression vilket minskar risken för läckage och maceration.

- Tillförlitlig absorption vid lite, måttlig och riklig mängd sårvätska
- Binder sårvätskan effektivt, även under kompression
- Anpassar sig till förändrade vätskenivåer
- Superabsorbenterna är sammansmälta med polyuretanskummet vilket gör förbandet klippbart
- Färre förbandsbyten


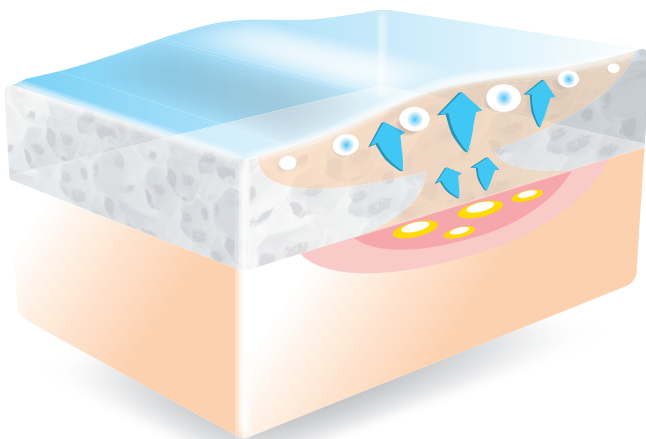
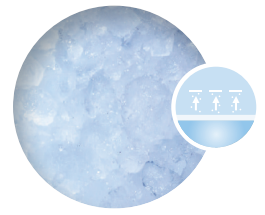


Intelligent skum


Drar snabbt upp vätskan till skumkärnans övre del

Skummets struktur hos Cutimed Siltec säkerställer effektiv, vertikal absorption utan att såret torkar ut, vilket resulterar i en säker behandling. Förbandet har en mycket god egenskap att absorbera sårvätska med hög viskositet. Det är resultatet av silikonlagrets perforering samt skumkärnans stora porer.

- Säkerställer effektiv, vertikal absorption och skyddar huden mot maceration
- Absorberar vätska från låg till mycket hög viskositet

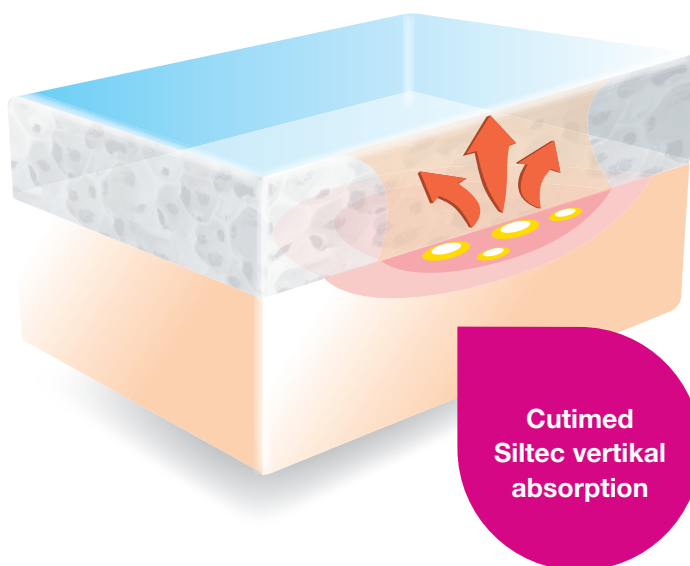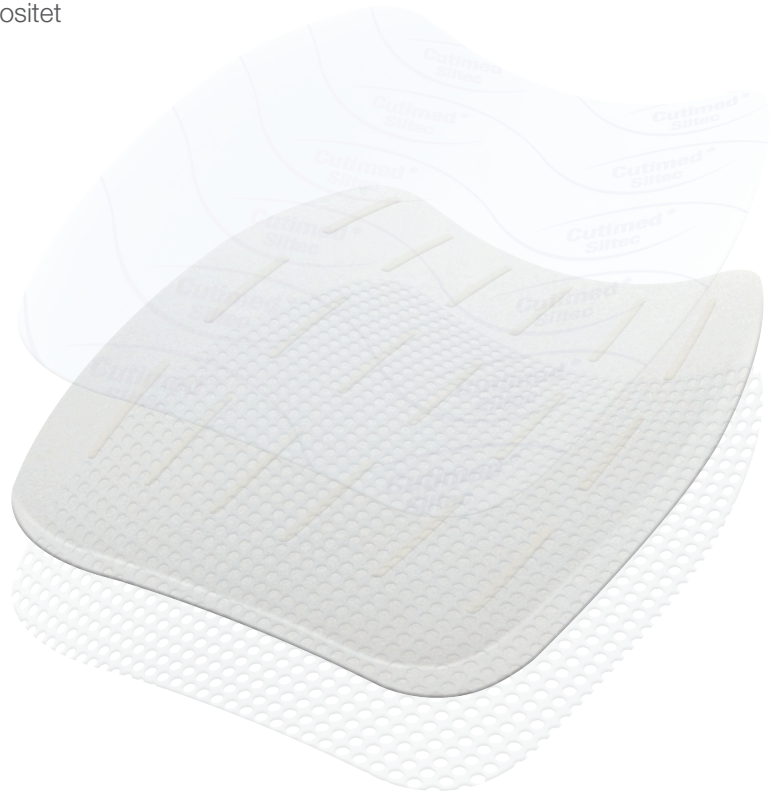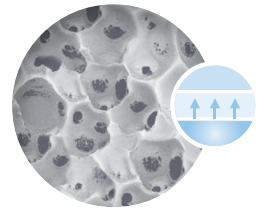



Perforerat sårkontakt-lager av silikon

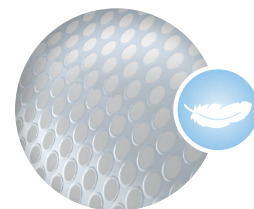

Skonsam vidhäftning

Det perforerade vidhäftande silikonlagret tillåter vätskeöverföring samtidigt som det utgör en effektiv barriär mot vävnadsinväxt i skumkärnan vilket skyddar den nybildade, epiteliserade vävnaden.

- Sårvätskan passerar enkelt igenom, oberoende av grad av viskositet
- Skonsam vidhäftning
- Atraumatiska och mindre smärtsamma förbandsbyten för patienten

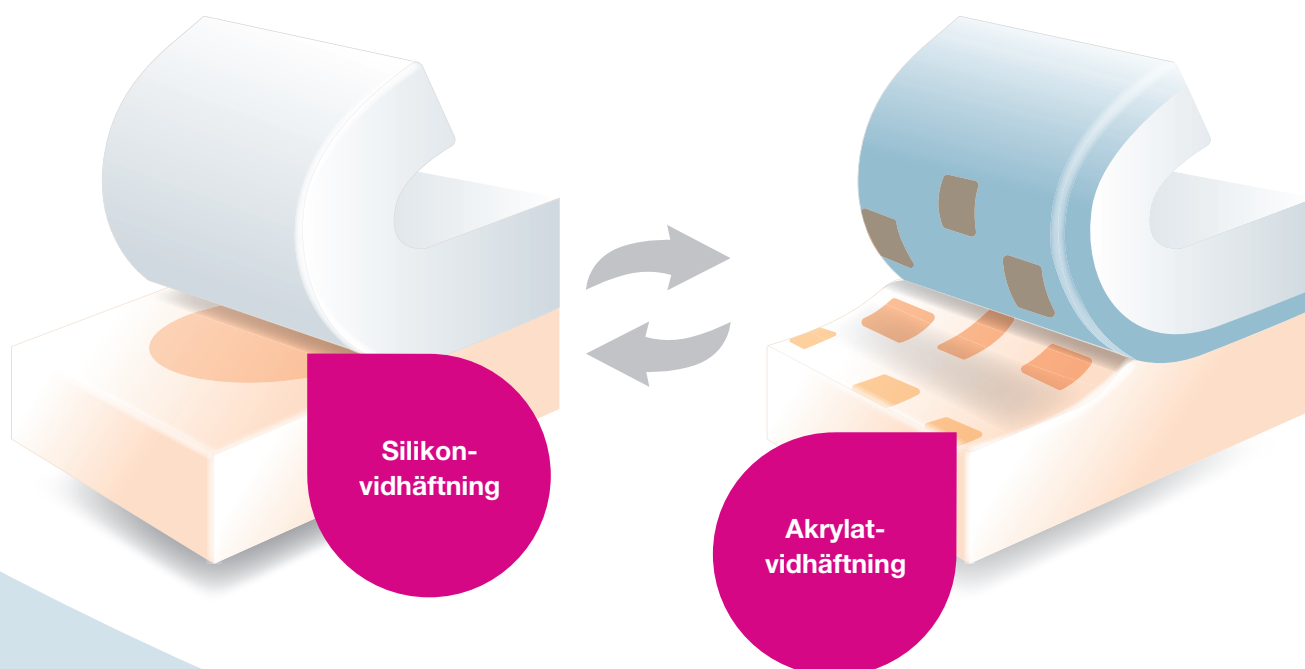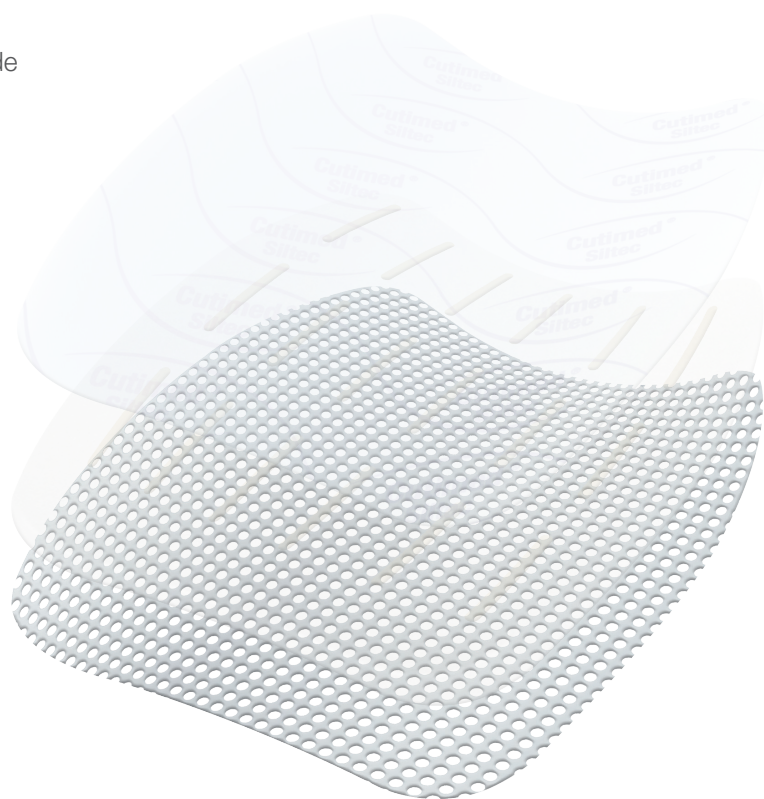

Perfekt samarbete mellan olika komponenter



Polyuretanfilm med hög förmåga att andas

- Dynamisk exsudathantering, perfekt kombination av absorption och vaporisering
- Barriär mot bakterier




Anatomisk design

- Anatomisk form som anpassar sig efter kroppens konturer och för bästa komfort




Klippbar

- Patientanpassad användning

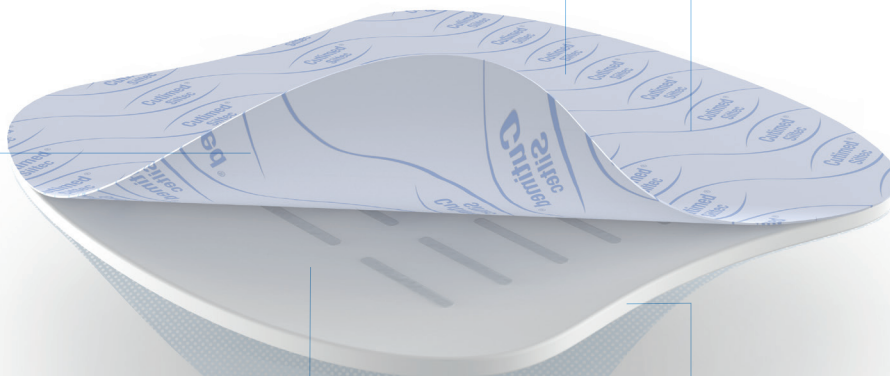

Teknologi med superabsorbenter

- Binder sårvätskan tack vare extra absorption och förmåga att hålla kvar vätskan
- Lämpar sig mycket väl för användning under kompression

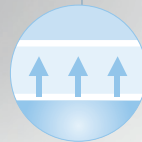

Intelligent skum

- Säkerställer effektiv, vertikal absorption och skyddar huden mot maceration
- Hög absorption av olika typer av sårvätska



Skonsamt sårkontakt-lager av silikon

- Skyddar nybildad vävnad
- Säkerställer atraumatiska förbandsbyten



Flexibel applicering

Anatomiskt anpassade former

Förband måste passa de unika, vanligtvis oregelbundna formerna på olika sår, följa kroppens konturer och tillåta en viss grad av kroppsrörelse. Samtidigt måste förbandet ha en nära kontakt med sårbädden för att skapa en optimal läkningsmiljö.

Den mjuka och smidiga följsamheten säkerställer att förbandet anpassar sig till olika kroppskonturer. Den anatomiska formen och rundade hörn gör att förbandet sitter bra oavsett var det appliceras.



Cutimed Siltec

Olika sår kräver olika lösningar




Cutimed Siltec

Skonsam

Superabsorberande skumförband i silikon med lätt vidhäftning.

- Perfekt för känslig hud, exempelvis tunn eller kortisonbehandlad hud

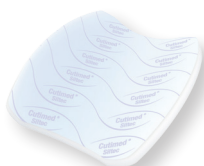


Cutimed Siltec PLUS

Supporterande

Superabsorberande skumförband med silikon och starkare initial vidhäftning.

- Enkel applicering tack vare starkare vidhäftning

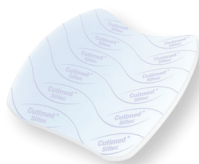

Cutimed Siltec L

Tunn

Tunt, superabsorberande skumförband med silikon och skonsam vidhäftning.

- Lämpligt för lätt till måttligt vätskande sår på ställen som är lite svårare att lägga om, exempelvis i hudveck under bröstet eller i lumsken



Cutimed Siltec B

Pålitlig

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant.

- Säker vidhäftning
- Enkel, kan omplaceras
- Duschbar



Cutimed Siltec

Specialformer



Cutimed Siltec B Oval

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant, oval.

- Säker vidhäftning
- Oval form anpassar sig perfekt till ojämna kroppskonturer
- Duschbar



Cutimed Siltec PLUS Heel 2D

Superabsorberande skumförband med silikon och starkare initial vidhäftning, för hälsår.

- Enklare applicering tack vare starkare initial vidhäftning
- Särskilt lämpligt för svåråtkomliga sår
- Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt



Cutimed Siltec Heel 3D

Superabsorberande skumförband med silikon, anatomiskt utformad för hälsår.

- Anatomiskt utformad för snabb och enkel applicering
- Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt
- Två extra fästremmar medföljer




Cutimed Siltec Sacrum

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant, för sår i sacrumområdet.

- Anatomiskt format förband med extra bred vidhäftande silikonkant
- Tryckdämpande effekt
- Duschbar



Cutimed Siltec – Översikt

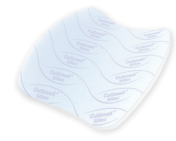		Storlek sårdyna	Storlek	Art nr.	Antal/fp	Antal/trp	
Cutimed Siltec Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och mycket skonsam vidhäftning 			5 x 6 cm	73285-00	10	100	
			10 x 10 cm	73285-01	10	100	
			10 x 20 cm	73285-02	10	100	
			15 x 15 cm	73285-03	10	100	
			20 x 20 cm	73285-04	5	50	
Cutimed Siltec Plus Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med starkare initial vidhäftning 			5 x 6 cm	73288-00	10	100	
			10 x 10 cm	73288-01	10	100	
			10 x 20 cm	73288-02	10	100	
			15 x 15 cm	73288-03	10	100	
			20 x 20 cm	73288-04	5	50	
Cutimed Siltec L (Light) Superabsorberande skumförband i polyuretan med låg profil och sårkontaktlager i silikon. Mycket skonsam vidhäftning 			5 x 6 cm	73283-00	10	100	
			10 x 10 cm	73283-01	10	100	
			15 x 15 cm	73283-02	10	100	
Cutimed Siltec B (Border) Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon 			4 x 4 cm	7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	100
			6 x 6 cm	10 x 10 cm	73284-05	10	100
			5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	73284-06	10	100
			8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	100
			10 x 10 cm	15 x 15 cm	73284-02	10	100
			12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	50
			16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	50
Specialformer							
Cutimed Siltec B Oval Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon, oval 			6,0 x 3,0 cm	10 x 7 cm	73284-14	10	100
			11,6 x 8,6 cm	16 x 13 cm	73284-21	5	50
Cutimed Siltec Plus Heel 2D Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med starkare initial vidhäftning, för hälsår 			16 x 24 cm	73288-05	5	50	
Cutimed Siltec Heel 3D Anatomiskt utformat, superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med mycket skonsam vidhäftning. För hälsår. Två extra fästremor medföljer 			16 x 24 cm	73286-01	5	50	
Cutimed Siltec Sacrum Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon, för sår i sakrumområdet 			11,6 x 9,7 cm	17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	50
			16,6 x 14 cm	23 x 23 cm	73287-01	5	50

Cutimed Siltec lämpar sig för:

Sårfaser

-  Fibrinbelagt (smetigt)
-  Granulation
-  Epitelisering

Sårvätska

-  Liten till måttlig mängd
-  Måttlig till riklig mängd

Se bruksanvisning för fullständiga anvisningar om säker användning av denna produkter.

Sårddjup

-  Ytligt

Cutimed® EXSUDATteam: Tre spelare för optimal sårhäkning

Ett bra behandlingsval banar väg för en framgångsrik sårhäkning. Med **Cutimed®** har du tillförlitliga sårvårdsprodukter till hands för att hantera varje sårfas och olika nivåer av sårutskott.

Hitta en passande produkt för icke-infekterade, vätskande sår:

EXSUDATNIVÅ

SÅRSTADIER



Fibrinbelagt



Granulerande



Epiteliserande




Nekrotiskt

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprepning av fibrinbeläggning från såret

- Optimalt fuktigt sårklimat tack vare osmoseffekt
- Hög sårstimuleringspotential stödjer tillväxt av ny vävnad

- Skydd av epitelvävnad

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprepning av nekrotisk vävnad

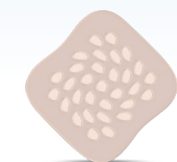

Den aktiva
Cutimed® HydroControl

- Perfekt balans mellan absorption och fuktigt sårklimat

- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
- Vertikal absorption minskar risken för maceration

- Skonsam och mindre smärtsam omläggning tack vare silikonlager




Den mjuka
Cutimed® Siltec®




- Skonsam debridering minskar fibrinbeläggning på sårytan
- Binder bakterier, inflammationsfaktorer och sårsekret säkert i förbandet

- Cutimed® Sorbion® Sana:**
- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
 - Skonsam omläggning

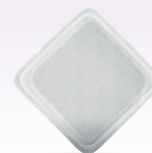

Den starka
Cutimed® Sorbion®

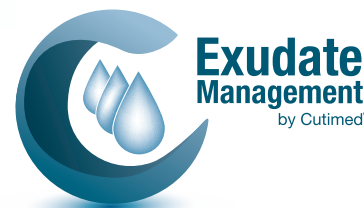

Cutimed® exsudatteam är indicerat för kroniska sår såsom exempelvis:*

- Venösa eller arteriella bensår
- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker

* Ytterligare information finns i produkternas bruksanvisning.