



ger
bekväm
kompression
efter bröstcancerkirurgi

JOBST® Bellisse®
Kompressions-BH



JOBST® Bellisse®

Innovativ behandlingslösning vid ödem orsakat av bröstcancerkirurgi

Bellisse® är utvecklad av Lesli R. Bell, fysioterapeut/lymfödemterapeut med specialistkompetens. Lesli saknade en produkt specifikt för kvinnor som har genomgått bröstcancerkirurgi.

Bellisse® kompressions-BH är en effektiv behandlingslösning vid lymfödem och fibros orsakat av

bröstkirurgi och strålbehandling.

BH:n finns i en rad olika storlekar med stora möjligheter för anpassning för att möta varje enskild patients behov.

Anpassad för

Din behandling

Din livsstil

För användning både dag och natt

Högre livskvalitet

JOBST® Bellisse® kan användas dag och natt. Produkten kan användas med en rad olika pads för att säkra optimalt lymfdränage och reducera smärta i den aktuella området.

Komfort gör skillnad för patienten i dagliga livet.



Kuporna är elastiska och har fickor där man kan lägga en protes, lateral pad eller en Chest-wall pocket pad. Kompression bidrar till lymfdränage.



Produkten har två lager, vilket ger en mer effektiv behandling och gör den skönare att använda. Mjuk kant under axillen.



Enkel att stänga framtill med öglor och dragkedja.



En mjuk och diskret nedre kant som håller produkten på plats, utan att rulla.



3 rader med hyskor på ryggen gör produkten mycket anpassningsbar.




Polstrade och reglerbara axelband ger god komfort och minimerar trycket på axlarna.

Måtttagning

Hitta rätt storlek

STEG 1 - Mätning

MÅTT 1A - Mät omkretsens direkt under bysten, där en vanlig BH sitter.
MÅTT 1B - Mät omkrets runt undre delen av bröstkorgen (ca 5-8 cm under mått 1A).
MÅTT 2 - Mät omkrets över bröstet (inkl protes).

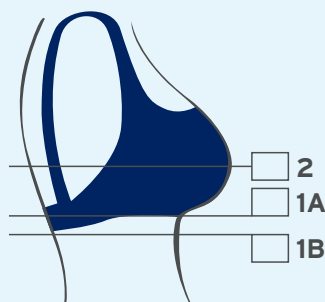

Uträknings-exempel:
Mått 2 = 112 cm
Mått 1A = 104 cm
Mått 1B = 102 cm

STEG 2 - Val av storlek på omkrets:

Använd det större av mått 1A och mått 1B för att bestämma storlek på omkrets. Avrunda uppåt vid gränssfall. Se tabell:

Tabell Omkrets:

USA storlek	Omkrets cm
30	76-81 cm
32	81-86 cm
34	86-91 cm
36	91-97 cm
38	97-102 cm
40	102-107 cm
42	107-112 cm
44	112-117 cm
46	117-122 cm
48	122-127 cm
50	127-132 cm

Mått 1A = 104 cm
Du väljer storlek **40** för omkrets. Se Tabell Omkrets.

STEG 3 - Val av kup-storlek:

Välj det större av mått 1A och mått 1B.
Beräkna skillnaden mellan det måttet du valde (mått 1A eller 1B) och mått 2.
Skillnaden avgör val av kup-storlek.

Tabell Kup-storlek:

Skillnad	Kup-storlek
5 cm eller mindre	A/B
5-10 cm	C/D
10-15 cm	DD/E

OBS! Om skillnaden är större än 15 cm - gå upp en storlek på omkrets.

Mått 1A är störst = 104 cm
Mått 2: 112-104 (Mått 1A) = 8 cm
Skillnaden 8 cm blir **C/D**. Se tabell Kup-storlek.

Måtttagning för pads - Omkretsmått under bröstet, undantag är Post-Lumpectomy och Axilla pad.

Small	Medium	Large	X-Large
32-36 (81-97 cm)	38-40 (97-107 cm)	42-44 (107-112 cm)	46-50 (117-132 cm)

JOBST® JoViPak Pads

Tillgänglig i olika former för olika användningsområden för att hantera ödem och/eller fibroser. Padsen ger ett lätt tryck över lång tid, vilket mjukgör påverkad vävnad och transporterar lymfvätskan över i fungerande delar. Dessa är framtagna för att användas ihop med Bellisse®.



Lateral Pad

Passar i Bellisse's fickor och täcker den laterala delen av bröstet. Framtagen för att mjukgöra fibrotisk vävnad.



Mini Axilla Pad

En pad med lös fyllning i axillen med en liten del som hålls på plats av Bellisse.



Bellisse Pad

Transporterar lymfan runt torso och bak ryggen mot den friska sidan.



Post-Lumpectomy pad

För ödem och fibros i bröst och serratus anterior. Täcker hela bröstet och bak mot ryggraden. Cupstorlek.



Serratus Anterior Pad

Leder lymfan ned mot ljumskan och bakåt mot ryggraden. Passar i de flesta BH:ar.



Unilateral Post-Mastectomy pad

För patienter som har opererat bort ett bröst eller patienter som har ödem eller fibrotisk vävnad efter kirurgi eller strålning, med normal flöde på friska sidan.



Double Mastectomy Pad

För patienter som har opererat bort båda brösterna och lymfkörtlarna i båda axillerna



Axilla Pad

För behandling direkt efter lymfkörtel-dissekering. Hålls på plats av band på armen och med hjälp av Bellisse. Tag mått mitt på överarmen.




Inframmary Pad

Ellipsformad pad som går från serratus anterior till bröstbenets spets. Ger ett lätt tryck mot nedre delen av bröstet när den används under Bellisse.



Cleavage Pad

För ödem mellan brösterna, samt vid ärrbehandling efter t.ex hjärtkirurgi.

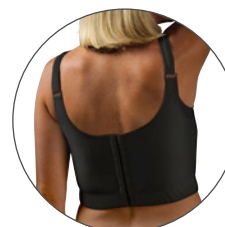

Variera knäppningen efter behov.

Bellisse finns även i svart.