

PATIENT:

HITTA RÄTT STORLEK

STEG 1 - Mätning

Mått 1A


Mät omkretsen direkt under bysten, där en vanlig BH sitter.

MÅTT 1B

Mät omkrets runt undre delen av bröstkorgen (ca 5-8 cm under mått 1A).

MÅTT 2

Mät omkrets över bröstet (inkl protes).

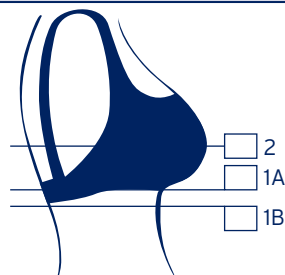

STEG 3 - Val av kup-storlek:

Välj det större av mått 1A och mått 1B. Beräkna skillnaden mellan det måttet du valde (mått 1A eller 1B) och mått 2. Skillnaden avgör val av kup-storlek.

Tabell Kup-storlek:

Skillnad	Kup-storlek
5 cm eller mindre	A/B
5-10 cm	C/D
10-15 cm	DD/E

Obs! Om skillnaden är större än 15 cm - gå upp en storlek på omkrets.

STEG 2 - Val av storlek på omkrets:

Använd det större av mått 1A och mått 1B för att bestämma storlek på omkrets. Avrunda uppåt vid gränsfall. Se omkrets nedan.

BELLISSE BH

Stl USA	Omkrets	Kupa A/B	Kupa C/D	Kupa DD/E	Färg
30	76 - 81 cm			-	<input type="checkbox"/> Off-white
32	81 - 86 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
34	86 - 91 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
36	91 - 97 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
38	97 - 102 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
40	102 - 107 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
42	107 - 112 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
44	112 - 117 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
46	117 - 122 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
48	122 - 127 cm				<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
50	127 - 132 cm	-			<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black

MÄTTAGNING FÖR PADS - OMKRETSMÅTT UNDER BRÖSTEN

Small: 32-36 (81-97 cm) Medium: 38-40 (97-107 cm)

Large: 42-44 (107-112 cm) X-large: 46-50 (117-132 cm)

Pads	Storlek	Färg
Axilla Pad - bredaste biceps	<input type="checkbox"/> 30 - 38 cm <input type="checkbox"/> 38 - 46 cm	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Bellisse pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Cleavage pad	<input type="checkbox"/> One size	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Double-Mastectomi Pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Inframammary Pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Lateral pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Mini axilla pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Post-Lumpectomi Pad	<input type="checkbox"/> A/B <input type="checkbox"/> C/D <input type="checkbox"/> D/DD <input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Serratus Anterior Pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black
Unilateral Post-Mastectomi Pad	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> Off-white <input type="checkbox"/> Black