

KORTINFORTMATION – NETTI 4U komfort CED och CEDS

Netti 4U komfort CED och CEDS är en komfort rullstol, producerad för både inom- och utomhus användning. Rullstolen har genomgått test hos TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland enligt europisk standard DIN EN 12183:2009. Netti 4U komfort CED och CEDS är krocktestad och godkänd enligt ISO 7176/19.

- ⚠ För att inga skador ska uppkomma vid användning av en Netti 4U komfort CED och CEDS rullstol måste brukarmanualen läsas igenom innan stolen tas i bruk.
- ⚠ Max brukarvikt är: 130 kg för CEDS & 160 kg för CED.
- ⚠ Kör försiktigt!
- ⚠ Uppmärksamma att friktionen mot drivringarna kan skapa en varm yta.
- ⚠ Saltvatten kan öka risken för korrosion. Andra förhållningsregler anknutna till miljöförhållanden är ej nödvändiga.
- ⚠ Tippskydden BÖR alltid vara nedfällda för brukarens säkerhet.
- ⚠ Tippskydden SKALL alltid vara nedfällda när rullstolen är tiltad bakåt.
- ⚠ Kontrollera att alla låsspakar är tillräcklig åtdragna.
- ⚠ Yttemperaturen i metalldelar kan öka vid exponering av direkt solljus.
- ⚠ Stå aldrig på fotplattorna – eftersom stolen då kan tippa framåt.
- ⚠ Lyft aldrig rullstolen i armstöd eller benstöd.
- ℹ Specifikationerna kan variera från land till land.
- ℹ För brukare med nedsatt syn, kan kataloger och manualer laddas ned på www.alurehab.com
- 👍 Om du är osäker – kontakta din återförsäljare!

