



## REKONDITIONERING JAY SITT- OCH RYGGDYNOR

**Kontrollera först alla delarna så att ingen del är skadad.**

### Överdrag:

Alla överdrag maskintvättas i 60° C med stängt blixtlås. Torktumlas på låg värme eller dropptorkas.

### Baser:

Alla baser och träplattan ytdesinficeras med t ex Virkon, eller liknande ytdesinficeringsmedel. Torkas sedan av med antibakteriell tvållösning och vatten. Lufttorkas.

Följande baser kan även autoklaveras i 90°C: *J2, J2 Djup, J2 Plus och GS.*

### Fluid-överdel:

Alla fluid-överdelar ytdesinficeras med t ex Virkon, eller liknande ytdesinficeringsmedel. Tvättas sedan av med antibakteriell tvållösning och vatten. Torkas torr med torr trasa och lufttorkas.

Följande fluid-överdelar kan autoklaveras i 90°: *Easy, J2 Plus, Xtreme, Active och GS.*

Var försiktig vid luftventilerna på J2- och J2 djup överdelarna.

### Luft-överdel:

#### DESINFICERA DRY FLOATATION®-INSATSEN

För desinficering av DRY FLOATATION®-insatsen ska du använda ett bakteriedödande medel som uppfyller smittskyddskraven.

Vi rekommenderar att du använder ett desinfektionsmedel med tuberkulocida egenskaper. Följ tillverkarens spädningssanvisningar. För desinfektion hemma, använd en lösning av proportionerna 125 ml Klorin till 1 liter vatten.

Låt klorinlösningen vara kvar på den rengjorda dynan i 10 minuter. Skölj noga och torka.

### Ryggskal

Alla ryggskalen ytdesinficeras med t ex Virkon, eller liknande ytdesinficeringsmedel. Tvättas sedan av med antibakteriell tvållösning och vatten. Torkas torr med torr trasa och lufttorkas.



Sunrise Medical AB, Box 9232, 400 95 GÖTEBORG  
Tel: 031 748 37 00 Fax: 031 748 37 37 E-post: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)

NR10901\_1009