

JAY® J3 Rygg

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

ANVÄNDARE: I Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning



Sunrise Medical rekommenderar att en sjukgymnast eller arbetsterapeut med stor erfarenhet av positionering i rullstol, rådfrågas för att avgöra om ett J3-ryggdyna är lämpligt. Jay ryggdynor får endast monteras av auktoriserad personal.

JAY J3 RYGGSTÖD

Jay J3-ryggstödet är avsett att passa som stöd för ryggen för en bred grupp rullstolsanvändare. Ryggstödet är utformat för att ge enkelt, bekvämt och effektivt stöd som bidrar till att fungera i vardagen så att brukaren kan sitta längre perioder. Ryggstödet är lätt, mycket hållbart och enkelt att använda.

Ryggstödet kan monteras på ett stort antal rullstolar.

Max brukarvikt: 136 kg.

UNDERHÅLL

Sunrise rekommenderar att alla fästanordningar kontrolleras med avseende på slitage hos exempelvis lösa bultar eller trasiga komponenter var 6:e månad. Lösa fästanordningar skall dras åt upprepade gånger enligt monteringsinstruktionerna. Alla fästen ska dras fast med i installationsavsnittet angivet moment. Ta kontakt med auktoriserad återförsäljare för Sunrise Medical för att genast byta ut söndriga komponenter. Fortsätt ej att använda ryggdynan om det har konstaterats att komponenter är lösa eller har gått sönder.

ENKEL RENGÖRING

OBS: När ryggstödet tas isär för rengöring, anteckna läget för Velcro® ryggradsuppriktningsdelen så att den kan sättas tillbaka korrekt.

Rengöring av ryggdynans överdrag

Avlägsna överdraget genom att dra isär kardborrrebindslet. Lossa överdraget från skalets baksida. Leta upp och öppna blixtlåset i överdragets botten. Ta ut skumgummit ur överdraget och vänd överdraget ut och in. Dra för säkerhets skull igen dragkedjan. Maskintvätta vid 60 °C. Drogptorka eller tumla torrt på låg värme.

OBS: Överdragen får ej kemtvättas, ej heller får tvättmaskiner och -torkare för industriellt bruk användas för rengöring. Får ej ångautoklaveras. Använd ej blekmedel.

Sätt tillbaka skummet i överdraget. Observera att basen har två skumlager. Säkerställ vid insättandet att det tunnare "ljusgrå" skummet är vänt mot skalet. När skummet är säkrat i överdraget stängs det med blixtlåset.

Rengöring av ryggskalet

Ryggskalet skall torkas rent med tvål och vatten. Det krävs ej något ytterligare underhåll.

Rengöring av positioneringskomponenter

Positioneringskomponenter kan torkas rena med trasa och tvålatten. Doppa inte positioneringskomponenter i vatten.

Om du har ytterligare frågor om rengöringsprocedurer, kontakta er återförsäljare för Sunrise Medical.

MONTERING/DEMONTERING

Efter montering och justering av ryggen på stolen (se fullständig bruksanvisning) kan ryggstödet vid behov lätt tas bort från rullstolen. Avlägsna genom att trycka vardera frigöringsspaken framåt för upplåsning (fig. 1). När båda spakarna är i främre läget lyfts ryggstödet rakt upp (fig. 2) handtaget överst på ryggstödet.

Korrekt montering efter borttagning


Fäst ryggstödet i hållarna genom att rikta upp stiften och trycka på plats (fig. 3). Om korrekt satt "klickar" stiften in i det låsta läget.

VARNING

Om du inte säkert hört låsklicket, dra i ryggstödshandtaget för en kontroll.

Låsstift (fig. 4)

Ryggstödet J3 levereras med två låsstift som, när säkrade, hindrar att ryggstödet lossas från stolen. Lås genom att sticka in stiften (A) i hållarna (B). Dra ut stiften om snabb frigöring önskas.

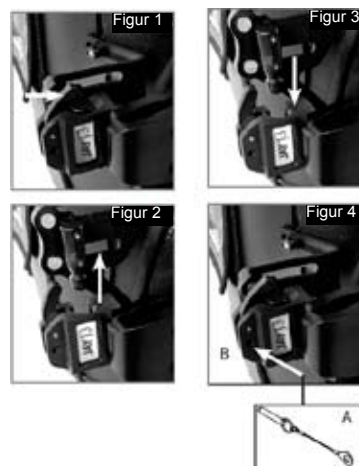

Vid problem vid användande av ryggstödet vänligen kontakta din förskrivare eller din Hjälpmedelscentral.



Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.se

This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC & 2007/47/EEC.

