

Artikelnummer J3RFE

Jay J3 rygg på rullstol Etac Cross och Next



Ta fram originalfästet för J3 ryggen




Skruva bort låsdelen (till höger på bilden) från originalfästet (4mm Insexnyckel). Dessa skruvar skall användas vid montering på det nya beslaget. Skruva av vajern till låssprinten om denna skall användas.



Montera låsdelen på metallbeslaget. Följ formen på beslaget och låsdelen. Använd skruvarna som togs bort i moment 2, använd medföljande gänglåsning eller Loctite.



Ta bort skruvarna som håller körhandtagen. Spara på de fyrkantiga muttrarna.

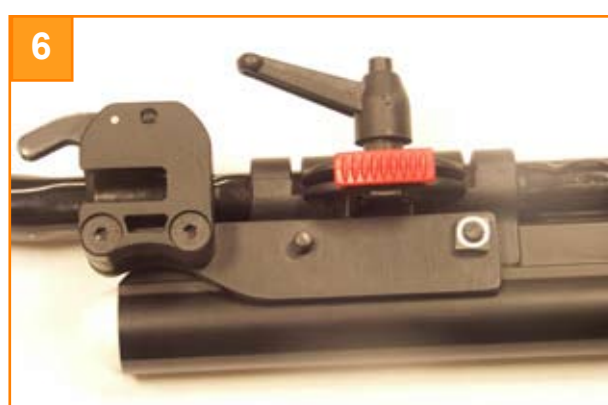

Sätt dit fästena, med låsdelen, på insidan av ryggroren med de längre svarta skruvarna, som levererats med fästena. Den rundade sidan skall vara framåt. Sätt dit muttrarna, som togs bort i moment 5, använd gänglåsning. Om låssprinten ska användas måste öglan borraras upp med 6 mm borrh och fästas i ovan nämnda skruvar.