

Artikelnummer ryggförlängare Bambino: 4380300

Jay J3 rygg på rullstol Panthera S2 och U2

1

Ta bort ryggklädseln från rullstolen. Lossa även på eventuella bakomliggande körhandtag. Låsklossarna till körhandtagen inne i ryggrören tas bort eftersom de ersätts av ryggförlängarna.

2


Ta bort plasthatten från toppen av ryggröret. Stick ner ryggförlängaren så att de sticker upp 5 cm. Skruva fast ryggförlängaren med medföljande bult. Sätt en bit tejp i botten på ryggförlängaren så faller inte låsklossen ned.

3


2 st "Ryggförlängare Bambino" köps av Panthera AB. Art nr: 4380300. Sunrise Medical AB kommer även att tillhandahålla ryggförlängare med samma artikelnummer.

Montera fästet för J3 ryggen på ryggförlängaren enl. anvisningarna i bruksanvisningen för J3 ryggen.

4

5

	RH 20 cm med adapter	RH 25 cm med adapter	RH 30 cm med adapter	RH 35 cm med adapter	RH 40 cm med adapter	RH 45 cm med adapter
Låg rygg		Ok	För högt	För högt	För högt	För högt
Mellanrygg			Ok		För högt	För högt
Hög rygg			Ok	Ok	För högt	För högt
Skulderhög			Ok	Ok	För högt	För högt
	Panthera SB 36	SB 39	SB 42	SB 45	SB 50	
J3 rygg						
Rygg 36	Ok	Ok		Ok		
Rygg 41		Ok	Ok	Ok		
Rygg 46				Ok	Ok	
Rygg 51					Ok	Ok

Rekommenderade höjder och bredder

6

Monteringsanvisning J3 rygg på Panthera U2 light.

Ta bort ryggklädseln från rullstolen. Montera J3 ryggen ovanför ryggbågen enl anvisningarna i bruksanvisningen för J3 ryggen.