

## FÖRHÖJNINGSKLOSS BILL

Artikelnummer: 151110

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Byggda höjden får inte överstiga nedanstående mått, dvs. max 2 distansklossar får användas i varje förhöjningskloss.
- Möbeln måste stå på bottenplattan eller distansklossen, dvs. inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen.
- Kan lämna avtryck i plastmattor.
- Kontrollera att möbeln inklusive klossar står stadigt före användning.
- Max brukarvikt: 320 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.



**Avsedd användning:** Förhöjningskloss Bill används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. Förhöjning kan fås med 7.5, 10 och 12.5 cm. Bill greppar tillräckligt mycket om benet så att möbeln kan flyttas utan att benet skadas. Passar för ben med diameter 3-5 cm.

### Teknisk specifikation

Byggbar höjd: 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm	Höjd distanskloss: 2,5 cm
Invändigt mått: $\varnothing$ 5,5 cm, höjd 13 cm	Höjd (yttermått): 20.5 cm      Vikt: 1,03 kg (totalt för 4 st)

**Material:** PP

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med mildt diskmedel.

### Medföljande delar:

4 st. Förhöjningskloss  
8 st. Distansklossar

### Reservdelar:

Art. nr 15111001, Distanskloss Bill

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Distributör Sverige:  
**Swereco Rehab AB**  
Barnhusgatan 4  
SE-111 23 Stockholm  
Tel: +46 8 444 38 20  
Fax: +46 8 754 30 80  
www.swereco.se  
info@swereco.se

Tillverkare:  
**Gordon Ellis & Co**  
TRENT LANE  
CASTLE DONINGTON  
DERBY DE74 2NP  
ENGLAND