

TOAFÖRHÖJNING, ROBUST Inklusive stänkskydd

Artikelnummer: 144400

Avsedd användning: Toaförhöjning Robust är avsedd att ställas över toalett och därmed öka sitthöjden för att underlätta vid toalettbesök. Stolen har helsvetsad konstruktion med extra dimensionerade rör för att klara av tyngre brukare. Stänkskydd och lockstödsband ingår. Om fristående placering önskas kan hink beställas som tillbehör.



Teknisk specifikation


Art. nr: **144400**

Storlek sits:	45 x 36 cm
Storlek hål i sits:	35 x 22 cm
Sitthöjd:	55 cm
Höjd armstöd från sits:	23 cm
Bredd mellan armstöd:	60 cm Yttermått 67 cm
Vikt:	12,4 kg

Material: Stål, PP (sits), TPE (stödfötter)

⚠ Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Toalettlocket får ej användas som ryggstöd. Se bild A
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att stolen endast står på två ben då brukaren sitter i stolen. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stödfötterna skall kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Max brukarvikt 300 kg.

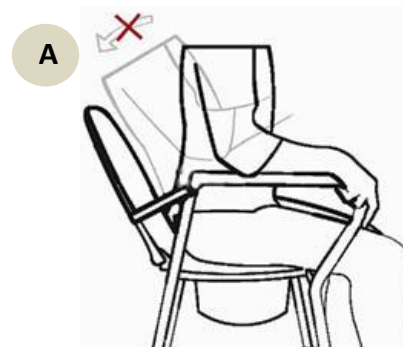

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.

Max 300 kg



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll






Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se

Användning:

1. Fäll upp sitsen och placera stänkskyddet i ramen.
2. Montera lockstödsbandet mellan armstöden på bakre delen av stolen. Se till att bandet fästs ovanför krokarna så att det inte glider ner.
3. Dra bandet genom spännet så att 2-3 cm sticker ut.
4. Toalettlocket får ej användas som ryggestöd.
5. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

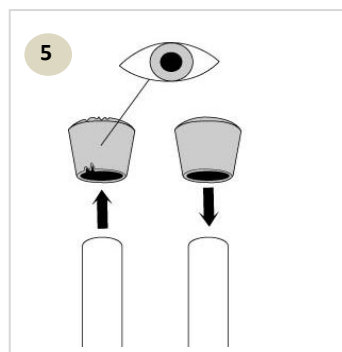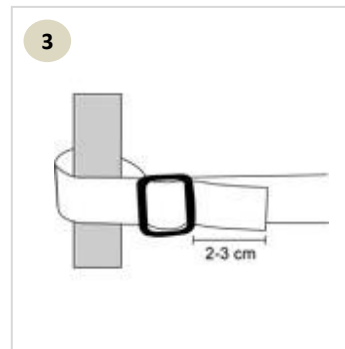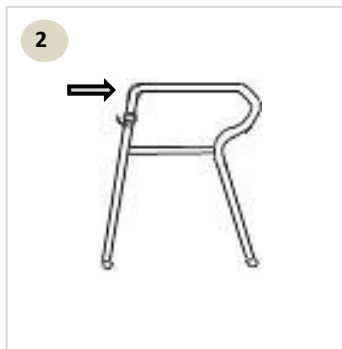

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1 ggr/vecka) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70 % isopropanol.

Reservdelar:

Art. nr 120702, Stödfot
Art. nr 14440005, Sits och lock
Art. nr 144405, Stänkskydd

Tillbehör:

Art. nr 144406, Hink