

Uppresning Eva

Artikelnummer: 151060, 151062, 151064

Golvplatta, Bygel standard, Bygel hög


Uppresning Eva är avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur sin säng.

Uppresningsstödet monteras genom att klicka i bygel i golvplattan, skruva fast bygel med golvplattan genom att dra åt insexskruvarna. Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot säng. Justera fästena så att de lägger an mot sängramen (långsidan) och skruva fast insexskruvarna. Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av sängramens underkant bör vara 2-5,5 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.

Höjd (H) monterad, standard: 85 cm

Höjd (H) monterad, hög: 97 cm

Sängbygel hög beställs när säng har hög madrass, exempel kontinentalsäng.

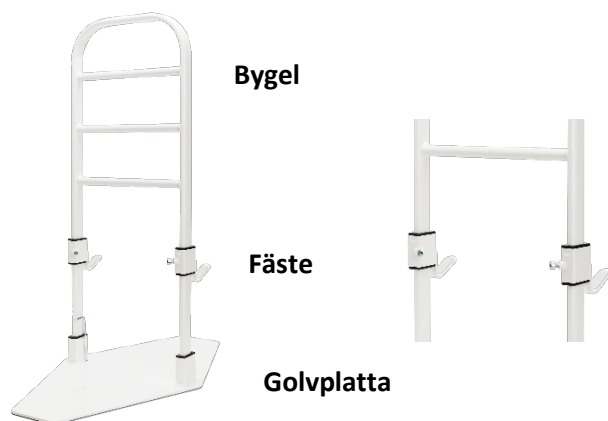

Teknisk specifikation

Art. nr: 151060:

Golvplatta Bredd: 35 cm Vikt: 8,4 kg

Insexnyckel ska alltid medfölja golvplattan.



Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot säng.

Art. nr: 151062


Bygel standard totalhöjd: 85 cm

Vikt: 3,1kg

Art. nr: 151064

Bygel hög totalhöjd: 97 cm

Vikt: 3,4kg

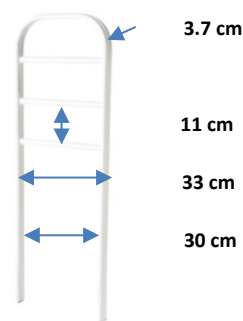


Material: Stålrör, pulverlack



Säkerhetsanvisningar:

1. Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Installationen skall göras av behörig personal. Karo Pharma påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.
2. Höjden (H) över madrass bör vara 22 cm. Se bild.
3. Sängbygel är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna. Klämrisk.
4. Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar ex. BILL, BULL, Liljan, Vivan eller liknande, bör dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben.
5. Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk.
6. Uppresning Eva bör ej användas tillsammans med däckertar.
7. Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämrisken beaktas. En sådan säng i kombination med sängbygel bör inte användas av personer som har demens eller spasmer om inte en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys har gjorts.
8. Avståndet (A) mellan gavel och sängbygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm. Detta säkerhetsavstånd gäller också om en extra sängbygel monteras på samma sida. Se bild.
9. Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6 cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven rygg och/eller benstöd) bör avståndet (B) dessutom vara större än 2,5 cm. Även om säkerhetsavstånden efterföljs kvarstår viss klämrisk
10. Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
11. Max brukarvikt 150 kg

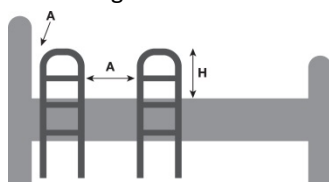

Monteringsanvisning:

1. Kontrollera sängens höjd från golv till sängens övre kant så att rätt modell av bygel valts.
2. Fäst bygel i golvplattan och dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot säng.
3. Justera fästena mot sängens regel (långsidan) och skruva åt insexskruvarna ordentligt med medföljande insexnyckel. Säkerhetsställ så upprensingsstödet sitter ordentligt.

Art.nr: 15106020 **Fäste**, passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är minst 6 cm då sängregelns bredd är 2,5 cm.



OBS! Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 1 före montering och användning. Säkerhetsavstånden måste respekteras då brukare inte kan motta muntlig information om klämrisk. Om osäkerhet råder kontakta Karo Pharma för vägledning.

Skötselanvisningar: Kontrollera samtliga skruvars fäste regelbundet.

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Vid reconditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Rondellgummit under golvstödet och på fästet bör kontrolleras och bytas ut vid behov. Reservdelar beställs från info@karopharma.se

Tillbehör:

Art. nr: 151060, Golvstöd
 Art. nr: 151062, Bygel 85 cm
 Art. nr: 151064, Bygel 97 cm

Reservdelar:

Art. nr: 15106020 Fäste
 Art. nr: 15106012 Insexskruv M8x18 mm
 Art. nr: 15106013 Insexnyckel NV6
 Art. nr: 15100013 Rondell gummi
 Art. nr: 15106014 Antiglid (till Fäste) 50x20 mm

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 150 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Karo Pharma Sverige AB
 Nybrokajen 7
 SE-111 48 Stockholm
 Tel: +46 10 330 23 10
 Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@karopharma.se