

GÅSTOL MED SITTPÅSE

Artikelnummer: 122120

Avsedd användning: Används för barn som behöver en stabil och säker gästol som stöd vid rörelseträning. Gåstolens höjd från golv till sittpåsens lägsta punkt kan ställas in mellan 18 – 30 cm.



Säkerhetsanvisningar:


- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Produkten bör ordinerars av behörig personal (t.ex. sjukgymnast eller annan person med förskrivningsrätt).
- Innan användning - försäkra att gåstolens höjd är rätt inställd. Totala höjden får ej ställas högre än 54 cm. Se markering på stolens ram.
- Kontrollera att hjulen rullar fritt och inte är blockerade.
- Tänk på att spärra av trappor så att stolen inte kan rulla utför när barnet sitter i.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt när det sitter i gåstolen.
- Produktens utformning begränsar användarens vikt, därav ingen angiven max brukarvikt.

Teknisk specifikation

Bredd:	50 cm
Längd:	60 cm
Höjd sits till golv:	18 - 32 cm
Höjd övre kant till golv:	41 – 54 cm
Vikt:	4,2 kg
Material:	Stålrör, bomullstyg

Användning:

1. Placera sittpåsen i stålramen och tryck fast med tryckknapparna.
2. Ställ in höjden med hjälp av spärrar på ramens sidor.
OBS! Markering för maximal höjd finns.
3. Justera storleken på sittpåsen med hjälp av kardborrbanden i sidan.
4. Barnet ska placeras med ansiktet i riktning mot handtaget. Se bild.

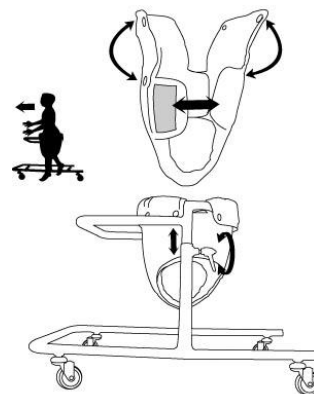

3122120

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid rekonditionering skall produkten desinficeras genom att torkas med 70% isopropanol. Sittpåsen kan tvättas i tvättmaskin 40 grader strykfritt program.

Reservdelar: Art. nr 122140, Extra sittpåse till gåstol

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco Group AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se