

STÖDKÄPP

Artikelnummer: 124300, 124309, 124310, 1124319, 124400, 124401, 124409, 124410, 124419, 124420, 124429

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Stödkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.

Avsedd användning: Stödkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Teknisk specifikation

Art. nr: 124300 Stödkäpp REKO Profil, höger	Art. nr: 124309 Stödkäpp, höger, vit	Art. nr: 124310 Stödkäpp REKO Profil, vänster	Art. nr: 124319 Stödkäpp, vänster, vit	Art. nr: 124400 Stödkäpp Flex, rak
Art. nr: 124401 Stödkäpp Flex, lång Ställbar höjd: 95-117 cm	Art. nr: 124409 Stödkäpp Flex, vit	Art. nr: 124410 Stödkäpp Flex Ergo, höger	Art. nr: 124419 Stödkäpp Ergo, höger, vit	Art. nr: 124420 Stödkäpp Flex Ergo, vänster
Art. nr: 124429 Stödkäpp Ergo, vänster, vit				

Ställbar höjd: 75-97 cm (Art. nr: 124401 95-117 cm)

Vikt: 0,34 kg

Material: Aluminiumrör, PP (handtag), naturgummi (doppskor)

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:

Swereco Rehab AB

Barnhusgatan 4

SE-111 23 Stockholm

Tel: +46 8 444 38 20


Fax: +46 8 754 30 80

www.swereco.se

info@swerecogroup.se

Användning:

1. Justera höjden förstödkäppen med hjälp av tryckknappen. Stödkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren
2. Kontrollera tryckknappen för höjdstyret regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av stödkäppen genast avbrytas.
3. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

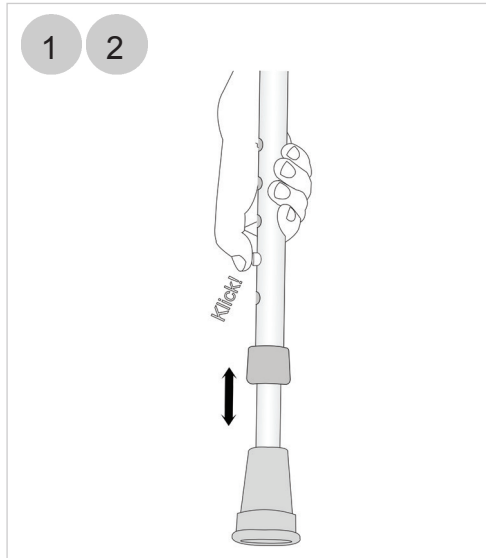

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb Spets
Art. nr 123350, Isdubb Kronan
Art. nr 124885, Käpphållare Flex
Art. nr 124889, Gummifot Stabil