

MJUKSITS, REKO

Artikelnummer: 144210

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Mjuksits REKO är framtagen för att passa StaplaLätt men passar de flesta toalettsitsar på marknaden.
- Innan användning försäkra att mjuksitsen är ordentligt nedtryckt i toalettsitsen och sitter stabilt.
- Klarar alla brukarvikter.

Avsedd användning: Mjuksits REKO är en mjuk toalettsits för personer som vill sitta mjukt.

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Mjuksitsen skall avlägsnas från toaletten vid rengöring.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Storlek sittring:

Djup: 37 cm

Bredd: 32,5 cm

Hål sittring:

Djup: 23 cm

Bredd: 19 cm

Tjocklek: 3 cm

Material: Polyesterskum, vinyl (överdrag)

Tillverkad av:

Swereco Rehab AB

Barnhusgatan 4

SE-111 23 Stockholm

Tel: +46 8 444 38 20

Fax: +46 8 754 30 80

www.swereco.se

info@swereco.se

3144210