



**REAL® 9000 PLUS SERIE**



**MONTERINGSANVISNING, BRUKS & SKÖTSELANVISNING  
REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT**

Artikelnr 804838  
Ändrad 1809  
Giltig från 1706


REAL 9000 PLUS är en medicin teknisk klass 1 produkt.

REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar är CE-märkt i enlighet med Läkemedelsverkets författningssamling för medicintekniska produkter LVFS 2003:11. REAL 9000 PLUS uppfyller samtliga krav enligt SS-EN 1335, IEC 60601 samt SS-EN 12182. Samtliga textilier uppfyller krav enligt EN 1021-1, EN 1021-2. Mercado Medic är certifierade mot både ISO 9001, 14001 samt RoHS 2 fördraget, samt följer gällande arbets- och miljölagar. Vi förbehåller oss rätten för ändringar på denna manual och dess innehåll.

Om du har frågor gällande din produkt, eller om något oförutsett inträffat, kontakta i första hand din förskrivare, annars är ni välkomna att kontakta Mercado Medic AB, se sista sidan för kontaktuppgifter.

För dig med nedsatt syn finns en PDF-version, med förstöringsmöjligheter, av denna bruks- och skötselanvisning på [www.mercado.se](http://www.mercado.se) under "DOKUMENT".

Monteringsanvisningar för tillbehör finns på. [www.mercado.se](http://www.mercado.se)

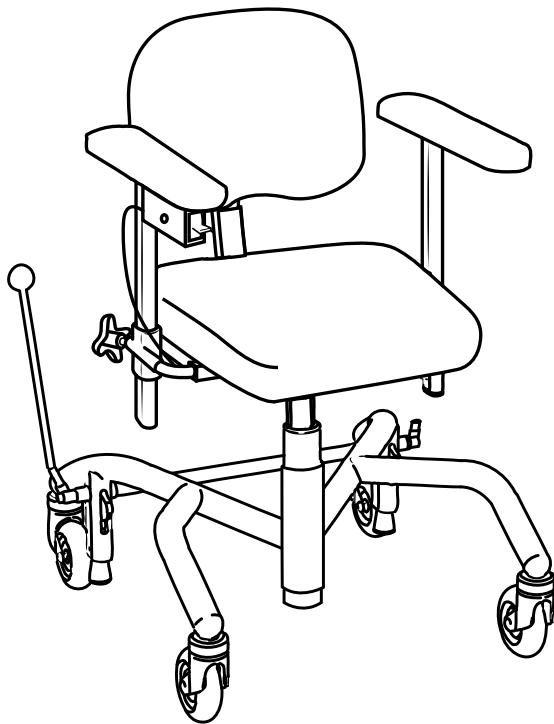

- REAL PLUS VUXEN MANUELL
- REAL PLUS VUXEN EL 24V 1G
- REAL PLUS BARN/MINI MANUELL
- REAL PLUS BARN/MINI EL 24V 1G
- REAL PLUS COXIT MANUELL
- REAL PLUS COXIT EL 24V 1G

## INNEHÅLL

MONTERING FÖR BRUK  
BEKANTA DIG MED DIN REAL 9000 PLUS  
VIKTIG INFORMATION & KLASS  
RENGÖRING & UNDERHÅLL  
DESTRUKTIONSANVISNINGAR  
SYMBOLER  
INDIVIDUELL ANPASSNING  
BRUKARMANUAL





**Mercado Medic AB**  
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö

**Telefon & Fax**  
Tel 08 555 143 00  
Fax 08 555 143 99


**Email & Internet**  
Email [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internet [www.mercado.se](http://www.mercado.se)





Tag ur stolen ur kartong. Lossa på bromsspaken som är fastlindad med rullplast längs med bromsaxeln bak på stolen. Sätt bromsspak i bromsspaksfästet(1) på höger eller vänster sida.

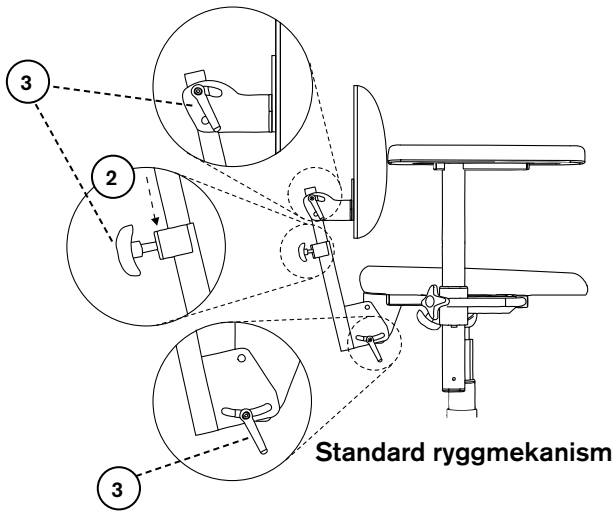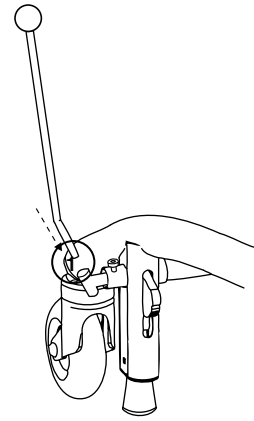

Montera ryggmekanismen genom att föra ned ryggstolpen på ryggfällningen(2) till önskad nivå. Drag sedan åt samtliga reglage(3).

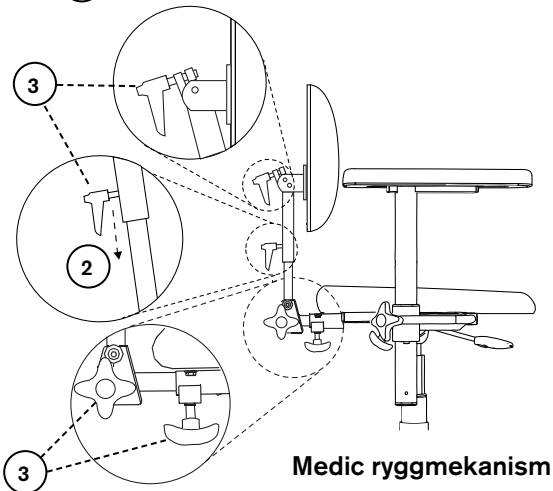

Om stolen levereras med nackstöd, för ned nackstödsmekanismen i dess fäste på ryggen enligt illustration. Drag sedan åt samtliga reglage(4).

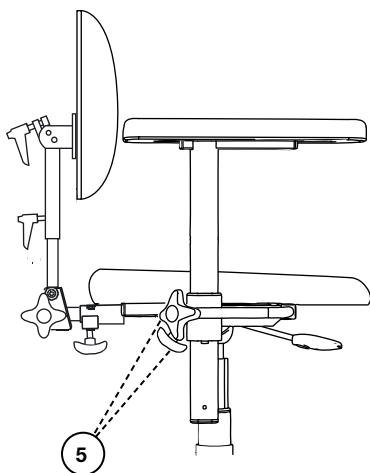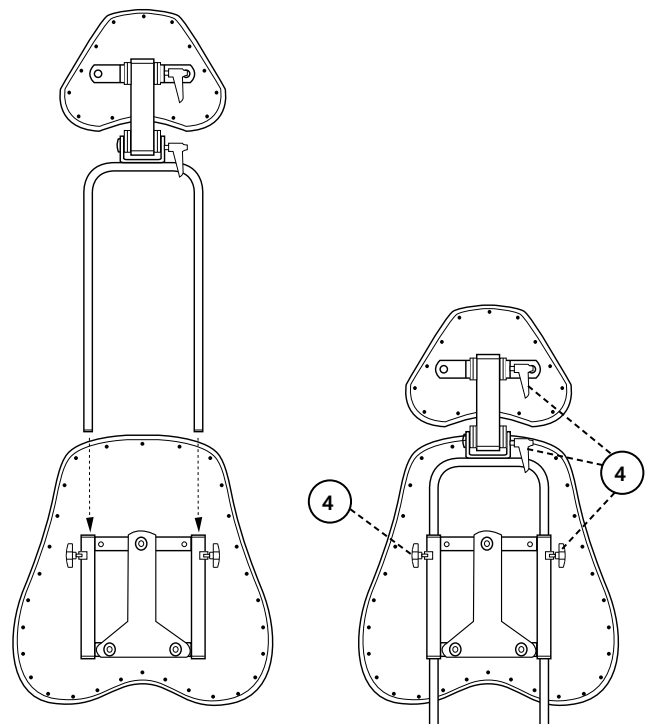

Lossa reglagen för armstöd(5). Ställ in önskad nivå i höjd och bredd. Dra åt samtliga reglage(5).

Stolen är nu redo att användas!

## NÖDVÄNDIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING

1. Justera upp armstöden i lämplig höjd och lås ratt avsedd för höjdregering.
2. Montera ryggstolpen i avsett fäste och lås ratt avsedd för höjjustering av ryggstöd.
3. Montera bromsspak i avsett fäste (höger eller vänster sida). Gäller ej Elbroms.
4. Samtliga rattar och vred skall vara åtdragna innan man sätter sig i stolen.
5. Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet.
6. Gäller elstol: Ladda stolen enligt instruktion i denna bruksanvisning, se sida 11. **OBS! Laddning bör ske dagligen.**
7. Stolen får ej användas med avmonterad rygg och/eller avmonterade armstöd.

## VIKTIG INFORMATION & KLASS

*REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd. Stolen är avsedd för inomhusbruk och får ej användas utomhus. Stolen skall ej utsättas för stark kyla, hög värme, långvarig solbelysning eller annan strålning. Stolen skall ej heller utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. Varning! Metalltytor kan bli mycket varma om de har utsatts för solsken. Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Mercado Medic AB. För bibehållen CE-märkning får inga anpassningar eller förändringar utföras utan Mercado Medic AB's godkännande <http://mercado.se/mercado-dokument/>. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan stolen tas i bruk.*

- REAL PLUS EL tillhör skyddsklass II, Internt batteri.
- REAL PLUS EL tillhör skyddstyp B.
- REAL PLUS EL är EMC testad och provad enligt EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2 och skall därför hanteras enligt vår bruks- och skötselanvisning.
- EMC bilaga finns att ladda hem på <http://mercado.se/mercado-dokument/>
- REAL PLUS EL uppfyller IP 21. IP2x innebär beröringsskydd för fingrar mm, ingen kommer åt något farligt med fingrar eller liknande. IPx1 innebär vertikalt droppskydd, lätt dusch uppifrån.
- REAL PLUS EL kan påverka samt påverkas av utrustning i sin omedelbara närhet som alstrar elektromagnetiska fält, t ex larmsystem, elgeneratorer. Även mobiltelefoner och liknande utrustning kan störa styrsystemet. Mercado Medic AB rekommendationer är att inte förvara sådan utrustning närmare än 3.3m från stolen.
- REAL PLUS EL har en ellyftomat som lyfter patienten så pass högt att det i värsta fall medför en risk. Klarar patienten ej att ta sig ur stolen från dess högsta läge får sitthöjden aldrig vara högre än att fötterna är i marken. Undantag tillåts om patienten kan få hjälp via hemtjänstlarm eller telefon.
- OBS! De elektriska funktionerna på REAL PLUS EL-stolarna får användas max 10% av tiden (max 2 min/20 min). Elektroniken mäter aktivitet och stänger ner de elektriska funktionerna om denna gräns överskrids.
- Endast elektrisk utrustning från Mercado Medic AB får användas på REAL PLUS EL.
- Varning! Koppla inte in något annat än de av Mercado Medic AB anpassade tillbehör i styrsystemets kontakter.
- Stolen måste framföras med aktsamhet. Innan förflyttning får ske måste omgivningen beaktas. Finns husdjur eller barn på golvet kan de lätt bli påkörda. Stolen skall endast användas för att sitta i och inte ses som en leksak för barn eller vuxna.
- Mercado Medics armstöd, sitsar, ryggstöd mm är framtagna och producerade så att de skall vara fria från toxiska och allergi framkallande ämnen.
- REAL PLUS EL är godkänd att transportera/Förvara i - 25°C - +60°C och upp till 90% icke kondenserande relativ luftfuktighet.
- Max brukarvikt vuxen: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS EL 150 kg.
- Max brukarvikt barn: REAL PLUS 75 kg. REAL PLUS EL 75 kg.
- REAL 9000 PLUS är godkänd att stå bromsad i upp till 5° lutning i alla riktningar. Står stolen bromsad i kraftigare lutningar kan stolen börja glida.
- Stolen skall transporteras i avsedd kartong på pall. Transporteras stolen i bil så måste stolen spännas fast med spännband både i stativ och sits, samt vara i lägsta möjliga sitthöjd.
- Stolen är testad och godkänd att använda mellan +5 till +40 °C samt 15-90 % icke kondenserande luftfuktighet. Om stolen förvarats i en miljö utanför dessa gränser måste stolen acklimatiseras innan användning för att säkerställa att stolen kan användas säkert.
- Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB.
- Maxhöjd 2000 möh.
- REAL Plus levereras som standard med sits, rygg och armstöd samt handkontroll för stolar med el funktioner.
- REAL PLUS skall ej förflyttas när sitthöjden är i upphöjt läge.
- Garanti tid två (2) år om inget annat avtalats. Vid garantiärenden, kontakta Mercado Medic AB
- Max livslängd tio (10) år.
- REAL PLUS kan kompletteras med en rad olika tillbehör. Alla tillbehör måste monteras så att det inte finns möjlighet för små delar, säkringar mm, att lossna. Alla sladdar måste säkras med buntband för att minimera stryplingsriskerna.

## RENGÖRING & UNDERHÅLL

- Stolen bör torkas av och hållas ren från damm och smuts.
- Stolen skall tvättas av med ett desinfektionsmedel med PH 7-12 (koncentrerat), med undantag av stoppning.
- Plyschklädsel tvättas med skumtvätt;
  1. Ta bort lös smuts, smulor och liknande.
  2. Applicera ett tunt skikt med skum, gnid skummet jämnt med en fuktig trasa.
  3. Eftertorka med en ren och lätt fuktad trasa.
  4. Dammsug väl när allt torkat.
- Konstläder tvättas med såpvatten alternativt avtorkas med spritlösning tex desinfektionsmedel.
- Skinnklädsel kräver lite extra underhåll;
  - Spill torkas av direkt med en fuktig trasa, använd aldrig starka medel.
  - Undvik kontakt med klädseln med kroppsvårdsprodukter som smink, hårgele mm.
  - Låt inga husdjur vara på skinnmöbler, deras klor kan repa skinnet.
  - Undvik direkt och långvarigt solljus, det kan i längden bleka skinnet.
- Sits, ryggstöd och övriga stoppningsdetaljer är av funktionella skäl ej tillverkade i slutet material. Vid rekonditionering bör stoppningsdetaljer av hygieniska skäl bytas ut.
- Ellyftomaten bör regelbundet kontrolleras med avseende på damm, smuts och stabilitet: Höj upp sittplattan till högsta läge. Gör rent med trasa. Vatten eller något lösningsmedel får ej användas. Smörj sedan in cylindern med ett tunt lager teflon- eller siliconbaserat smörjfett.
- Brukaren/brukarens assistent får damma av, torka rent samt rengöra sina stoppdetaljer, enligt ovanstående instruktioner, på sin egen stol efter bästa förmåga och behov. Om detta inte utförs tillfredsställande krävs rekonditionering för att säkerställa hygienisk säkerhet.

## DESTRUKTIONSANVISNINGAR

### Brännbart:

- Sits
- Rygg
- Armstöd
- Nackstöd
- Övriga stoppdetaljer sålda utav Mercado Medic AB

### Elektronikskrot:


- Motorer
- Sladdar
- Styrsystem

### Metall:

- Stativ
- Ellyftomater
- Gaskolvar
- Gasfjädrar
- Sittkryss
- Ryggfällning
- Breddbågar och armstödsmechanism
- Övriga metalldelar av produkter sålda utav Mercado Medic AB

OBS! Batteri sorteras separat.

## SYMBOLER

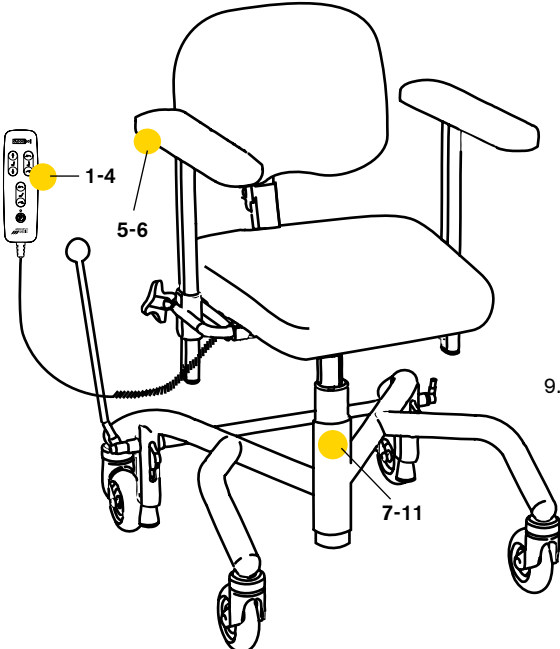

1. Sitthöjd uppåt/nedåt.

2. Sitsvinkling framåt/bakåt.

3. Ryggfällning framåt/bakåt.

4. Aktivera/släpp broms.

5. Varning! Läs manualen innan användning.

6. Laddningsanslutning. 24VDC

7. Källsorteras

8. Produkten är del i en återvinningsprocess.

9. Produkt klassifierad som type B applied part enligt IEC 60601-1.

10. Max brukarvikt

11. Brukartid för elektriska funktioner 2/20 MIN DUTY CYCLE



Anpassningar får göras endast av personal som genomgått Mercado Medic ABs utbildning för service och rekonditionering. Artiklar som finns på lista över gällande kombinationsavtal på [www.mercado.se/mercado-dokument](http://www.mercado.se/mercado-dokument) får monteras med av Mercado Medic AB bibehållen CE-märkning. Önskas artikel som ej finns på lista över gällande kombinationsavtal monteras skall hos kund auktoriserad personal kontakta Mercado Medic AB för skriftligt godkännande.

Artikel som skall utvärderas måste fysiskt skickas till Mercado Medic AB från antingen kund eller leverantör av artikel i fråga. Mercado Medic AB kontaktar sedan leverantör av artikel ifråga om eventuellt kombinationsavtal är aktuellt, genomför Mercado Medic AB en riskanalys på önskad artikel. När riskanalys är utförd erhåller kund ett skriftligt utlåtande.

Stolar som genomgått förändringar enligt nedan skall verifieras av Mercado Medic AB för att Mercado Medic AB skall bibehålla produktansvaret.

- Stoppade detaljer såsom sitsar, ryggstöd, armstöd, sidostöd, bålstöd och nackstöd får anpassas såvida man ej överskrider på produkten befintliga yttre justeringsmått.
- Tyngdpunkt över lyftdon skall bibehållas/centreras för bästa funktion.
- Stoppade detaljer skall klara gällande antändlighetskrav och andra miljökrav.
- Ytor som belastas med betydande vertikala krafter får ej hamna utanför den yta (bas) som bildas av hjulcentrum-punkterna.

Om dessa riktlinjer uppfylls behåller Mercado Medic AB produktansvaret för sin produkt.

Produkter som specialanpassas av vården utanför Mercado Medic ABs direktiv där vården också tar över produktansvaret kan återställs till originalskick. Detta måste utföras av en auktoriserad tekniker godkänd av Mercado Medic AB. Mercado Medic AB återtar då produktansvaret enligt CE-märkning 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD.

Vid frågor angående anpassningar/specialanpassningar kontakta Ronny Fogelqvist:

Tel [0708 27 96 14](tel:0708279614)


E-post [ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)

## BROMS


OBS! Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet. Vid slitage bytes bromsfot av gummi. Bromsfunktionen kan vara nedsatt på ojämt underlag.

## DET FINNS TRE TYPER AV BROMS:


Bromsspak, fotbroms och elbroms.

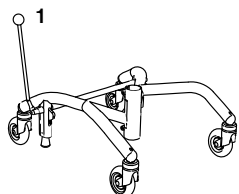



Handbroms

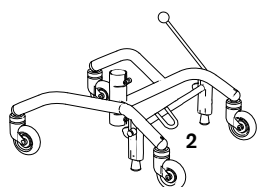

Fotbroms

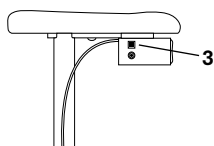

Elbroms (tillval)

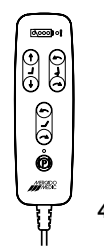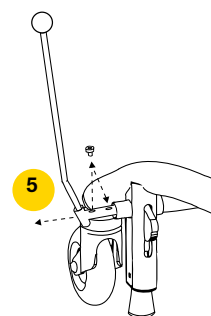Elreglage  
handkontroll (tillval)

## REGLAGE

1. Broms, PLUS-stativ 48 för spak framåt
2. Broms, PLUS-stativ 43 för spak bakåt, pedal nedåt
3. EL- broms, tryck på knapp
4. EL- broms, tryck på knapp
5. Bromsspaksfästet - För att bromsa stolen även då armstödet är utjusterat i bredd; lossa skruven på bromsspaksfästet med en 6 mm insexnyckel, dra ut fästet, fäst skruven i nästa hål och drag åt skruven hårt med insexnyckeln.


## SITTHÖJD/LYFTOMATER

## DET FINNS TVÅ TYPER AV LYFTOMATER:



Gasfjäder och EL. Det finns standard- och låg sitthöjd. Reglage för gasfjäder kan placeras under sits eller armstöd. EL reglage är monterat som standard under armstöd. OBS! Lätta personer kan behöva hjälp med att höja och sänka den gasfjäderreglerade sättenheten.

## REGLAGE


1. Sitthöjd. Gasfjäder - för reglage uppåt.
2. Sitthöjd. EL - för reglage uppåt/nedåt.
3. Sitthöjd. EL - reglage i lös dosa.  
Vänster knapp = upp.  
Höger knapp = ned.

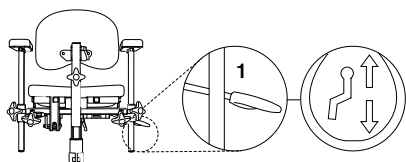

Gasfjäderreglage under sits

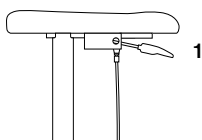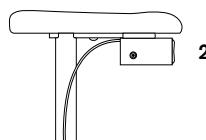Gasfjäderreglage under  
armstöd (Tillval)

Elreglage under armstöd

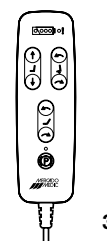Elreglage handkontroll/  
joystick finns som tillval.  
På bilden visas lös dosa.

## SITSTILT (TILLVAL)

## DET FINNS TRE TYPER AV SITSTILT:


Vev, gasfjäder och EL.

Reglage för gasfjäder kan placeras vid sitsens vänstra bakkant eller under armstöd. Elreglage är monterat som standard under armstöd.


Standard på sitstiltens intervall är +15°/-8°.

## REGLAGE



1. Sitstilt. Vevreglerad - vrid reglage
2. Sitstilt. Gasfjäder - för reglage bakåt
3. Sitstilt. Gasfjäder - för reglage uppåt
4. Sitstilt. EL - för reglage uppåt/nedåt.
5. Sitstilt. EL - reglage i lös dosa.  
Vänster knapp = framåt  
Höger knapp = bakåt.

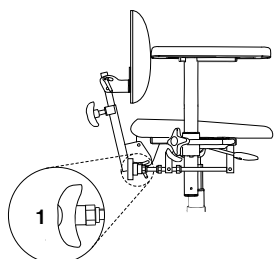


Vevreglerad

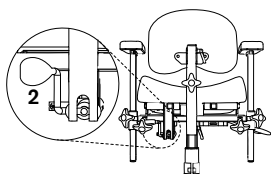

Gasfjäderreglage under sits

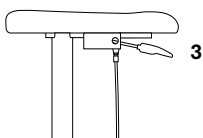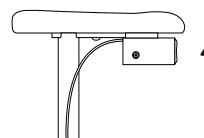
Gasfjäderreglage  
under armstöd

Elreglerad

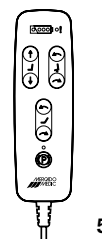Elreglage  
handkontroll



## OMVÄND SITSTILT ELLER ALL SITSTILT BAKÅT (TILLVAL)

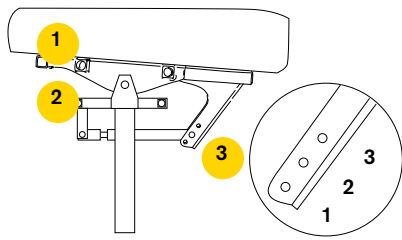

## REGLAGE

1. Armstöd placerade här följer med sitsens vinkling
2. Armstöd placerade här följer ej sitsens vinkling
3. Det finns 3 lägen. **Vid val av läge 3 måste stolen utrustas med stativförlängare**

1. Fram 15°, bak 8° - Standard sitstilt
2. Fram 8°, bak 15° - Omvärd sittilt
3. Fram 0°, bak 23° - All sitstilt bakåt

## RYGGMEKANISM

## DET FINNS FYRA TYPER AV RYGGMEKANISMER:


Standard, Medic, Comfort och EL.

Samtliga finns i lågt- respektive högt utförande (illustrerade stolar har alla låg rygg). Alla ryggmekanismer har separata reglage för höjd, djup och vinkel. Medicmodellen har utökad djupledsinställning.

## REGLAGE

1. Höjd
2. Vinkel på ryggmekanism
3. Vinkel på ryggplatta
4. Djup
5. Ryggvinkel. EL - reglage i lös dosa.  
Vänster knapp = framåt  
Höger knapp = bakåt.

**OBS!** Säkerställ att Medic ryggfällning justeras in i fästet så att fjädersnappet låser och ryggfällningen ej kan dras ur.

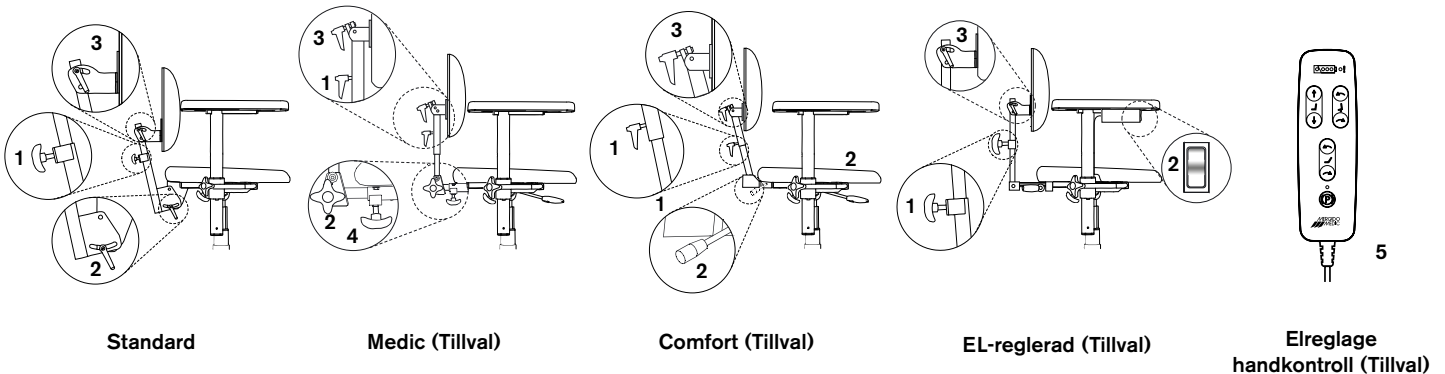

Standard

Medic (Tillval)

Comfort (Tillval)


EL-reglerad (Tillval)

Elreglage handkontroll (Tillval)

## ARMSTÖD

## REGLAGE

1. Höjjustering
2. Breddjustering
3. Fällning

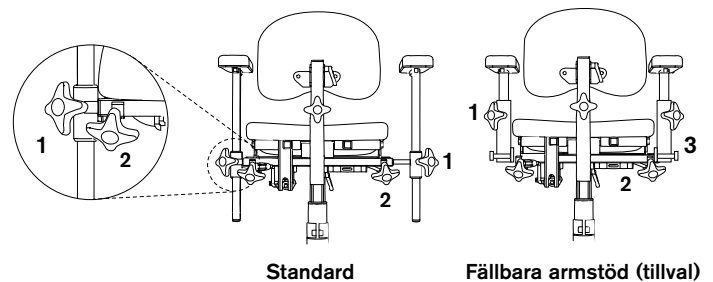


Standard

Fällbara armstöd (tillval)

## INSTÄLLNING AV COXITKLAFFAR

### REAL PLUS COXIT/EL

Det finns två varianter på hur coxitklaffarna justeras. På stol utan sitsvinkling sitter reglagen under sitsens framkant. På stol med sitsvinkling sitter reglagen under sitsens bakkant.

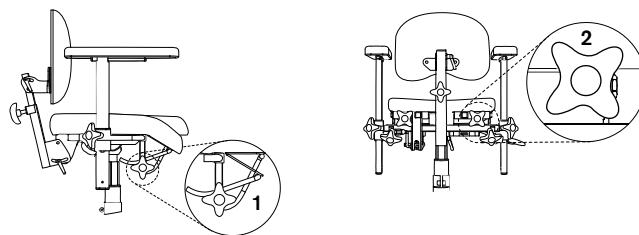

### REGLAGE


1. Lossa, ställ in önskad vinkel och drag åt.
2. Vrid reglaget för att sänka/höja klaffen.

## ROTATIONSFRIGÖRARE (TILLVAL)

**OBS!** Rotationen skall vara i låst läge när man sätter sig och reser sig. Kontrollera att spärren har "klickat" i.

### REGLAGE

1. Vrides medurs för att frikoppla, moturs för att låsa.

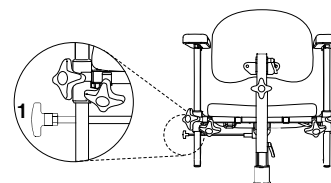

## LADDNING

Batteriladdare 2240-24V (art. nr. 804428) skall användas vid laddning av stolen. Eftersom stolen certifieras som en enhet tillsammans med laddare krävs ytterligare tester om annan laddare önskas användas. Vid användning av annan laddare eller andra batterier än de som tillhandahålls av Mercado Medic AB tillsammans med produkten är CE-godkännandet och Mercado Medic AB:s produktansvar inte längre giltigt för ärenden gällande batteri, laddning eller övrig elektronik på stolen. Laddning av batteriet bör ske dagligen. Att ladda stolens batteri fullt vid daglig laddning tar 2-6 timmar. För batteriets livslängd är det viktigt att det aldrig blir helt urladdat, då djupurladdning kan skada battericellerna. Om stolen är utrustad med handkontroll kan batterinivån avläsas på indikationslamporna (1). På en full laddning med hög Ellyftomat kan man köra fulla upp/ner-slag upp till 120 gånger med 80 kg last, eller upp till 90 gånger med 150 kg last.

### SÅ LADDAR DU STOLEN

Anslut kontaktpluggen (2) på laddaren till ladduttaget (3) (ladduttaget kan vara placerat under stolens sits eller armstöd, beroende på avtal eller önskemål). Anslut därefter laddarens stickpropp till ett vägguttag. Lysdioden på laddaren indikerar att laddning sker. När lysdioden ändrar färg från orange till grönt är batteriet färdigladdat. Inga elektriska funktioner fungerar när man laddar stolen. Laddning av stolen måste ske på ett säkert sätt. Välj därför ett vägguttag som är lättillgängligt att ansluta laddaren till. Laddsladden är 1,8 meter och får ej förlängas. I nödläge, separera stolen från elnätet genom att dra ur laddaren ur vägguttaget. Det är inte tillåtet att sitta i stolen under laddning.

### I- OCH URKOPPLING AV BATTERI

Vid längre tids förvaring kopplas batteriet ur per automatik efter 7 dagar. Batteriet kan även tvingas till urkopplat läge genom att koppla in ett 9V nätaggregat (art. nr. 804823) i ladduttaget och vänta i minst 5 sekunder innan nätaggregatet kopplas ur. Om handkontroll används kommer alla indikationslampor blinka när batteriet är urkopplat och nätaggregatet kan kopplas ur. När batteriet är urkopplat måste batteriet laddas var 4:e månad för att behålla sin funktion. Följs dessa laddningsinstruktioner håller batteriet tillräcklig kapacitet i 4 år. För att återansluta batteriet till systemet igen ansluts batteriladdaren till ladduttaget och vägguttag. Vänta minst 5 sekunder innan batteriladdaren kopplas ur. Nu är batteriet inkopplat och systemet redo att användas. Det är rekommenderat att låta laddaren sitta kvar och ladda batteriet fullt efter att produkten förvarats med batteriet i urkopplat läge.

## LADDNING

## INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Produkten levereras av Mercado Medic AB med batteriet i urkopplat läge. Innan första användning måste batteriet anslutas till systemet. Detta görs genom att ansluta batteriladdaren till ladduttaget och vägguttag. Behåll batteriladdaren ansluten till dess att batteriet är fulladdat. Detta visas genom grönt sken på laddarens lysdiod. Används handkontroll visas detta även genom att de tre gröna batteridioderna på handkontrollen blinkar synkroniserat. Även när batteriet varit urkopplat kan batteriet behöva laddas då det alltid förekommer viss självurladdning i ett batteri.

## OBS!

Laddning av batteriet är särskilt viktigt på de stolar som har elbroms, elvinkling av sits och elrygg då dessa funktioner kräver hög batterikapacitet för att inte gå förlorade. Säkerställ funktionerna genom att ladda batteriet en gång per dygn. Byte av batteri får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Se monteringsanvisning Batteribyte.

## FELSÖKNING FÖR ELEKTRISKA FUNKTIONER PÅ DIN STOL

Rörelserna går inte alls:

- Batteriet kan behöva laddas. Se instruktioner ovan.
- Arbetscykeln kan ha överskridits. Om användandet av de elektriska funktionerna närmar sig gränsvärdet börjar varningslampan på handkontrollen blinka(!-symbolen). Om användandet överstiger gränsvärdet stängs de elektriska funktionerna av och kan inte användas igen förrän systemet har återhämtat sig. Om brukaren trycker på en knapp innan systemet har återhämtat sig så kommer varningslampan blinka till.
- Ett internt fel kan ha upptäckts av systemet, som då stänger ned en eller samtliga funktionskanaler och varningslampan på handkontrollen tänds. Systemet nollställs automatiskt efter 10 sekunder. Om felet har lösts så låses samtliga kanaler upp igen och varningslampan slocknar.
- Knapplåset kan vara aktiverat. För att aktivera eller avaktivera knapplås för en funktion, håll in den aktuella funktionens bägge riktningknappar i minst 3 sekunder.

De elektriska funktionerna på stolen går långsamt:


- Batteriet behöver laddas. Se instruktioner ovan.

Skulle ingen av de ovanstående åtgärderna lösa problemet kan service krävas. Kontakta din hjälpmedelscentral alternativt Mercado Medic AB. Se kontaktuppgifter på sista sidan av manualen.

## NÖDSTOPP

Om systemet av någon anledning inte avbryter en rörelse när motsvarande funktionsknapp släpps kan den avbrytas genom att trycka ned någon av de andra knapparna på handkontrollen. Om fast monterad manöverbox användas istället för handkontroll fås samma nödstoppfunktion genom att trycka på manöverknappen för rörelse i annan riktning.

- A. Laddning behövs  
B. Batterinivå  
C. Varningslampan  
(internt fel/knapplås)

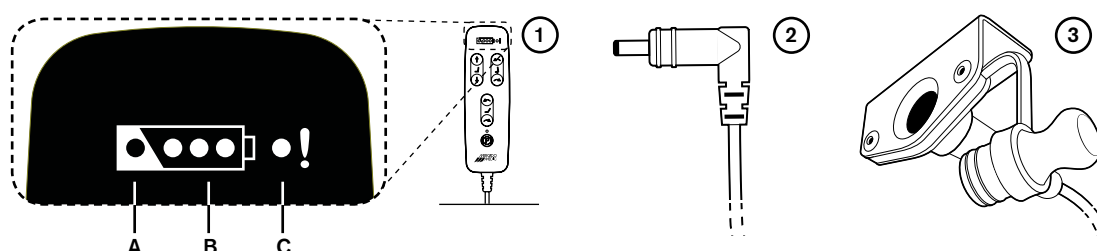

# KONTAKTA MERCADO

## Huvudkontoret

Besöksadress  
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress  
Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen: Mån-Fre 08.00-16.30

Tel: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

E-post: [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)

## Service och teknisk support

Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson  
Box 1074, 181 22 Lidingö

Service har telefontid mån-fre  
08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Tel: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68

E-post: [service@mercado.se](mailto:service@mercado.se)

---

*[Plats för produktetikett med serienummer.]*



**Mercado Medic AB**  
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö

**Telefon & Fax**  
Tel 08 555 143 00  
Fax 08 555 143 99

**Email & Internet**  
Email [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internet [www.mercado.se](http://www.mercado.se)