



BRUKSANVISNING

QuickTalker 12

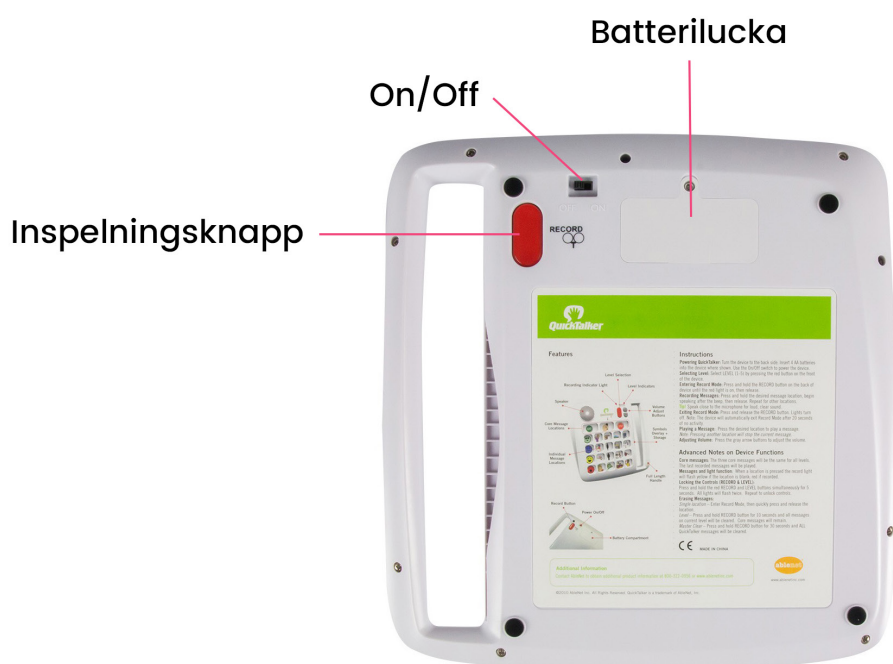

Översikt funktioner

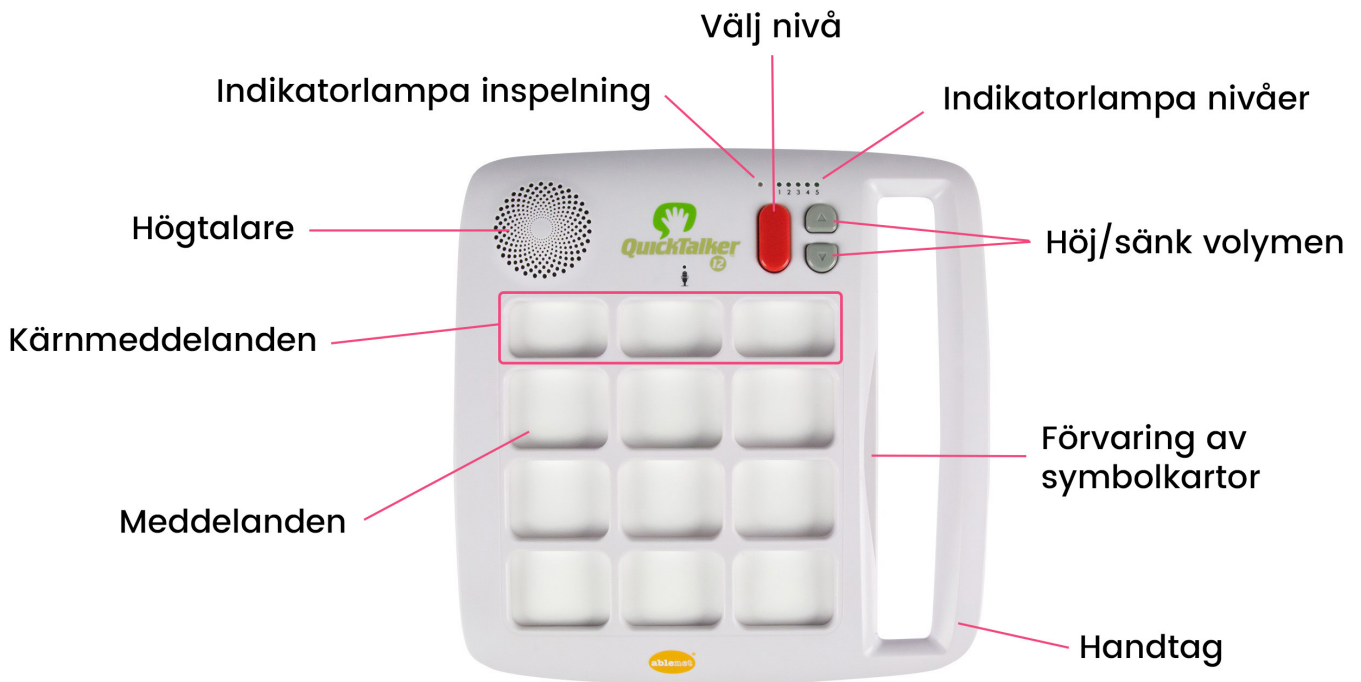

Slå på din QuickTalker

QuickTalker 12 drivs på 4 st AA-batterier.

Skruva upp batteriluckan på baksidan av din QuickTalker. Sätt i 4 st AA-batterier i enheten och skruva därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på din QuickTalker genom att dra den lilla spaken On/Off till On.

Välj nivå

QuickTalker 12 har fem nivåer. Tryck på den röda knappen på framsidan (Välj nivå) av QuickTalker för att välja nivå 1, 2, 3, 4 eller 5.

Spela in meddelanden

1. Gå in i Inspelningsläge

Tryck och håll inne den stora röda knappen på baksidan (Inspelningsknapp) tills den röda indikatorlampan för inspelning tänds.

2. Spela in meddelanden

Tryck och håll nere vald meddelanderuta, tala in ditt meddelande efter pipet och släpp trycket när du är klar. Upprepa för andra meddelanderutor.



Tala ca 15-20 cm från mikrofonen för bästa ljudkvalitet!

3. Gå ur Inspelningsläge

Tryck och släpp Inspelningsknappen. Ljuset stängs nu av.

QuickTalker kommer automatiskt att gå ur Inspelningsläge efter 20 sekunders inaktivitet.

Spela upp meddelande

Tryck på valfri meddelanderuta för att spela upp meddelandet.



Om du trycker på en annan meddelanderuta avbryts uppspelningen av nuvarande meddelande.

Om det finns ett inspelat meddelande kommer indikeringslampan för inspelning att blinka gul om inget meddelande finns inspelat och rött om meddelande finns.

Höj och sänk volymen

Tryck på de grå pilknapparna för att höja resp. sänka volymen.

Radera meddelanden

Radera ett meddelande

Gå in i Inspelningsläge, tryck kort på meddelanderutan.

Radera allt på en nivå

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 10 sek, så rensas hela nivån. Kärnmeddelande raderas ej.

Radera allt

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 30 sek, så raderas samtliga meddelanden.

Kärnmeddelanden

De tre kärnmeddelandena kommer att vara samma oavsett nivå. De senast inspelade kommer att användas.

Undvik oavsiktlig redigering

Tryck och håll nere Inspelningsknappen och Nivåknappen samtidigt under 5 sek. Alla lampor blinkar två gånger för att bekräfta.

Upprepa för att möjliggöra redigering igen.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se