



BRUKSANVISNING

# QuickTalker 23

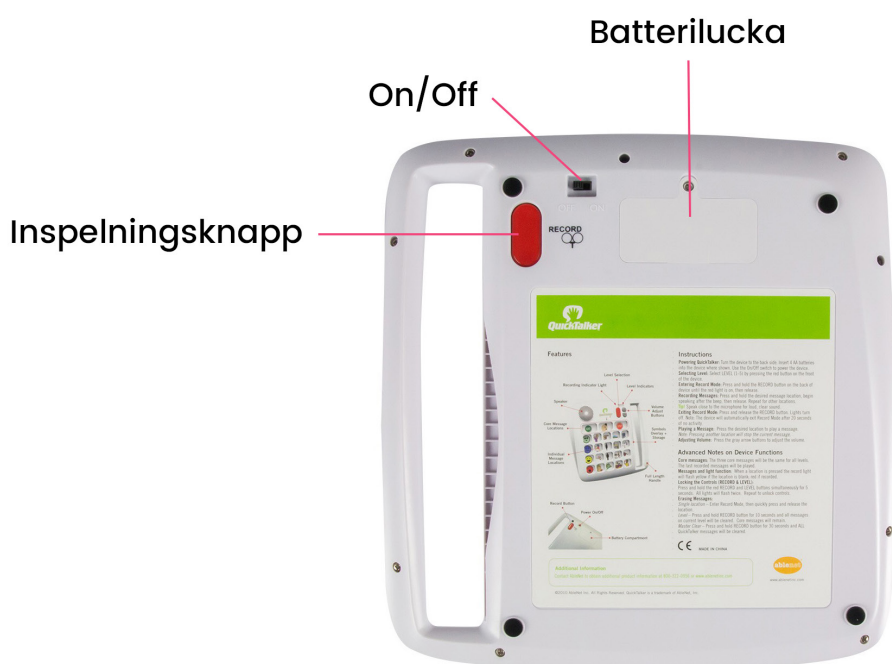

# Översikt funktioner

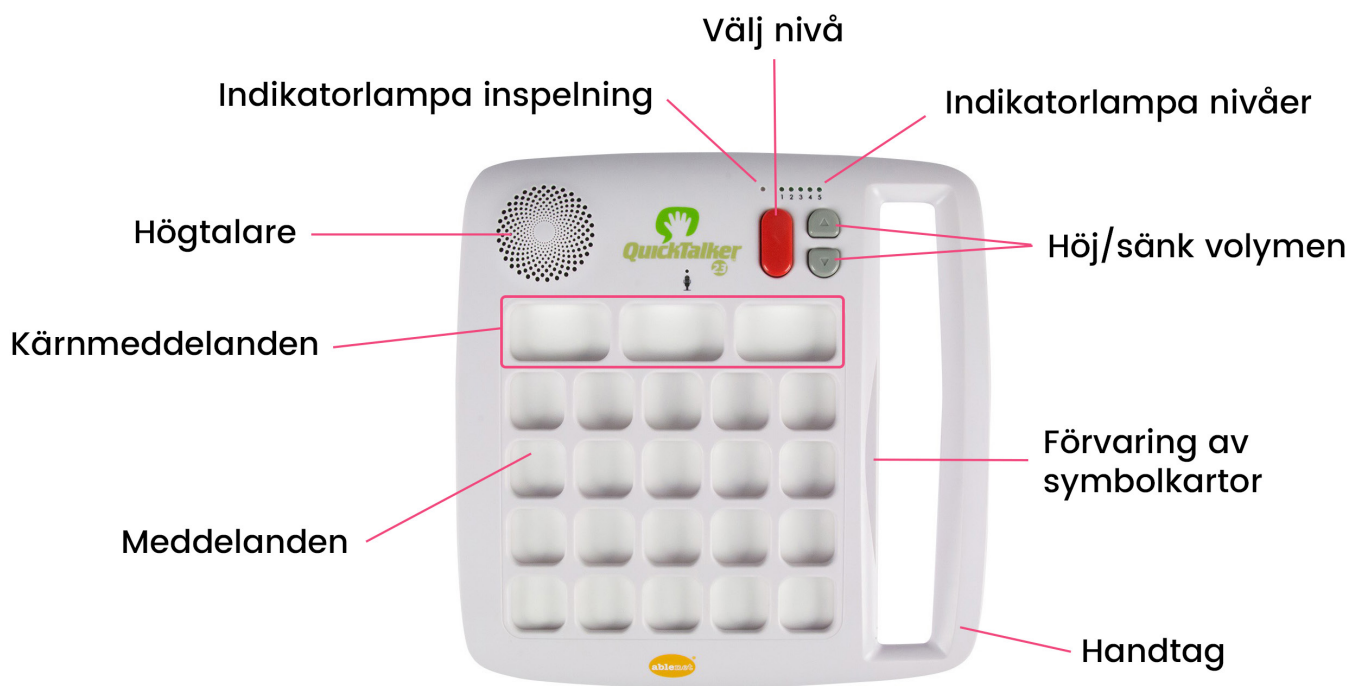

## Slå på din QuickTalker

QuickTalker 23 drivs på 4 st AA-batterier.

Skruva upp batteriluckan på baksidan av din QuickTalker. Sätt i 4 st AA-batterier i enheten och skruva därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på din QuickTalker genom att dra den lilla spaken On/Off till On.

## Välj nivå

QuickTalker 23 har fem nivåer. Tryck på den röda knappen på framsidan (Välj nivå) av QuickTalker för att välja nivå 1, 2, 3, 4 eller 5.

## Spela in meddelanden

### 1. Gå in i Inspelningsläge

Tryck och håll inne den stora röda knappen på baksidan (Inspelningsknapp) tills den röda indikatorlampan för inspelning tänds.

### 2. Spela in meddelanden

Tryck och håll nere vald meddelanderuta, tala in ditt meddelande efter pipet och släpp trycket när du är klar. Upprepa för andra meddelanderutor.



*Tala ca 15-20 cm från mikrofonen för bästa ljudkvalitet!*

### 3. Gå ur Inspelningsläge

Tryck och släpp Inspelningsknappen. Ljuset stängs nu av.

*QuickTalker kommer automatiskt att gå ur Inspelningsläge efter 20 sekunders inaktivitet.*

## Spela upp meddelande

Tryck på valfri meddelanderuta för att spela upp meddelandet.



*Om du trycker på en annan meddelanderuta avbryts uppspelningen av nuvarande meddelande.*

Om det finns ett inspelat meddelande kommer indikeringslampan för inspelning att blinka gul om inget meddelande finns inspelat och rött om meddelande finns.

## Höj och sänk volymen

Tryck på de grå pilknapparna för att höja resp. sänka volymen.

## Radera meddelanden

### Radera ett meddelande

Gå in i Inspelningsläge, tryck kort på meddelanderutan.

### Radera allt på en nivå

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 10 sek, så rensas hela nivån. Kärnmeddelande raderas ej.

### Radera allt

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 30 sek, så raderas samtliga meddelanden.

## Kärnmeddelanden

De tre kärnmeddelandena kommer att vara samma oavsett nivå. De senast inspelade kommer att användas.

## Undvik oavsiktlig redigering

Tryck och håll nere Inspelningsknappen och Nivåknappen samtidigt under 5 sek. Alla lampor blinkar två gånger för att bekräfta.

Upprepa för att möjliggöra redigering igen.



**funktionsverket**

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)