

Arion Easy Slide Arion Easy Slide arm

Glidssockor för påtagning av kompressionsstrumpor med öppen tå, samt armstrumpor.

Arion Easy Slide		
Art.nr.	Storlek	Information
6902002	Small	Skostorlek 34-37
6902003	Medium	Skostorlek 38-41
6902004	Large	Skostorlek 42-45
6902005	X-Large	Skostorlek >45

Arion Easy Slide Arm		
Art.nr.	Storlek	Information
6902023	Medium	Motsv. standardstorlek 1-4 på ärm
6902024	Large	Motsv. standardstorlek 5-7 på ärm

Glidsocka för påtagning av kompressionsstrumpor med öppen tå

Arion Easy Slide är en mycket populär glidsocka för påtagning av kompressionsstrumpor med öppen tå.

Kompressionsstrumpan glider väldigt lätt upp på benet tack vare det glatta materialet. När kompressionsstrumpan tagits på dras glidsockan ut via den öppna tådelen, eller vid armstrumpans öppning vid handleden.

Bruksanvisning för påtagning



1. Fatta tag i hjälpmedlet. Använd gärna gummihandskar för säkrare hantering. För in foten i Arion Easy Slide.



2. Dra sedan på strumpan.



3. Tack vare det glatta materialet glider strumpan på utan ansträngning.

4. Ta tag i hjälpmedlets handtag.



5. Dra bort hjälpmedlet genom kompressionsstrumpans öppna tådel. Fortsätt tills hjälpmedlet har avlägsnats. Justera eventuella veck.

Påtagning av armstrumpor fungerar även enligt samma princip, med undantag för att glidsockan dras ut via handleden.