

## Arion Magnide

Glidsocka i genial konstruktion för påtagning av kompressionsstrumpor med slutna tå.

Storlek	Artikelnr	Information
Medium	6902111	Skostorlek ≤40
Large	6902112	Skostorlek <46
X-Large	6902113	Skostorlek >46

Arion Magnide innehåller flera magneter. Produkterna ska därför inte vara i närheten av pacemaker och defibrillatorer. Det magnetiska fältet kan störa dessa apparaters funktion (minsta avstånd: 30 cm).

## Glidsocka med magnetförslutning för påtagning av kompressionsstrumpor

Tack vare en genial konstruktion med magnetförslutning kan Arion Magnide användas för påtagning av kompressionsstrumpor med slutna tå.

Arion Magnide är ett innovativt hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpor med slutna tå. Arion Magnide är en glidsocka med väldigt låg friktion som ger hög glidförmåga. Den är försluten med magneter och kan på så vis avlägsnas via kompressionsstrumpans avslut efter påtagning. Arion Magnide kännetecknas av hög kvalitet, komfort och effektivitet. Påtagningen sker snabbt och enkelt och minimerar därför risken för skador på kompressionsstrumporna.


## Bruksanvisning




Se till att magneterna sitter fast ordentligt och för in foten i Magnide. Kontrollera att den långa remmen är placerad ovanpå foten.



Dra på kompressionsstrumpen över foten och Magnide. Fortsätt att dra tills hälen sitter korrekt på foten.

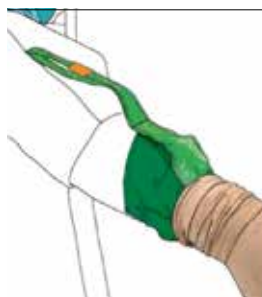

Ta tag i den gröna remmen och dra den mot dig.

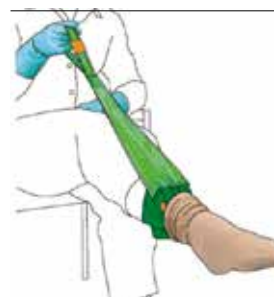

Den gröna remmen lossar magneterna. Fortsätt att dra i remmen för att avlägsna Magnide. Justera eventuella veck.