

## mediven® 550 ben

Lipödem och lymfödem kan delas in i tre stadier beroende på svårighetsgraden. Men du vet ju bäst själv: Varje produkt har särskilda egenskaper eftersom varje person är unik.

Därför erbjuder kompressionsstrumpan mediven 550 ben många kombinationsmöjligheter och extra tillval. Med denna stora mångfald kan mediven 550 ben användas i ödemets samtliga tre stadier.

# mediven® 550 ben

Stark. Högsta väggstabilitet. Pålitlig kompression.

## Tips<sup>1</sup>:

Tack vare materialstyrkan, passformen och produkttegenskaperna rekommenderar vi mediven 550 ben för:

- Mycket mjuk till fast bindväv
- Djupa hudveck
- Samtidig fetma
- Utpräglade lymfödem

## Indikationer<sup>2</sup>

- Primära och sekundära lymfödem i stadierna 1, 2 och 3
- Lipödem i stadierna 1, 2 och 3
- Ärrbehandling
- Postoperativ ödembildning och posttraumatiska ödem
- Andra kroniska ödem

## Egenskaper

- Mycket hög väggstabilitet
- Högt arbetstryck
- Robust material
- Hög slitstyrka

## Specialiteter

- Stort urval av tillval (hallux avlastningszon, funktionszoner, formande egenskaper för baken)
- Åtskilliga varianter, till exempel bensegment för plagg: två eller flera delar
- UV-skyddsfaktor 40
- Luktreducerande effekt tack vare Clima Fresh
- Hög andningsförmåga tack vare Clima Comfort
- Brett urval av modeller: 6 standardfärger, 5 trendfärger, 3 designelement och 4 fashion-element
- Tillgängliga med glittrande kristaller

## Tvättråd

Lättskött  kan maskintvättas och torktumlas

Kompressionsklass

KKL 1, 2, 3, 4

Ödemstadie



Färger

Standardfärger

Sand

Cashmere

Caramel

Svart

Antracite

Marinblå

Trendfärger

Denna kvalitet finns i ett antal trendfärger. Vänligen se färgöversikt på vår hemsida.

## Produktfördelar



Clima Comfort



Clima Fresh



Variety



Perfect Fit




Anatomic Fit



## mediven® 550 ben standardstorlekar

### Tillgängliga utföranden

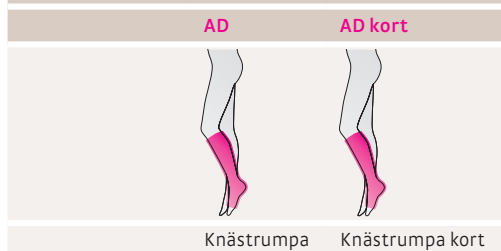


KKL	2
Längd	Normal och kort
Fot	Öppen tå med rakt avslut
Häftband	Häftband med noppor
Standardstorlek	IV – XIV
Färg	Caramel




Knästrumpa (AD)  
med öppen tå

Omfångsmått i cm	IV	V	VI	VII	VIII	
cD	29 – 33	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37	
cC	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37	34 – 38	
cB <sub>1</sub>	24 – 26	25 – 27	26 – 28	27 – 29	28 – 30	
cB	19 – 20	20 – 21	21 – 22	22 – 23	23 – 24	
cY	27 – 29	28 – 30	29 – 32	29 – 33	30 – 34	
cA	18 – 20	19 – 21	20 – 22	21 – 23	22 – 24	
Omfångsmått i cm	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
cD	34 – 38	35 – 39	36 – 40	37 – 41	38 – 42	39 – 43
cC	35 – 39	36 – 40	37 – 41	38 – 42	39 – 43	40 – 44
cB <sub>1</sub>	29 – 32	29 – 33	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37
cB	24 – 25	25 – 26	26 – 27	27 – 28	28 – 29	29 – 30
cY	31 – 35	32 – 36	33 – 37	34 – 38	35 – 39	36 – 40
cA	23 – 25	24 – 26	25 – 27	26 – 28	27 – 29	28 – 30
Rekommerade längdmått i cm	ℓD normal 39 – 41		ℓD kort 37 – 39			

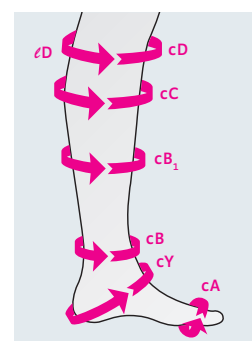

ℓ = längdmått  
c = omfångsmått

### Tips:

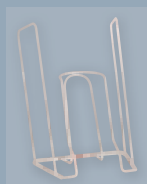

medi Butler underlättar  
påtagning<sup>5</sup>






Vårdande produkter för hud- och  
kompressionsstrumpor

Mer information om medi tillbehör på [www.medi.se](http://www.medi.se)


# mediven® 550 ben måttillverkat

Standardutföranden	
Måttillverkning	Ja
Avslutning proximal	Alla strumpvarianter med snedskuret avslut
Utföranden	Snedskuret avslut kring låren och perforerat band för alla byxvarianter
Kil/resårdel	Kil, herr: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH resårdel utan kompression fram: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fotdel	Snedskuren, öppen fot


Materialsammansättning		
	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
KKL 1	23 %	77 %
KKL 2	25 %	75 %
KKL 3	28 %	72 %
KKL 4	32 %	68 %

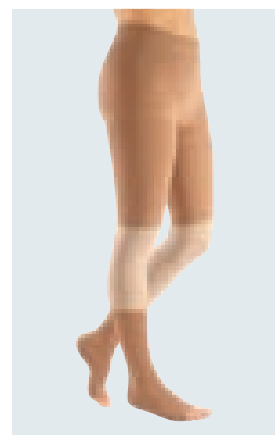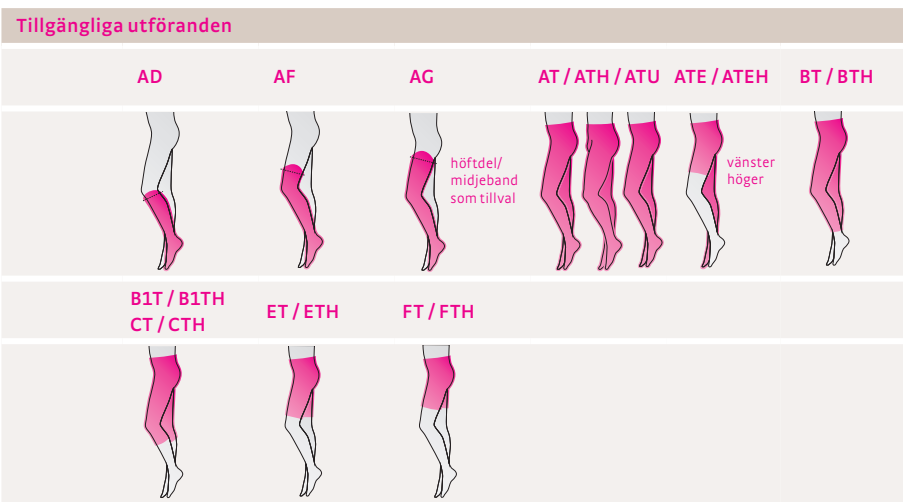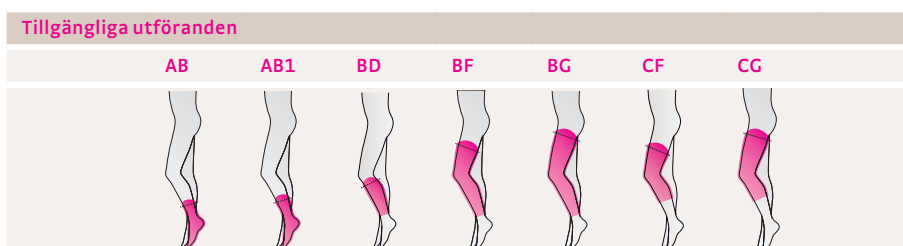

Kombination av knästrumpa (AD), bensektion (CG) och cykelbyxa (ET)

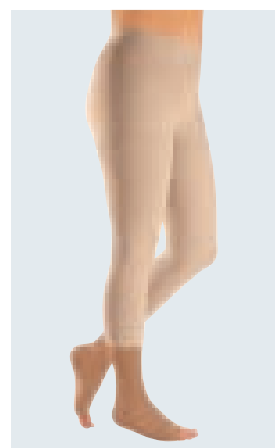

Kombination av knästrumpa (AD) och CT capribyxa

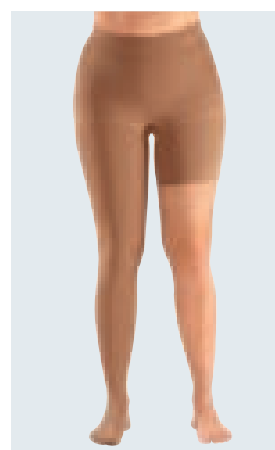

Strumpbyxa med ett ben (ATE)

- <sup>1</sup> Beakta att denna rekommendation inte ersätter läkarens diagnos eller rådgivningen i fackhandeln för medicinska produkter.
- <sup>2</sup> Valet av den optimala kompressionsstrumpan beror på patientens indikation och individuella behov.
- <sup>3</sup> Designelementen kan kombineras med alla standard- och trendfärger (utan pristillägg).
- <sup>4</sup> Pristillägget för fashion elements finns i den aktuella prislistan.
- <sup>5</sup> Principiellt gäller för på- och avtagningshjälp: Rabe E med andra, S2k-riktlinje: Medicinsk kompressionsbehandling av extremiteterna med medicinsk kompressionsstrumpa (MKS), flebologiskt kompressionsbandage (PKV) och medicinska adaptiva kompressionssystem (MAK). Publicerad online på: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (senaste åtkomst 2 mars 2020)

# mediven® 550 tåkappa

**Stark. Högsta väggstabilitet. Pålitlig kompression.**

## Indikationer<sup>1</sup>

- Patienter med ödem i tårna (positivt Stemmers tecken) och på fotryggen

## Egenskaper

- Tåkappa med Clima Fresh: förhindrar tillförlitligt lukt och tillväxt av bakterier
- Sömmarna har flyttats till nedan och ovasidan i en riktning som underlättar naturligt lymfflöde (inga sömmar mellan tårna)
- Måttillverkas
- Tips: medi lymphpads kan integreras på fotryggen för extra tryck vid lymfödem



### Integrerad tåkappa

- Mer säkerhet vid mätningen (beräkning av överlappningsområde bortfaller)
- Indikationsanpassat plagg för optimalt lymfflöde (inga cirkelformiga sömmar)
- Behaglig känsla, utan cirkelformiga sömmar
- Tåkappan riskerar inte att glida ner
- Finns för varianterna AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Olika kompressionsklasser för ben och tår möjliga



### Fristående tåkappa

- Högre stabilitet tack vare överlappande kompressiva material vid starkt utpräglat ödem på fotryggen
- Individuella alternativ när det gäller plagg, till exempel för natten eller en kombination med andra produktvarianter
- Växling av sömmar till mitten på fotens undersida (söm på sidan möjlig på begäran)

### Tips:

Den fristående tåkappan säkerställer enkel och snabb på- och avtagning.

## Produktfördelar



Clima Comfort



Clima Fresh



Variety



Perfect Fit



Anatomic Fit



## Kompressionsklass

# KKL 1, 2, 3

## Ödemstadiet



## Färger

### Standardfärger

Sand

Cashmere

Caramel

Svart

Antracite

Marinblå

### Trendfärger

Denna kvalitet finns i ett antal trendfärger. Vänligen se färgöversikt på vår hemsida.v

## Tillgängliga utföranden

Tåkappa  
slutna tår



Tåkappa  
slutna tår  
utan lilltå



Tåkappa  
öppna  
tår



Tåkappa  
slutna tår  
utan lilltå



## Visste du att?

- 82 % av alla lymfödempatienter har ett positivt Stemmers tecken.\*
  - 63 % av alla lymfödempatienter har en svullen fottrygg.\*
- En tåkappa rekommenderas för optimal vård av dessa patienter.

\* Källa: Dr. Schingale "Lymfödem – diagnos och behandling – En handledning för drabbade personer"

- <sup>1</sup> Valet av den optimala kompressionsstrumpan beror på patientens indikation och individuella behov.
- <sup>2</sup> Designelementen kan kombineras med alla standard- och trendfärger (utan pristillägg).
- <sup>3</sup> Pristillägget för fashion elements finns i den aktuella prislistan.