



## medi butler lång

Hjälpmiddel med långa handtag för påtagning av kompressionsstrumpor.

### medi butler lång

Längd	Diameter	Art.nr.
32 cm	10 cm	6900041


## Marknadens mest populära hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpor

Vi har många varianter av medi butler men denna är utan tvekan den mest populära. Mycket på grund av de långa handtagen.


Medicinska kompressionsstrumpor har som allra högst tryck vid vristen, precis där strumpan är som smalast. Genom att trä på kompressionsstrumporna på medi butler lång vidgas detta område så att foten lätt kan komma igenom.

medi Butler lång har långa rundande handtag vilket medför att brukaren inte behöver böja sig ned allt för mycket. Passar alla kompressionsstrumpor avsedda för ben, både med öppen och sluten tå.


## Bruksanvisning

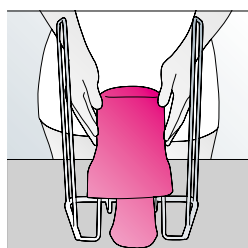


**1.** Placera medi Butler på en bordsskiva med den slutna delen av cylindern riktad mot er. Sätt ned kompressionsstrumpan i cylindern med tåpetsen pekandes framåt. Trä över kompressionsstrumpans avslut över cylindern tills sömmen på häldelen blir synlig.

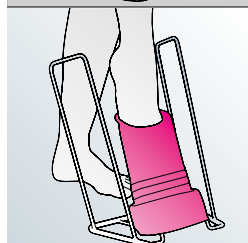


**2.** Ställ ned hjälpmedlet på golvet. Trampa försiktigt ned foten i strumpan. Ta gärna stöd av exempelvis ett bord så att du inte tappar balansen. Det går även bra att sitta ned i en stol under detta moment.

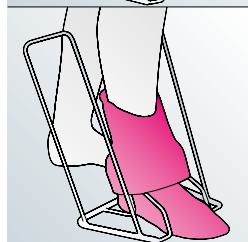


**3.** Fortsätt att trampa ned foten tills hela foten når golvet. Kontrollera noga att hälen placerats korrekt i kompressionsstrumpans häldel.

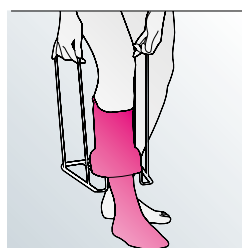

**4.** Fatta tag i handtagen och dra försiktigt upp kompressionsstrumpan över benet. Fortsätt så långt du kan eller till dess att strumpan nått vaden.

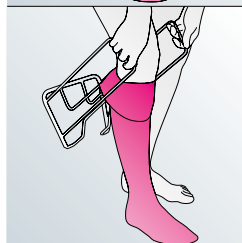

**5.** Ta bort hjälpmedlet genom att vinkla handtagen framåt.

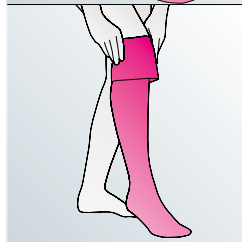

**6.** Dra eventuellt upp resterande bit för hand. Använd gärna våra textil- eller gummihandskar så riskerar du inte att skada kompressionsstrumpan. Släta ut eventuella veck och se till att kompressionsstrumpan är jämnt fördelad över hela benet.