

Positioneringsbälte Sterling Elite2Plus



Benämning

Artikelnummer

Positioneringsbälte Rullbälte

EB0N150750



MONTERINGSANVISNING

Fig.1

Ta fram bälte, OBS! -Avlägsna medföljande muttrar, dessa skall ej användas.



Fig. 2

För bästa position av bälte använd fästpunkter i sitsen.

Beskrivning av alternativ fästposition på ryggstödet följer på nästa sida. Lämpligt om man inte vill skära i sittklädseln

Lokalisera nedre bulthål i ram under klädsel på sidorna och skär försiktigt krysshål i klädsel med vass kniv på båda sidor av sitsen

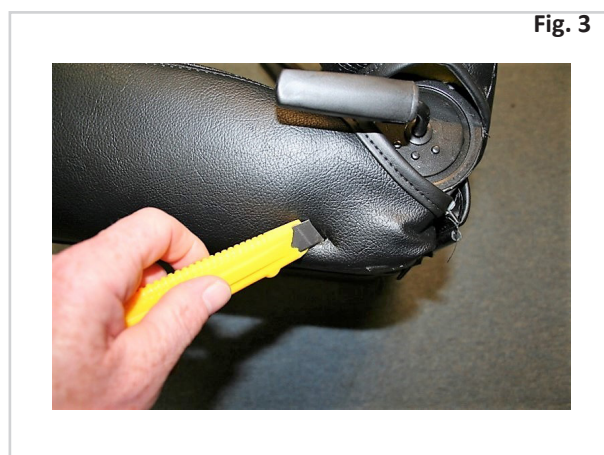
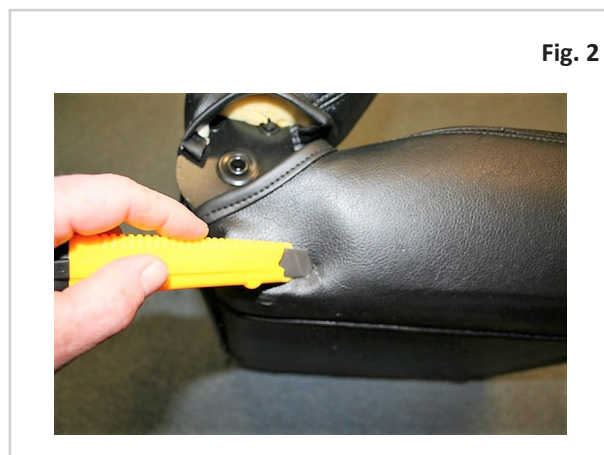


Fig. 4

Stoppa i skruv i rullbälte på höger sida och montera igenom klädsel in i ramen. Sätt rullbältet i rätt position och dra åt med 20Nm åtdragningsmoment.

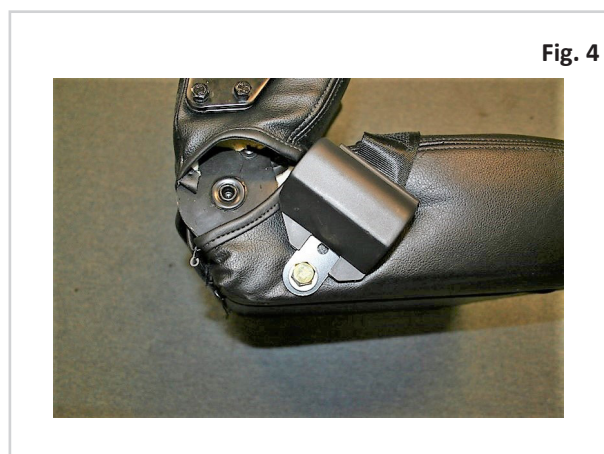


Fig. 5
Upprepa proceduren ovan fast för bälteslåset på vänster sida.



Fig. 5

Fig. 6
Kontrollera att bältet löper lätt och kan låsa som det skall.

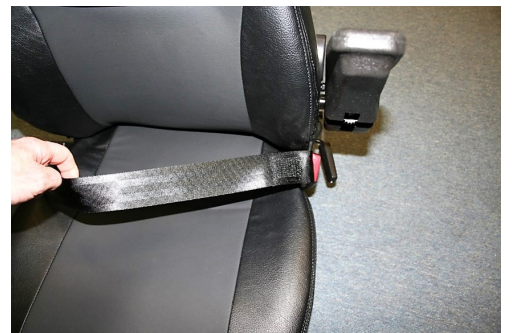


Fig. 6

Fig. 7
Alternativ placering av bältet är på armstödsfästet på ryggen. Gör så här:
Lossa den främsta skruven på armstödsfästet



Fig. 7

Fig. 8
Komplettera med stor M8 bricka (19mm) och lägg under låsbrickan.



Fig. 8

Fig. 9
Dra fast skruven igen med 15Nm åtdragningsmoment.


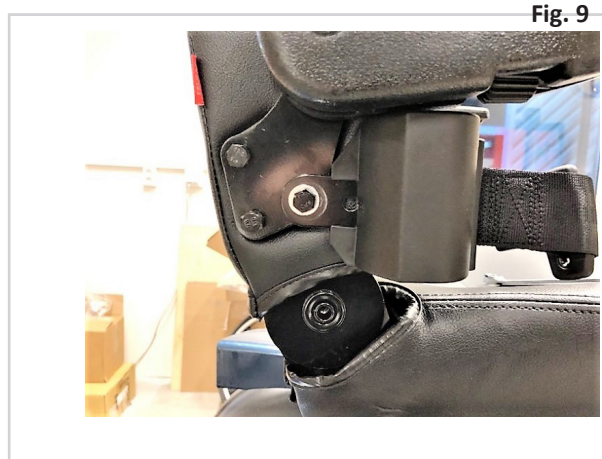


Fig. 10
Upprepa för andra sidan.

Kontrollera att bältet löper lätt och kan låsa som det skall.

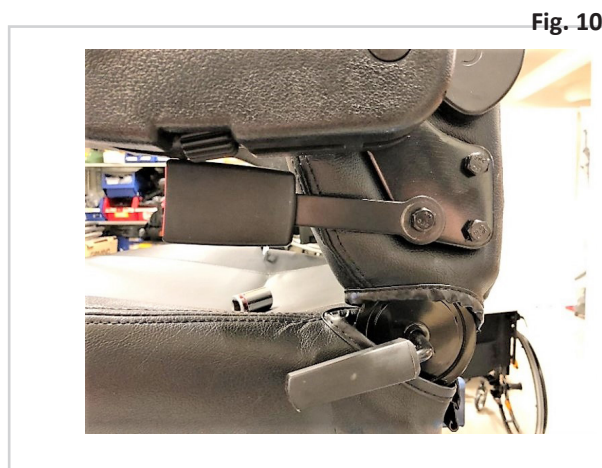

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se