

# Bakhjul Sterling Elite2Plus



**Benämning**

**Artikelnummer**

Hjul Sterling Elite2 Plus luft bak kpl

030871

Hjul Sterling Elite2 Plus massivt bak kpl

030872



# MONTERINGSANVISNING

**Fig.1**

Lyft upp bakhjulen genom att placera domkraften under relevanta domkraftspunkter, säkra sedan med block.



**Fig. 2**

Låt drivnavet sitta kvar på drivaxeln.




**Fig. 3**

Placera hjulet så att de fyra hålen i fälgen hamnar i linje med hålen i drivnavet.



**Fig. 4**

Sätt på brickorna på fälgbultarna och skruva sedan i dem för hand.

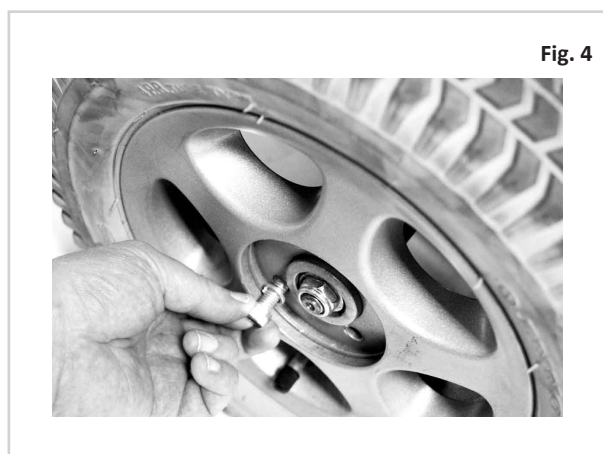


**Fig. 5**

Sänk ner skotern och använd sedan en 6 mm insexnyckel för att dra åt de fyra fälgbultarna med ett moment på 25 Nm.



**Fig. 6**

Tryck tillbaka navkapseln på plats.

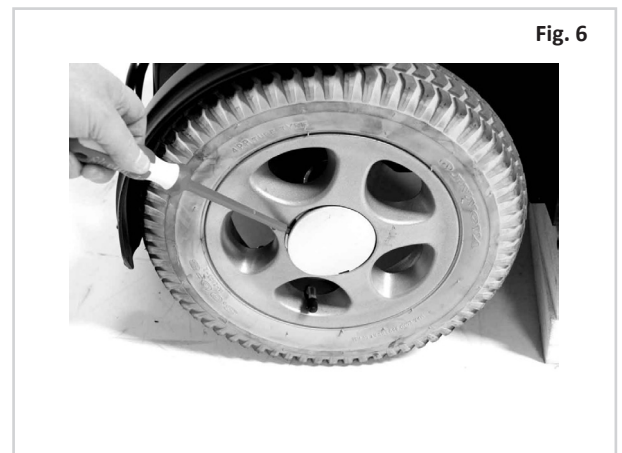



Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88  
E: [customerservice@sunrisemedical.nl](mailto:customerservice@sunrisemedical.nl)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)