

# Framhjul Sterling Elite2Plus



**Benämning**

**Artikelnummer**

Hjul Sterling Elite2 Plus luft fram kpl

030866

Hjul Sterling Elite2 Plus massivt fram kpl

030856



# MONTERINGSANVISNING




**Fig.1**

Lyft upp framdelen av scootern genom att placera domkraften under relevanta domkraftspunkter. Placera stödblock under domkraften när den är upphöjd för att öka stabiliteten.



**Fig. 2,3,4**

Montera hjulet med hjälp av hjulaxeln och placera den korta distansen på högra sida om hjulet och den långa på vänster sida

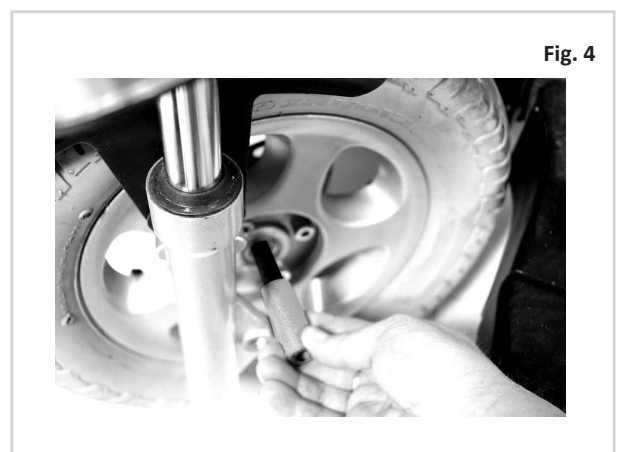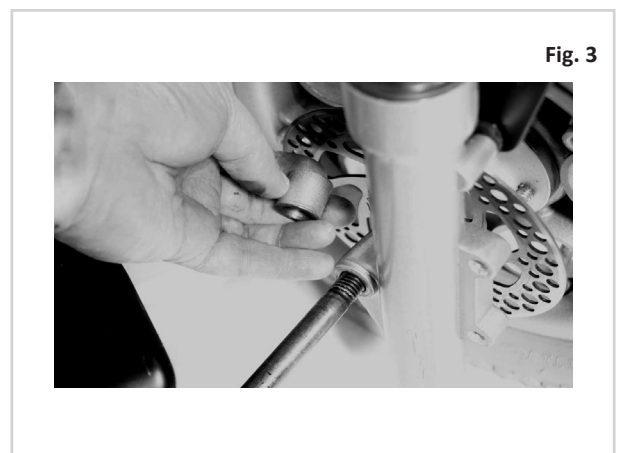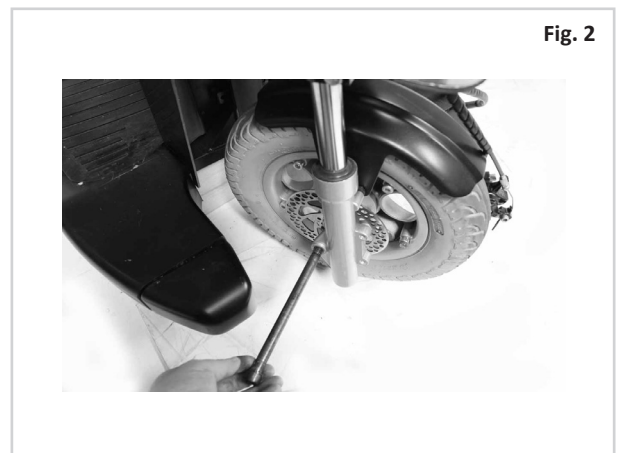

**Fig. 5**

Använd en 10.0 mm insexnyckel, (Fig. 5), och en 19.0 mm hylsa, (Fig. 6), för att ta bort skruva fast axeln med ett moment på 32 Nm.



**Fig. 5**

**Fig. 6**



**Fig. 7**

Montera skivbromsen med en 5.0 mm insexnyckel, Fig 7,8.



**Fig. 7**

**Fig. 8**





Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88  
E: [customerservice@sunrisemedical.nl](mailto:customerservice@sunrisemedical.nl)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)