
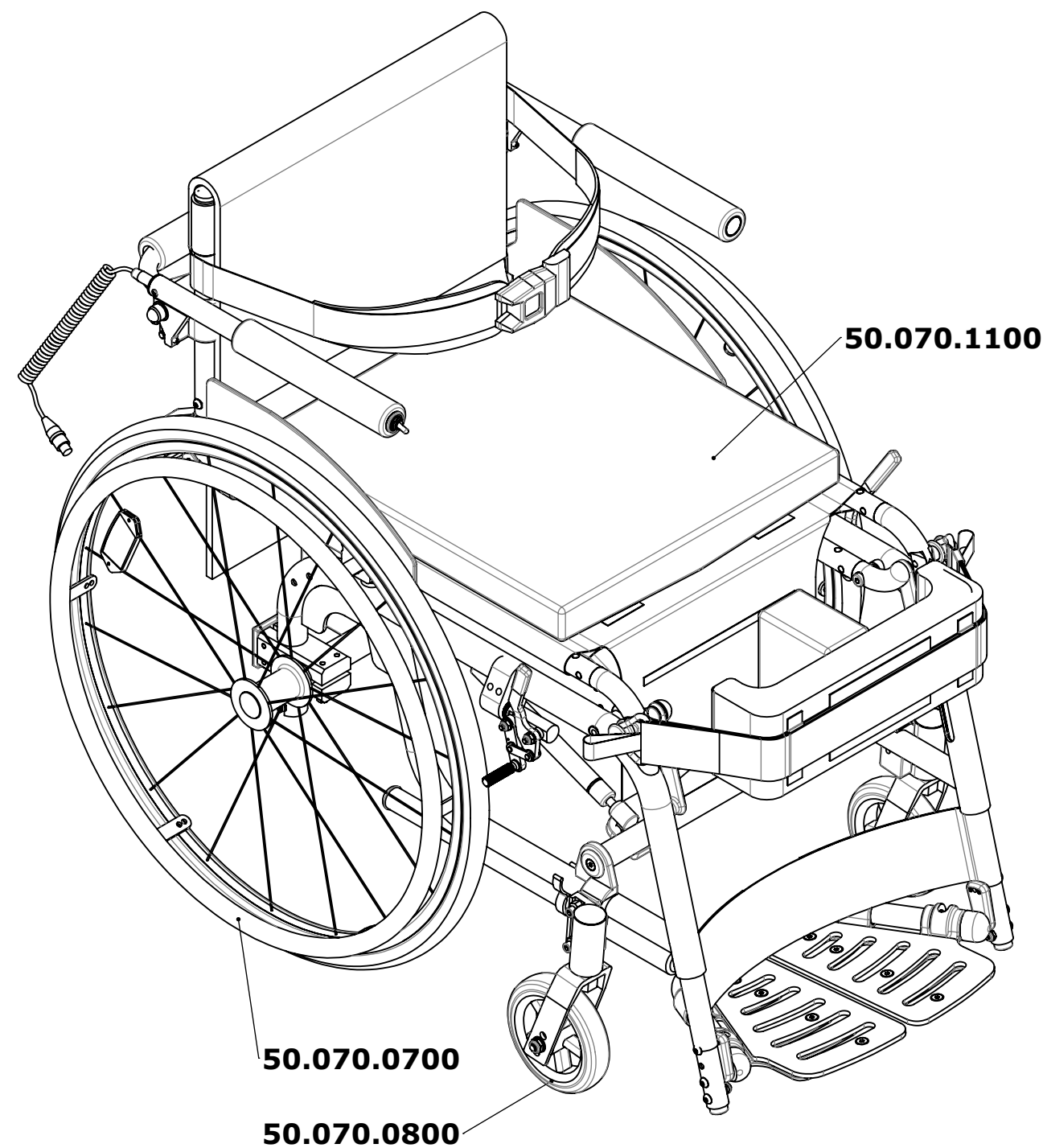


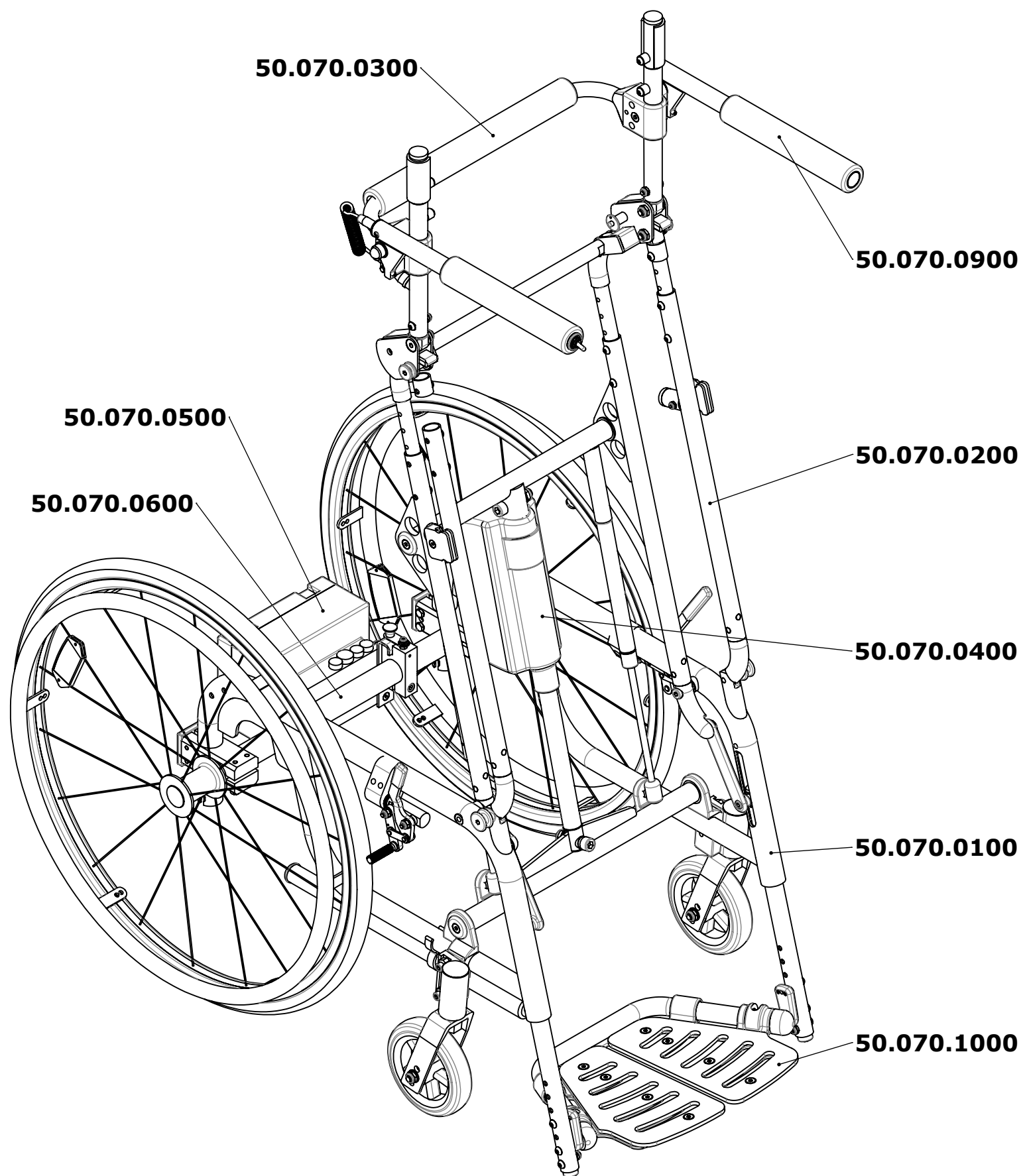

|                                                                                                                                                                                                                          |                      |    |                                                                   |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                                                              | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>LCEV                        |                                                                                                          |  |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                                                              |                      | -  |                                                                   |                                                                                                          |  |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                                                                          | 30.04.2008           | TN |                                                                   |                                                                                                          |  |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                                                                  | freigegeben/approved |    |                                                                   |                                                                                                          |  |
| <div><div><div>LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div></div><div>Rollstuhl<br/><i>Wheelchair</i><br/><br/>LCEV</div></div> |                      |    | <div>Artikelnummer<br/><i>Art. no.</i><br/><br/>50.070.0000</div> | <div>Blatt / Anz.<br/><i>Sheet / no. of</i><br/><br/>1 / 1<br/><br/>Index / <i>Rev.</i><br/><br/>-</div> |  |

| Farbe             | color             | rechts/right | links/left  |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| platin            | platinum          | 32.065.20    | 32.065.21   |
| blau              | blue              | 32.065.2010  | 32.065.2110 |
| gelb              | yellow            | 32.065.2020  | 32.065.2120 |
| rot               | red               | 32.065.2030  | 32.065.2130 |
| schwarz           | black             | 32.065.2050  | 32.065.2150 |
| Reflexfarbe       | reflex color      | 32.065.2040  | 32.065.2140 |
| rot metallic      | red metallic      | 32.065.2060  | 32.065.2160 |
| blau metallic     | blue metallic     | 32.065.2070  | 32.065.2170 |
| grün metallic     | green metallic    | 32.065.2080  | 32.065.2180 |
| silber metallic   | silver metallic   | 32.065.2090  | 32.065.2190 |
| Aluminium poliert | aluminum polished | 32.065.2005  | 32.065.2105 |
| RAL               | RAL               | 32.065.2095  | 32.065.2195 |

32.065.23

02.001.0212

links/left

rechts/right

02.001.0220


02.001.0213

32.065.22

30.100.5140

| Farbe             | color             | rechts/right | links/left  |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| platin            | platinum          | 31.650.02    | 31.650.01   |
| blau              | blue              | 31.650.0201  | 31.650.0101 |
| gelb              | yellow            | 31.650.0202  | 31.650.0102 |
| rot               | red               | 31.650.0203  | 31.650.0103 |
| schwarz           | black             | 31.650.0205  | 31.650.0105 |
| Reflexfarbe       | reflex color      | 31.650.0204  | 31.650.0104 |
| rot metallic      | red metallic      | 31.650.0206  | 31.650.0106 |
| blau metallic     | blue metallic     | 31.650.0207  | 31.650.0107 |
| grün metallic     | green metallic    | 31.650.0208  | 31.650.0108 |
| silber metallic   | silver metallic   | 31.650.0209  | 31.650.0109 |
| Aluminium poliert | aluminum polished | 31.650.0210  | 31.650.0110 |
| RAL               | RAL               | 31.650.0211  | 31.650.0111 |

|                                                    |            |    |                                                                     |                                        |                                                               |
|----------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                               | 27.06.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Grundrahmen</b><br><b>Basic frame</b> |                                        | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br>Modified                               |            | -  |                                                                     |                                        |                                                               |
| Gepr./Freig.<br>Approved                           | 30.04.2008 | TN |                                                                     |                                        |                                                               |
| Status<br>Status                                   |            |    |                                                                     |                                        |                                                               |
| <b>LEVO</b> <small>THE EXPERTS IN STANDING</small> |            |    | <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch                     | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><b>LCEV</b> | Artikelnummer<br>Art. no.<br><b>50.070.0100</b>               |

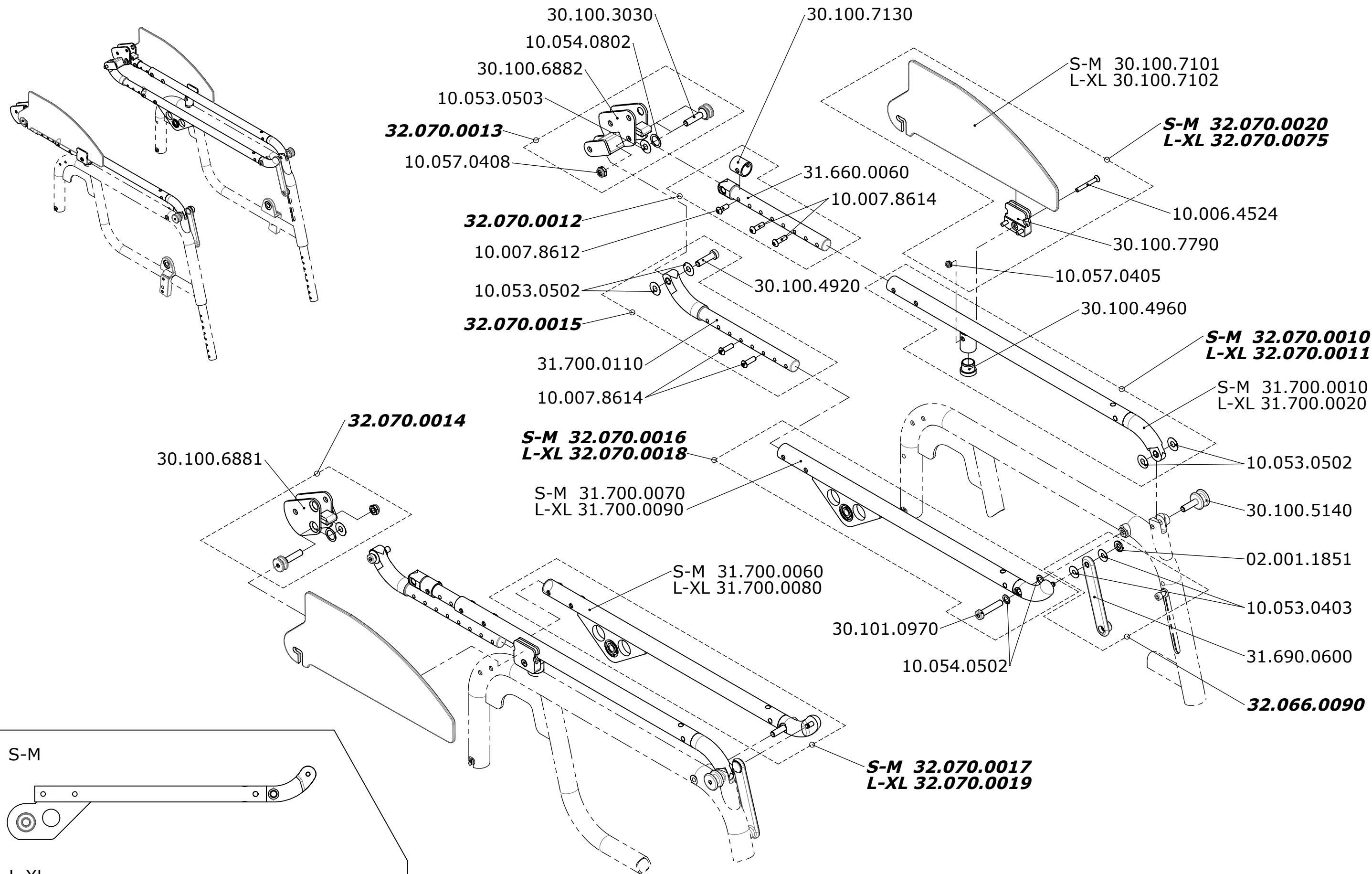

S-M

L-XL

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     | 10.03.2010           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 10.03.2010           | TN |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Sitzträger**  
**Seat support**

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair


**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.0200**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**A**

| Sitzbreite<br>Seat width | Pos. A             | Pos. B      | Pos. C      |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 35                       | <b>32.070.0039</b> | 30.100.9142 | 30.101.5173 |
| 38                       | <b>32.070.0030</b> | 30.100.9143 |             |
| 40                       | <b>32.070.0031</b> | 30.100.9144 | 30.101.4110 |
| 42                       | <b>32.070.0032</b> | 30.100.9145 |             |
| 45                       | <b>32.070.0033</b> | 30.100.9146 | 30.101.5172 |
| 48                       | <b>32.070.0034</b> | 30.100.9147 |             |
| 50                       | <b>32.070.0049</b> | 30.100.9149 | 02.400.6000 |

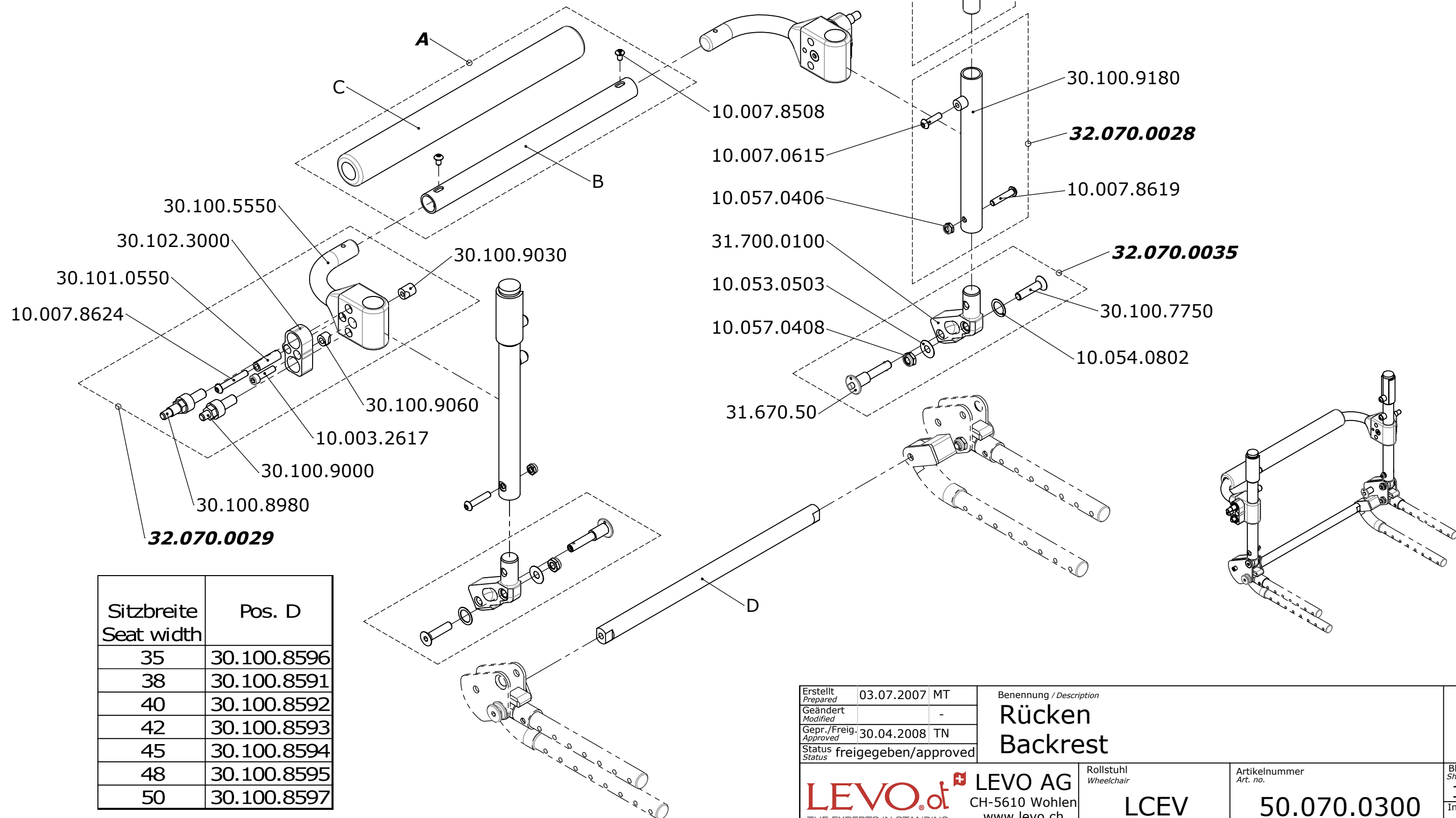

| Sitzbreite<br>Seat width | Pos. D      |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.100.8596 |
| 38                       | 30.100.8591 |
| 40                       | 30.100.8592 |
| 42                       | 30.100.8593 |
| 45                       | 30.100.8594 |
| 48                       | 30.100.8595 |
| 50                       | 30.100.8597 |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 03.07.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     |                      | -  |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 30.04.2008           | TN |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Rücken  
Backrest**

**LEVO** <sup>dt</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.0300**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of

**1 / 1**

Index / Rev.

-



| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.102.1480 |
| 38                       | 30.101.1400 |
| 40                       | 30.101.1430 |
| 42                       | 30.101.1460 |
| 45                       | 30.101.1480 |
| 48                       | 30.101.1490 |
| 50                       | 30.102.1460 |

| Sitzbreite<br>Seat width |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>35</b>                | <b>32.065.4095</b> |
| <b>38</b>                | <b>32.065.41</b>   |
| <b>40</b>                | <b>32.065.42</b>   |
| <b>42</b>                | <b>32.065.43</b>   |
| <b>45</b>                | <b>32.065.44</b>   |
| <b>48</b>                | <b>32.065.45</b>   |
| <b>50</b>                | <b>32.065.4505</b> |

| Grösse<br>Size | Kraft<br>Force | Artikelnummer<br>Article no. |
|----------------|----------------|------------------------------|
| S - M          | 400 N          | 02.001.0616                  |
| L - XL         | 700 N          | 02.001.0617                  |

| Sitzbreite<br>Seat width |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>35</b>                | <b>32.065.4695</b> |
| <b>38</b>                | <b>32.065.47</b>   |
| <b>40</b>                | <b>32.065.48</b>   |
| <b>42</b>                | <b>32.065.49</b>   |
| <b>45</b>                | <b>32.065.50</b>   |
| <b>48</b>                | <b>32.065.51</b>   |
| <b>50</b>                | <b>32.065.5105</b> |

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.102.1430 |
| 38                       | 30.100.3380 |
| 40                       | 30.100.3370 |
| 42                       | 30.100.3350 |
| 45                       | 30.100.3340 |
| 48                       | 30.100.3330 |
| 50                       | 30.102.1440 |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     | 08.02.2017           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 08.02.2017           | FW |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Aufsteheinheit**  
**Stand up unit**

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair




**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.


**50.070.0400**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**A**

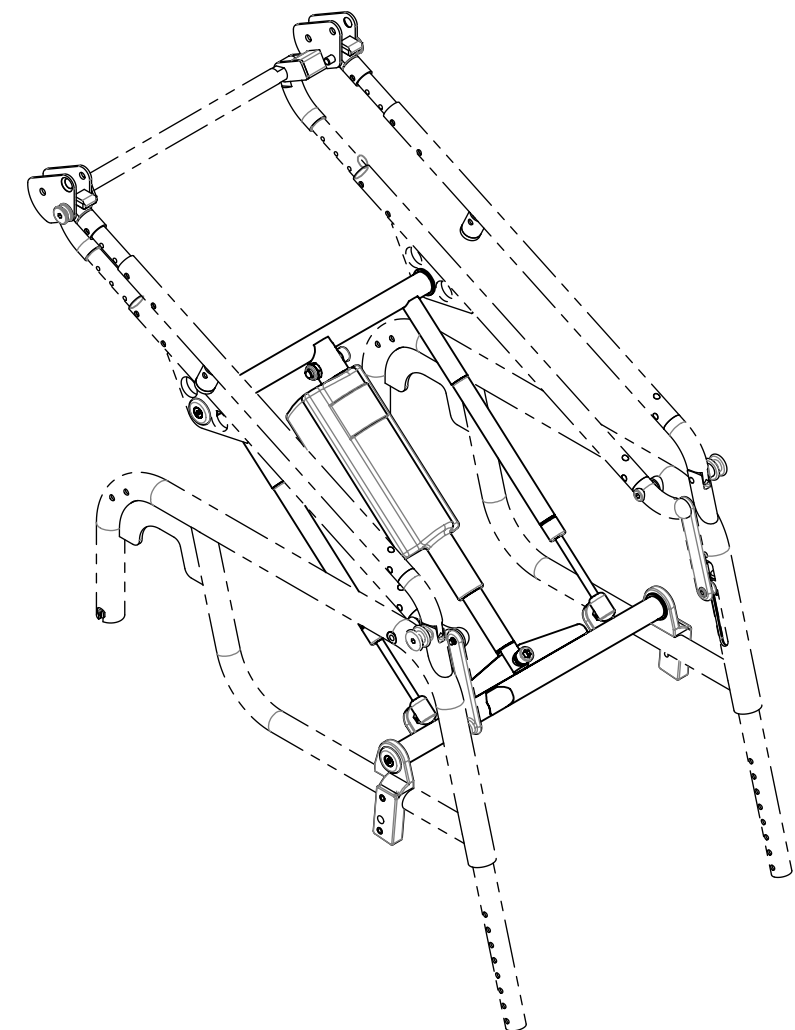

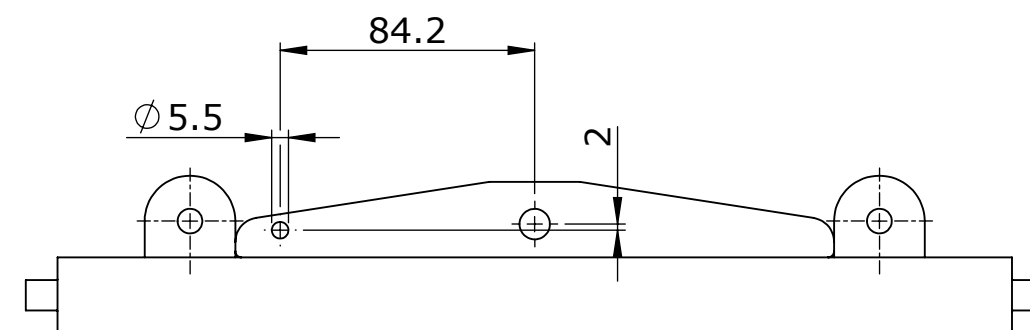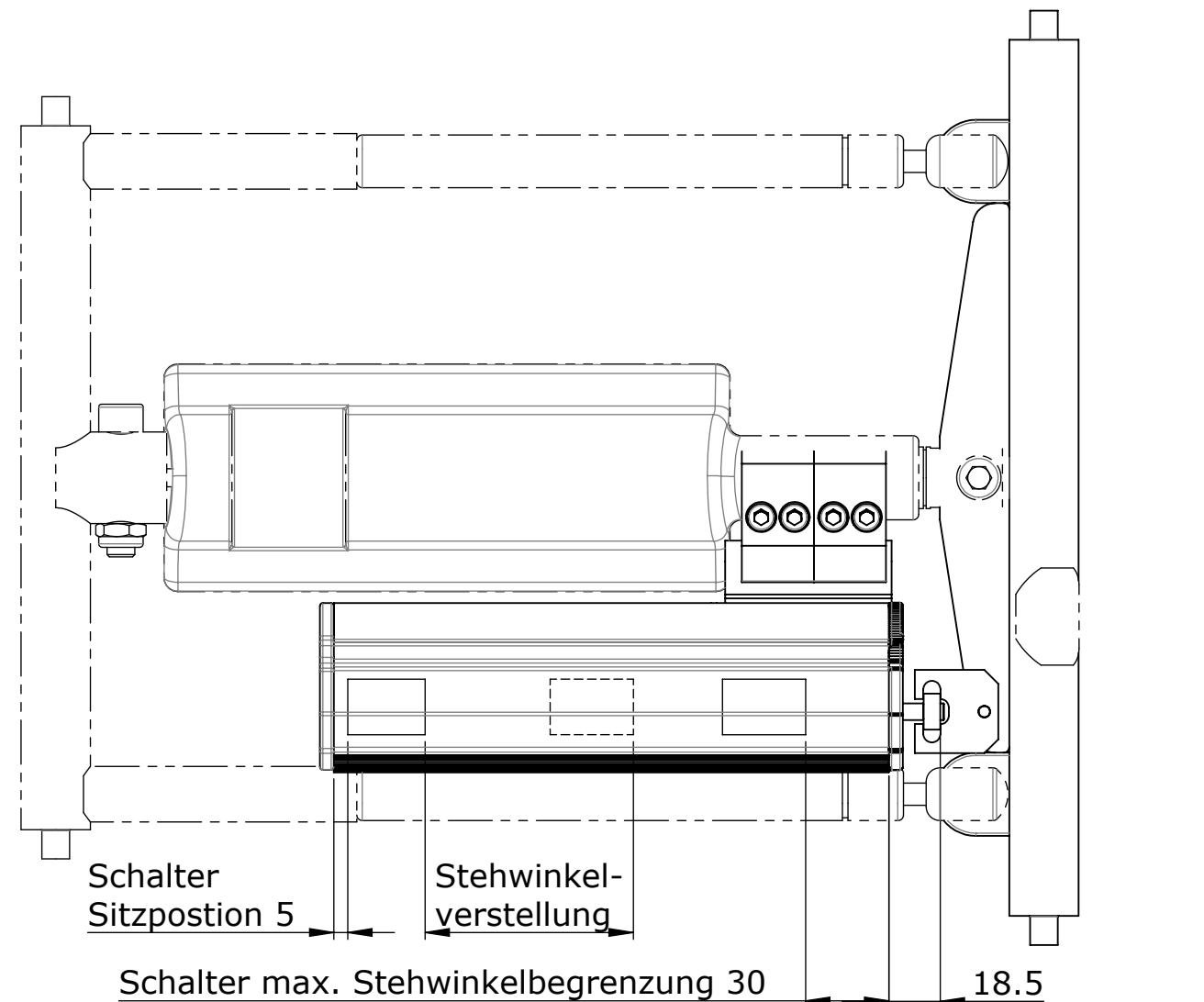
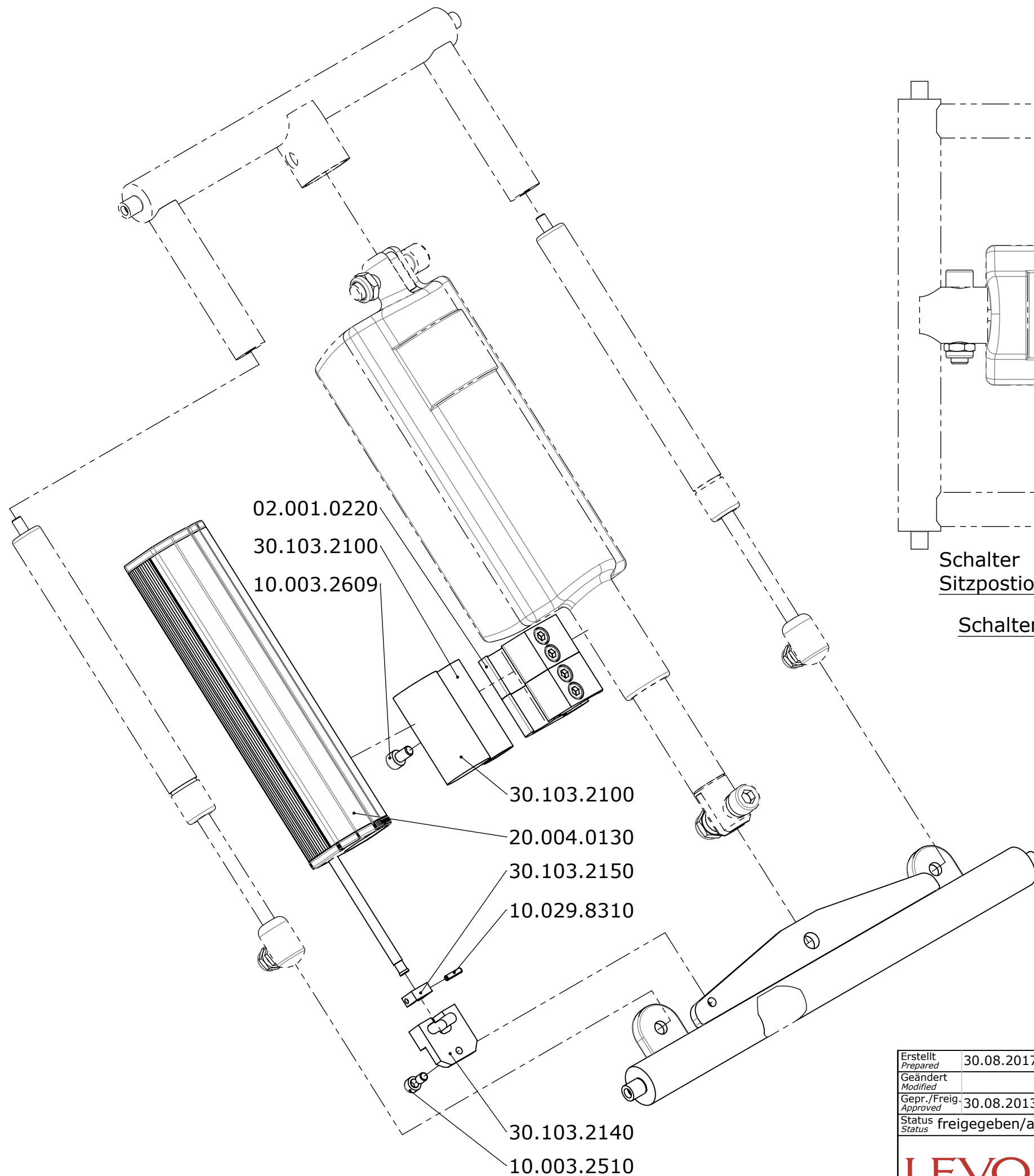


|                                                                                                                                                              |                      |    |                                                                                    |                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                  | 30.08.2017           | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br>Stehwinkelbegrenzung<br>Standing angle limit |                                                     |                                                                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                  |                      | -  |                                                                                    |                                                     |                                                                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                              | 30.08.2013           | HB |                                                                                    |                                                     |                                                                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                      | freigegeben/approved |    |                                                                                    |                                                     |                                                                                       |
| <div>LEVO<sup>®</sup>  LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                                         | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.0450 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1<br><br>Index / <i>Rev.</i><br><br>- |

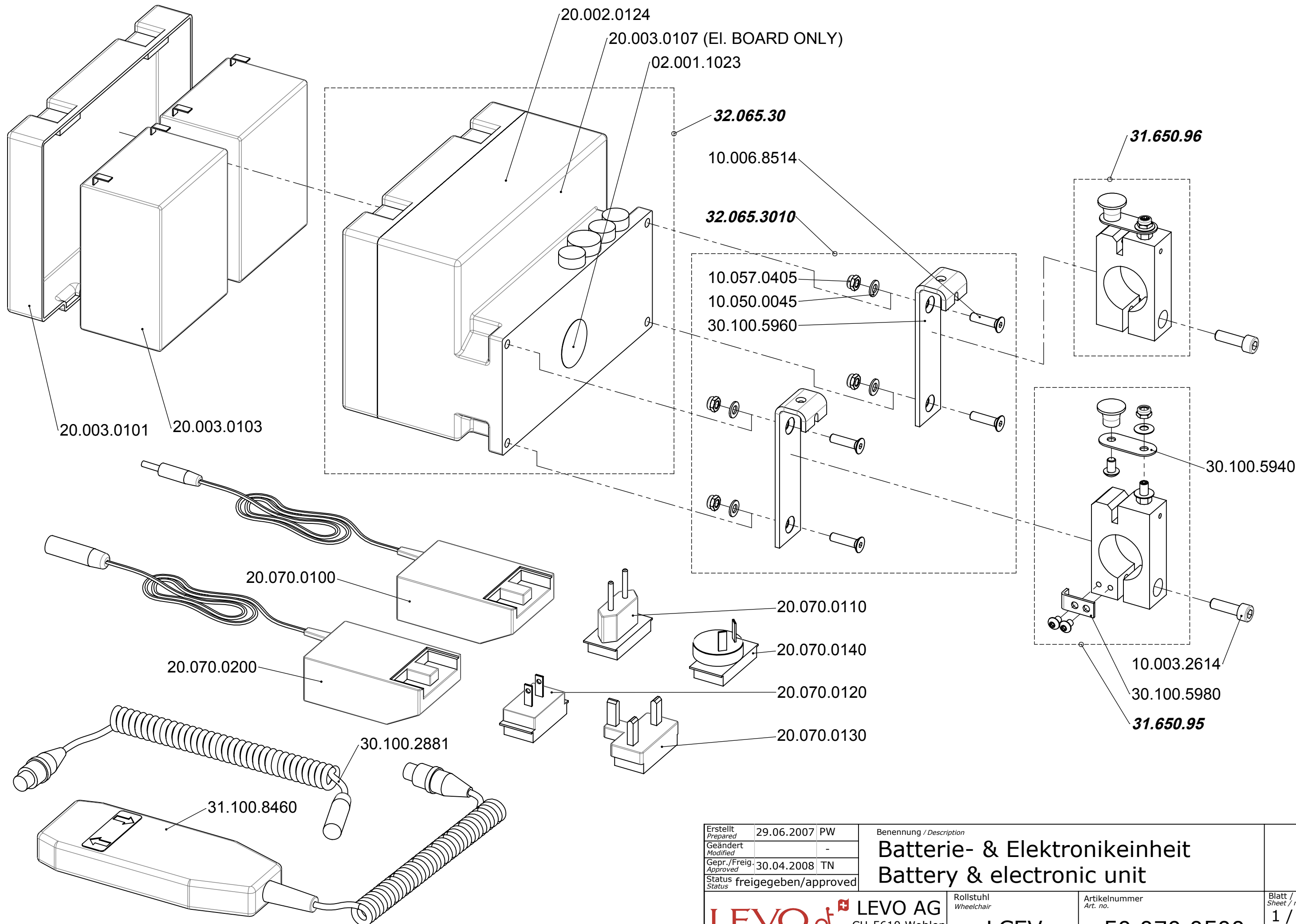

|                                                                               |                      |    |                                                                                                  |                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                   | 29.06.2007           | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br>Batterie- & Elektronikeinheit<br>Battery & electronic unit |                                                     |                                                   |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                   |                      | -  |                                                                                                  |                                                     |                                                   |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                               | 30.04.2008           | TN |                                                                                                  |                                                     |                                                   |
| Status<br><i>Status</i>                                                       | freigegeben/approved |    |                                                                                                  |                                                     |                                                   |
| <div>LEVO<sup>®</sup>.<sup>+</sup>df</div> <div>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                                                       | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.0500 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1 |
| CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch                                                 |                      |    |                                                                                                  |                                                     | Index / <i>Rev.</i>                               |



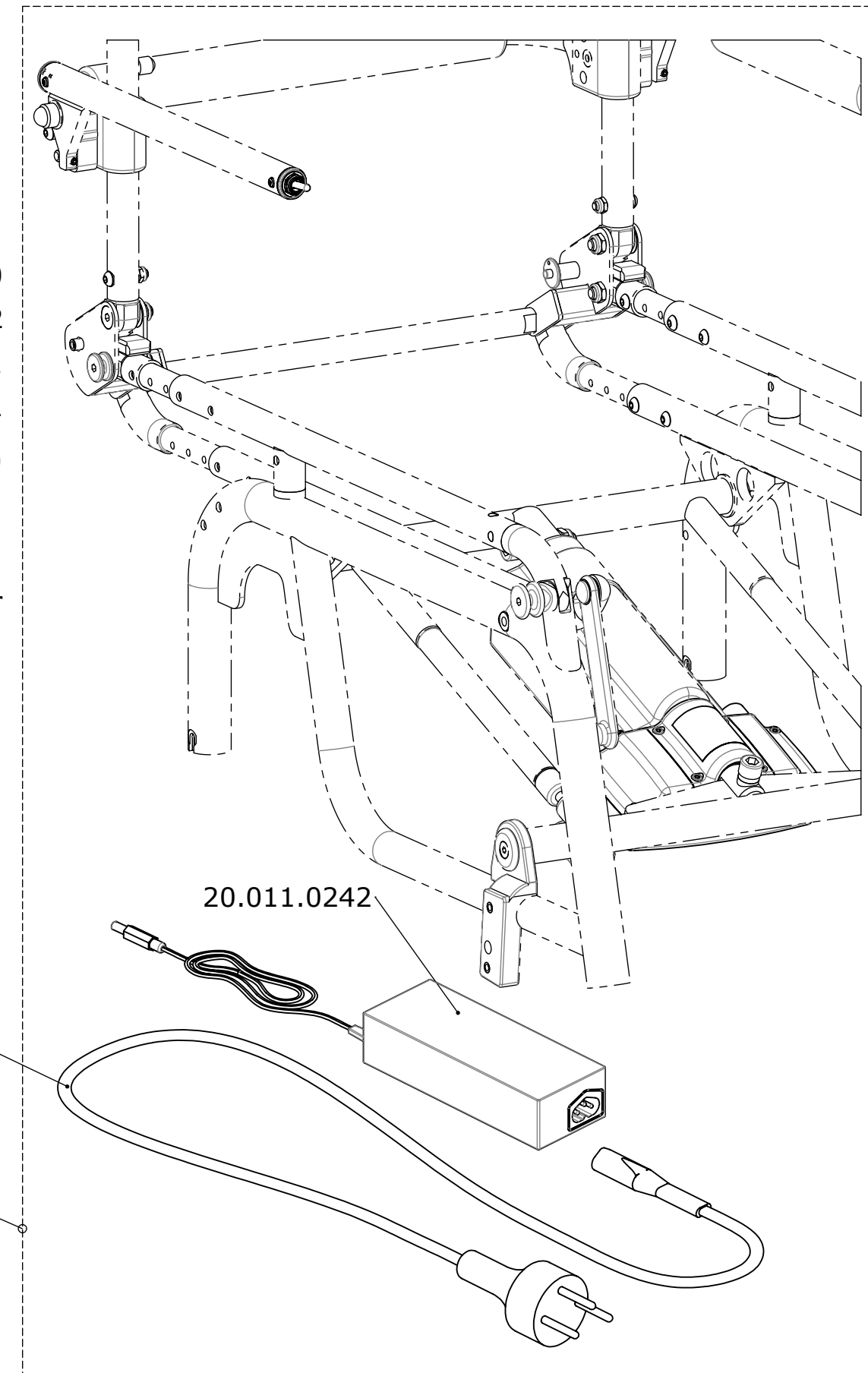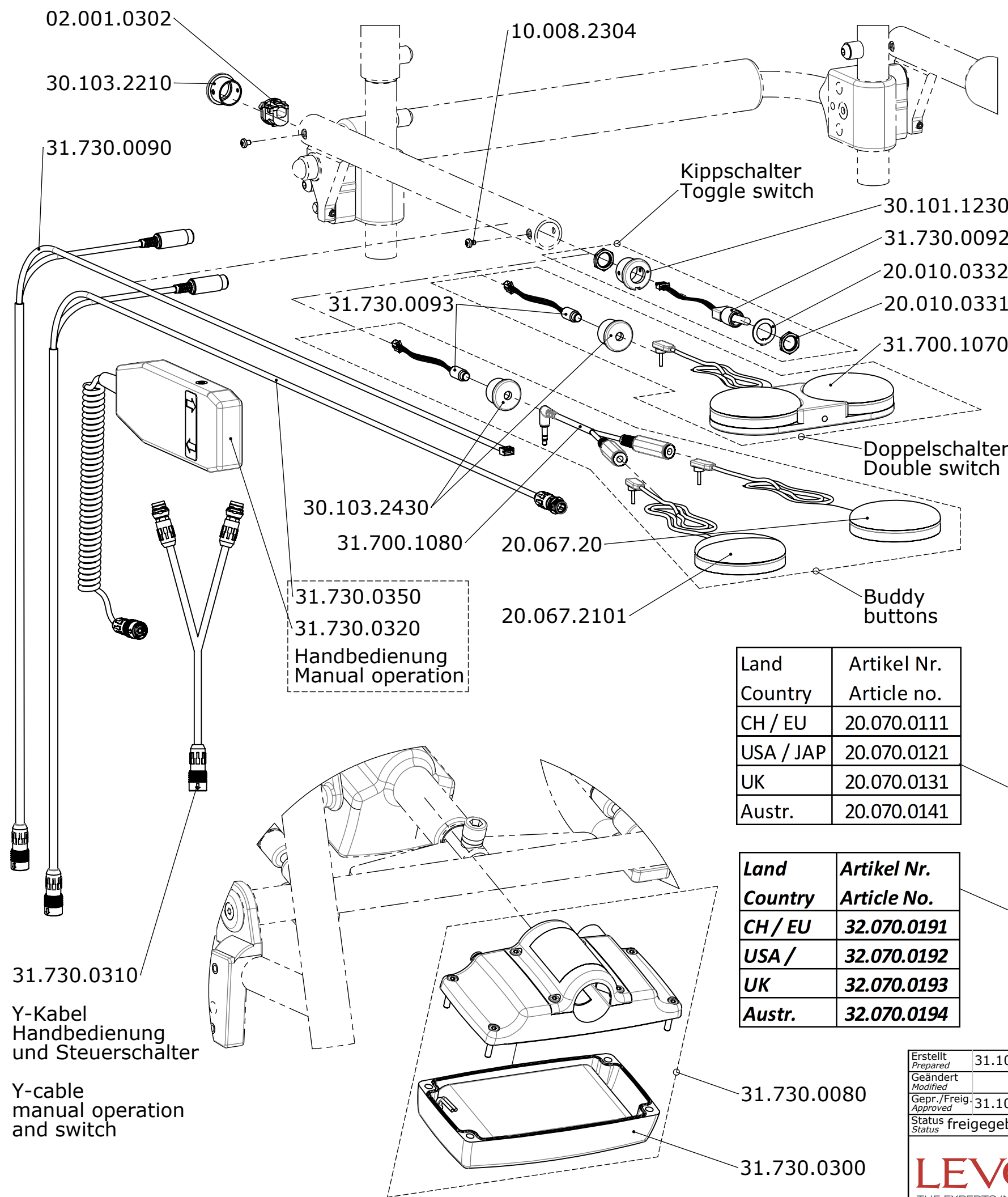



| Land<br>Country | Artikel Nr.<br>Article no. |
|-----------------|----------------------------|
| CH / EU         | 20.070.0111                |
| USA / JAP       | 20.070.0121                |
| UK              | 20.070.0131                |
| Austr.          | 20.070.0141                |

| Land<br>Country | Artikel Nr.<br>Article No. |
|-----------------|----------------------------|
| CH / EU         | 32.070.0191                |
| USA /           | 32.070.0192                |
| UK              | 32.070.0193                |
| Austr.          | 32.070.0194                |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 31.10.2017           | PW |
| Geändert<br>Modified     |                      | -  |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 31.10.2017           | FW |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description  
**Light Option**  
**Light weight option**



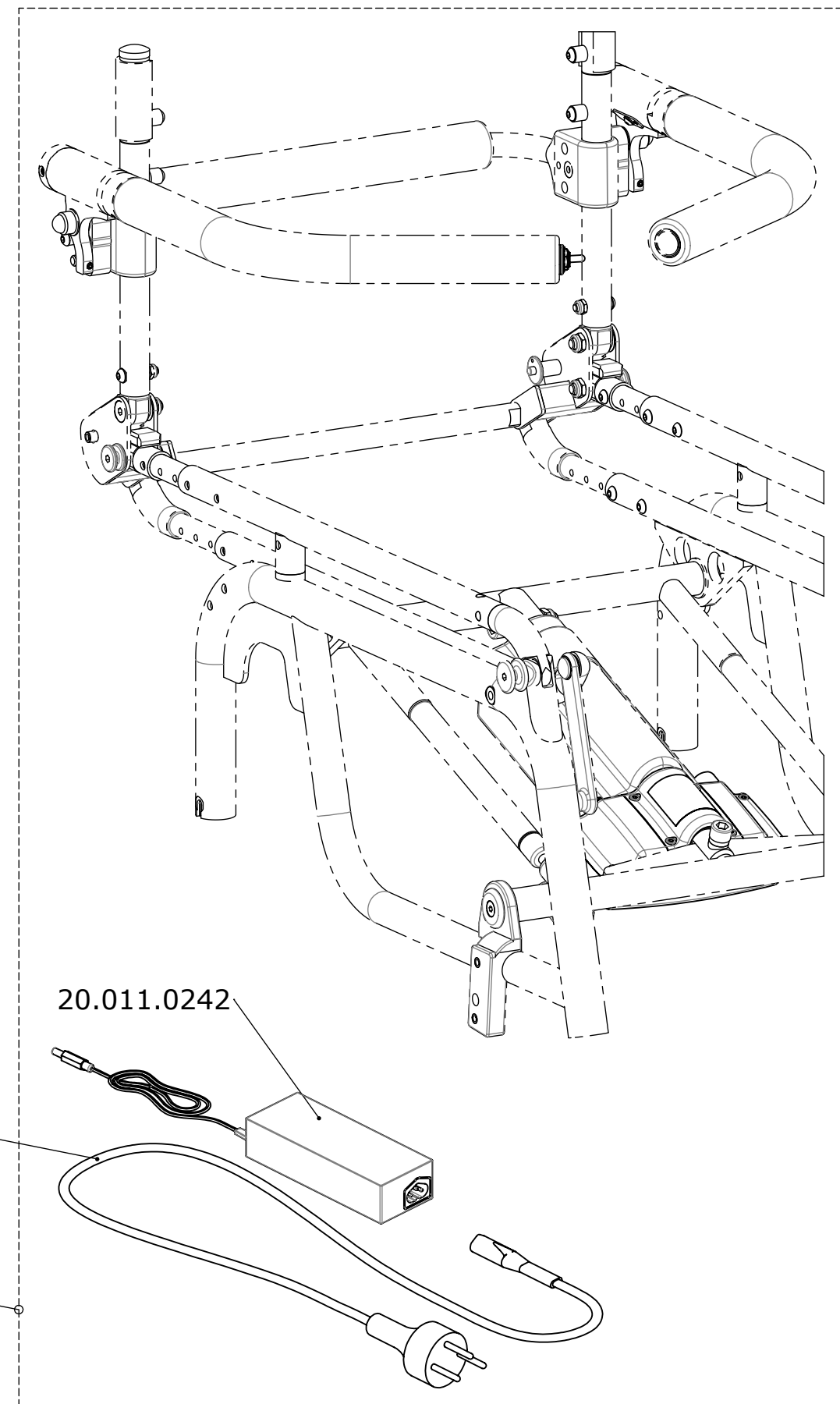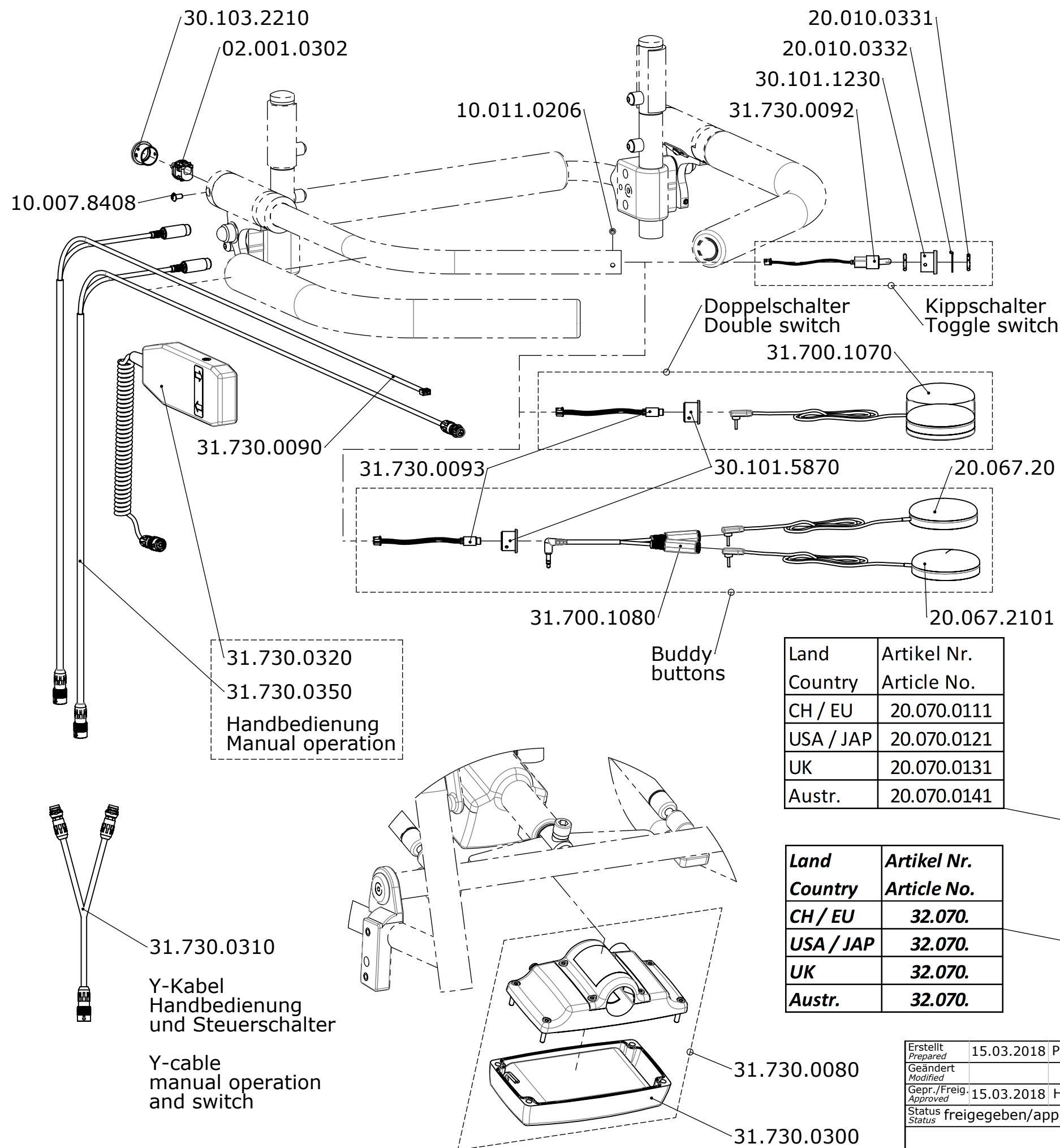

| Land<br>Country | Artikel Nr.<br>Article No. |
|-----------------|----------------------------|
| CH / EU         | 20.070.0111                |
| USA / JAP       | 20.070.0121                |
| UK              | 20.070.0131                |
| Austr.          | 20.070.0141                |

| Land<br>Country | Artikel Nr.<br>Article No. |
|-----------------|----------------------------|
| CH / EU         | 32.070.                    |
| USA / JAP       | 32.070.                    |
| UK              | 32.070.                    |
| Austr.          | 32.070.                    |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 15.03.2018           | PW |
| Geändert<br>Modified     |                      |    |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 15.03.2018           | HB |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Light Option Oberkörperbügel  
Light weight option swing away

**LEVO** <sup>dt</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair


**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.


**50.070.0560**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
-


**S**

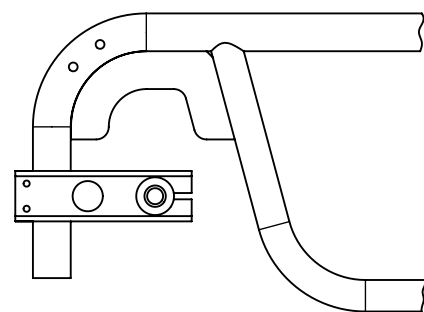


**M**

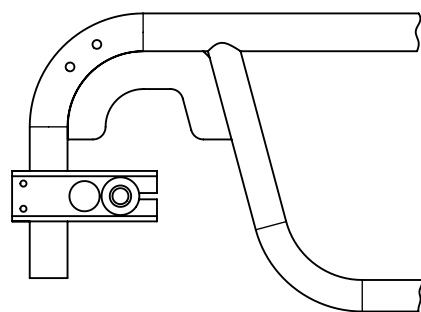

**L**

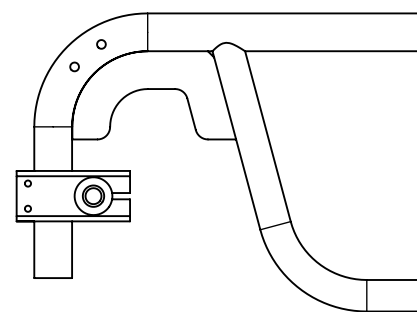

**XL**

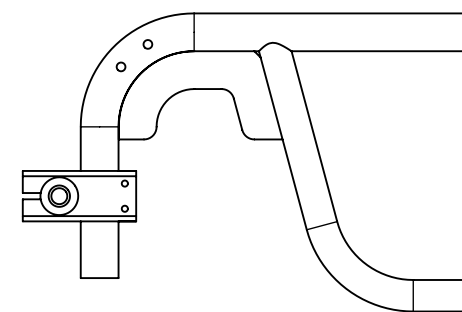

| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| S              | 30.100.5380 |
| M              | 30.100.5400 |
| L/XL           | 30.100.5360 |

02.001.1710

10.020.2614

10.050.0046

10.016.2624

Standard

3°


6°

| Grösse<br>Size |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>S</b>       | <b>32.064.0130</b> |
| <b>M</b>       | <b>32.064.0131</b> |
| <b>L/XL</b>    | <b>32.064.0132</b> |

| Sitzbreite<br>Seat width | Standard    | Radsturz 3°<br>Camber 3° | Radsturz 6°<br>Camber 6° |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 35                       | 31.700.0300 | 31.700.0370              | 31.700.0440              |
| 38                       | 31.700.0310 | 31.700.0380              | 31.700.0450              |
| 40                       | 31.700.0320 | 31.700.0390              | 31.700.0460              |
| 42                       | 31.700.0330 | 31.700.0400              | 31.700.0470              |
| 45                       | 31.700.0340 | 31.700.0410              | 31.700.0480              |
| 48                       | 31.700.0350 | 31.700.0420              | 31.700.0490              |
| 50                       | 31.700.0360 | 31.700.0430              | 31.700.0500              |


|                                                                                                                                                   |            |    |                                                                                       |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                       | 17.08.2007 | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Hinterradachse</b><br><b>Rear wheel axle</b> |                                  |                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                       |            | -  |                                                                                       |                                  |                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                   | 30.04.2008 | TN |                                                                                       |                                  |                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                           |            |    |                                                                                       |                                  |                                       |
| <div><b>LEVO</b> AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div> |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i>                                                        | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i> | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i> |
|                                                                                                                                                   |            |    | <b>LCEV</b>                                                                           | <b>50.070.0600</b>               | <b>1 / 1</b>                          |
|                                                                                                                                                   |            |    |                                                                                       |                                  | Index / <i>Rev.</i>                   |

Standard

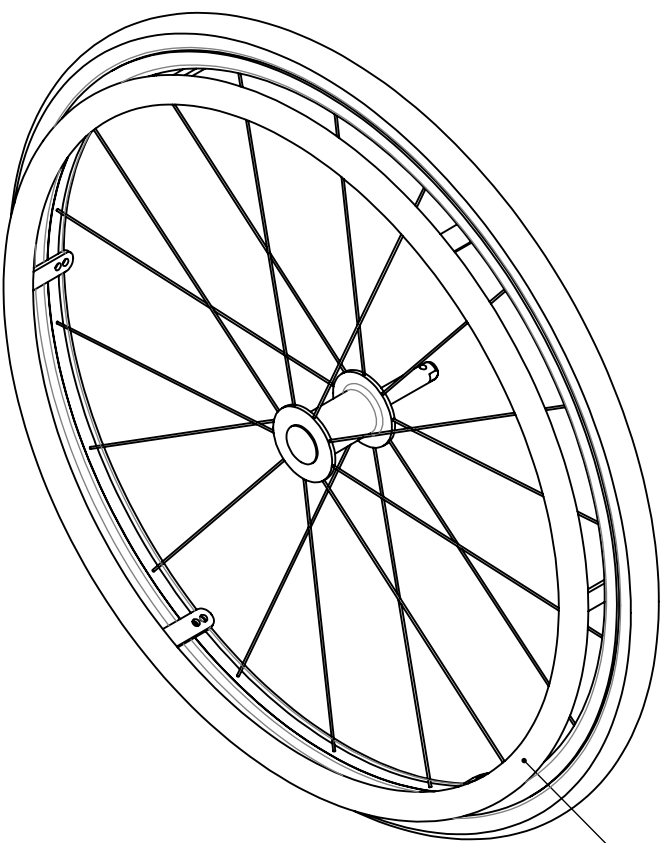


50.070.0710

Spinergy

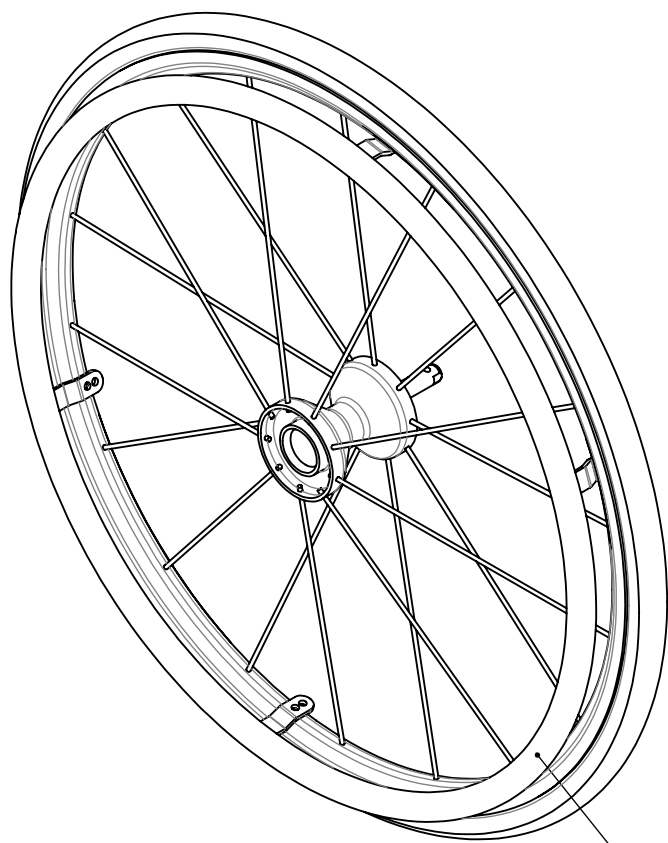


50.070.0720

mit Naben-Feststellbremse  
with hub locking brake

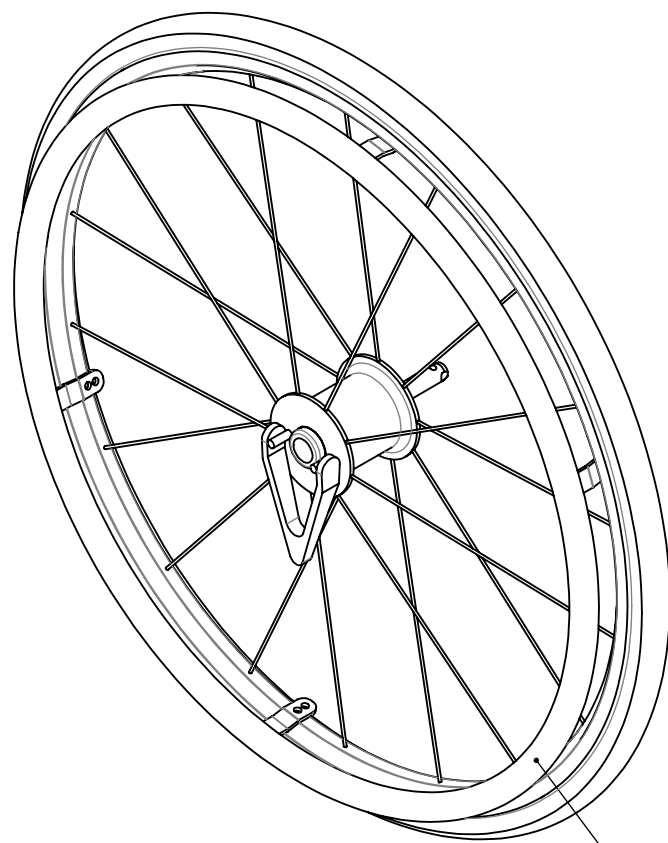

50.070.0730

Luftpumpe  
Air pump

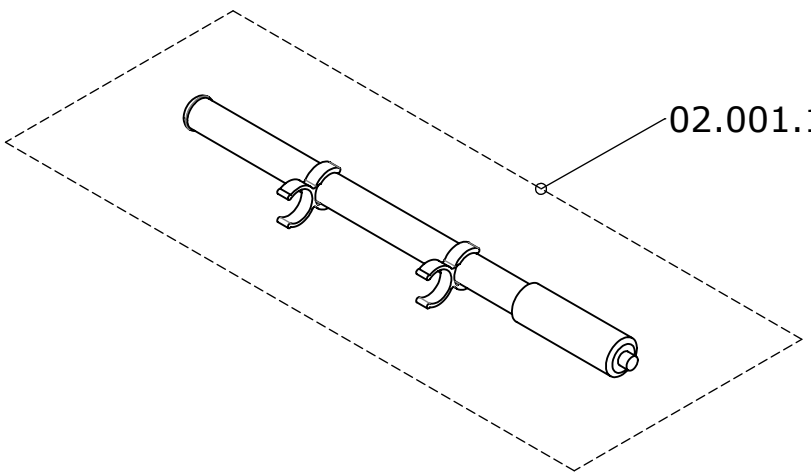


02.001.1121

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |    |                                                                     |            |                                                                                                              |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----|---------------------------------|------------|----|-------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|
| <table><tr><td>Erstellt<br/><i>Prepared</i></td><td>11.09.2007</td><td>PW</td></tr><tr><td>Geändert<br/><i>Modified</i></td><td>29.03.2017</td><td>PW</td></tr><tr><td>Gepr./Freig.<br/><i>Approved</i></td><td>29.03.2017</td><td>FW</td></tr><tr><td>Status<br/><i>Status</i></td><td colspan="2">freigegeben/approved</td></tr></table> |                      |    | Erstellt<br><i>Prepared</i>                                         | 11.09.2007 | PW                                                                                                           | Geändert<br><i>Modified</i> | 29.03.2017 | PW | Gepr./Freig.<br><i>Approved</i> | 29.03.2017 | FW | Status<br><i>Status</i> | freigegeben/approved |  | Benennung / <i>Description</i><br><br>Hinterräder<br>Rear wheels |  |  |
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.09.2007           | PW |                                                                     |            |                                                                                                              |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.03.2017           | PW |                                                                     |            |                                                                                                              |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.03.2017           | FW |                                                                     |            |                                                                                                              |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | freigegeben/approved |    |                                                                     |            |                                                                                                              |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |
| <div><div><div>LEVO<sup>®</sup>.dt</div><div>THE EXPERTS IN STANDING</div></div><div><div>CH-5610 Wohlen</div><div>www.levo.ch</div></div></div> <div><div>Rollstuhl</div><div>Wheelchair</div><div>LCEV</div></div>                                                                                                                       |                      |    | <div>Artikelnummer</div> <div>Art. no.</div> <div>50.070.0700</div> |            | <div><div>Blatt / Anz</div><div>Sheet / no. of</div><div>1 / 1</div><div>Index / Rev</div><div>A</div></div> |                             |            |    |                                 |            |    |                         |                      |  |                                                                  |  |  |



02.400.1000

02.400.5002

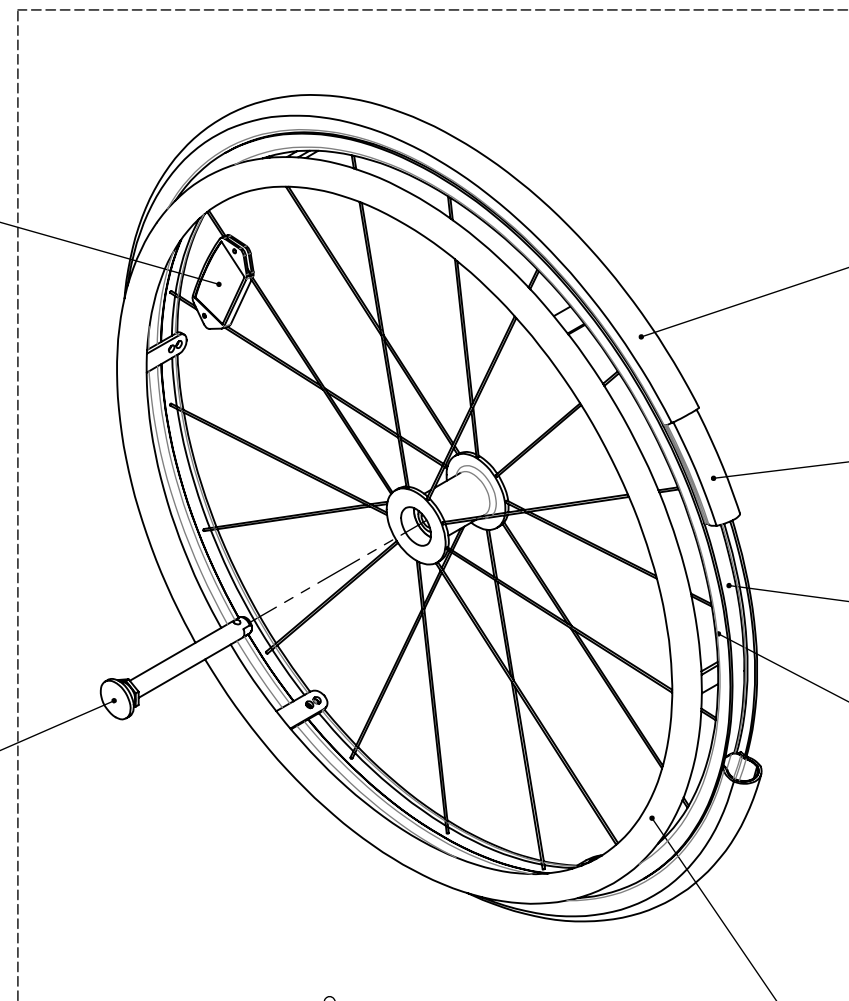

|     | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 02.400.2212             | 02.400.2322                  |
| 24" | 02.400.2425             | 02.400.2324                  |
| 26" | 02.400.2627             | 02.400.2326                  |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2215 |
| 24" | 02.400.2426 |
| 26" | 02.400.2628 |


|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2216 |
| 24" | 02.400.2427 |
| 26" | 02.400.2630 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2213 |
| 24" | 02.400.2423 |
| 26" | 02.400.2623 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2200 |
| 24" | 02.400.2400 |
| 26" | 02.400.2600 |


|     | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 32.070.0200             | 32.070.0230                  |
| 24" | 32.070.0210             | 32.070.0240                  |
| 26" | 32.070.0220             | 32.070.0250                  |

|     | Standard              | Optionen / Options |                      |                          |
|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|     | Aluminium<br>Aluminum | Stahl<br>Steel     | Maxgrepp<br>Original | Maxgrepp<br>Ergo Para CP |
| 22" | 02.400.2223           | 02.402.2202        | 02.069.0051          | 02.069.0041              |
| 24" | 02.400.2424           | 02.402.2402        | 02.069.0050          | 02.069.0040              |
| 26" | 02.400.2629           | 02.402.2602        | 02.069.0052          | 02.069.0042              |

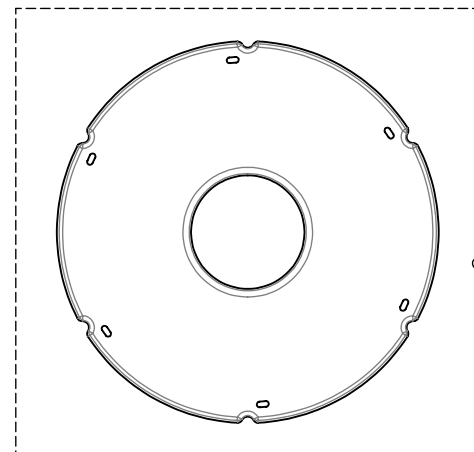

|     | transparent |
|-----|-------------|
| 22" | 02.066.1014 |
| 24" | 02.066.1015 |
| 26" | 02.066.1017 |

|                                                                                                                                             |                      |    |                                                                      |                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                 | 17.08.2007           | TN | Benennung / <i>Description</i><br><br>Standard Rad<br>Standard wheel |                                                     |                                                                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                 | 26.01.2015           | PW |                                                                      |                                                     |                                                                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                             | 26.01.2015           | FW |                                                                      |                                                     |                                                                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                     | freigegeben/approved |    |                                                                      |                                                     |                                                                                       |
| <div> LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                           | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.0710 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1<br><br>Index / <i>Rev.</i><br><br>D |

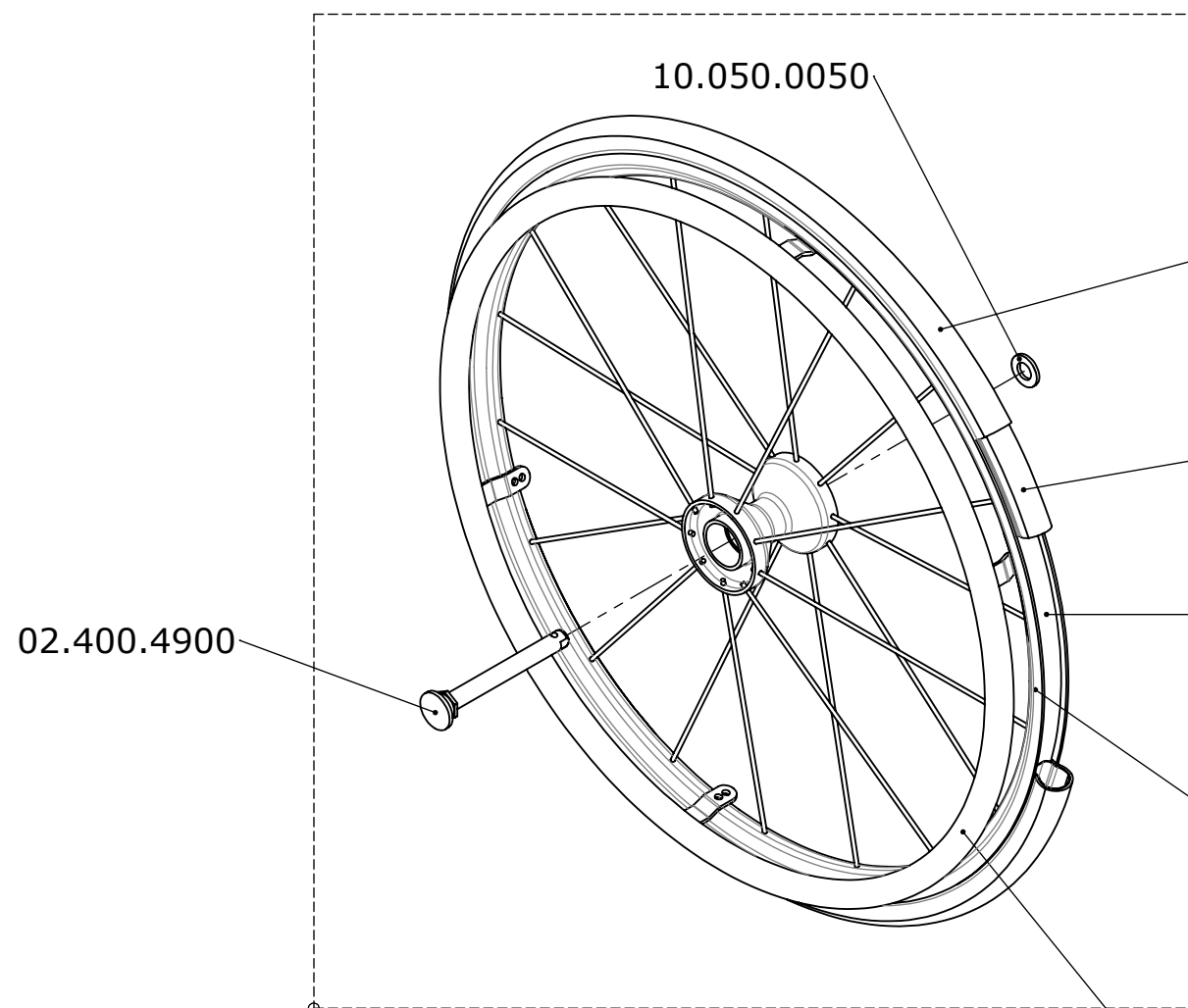

|     | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 02.400.2212             | 02.400.2322                  |
| 24" | 02.400.2425             | 02.400.2324                  |
| 26" | 02.400.2627             | 02.400.2326                  |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2215 |
| 24" | 02.400.2426 |
| 26" | 02.400.2628 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2216 |
| 24" | 02.400.2427 |
| 26" | 02.400.2630 |

|     |         |             |
|-----|---------|-------------|
| 22" | schwarz | 02.403.2201 |
|     | rot     | 02.403.2203 |
|     | weiss   | 02.403.2205 |
| 24" | schwarz | 02.403.2401 |
|     | rot     | 02.403.2403 |
|     | weiss   | 02.403.2405 |
| 26" | schwarz | 02.403.2601 |
|     | rot     | 02.403.2603 |
|     | weiss   | 02.403.2605 |


|     |         | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|---------|-------------------------|------------------------------|
| 22" | schwarz | 32.070.0261             | 32.070.0291                  |
|     | rot     | 32.070.0262             | 32.070.0292                  |
|     | weiss   | 32.070.0263             | 32.070.0293                  |
| 24" | schwarz | 32.070.0271             | 32.070.0301                  |
|     | rot     | 32.070.0272             | 32.070.0302                  |
|     | weiss   | 32.070.0273             | 32.070.0303                  |
| 26" | schwarz | 32.070.0281             | 32.070.0311                  |
|     | rot     | 32.070.0282             | 32.070.0312                  |
|     | weiss   | 32.070.0283             | 32.070.0313                  |

|     | Standard              | Optionen / Options |                      |                          |
|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|     | Aluminium<br>Aluminum | Stahl<br>Steel     | Maxgrepp<br>Original | Maxgrepp<br>Ergo Para CP |
| 22" | 02.400.2223           | 02.402.2202        | 02.069.0051          | 02.069.0041              |
| 24" | 02.400.2424           | 02.402.2402        | 02.069.0050          | 02.069.0040              |
| 26" | 02.400.2629           | 02.402.2602        | 02.069.0052          | 02.069.0042              |

|                                                                                                                                |                      |    |                                                                      |                                                     |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                    | 17.08.2007           | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br>Spinergy Rad<br>Spinergy wheel |                                                     |                                                                           |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                    | 25.07.2018           | PW |                                                                      |                                                     |                                                                           |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                | 25.07.2018           | HB |                                                                      |                                                     |                                                                           |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                        | freigegeben/approved |    |                                                                      |                                                     |                                                                           |
|  LEVO AG<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                           | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.0720 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br>1 / 1<br>Index / <i>Rev.</i><br>A |

02.400.1000

02.001.1322

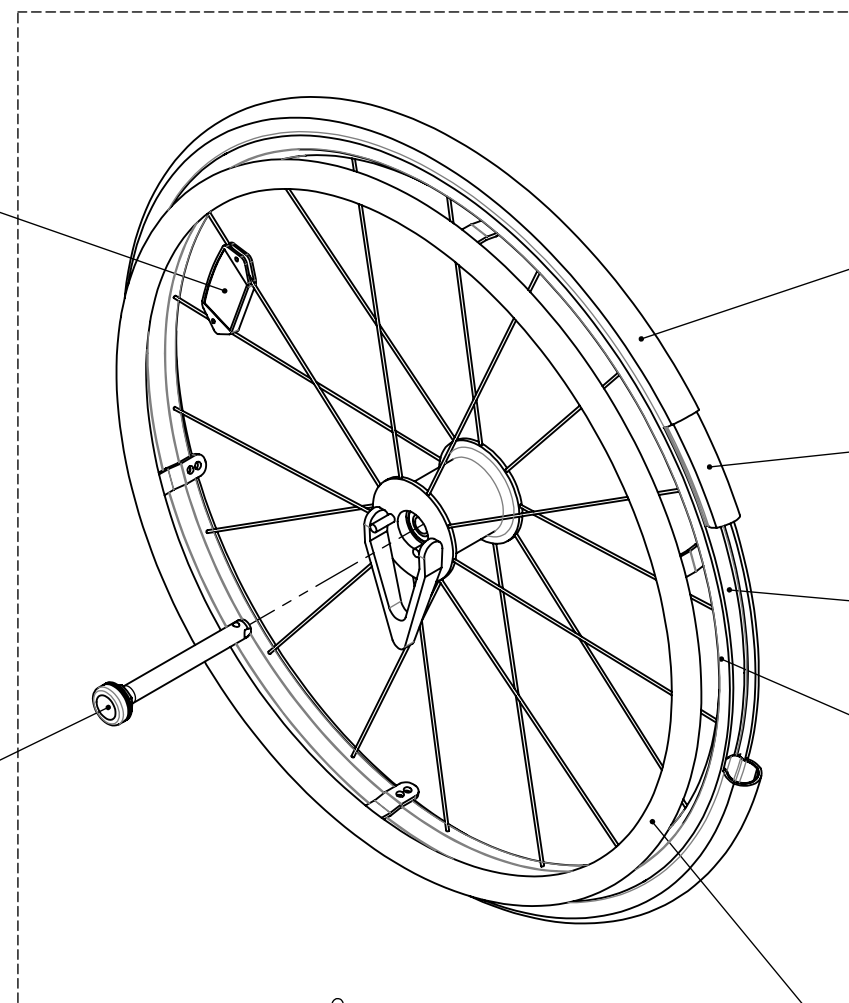

|     | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 02.400.2212             | 02.400.2322                  |
| 24" | 02.400.2425             | 02.400.2324                  |
| 26" | 02.400.2627             | 02.400.2326                  |


|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2215 |
| 24" | 02.400.2426 |
| 26" | 02.400.2628 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.400.2216 |
| 24" | 02.400.2427 |
| 26" | 02.400.2630 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 02.001.1319 |
| 24" | 02.001.1320 |
| 26" | 02.001.1321 |

|     | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 32.070.0320             | 32.070.0350                  |
| 24" | 32.070.0330             | 32.070.0360                  |
| 26" | 32.070.0340             | 32.070.0370                  |

|     | Standard              | Optionen / Options |                      |                          |
|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|     | Aluminium<br>Aluminum | Stahl<br>Steel     | Maxgrepp<br>Original | Maxgrepp<br>Ergo Para CP |
| 22" | 02.400.2223           | 02.402.2202        | 02.069.0051          | 02.069.0041              |
| 24" | 02.400.2424           | 02.402.2402        | 02.069.0050          | 02.069.0040              |
| 26" | 02.400.2629           | 02.402.2602        | 02.069.0052          | 02.069.0042              |

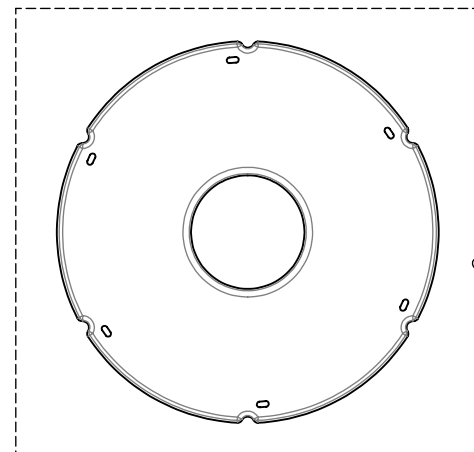

|     | transparent |
|-----|-------------|
| 22" | 02.066.1014 |
| 24" | 02.066.1015 |
| 26" | 02.066.1017 |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     | 30.01.2015           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 30.01.2015           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Rad zu Nabenfeststellbremse  
Wheel to hub locking brake

**LEVO**<sup>®</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.


**50.070.0730**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

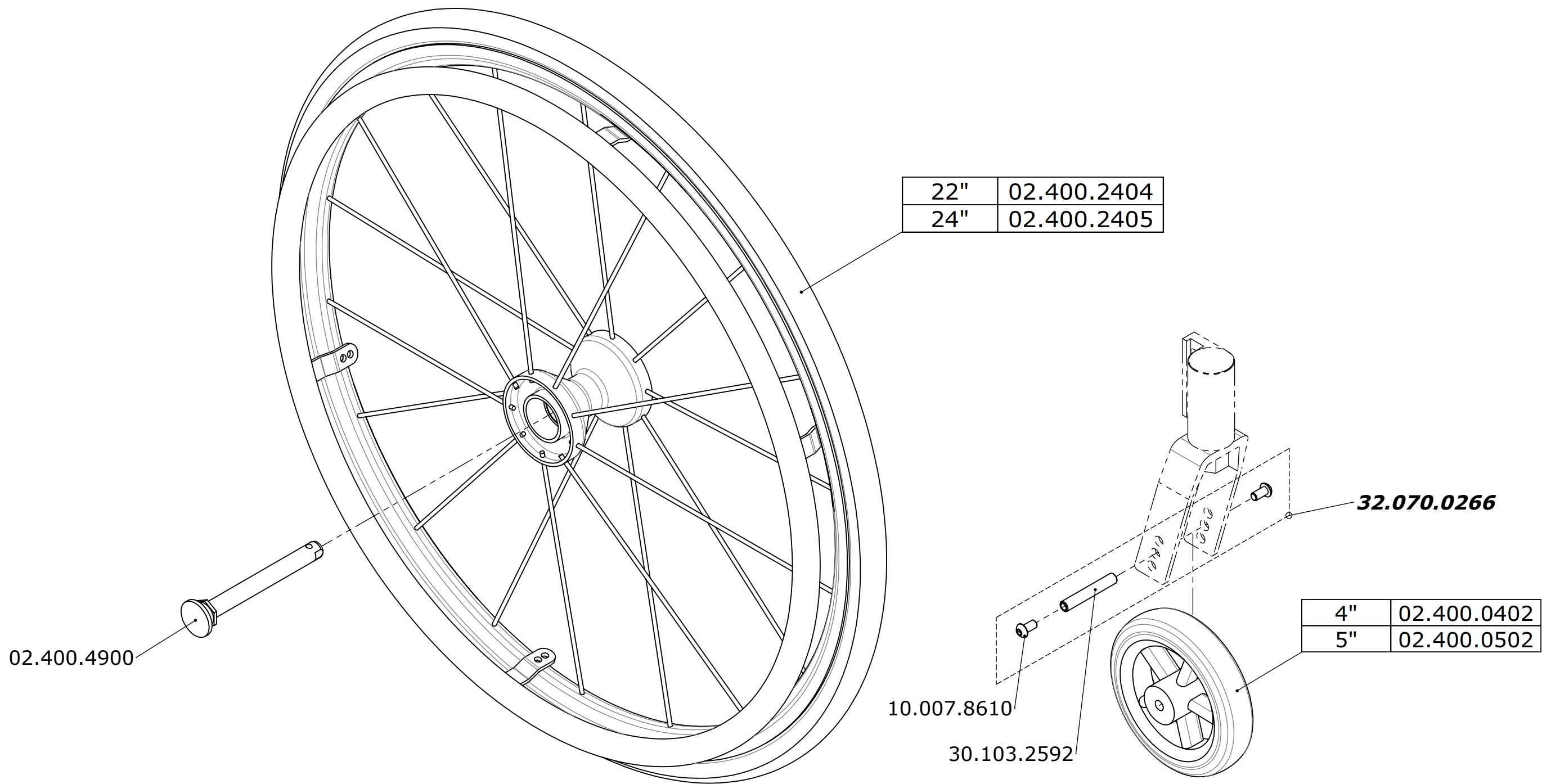


|                                                                                                                             |                      |    |                                                                                          |                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                                                                        | 13.03.2018           | PW | Benennung / Description<br><br>Rad-Satz Gewichts-Reduktion<br>Wheel kit weight reduction |                                              |                                                              |
| Geändert<br>Modified                                                                                                        | 23.04.2019           | PW |                                                                                          |                                              |                                                              |
| Gepr./Freig.<br>Approved                                                                                                    | 23.04.2019           | BB |                                                                                          |                                              |                                                              |
| Status<br>Status                                                                                                            | freigegeben/approved |    |                                                                                          |                                              |                                                              |
| <div>LEVO<sup>+</sup>.<sub>AG</sub><br/>THE EXPERTS IN STANDING</div> <div>LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div> |                      |    | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><br>LCEV                                                      | Artikelnummer<br>Art. no.<br><br>50.070.0750 | Blatt / Anz.<br>Sheet / no. of<br>1 / 1<br>Index / Rev.<br>A |




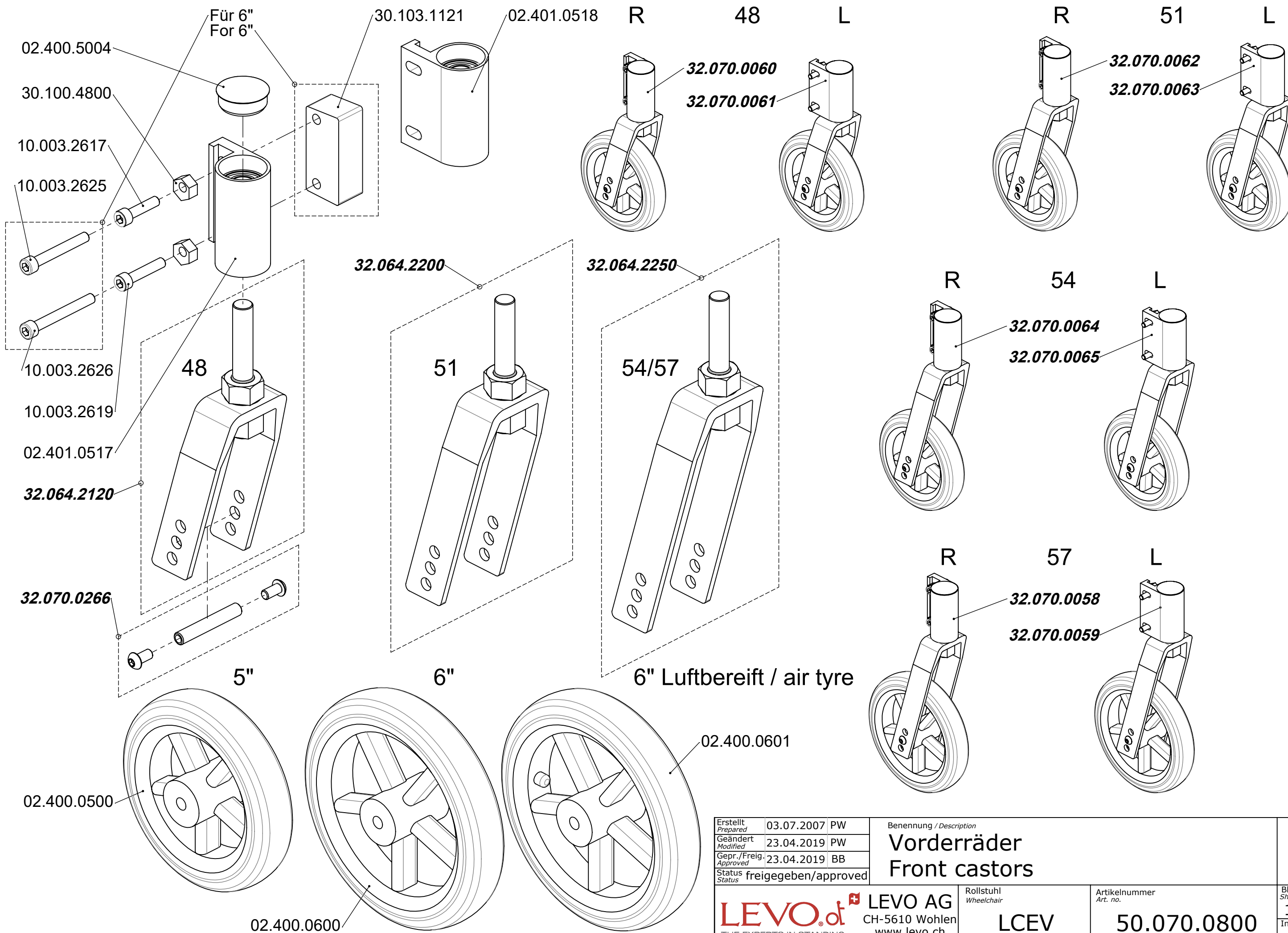

|                                                                               |                      |                                                                       |                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                          | 03.07.2007 PW        | Benennung / Description<br><b>Vorderräder</b><br><b>Front castors</b> |                                                 | Blatt / Anz.<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b> |
| Geändert<br>Modified                                                          | 23.04.2019 PW        |                                                                       |                                                 |                                                |
| Gepr./Freig.<br>Approved                                                      | 23.04.2019 BB        |                                                                       |                                                 |                                                |
| Status                                                                        | freigegeben/approved |                                                                       |                                                 |                                                |
| <b>LEVO</b> <small>dt</small> <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |                      | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><b>LCEV</b>                                | Artikelnummer<br>Art. no.<br><b>50.070.0800</b> | Index / Rev.<br><b>C</b>                       |

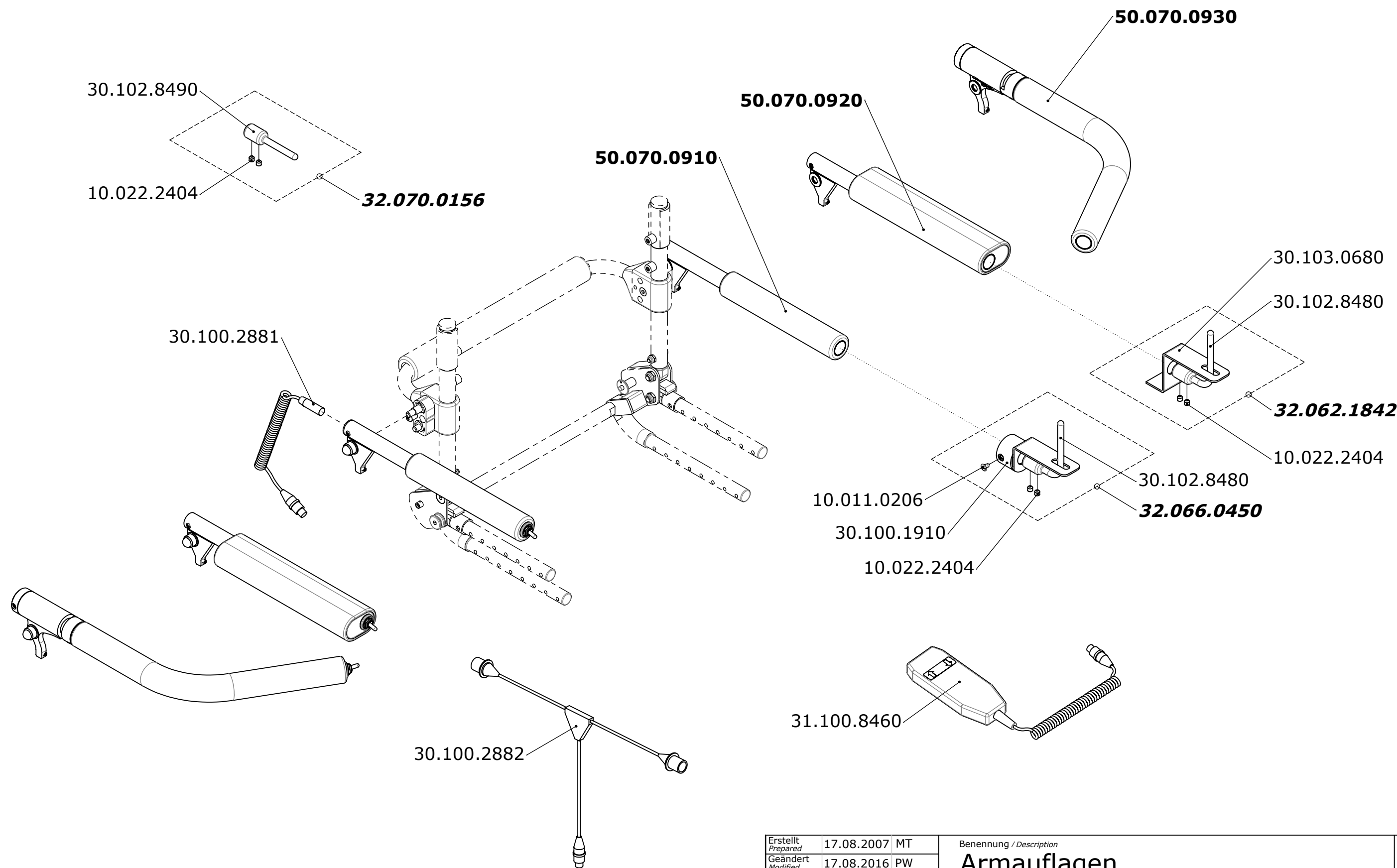

|                                                                   |                      |    |                                                                   |                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                       | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>Armauflagen<br>Arm supports |                                                     |                                                                                   |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                       | 17.08.2016           | PW |                                                                   |                                                     |                                                                                   |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                   | 17.08.2016           | FW |                                                                   |                                                     |                                                                                   |
| Status<br><i>Status</i>                                           | freigegeben/approved |    |                                                                   |                                                     |                                                                                   |
| <div>LEVO<sup>+</sup>.<i>ch</i><br/>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                        | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.0900 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1<br>Index / <i>Rev.</i><br><br>A |

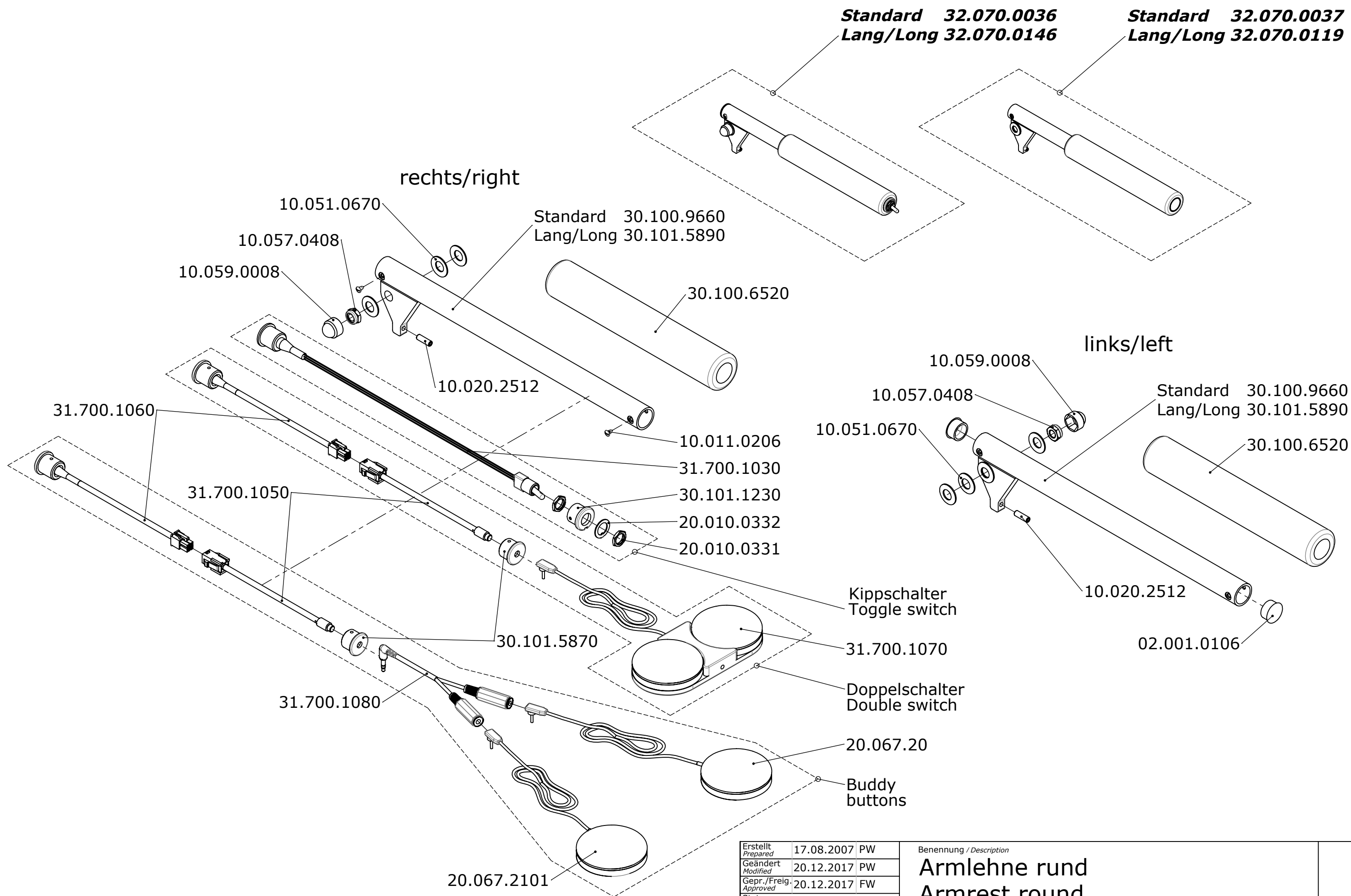

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 20.12.2017           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 20.12.2017           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description  
**Armlehne rund**  
**Armrest round**

**LEVO** <sup>dt</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING


**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair  
**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.  
**50.070.0910**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**D**



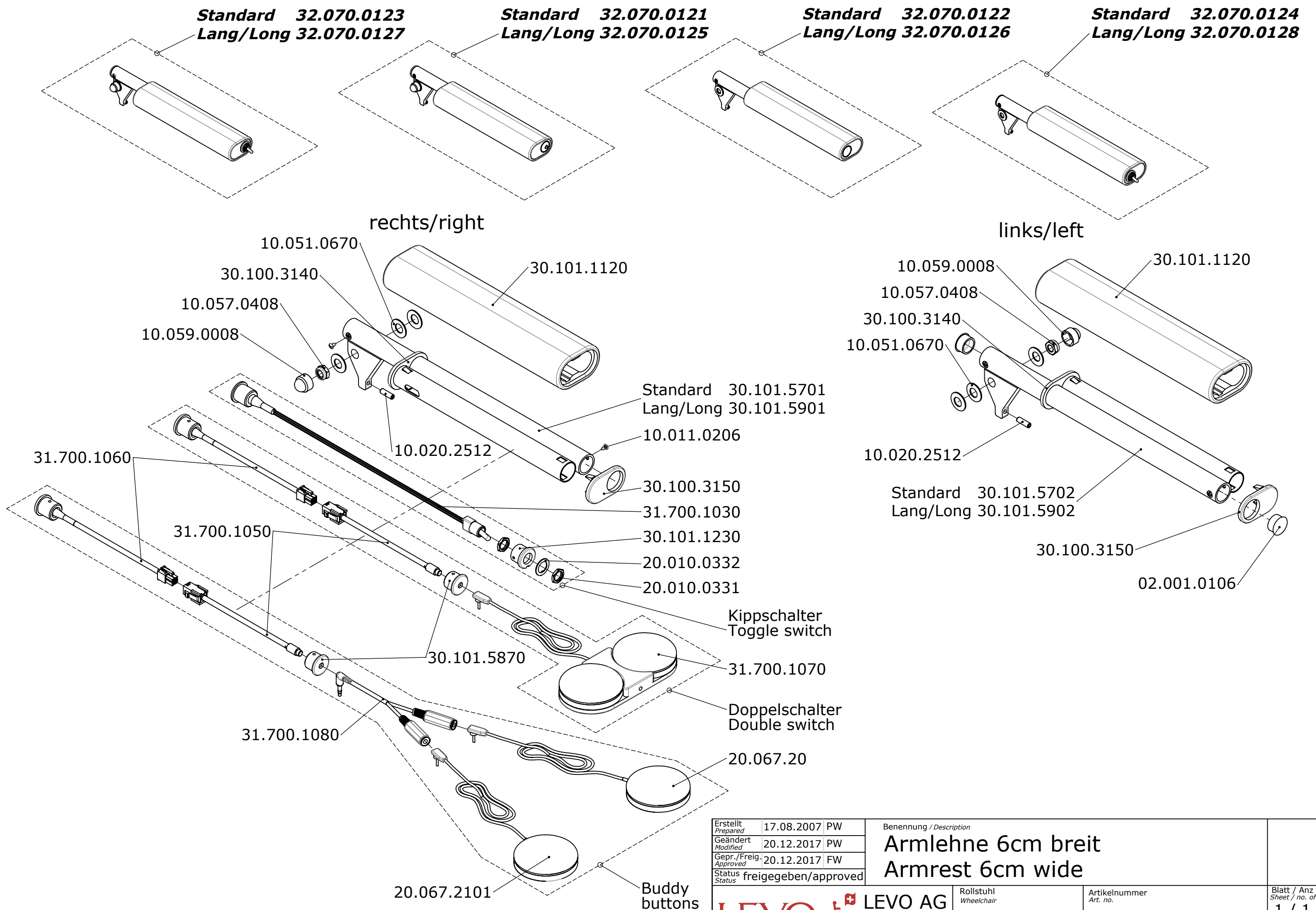

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 20.12.2017           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 20.12.2017           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

**LEVO** AG  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Benennung / Description

**Armlehne 6cm breit**  
**Armrest 6cm wide**

Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.





**50.070.0920**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**



rechts/right

links/left

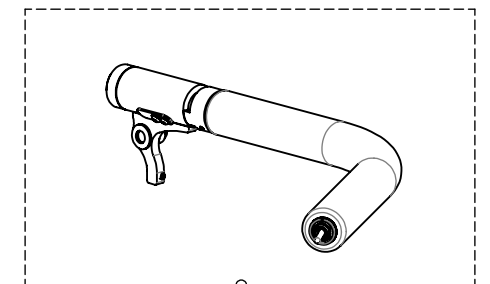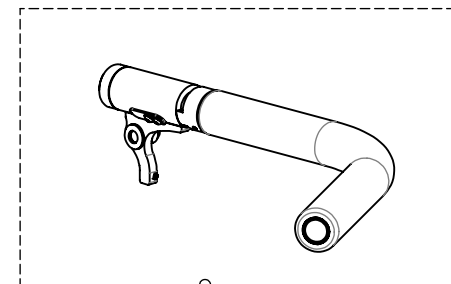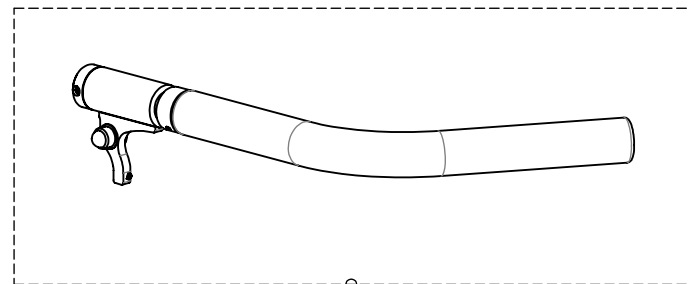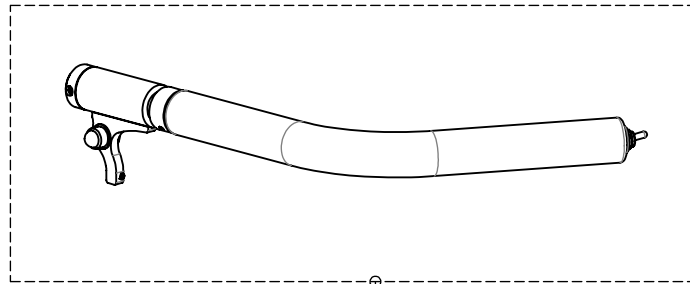


| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| 27 cm          | 32.070.0085 |
| 32 cm          | 32.070.0095 |
| 37 cm          | 32.070.0105 |

| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| 27 cm          | 32.070.0083 |
| 32 cm          | 32.070.0093 |
| 37 cm          | 32.070.0103 |

| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| 27 cm          | 32.070.0084 |
| 32 cm          | 32.070.0094 |
| 37 cm          | 32.070.0104 |

| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| 27 cm          | 32.070.0086 |
| 32 cm          | 32.070.0096 |
| 37 cm          | 32.070.0106 |

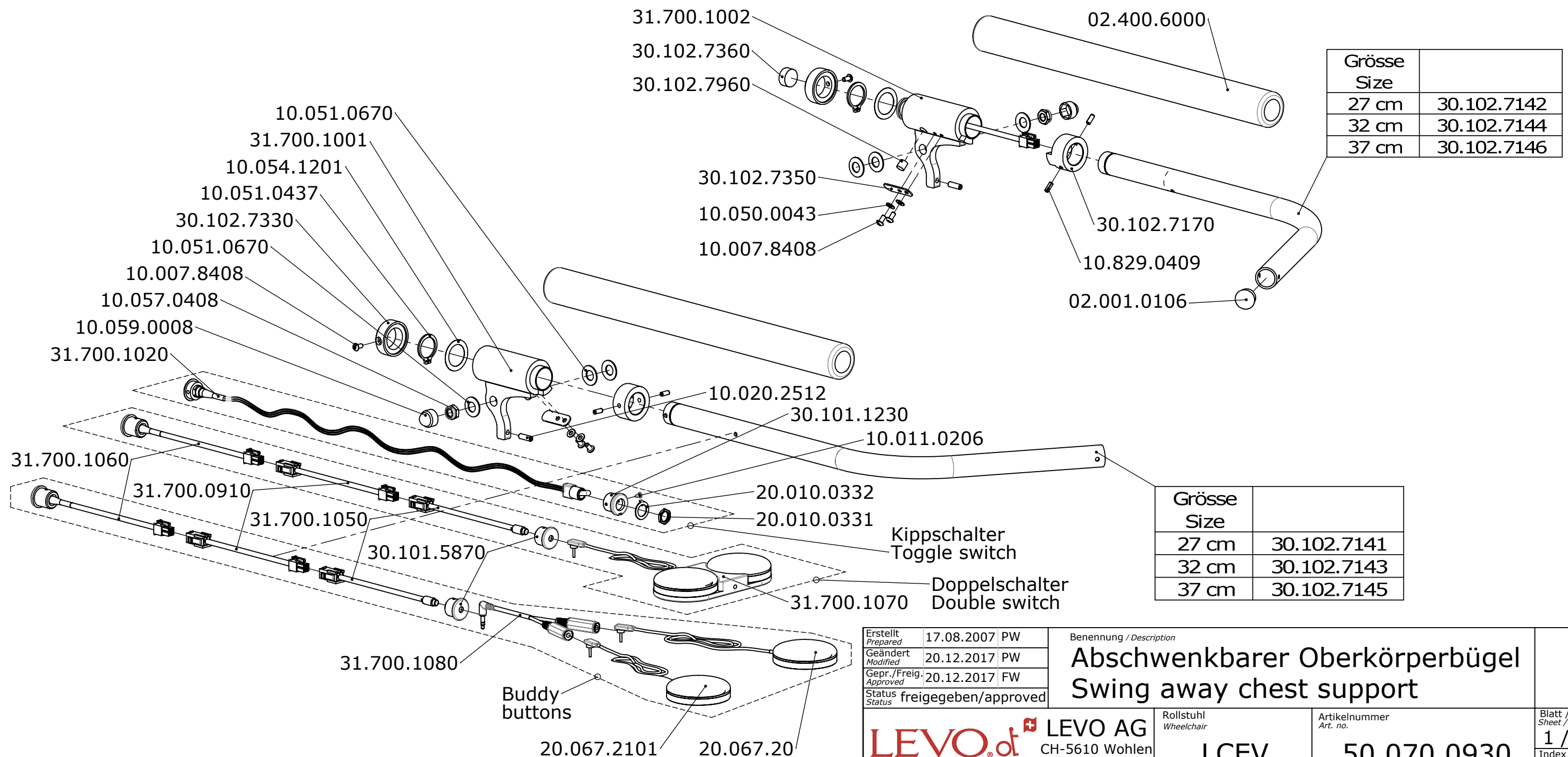

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 20.12.2017           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 20.12.2017           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Abschwenkbarer Oberkörperbügel  
Swing away chest support

**LEVO** <sup>dt</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch





Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.0930**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**A**

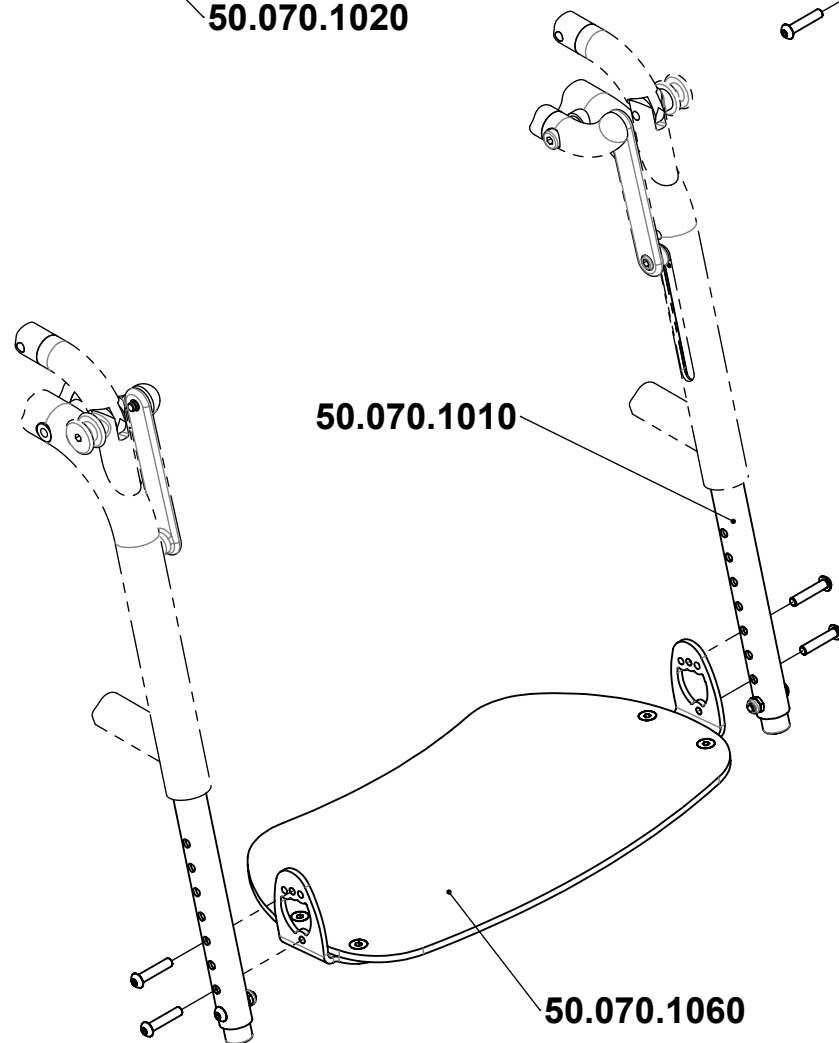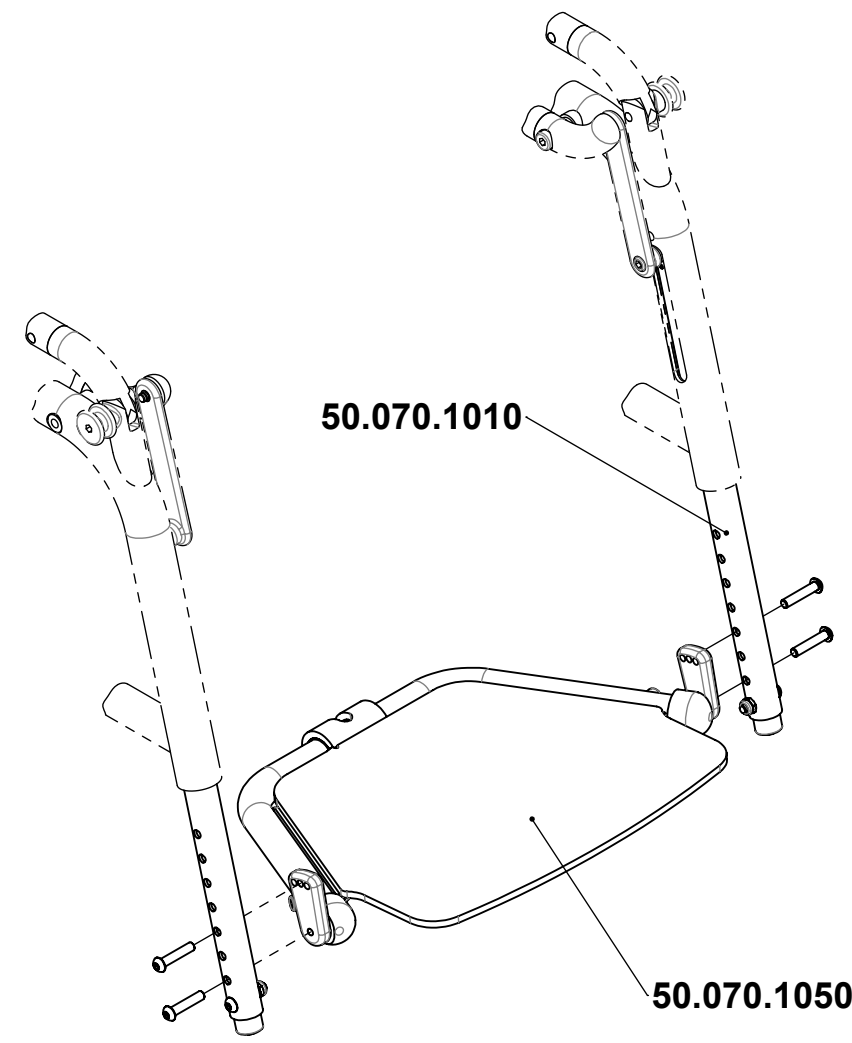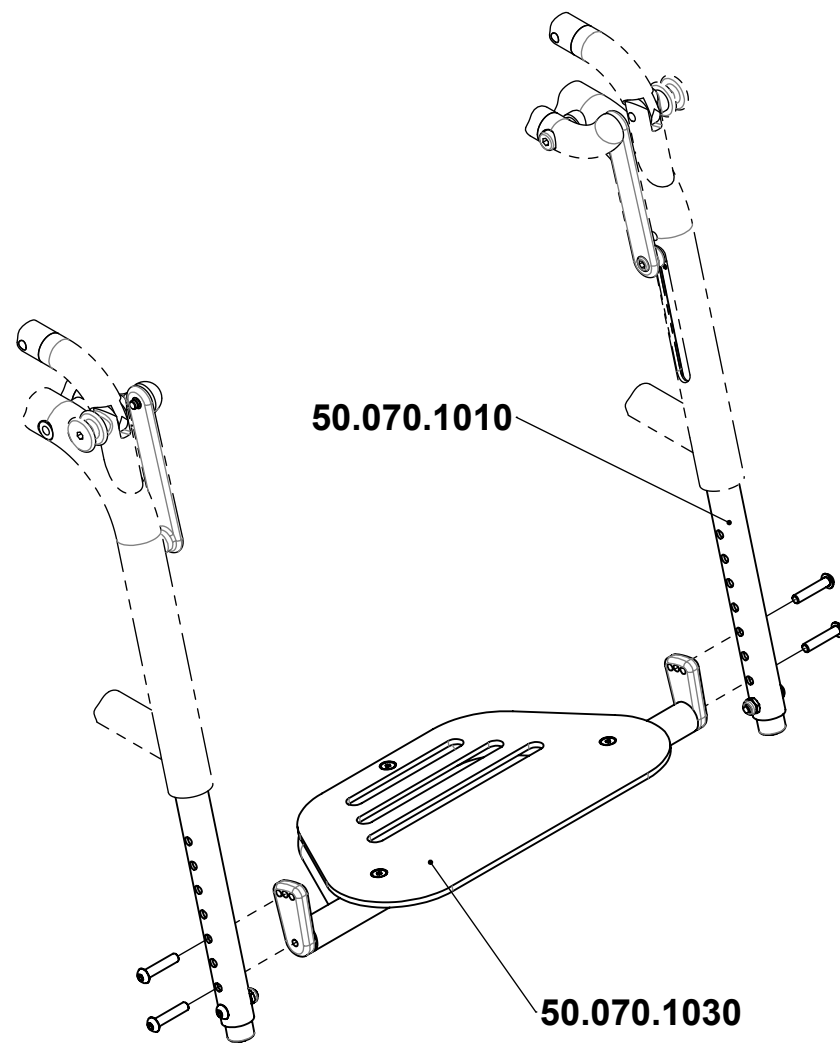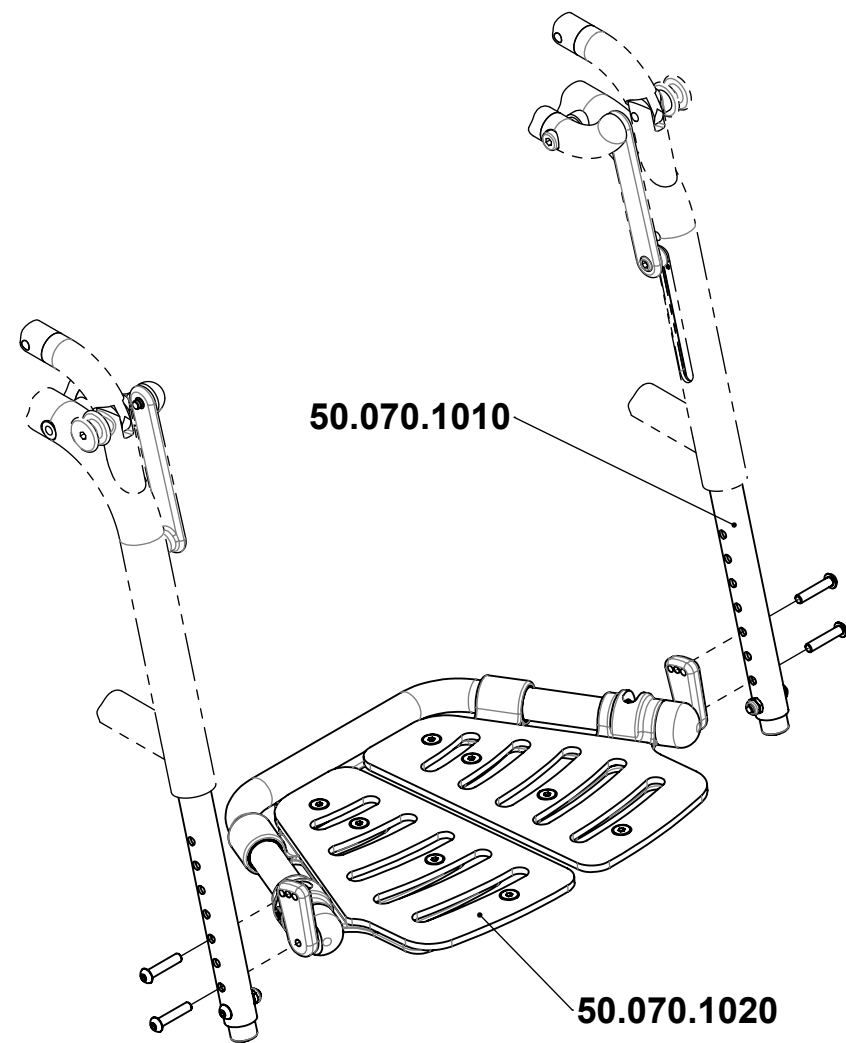

|                          |                           |    |
|--------------------------|---------------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007                | MT |
| Geändert<br>Modified     | 27.06.2013                | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 27.06.2013                | BM |
| Status                   | in Bearbeitung/in process |    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Benennung / Description      |  |
| Beinstützen und Fussauflagen |  |
| Legrests and Footrests       |  |


**LEVO**  **LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch  
THE EXPERTS IN STANDING

Rollstuhl  
Wheelchair  
**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.  
**50.070.1000**


Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

Beinstütze fix  
fixed legrest

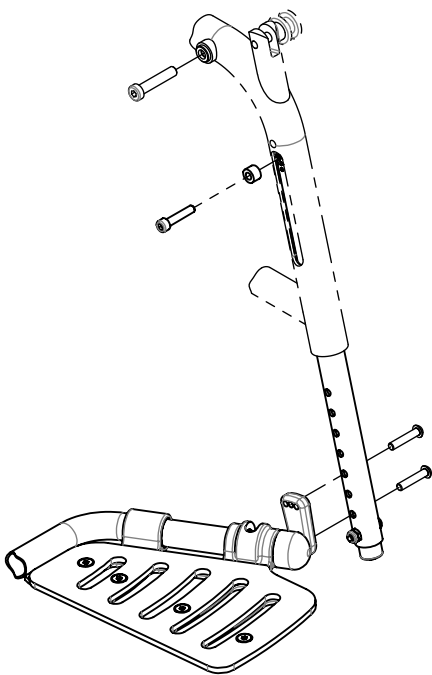


| <i><b>Sitzhöhe</b></i><br><i><b>Seat height</b></i> |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>48</b>                                           | <b>32.069.33</b> |
| <b>51</b>                                           | <b>32.069.34</b> |
| <b>54</b>                                           | <b>32.069.35</b> |
| <b>57</b>                                           | <b>32.069.36</b> |

| <i><b>Sitzhöhe</b></i><br><i><b>Seat height</b></i> |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>48</b>                                           | <b>30.100.7110</b> |
| <b>51</b>                                           | <b>30.100.7560</b> |
| <b>54</b>                                           | <b>30.100.6650</b> |
| <b>57</b>                                           | <b>30.100.7170</b> |

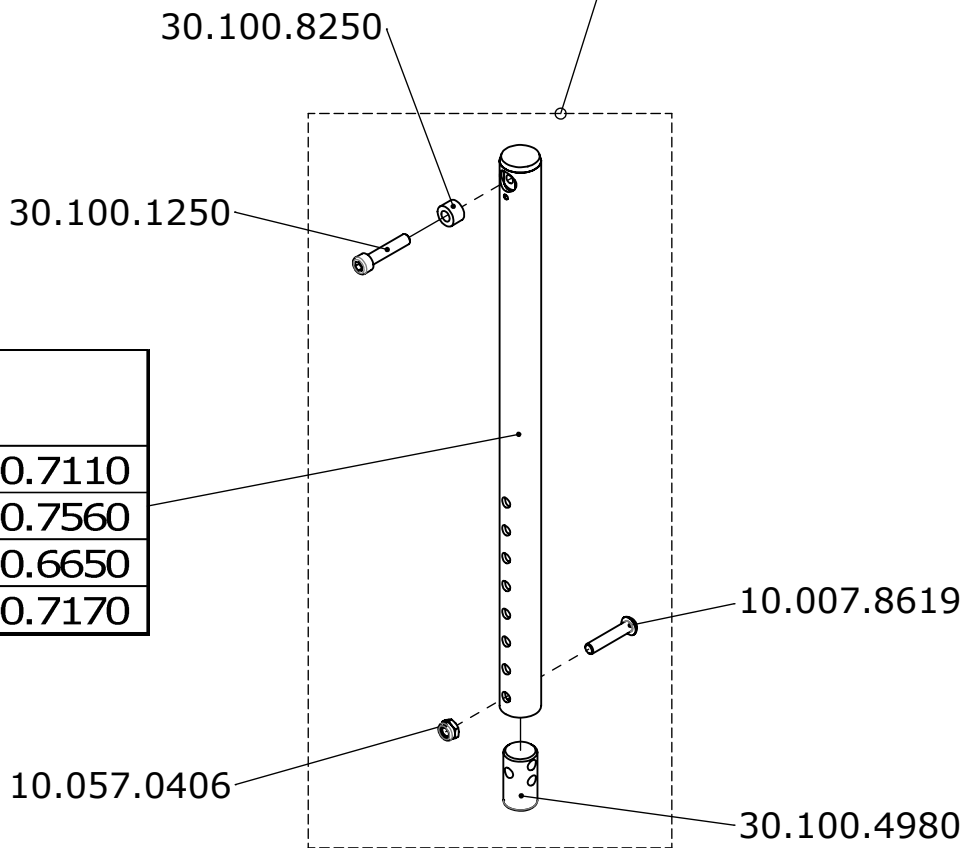


abnehmbare Beinstütze  
removable legrest

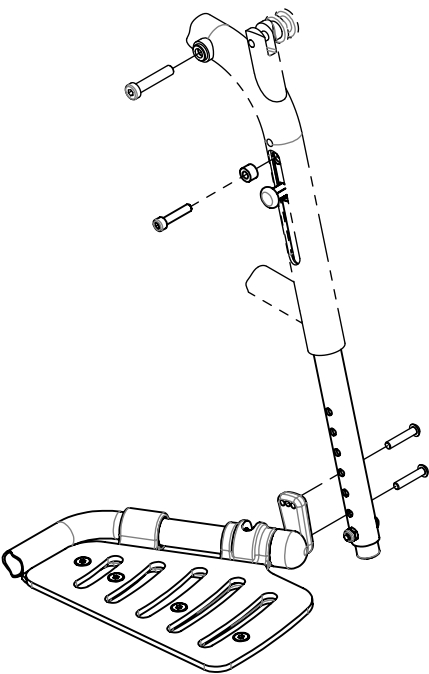

| <i><b>Sitzhöhe</b></i><br><i><b>Seat height</b></i> |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>48</b>                                           | <b>32.069.51</b> |
| <b>51</b>                                           | <b>32.069.52</b> |
| <b>54</b>                                           | <b>32.069.53</b> |
| <b>57</b>                                           | <b>32.069.54</b> |


| <i><b>Sitzhöhe</b></i><br><i><b>Seat height</b></i> |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>48</b>                                           | <b>30.100.3560</b> |
| <b>51</b>                                           | <b>30.100.2430</b> |
| <b>54</b>                                           | <b>30.100.3580</b> |
| <b>57</b>                                           | <b>30.100.3590</b> |

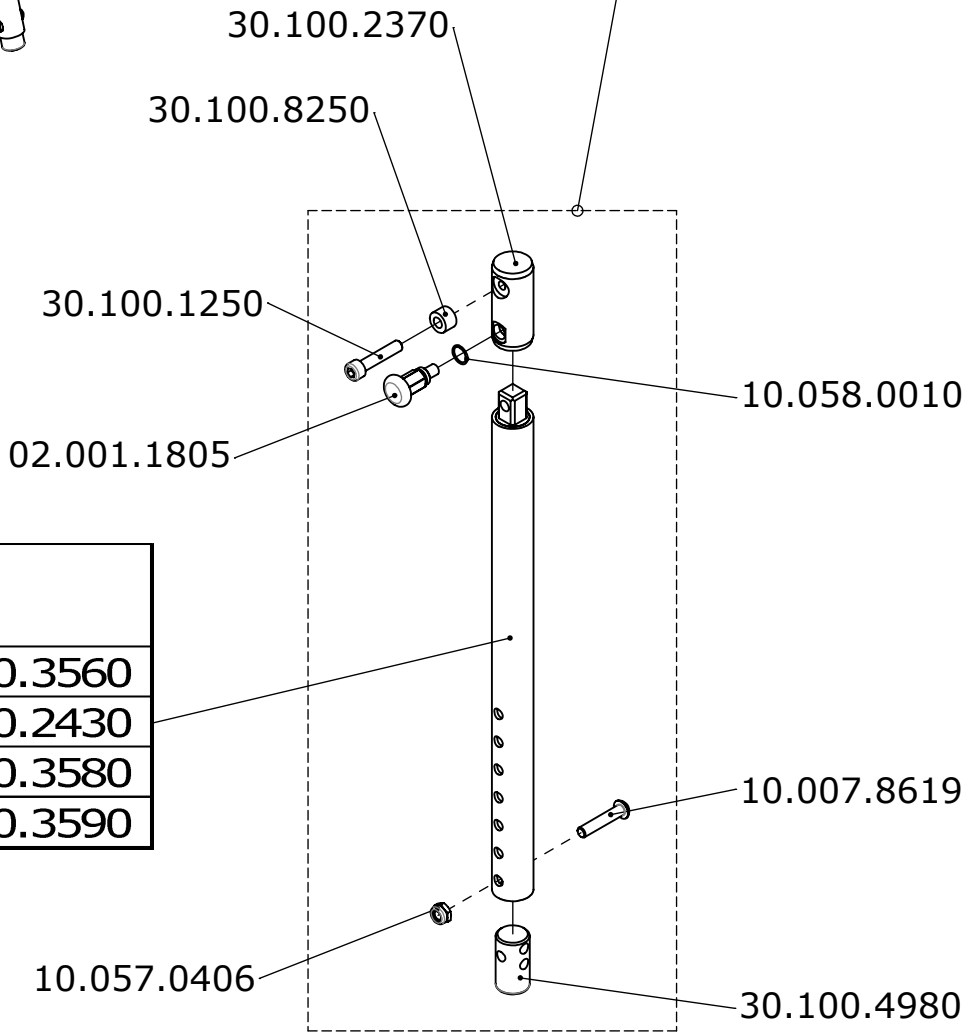

|                                                                                                                                       |                      |    |                                                                       |                                                            |                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                           | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Beinstützen<br/>Legrests</b> |                                                            |                                                                                  |  |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                           |                      | -  |                                                                       |                                                            |                                                                                  |  |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                       | 30.04.2008           | TN |                                                                       |                                                            |                                                                                  |  |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                               | freigegeben/approved |    |                                                                       |                                                            |                                                                                  |  |
|  <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br><b>LCEV</b>                     | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br><b>50.070.1010</b> | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / <i>Rev.</i><br>- |  |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.102.9831                |
| 38                       | 30.102.9832                |
| 40                       | 30.102.9833                |
| 42                       | 30.102.9834                |
| 45                       | 30.102.9835                |
| 48                       | 30.102.9836                |
| 50                       | 30.102.9837                |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.102.9511                |
| 38                       | 30.102.9512                |
| 40                       | 30.102.9513                |
| 42                       | 30.102.9514                |
| 45                       | 30.102.9515                |
| 48                       | 30.102.9516                |
| 50                       | 30.102.9517                |

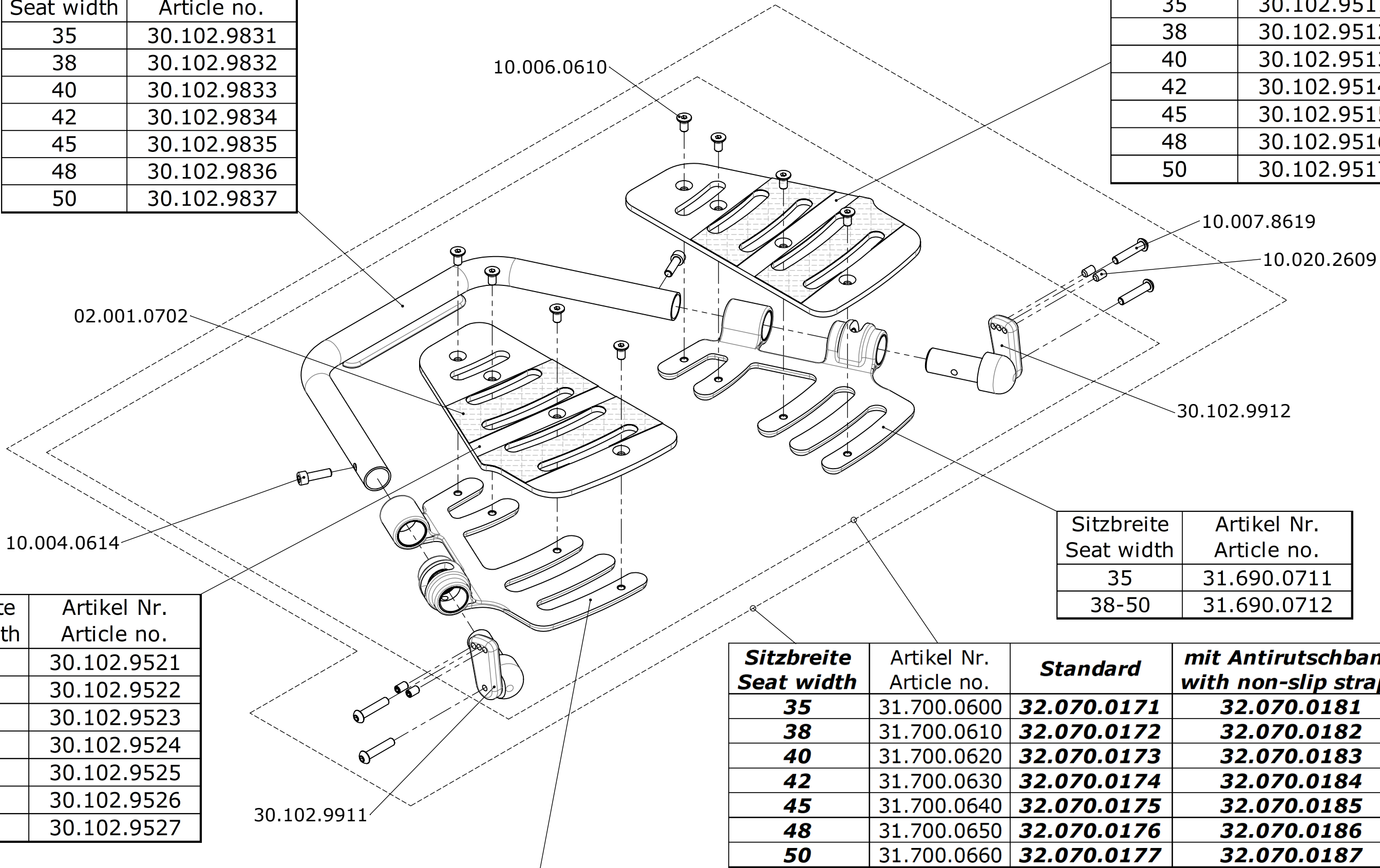

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.102.9521                |
| 38                       | 30.102.9522                |
| 40                       | 30.102.9523                |
| 42                       | 30.102.9524                |
| 45                       | 30.102.9525                |
| 48                       | 30.102.9526                |
| 50                       | 30.102.9527                |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 31.690.0711                |
| 38-50                    | 31.690.0712                |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 31.690.0701                |
| 38-50                    | 31.690.0702                |

| <b>Sitzbreite<br/>Seat width</b> | Artikel Nr.<br>Article no. | <b>Standard</b>    | <b>mit Antirutschband<br/>with non-slip straps</b> |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>35</b>                        | 31.700.0600                | <b>32.070.0171</b> | <b>32.070.0181</b>                                 |
| <b>38</b>                        | 31.700.0610                | <b>32.070.0172</b> | <b>32.070.0182</b>                                 |
| <b>40</b>                        | 31.700.0620                | <b>32.070.0173</b> | <b>32.070.0183</b>                                 |
| <b>42</b>                        | 31.700.0630                | <b>32.070.0174</b> | <b>32.070.0184</b>                                 |
| <b>45</b>                        | 31.700.0640                | <b>32.070.0175</b> | <b>32.070.0185</b>                                 |
| <b>48</b>                        | 31.700.0650                | <b>32.070.0176</b> | <b>32.070.0186</b>                                 |
| <b>50</b>                        | 31.700.0660                | <b>32.070.0177</b> | <b>32.070.0187</b>                                 |


|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     | 02.11.2009           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 02.11.2008           | TN |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description  
**Fussauflage 2-teilig hochklappbar**  
**Two-piece flip-up footrest**



| Sitzbreite<br>Seat width | Artikelnummer<br>Article no. |
|--------------------------|------------------------------|
| 35                       | 30.100.7430                  |
| 38                       |                              |
| 40                       | 30.100.7470                  |
| 42                       | 30.100.7410                  |
| 45                       | 30.100.7420                  |
| 48                       |                              |
| 50                       |                              |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikelnummer<br>Article no. |
|--------------------------|------------------------------|
| 35                       | 30.101.6100                  |
| 38                       | 30.100.7340                  |
| 40                       | 30.100.7360                  |
| 42                       | 30.100.7380                  |
| 45                       | 30.100.7400                  |
| 48                       | 30.100.8330                  |
| 50                       | 30.102.2520                  |

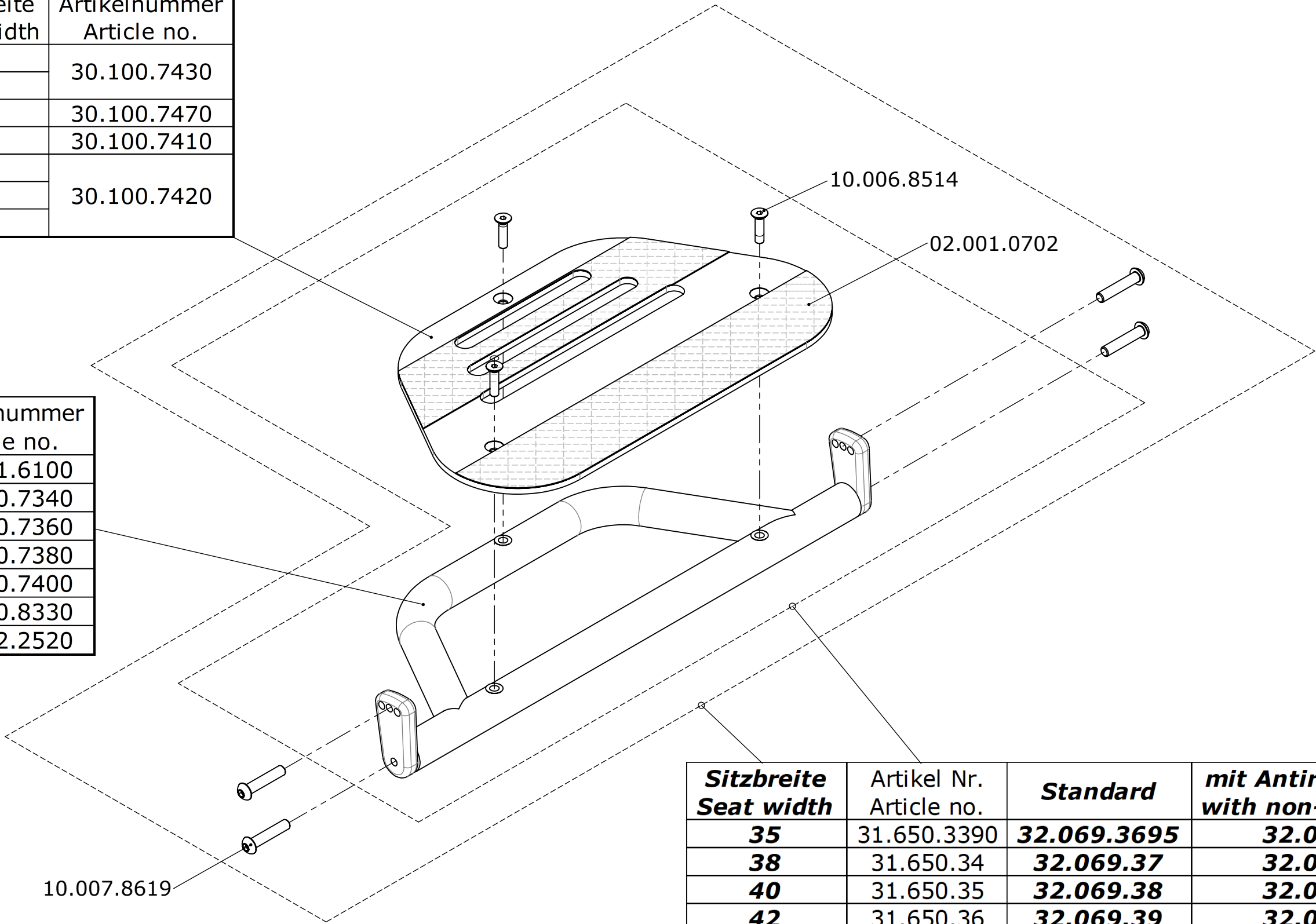


| <b>Sitzbreite<br/>Seat width</b> | Artikel Nr.<br>Article no. | <b>Standard</b>    | <b>mit Antirutschband<br/>with non-slip straps</b> |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>35</b>                        | 31.650.3390                | <b>32.069.3695</b> | <b>32.069.89</b>                                   |
| <b>38</b>                        | 31.650.34                  | <b>32.069.37</b>   | <b>32.069.90</b>                                   |
| <b>40</b>                        | 31.650.35                  | <b>32.069.38</b>   | <b>32.069.91</b>                                   |
| <b>42</b>                        | 31.650.36                  | <b>32.069.39</b>   | <b>32.069.92</b>                                   |
| <b>45</b>                        | 31.650.37                  | <b>32.069.40</b>   | <b>32.069.93</b>                                   |
| <b>48</b>                        | 31.650.38                  | <b>32.065.40</b>   | <b>32.065.69</b>                                   |
| <b>50</b>                        | 31.650.39                  | <b>32.065.4005</b> | <b>32.065.4015</b>                                 |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     |                      | -  |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 30.04.2008           | TN |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description  
**Fussauflage einteilig starr**  
**One-piece footrest fix**

|                                        |                                                 |                                        |                                                 |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LEVO</b><br>THE EXPERTS IN STANDING | <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><b>LCEV</b> | Artikelnummer<br>Art. no.<br><b>50.070.1030</b> | Blatt / Anz.<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b> |
|                                        |                                                 |                                        |                                                 | Index / Rev.<br>-                              |

X : (1 : 1)

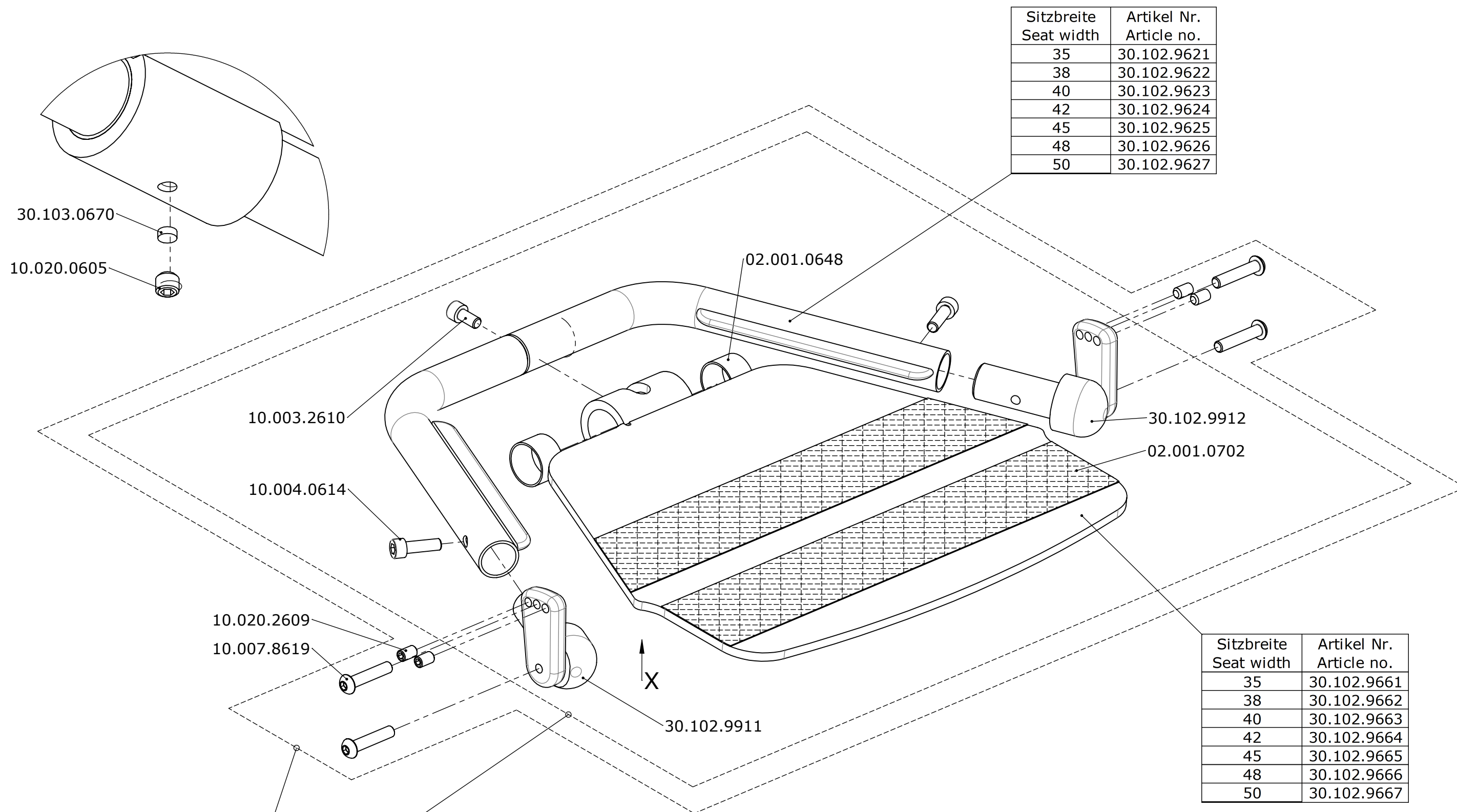


| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.102.9621                |
| 38                       | 30.102.9622                |
| 40                       | 30.102.9623                |
| 42                       | 30.102.9624                |
| 45                       | 30.102.9625                |
| 48                       | 30.102.9626                |
| 50                       | 30.102.9627                |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.102.9661                |
| 38                       | 30.102.9662                |
| 40                       | 30.102.9663                |
| 42                       | 30.102.9664                |
| 45                       | 30.102.9665                |
| 48                       | 30.102.9666                |
| 50                       | 30.102.9667                |

| <b>Sitzbreite<br/>Seat width</b> | <b>Artikel Nr.<br/>Article no.</b> | <b>Standard</b>    | <b>mit Antirutschband<br/>with non-slip straps</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>35</b>                        | 31.700.0700                        | <b>32.070.0511</b> | <b>32.070.0521</b>                                 |
| <b>38</b>                        | 31.700.0710                        | <b>32.070.0512</b> | <b>32.070.0522</b>                                 |
| <b>40</b>                        | 31.700.0720                        | <b>32.070.0513</b> | <b>32.070.0523</b>                                 |
| <b>42</b>                        | 31.700.0730                        | <b>32.070.0514</b> | <b>32.070.0524</b>                                 |
| <b>45</b>                        | 31.700.0740                        | <b>32.070.0515</b> | <b>32.070.0525</b>                                 |
| <b>48</b>                        | 31.700.0750                        | <b>32.070.0516</b> | <b>32.070.0526</b>                                 |
| <b>50</b>                        | 31.700.0760                        | <b>32.070.0517</b> | <b>32.070.0527</b>                                 |


|                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                |                                                                                                       |                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                      | 20.05.2010                                                                                                                     | PW                             | Benennung / <i>Description</i><br><br>Fussauflage 1-teilig hochklappbar<br>One-piece flip-up footrest |                                  |  |  |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                      | 18.02.2011                                                                                                                     | PW                             |                                                                                                       |                                  |  |  |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                  | 18.02.2011                                                                                                                     | BM                             |                                                                                                       |                                  |  |  |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                          | freigegeben/approved                                                                                                           |                                |                                                                                                       |                                  |  |  |
| <br>THE EXPERTS IN STANDING |  LEVO AG<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i> | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i>                                                                      | Blatt / An<br><i>Sheet / no.</i> |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                | LCEV                           | 50.070.1050                                                                                           | 1 / 1<br>Index / <i>Re</i><br>A  |  |  |

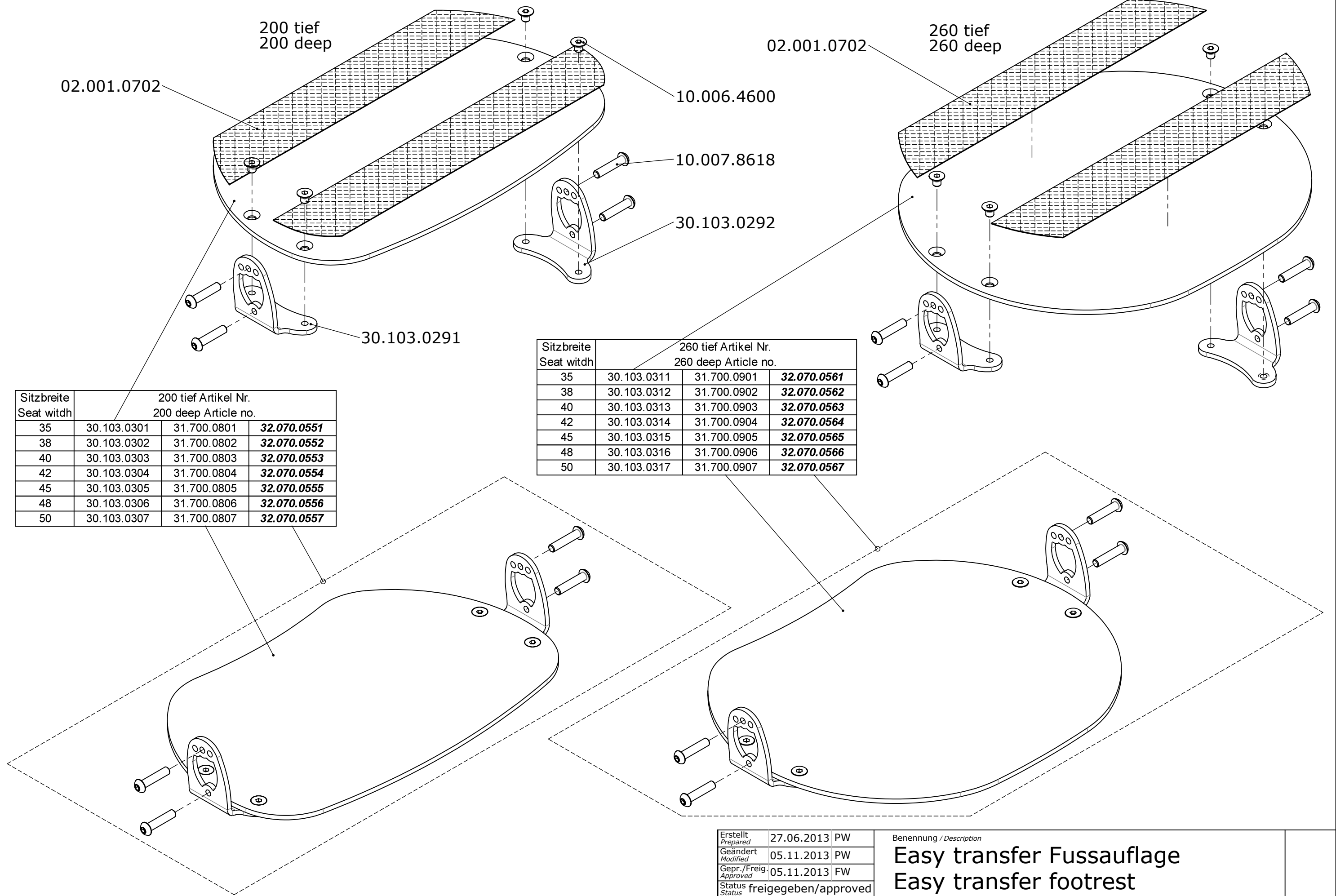

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 27.06.2013           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 05.11.2013           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 05.11.2013           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

|                                                     |                                     |                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benennung / Description                             |                                     |                                              |                                                              |
| Easy transfer Fussauflage<br>Easy transfer footrest |                                     |                                              |                                                              |
| EVO AG<br>-5610 Wohlen<br>www.levo.ch               | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><br>LCEV | Artikelnummer<br>Art. no.<br><br>50.070.1060 | Blatt / Anz.<br>Sheet / no. of<br>1 / 1<br>Index / Rev.<br>C |



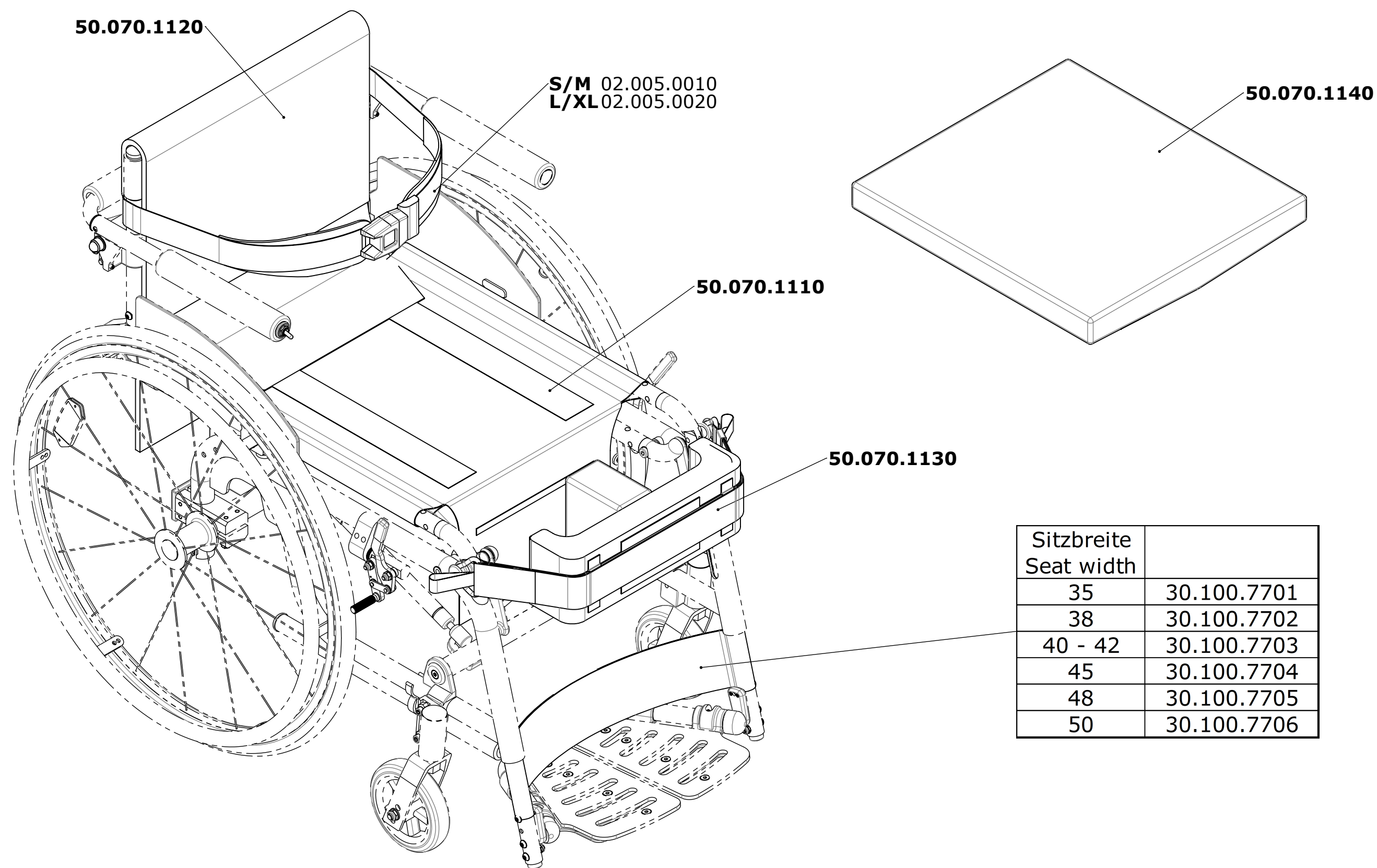


| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.100.7701 |
| 38                       | 30.100.7702 |
| 40 - 42                  | 30.100.7703 |
| 45                       | 30.100.7704 |
| 48                       | 30.100.7705 |
| 50                       | 30.100.7706 |





| Grösse<br>Size | Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| S/M            | 35                       | 32.069.0046                |
|                | 38 - 40                  | 32.069.0023                |
|                | 42                       | 32.069.0024                |
|                | 45 - 48                  | 32.069.0025                |
|                | 50                       | 32.069.0052                |
| L/LX           | 35                       | 32.069.0048                |
|                | 38 - 40                  | 32.069.0029                |
|                | 42                       | 32.069.0030                |
|                | 45 - 48                  | 32.069.0031                |
|                | 50                       | 32.069.0049                |

| Grösse<br>Size | Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| S/M            | 35                       | 30.101.5154                |
|                | 38 - 40                  | 30.101.5151                |
|                | 42                       | 30.101.5152                |
|                | 45 - 48                  | 30.101.5153                |
|                | 50                       | 30.101.5155                |
| L/LX           | 35                       | 30.101.3444                |
|                | 38 - 40                  | 30.101.3441                |
|                | 42                       | 30.101.3442                |
|                | 45 - 48                  | 30.101.3443                |
|                | 50                       | 30.101.3446                |

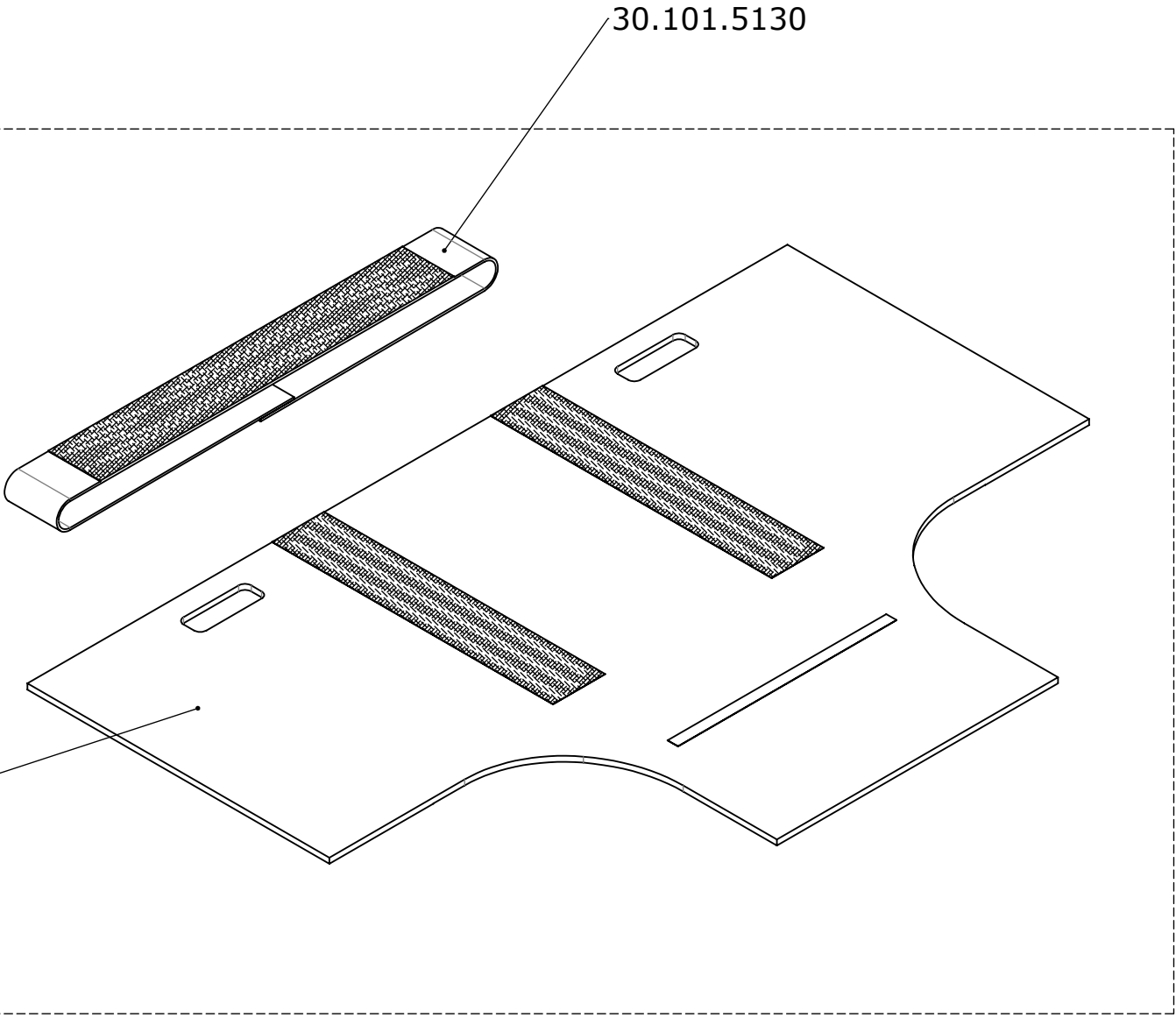

|                                                                      |                      |    |                                                                       |                                            |                                                     |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                 | 17.08.2007           | MT | Benennung / Description<br><div>Sitzpolster<br/>Seat upholstery</div> |                                            |                                                     |                                                                                 |
| Geändert<br>Modified                                                 |                      | -  |                                                                       |                                            |                                                     |                                                                                 |
| Gepr./Freig.<br>Approved                                             | 30.04.2008           | TN |                                                                       |                                            |                                                     |                                                                                 |
| Status<br>Status                                                     | freigegeben/approved |    |                                                                       |                                            |                                                     |                                                                                 |
| <div>LEVO<sup>®</sup>.<sup>+</sup><br/>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | <div>LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div>                 | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><div>LCEV</div> | Artikelnummer<br>Art. no.<br><div>50.070.1110</div> | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><div>1 / 1</div> <div>Index / Rev.<br/>-</div> |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|----------------------------|
| 35                       | 30.101.3384                |
| 38 - 40                  | 30.101.3381                |
| 42                       | 30.101.3382                |
| 45 - 48                  | 30.101.3383                |
| 50                       | 30.101.3386                |

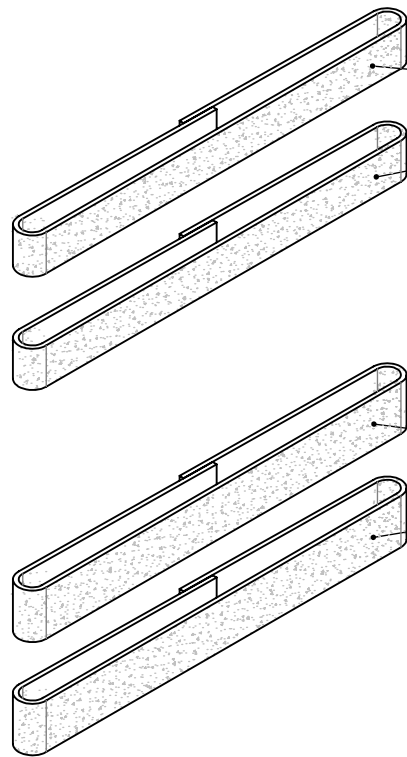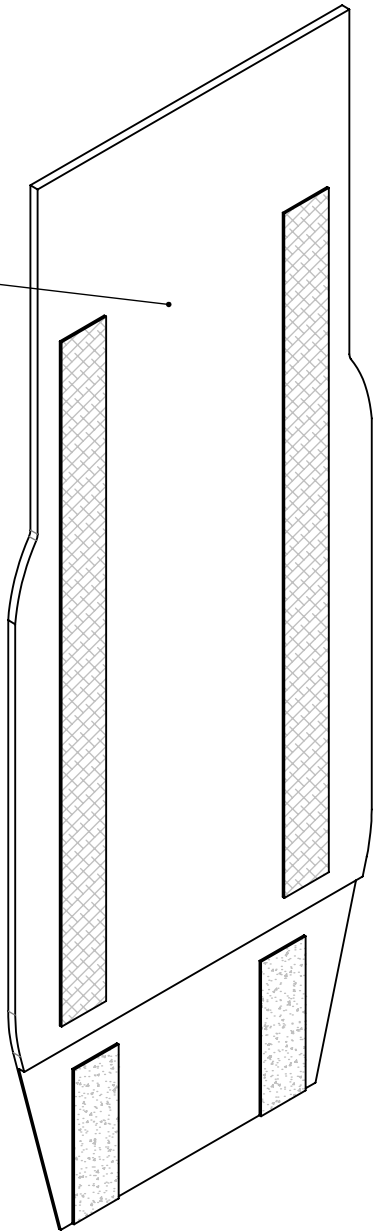

| Sitzbreite<br>Seat width | Gurt 40<br>Strap 40 |
|--------------------------|---------------------|
| 35 - 48                  | 30.101.3402         |
| 50                       | 30.101.3404         |


| Sitzbreite<br>Seat width | Gurt 50<br>Strap 50 |
|--------------------------|---------------------|
| 35 - 48                  | 30.101.3401         |
| 50                       | 30.101.3403         |

| Rückenpolsterhöhe<br>Backrest height | Gurt 40<br>Strap 40<br>[Stk./pcs.] | Gurt 50<br>Strap 50<br>[Stk./pcs.] |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 31                                   | 2                                  | 2                                  |
| 33                                   | 3                                  | 2                                  |
| 35                                   | 3                                  | 2                                  |
| 37                                   | 2                                  | 3                                  |
| 39                                   | 4                                  | 2                                  |
| 41                                   | 2                                  | 4                                  |

|                                                                  |  |  |                                                                                            |  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Erstellt<br/><i>Prepared</i></div> 12.09.2007PW             |  |  | <div>Benennung / <i>Description</i></div> <div>Rückenpolster<br/>Backrest upholstery</div> |  | <div>Blatt / Anz<br/><i>Sheet / no. of</i></div> <div>1 / 1</div> <div>Index / <i>Rev.</i></div> <div>-</div> |
| <div>Geändert<br/><i>Modified</i></div>                          |  |  |                                                                                            |  |                                                                                                               |
| <div>Gepr./Freig.<br/><i>Approved</i></div> 30.04.2008TN         |  |  |                                                                                            |  |                                                                                                               |
| <div>Status<br/><i>Status</i></div> freigegeben/approved         |  |  |                                                                                            |  |                                                                                                               |
| <div>LEVO<sup>®</sup>dt</div> <div>THE EXPERTS IN STANDING</div> |  |  | <div>LEVO AG</div> <div>CH-5610 Wohlen</div> <div>www.levo.ch</div>                        |  | <div>Rollstuhl<br/><i>Wheelchair</i></div> <div>LCEV</div>                                                    |
|                                                                  |  |  | <div>Artikelnummer<br/><i>Art. no.</i></div> <div>50.070.1120</div>                        |  |                                                                                                               |

| Dimension | Art.-Nr. Art.-no. |
|-----------|-------------------|
| 50x100    | 30.101.5391       |
| 60x100    | 30.101.5392       |
| 80x100    | 30.101.5393       |
| 50x150    | 30.101.5394       |
| 80x150    | 30.101.5395       |

| Dimension   | Art.-Nr. Art.-no. |
|-------------|-------------------|
| 50-100x100  | 30.101.8221       |
| 90-140x100  | 30.101.8222       |
| 130-180x100 | 30.101.8223       |

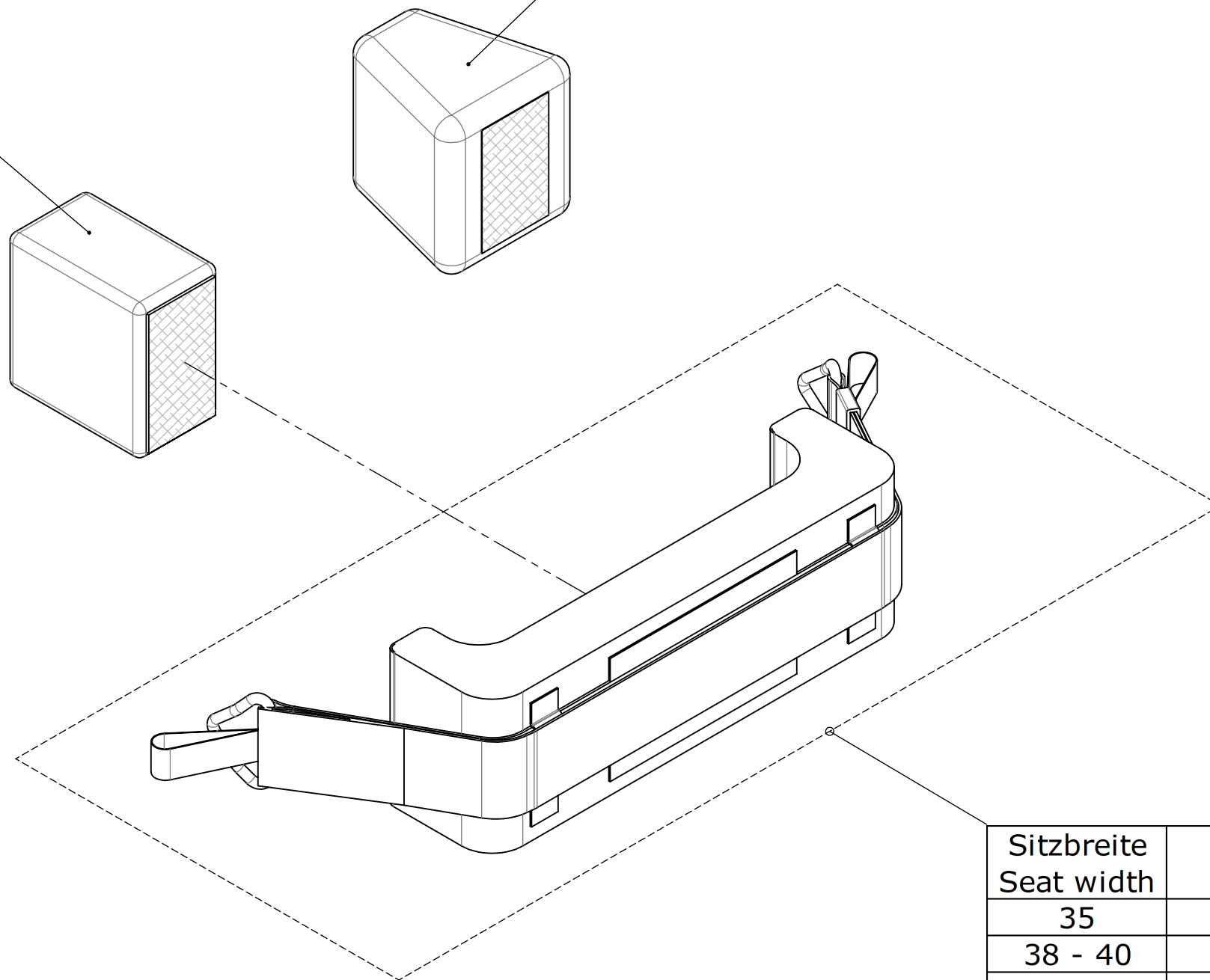


Standard Kombination:  
Standard combination:

| Sitzbreite<br>Seat width | Typ<br>Type | Kniekeil<br>Wedge |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 35                       | 2           | 50x100            |
| 38 - 40                  | 3           | 60x100            |
| 42                       | 4           |                   |
| 45                       | 5           | 80x100            |
| 48 - 50                  | 6           |                   |


| Sitzbreite<br>Seat width | Typ<br>Type | Artikel Nr.<br>Article no. |
|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 35                       | 2           | 30.101.5403                |
| 38 - 40                  | 3           | 30.101.5405                |
| 42                       | 4           | 30.101.5407                |
| 45                       | 5           | 30.101.5408                |
| 48 - 50                  | 6           | 30.901.5403                |

|                                                                                                                                |                      |    |                                                                      |                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                    | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>Kniehalter<br><br>Knee support |                                  |                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                    |                      | -  |                                                                      |                                  |                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                | 30.04.2008           | TN |                                                                      |                                  |                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                        | freigegeben/approved |    |                                                                      |                                  |                                       |
|  LEVO AG<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i>                                       | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i> | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i> |
|                                                                                                                                |                      |    | LCEV                                                                 | 50.070.1130                      | 1 / 1<br>Index / Rev.<br>-            |

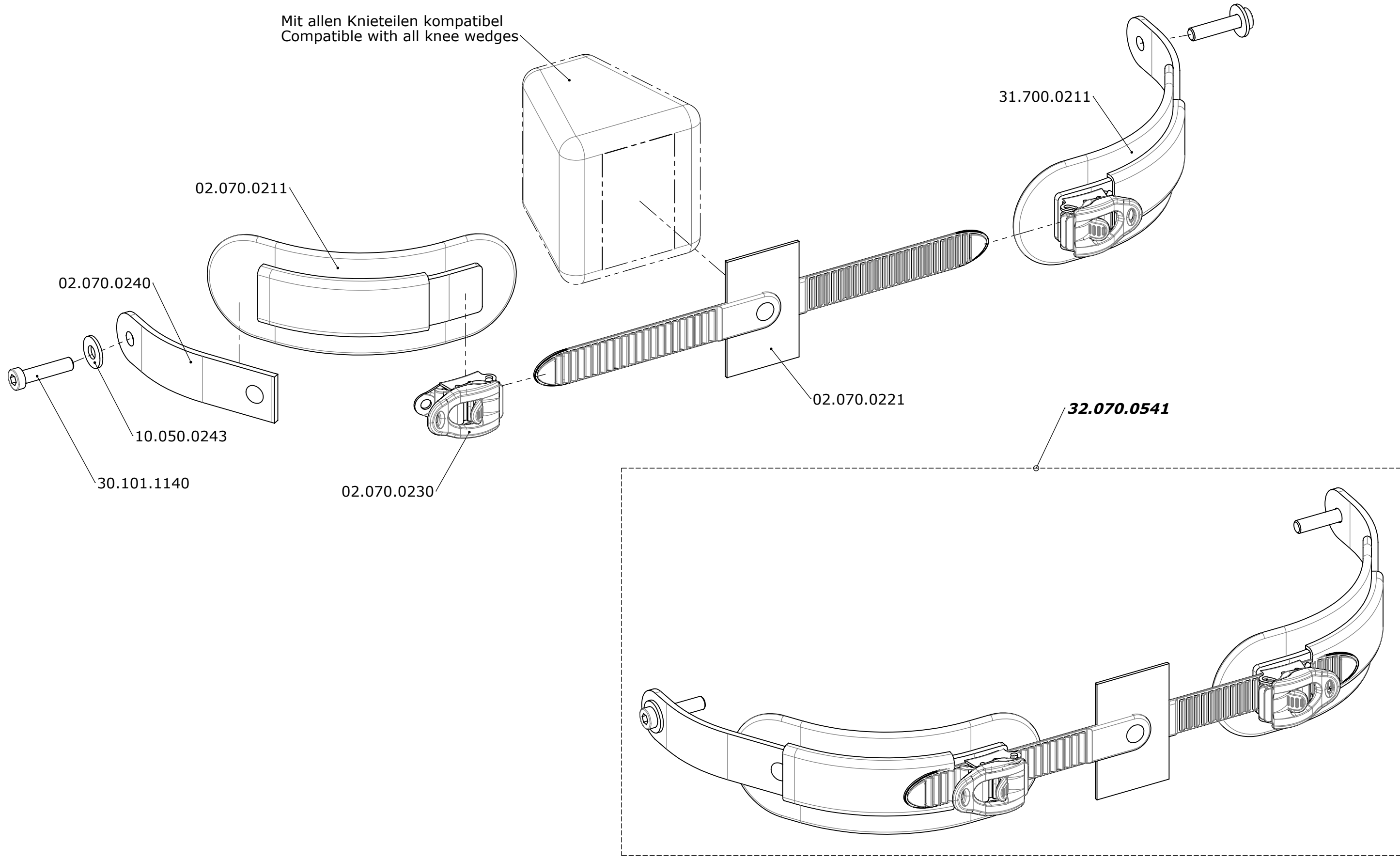

|                                                                     |                      |    |                                                    |                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                         | 06.03.2014           | PW | Benennung / Description<br><br>Sports knee support |                                                     |                                                                                 |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                         | 07.08.2015           | PW |                                                    |                                                     |                                                                                 |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                     | 07.08.2015           | FW |                                                    |                                                     |                                                                                 |
| Status<br><i>Status</i>                                             | freigegeben/approved |    |                                                    |                                                     |                                                                                 |
| <div>LEVO<sup>®</sup><sup>+</sup><br/>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV         | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.1131 | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1<br><br>Index / Rev.<br><br>A |
| LEVO AG<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch                            |                      |    |                                                    |                                                     |                                                                                 |



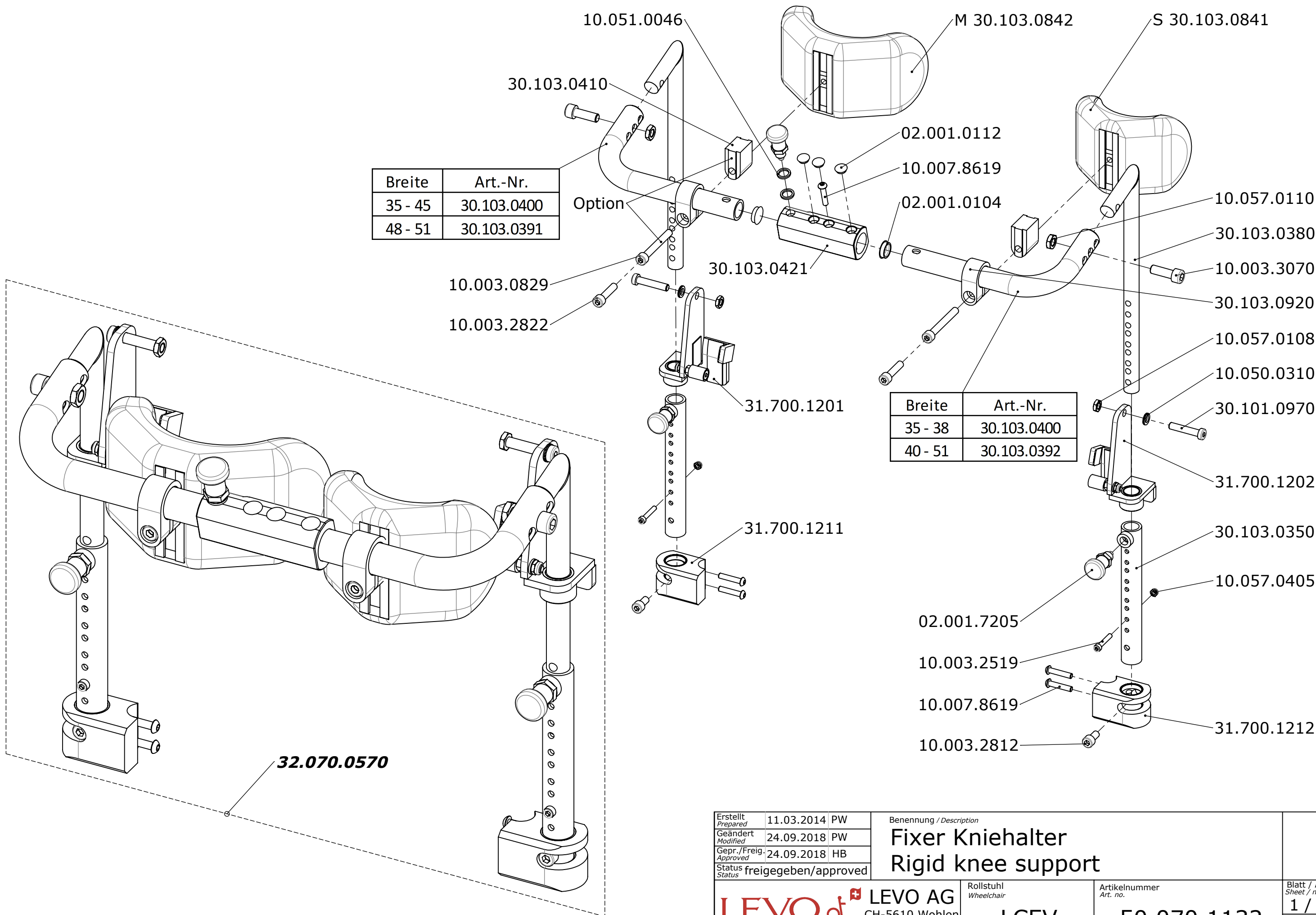

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 11.03.2014           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 24.09.2018           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 24.09.2018           | HB |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

## Fixer Kniehalter Rigid knee support

**LEVO** <sup>dt</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.1132**


Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

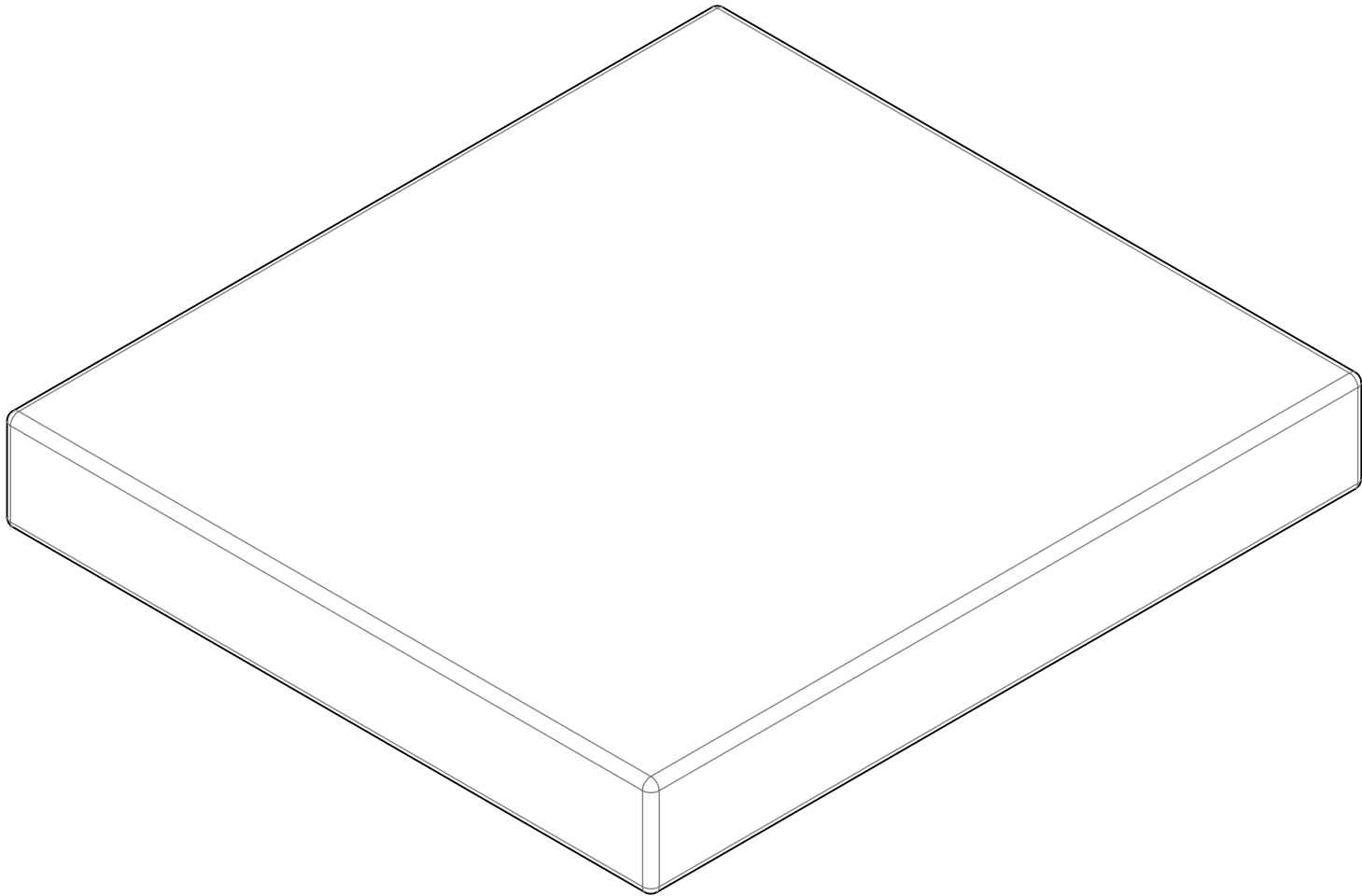


| Grösse<br>Size | Sitzbreite<br>Seat width | Sitzkissen<br>Seat cushion | Ersatzbezug<br>Spare cover |
|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| S              | 35                       | 30.100.3740                | 30.100.3741                |
|                | 38                       | 30.100.3770                | 30.100.3771                |
|                | 40                       | 30.100.3780                | 30.100.3781                |
|                | 42                       | 30.100.3790                | 30.100.3791                |
|                | 45                       | 30.100.3800                | 30.100.3801                |
|                | 48                       | 30.100.3802                | 30.100.3804                |
|                | 50                       | 30.100.3803                | 30.100.3805                |
| M              | 35                       | 30.100.3822                | 30.100.3823                |
|                | 38                       | 30.100.3820                | 30.100.3821                |
|                | 40                       | 30.100.3830                | 30.100.3831                |
|                | 42                       | 30.100.3840                | 30.100.3841                |
|                | 45                       | 30.100.3850                | 30.100.3851                |
|                | 48                       | 30.100.3855                | 30.100.3854                |
|                | 50                       | 30.100.3856                | 30.100.3953                |
| L              | 35                       | 30.100.3857                | 30.100.3858                |
|                | 38                       | 30.100.3860                | 30.100.3861                |
|                | 40                       | 30.100.3870                | 30.100.3871                |
|                | 42                       | 30.100.3880                | 30.100.3881                |
|                | 45                       | 30.100.3890                | 30.100.3891                |
|                | 48                       | 30.100.3900                | 30.100.3901                |
|                | 50                       | 30.100.3902                | 30.100.3903                |
| XL             | 35                       | 30.100.3907                | 30.100.3908                |
|                | 38                       | 30.100.3910                | 30.100.3911                |
|                | 40                       | 30.100.3920                | 30.100.3921                |
|                | 42                       | 30.100.3930                | 30.100.3931                |
|                | 45                       | 30.100.3940                | 30.100.3941                |
|                | 48                       | 30.100.3950                | 30.100.3951                |
|                | 50                       | 30.100.3956                | 30.100.3957                |

|                                                                       |                      |    |                                                                  |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                           | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>Sitzkissen<br>Seat cushion |                                            |                                                                           |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                           |                      | -  |                                                                  |                                            |                                                                           |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                       | 30.04.2008           | TN |                                                                  |                                            |                                                                           |
| Status<br><i>Status</i>                                               | freigegeben/approved |    |                                                                  |                                            |                                                                           |
| <div>LEVO<sup>®</sup>.<sub>dt</sub><br/>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | LEVO AG<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch                         | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.1140                       |
|                                                                       |                      |    |                                                                  |                                            | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br>1 / 1<br>Index / <i>Rev.</i><br>- |


50.070.5100

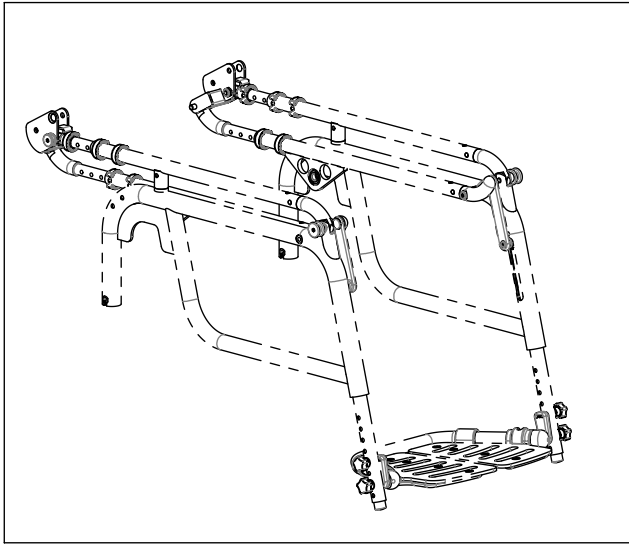


50.070.5200

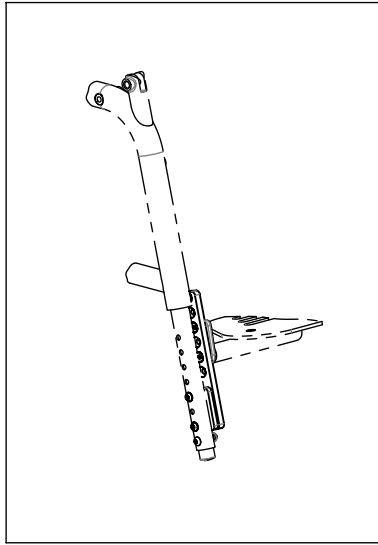


50.070.5300

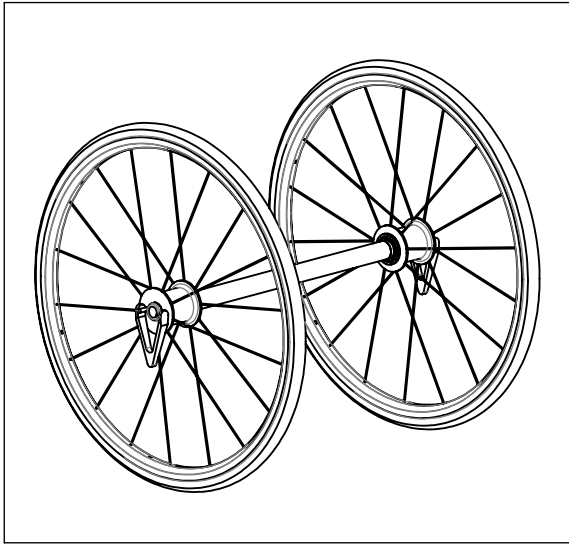


50.070.5400

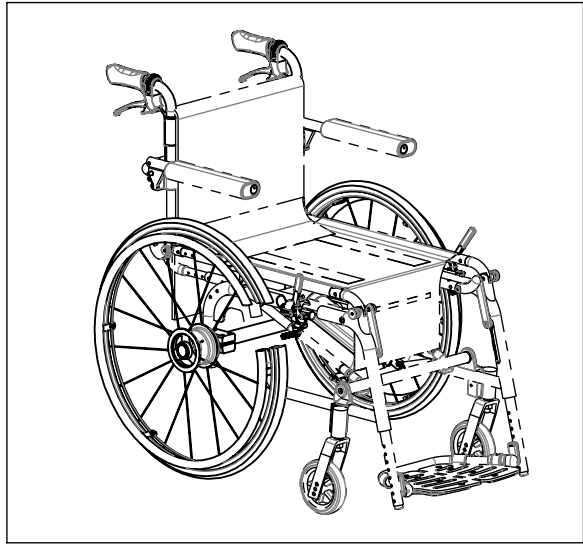


50.070.5500

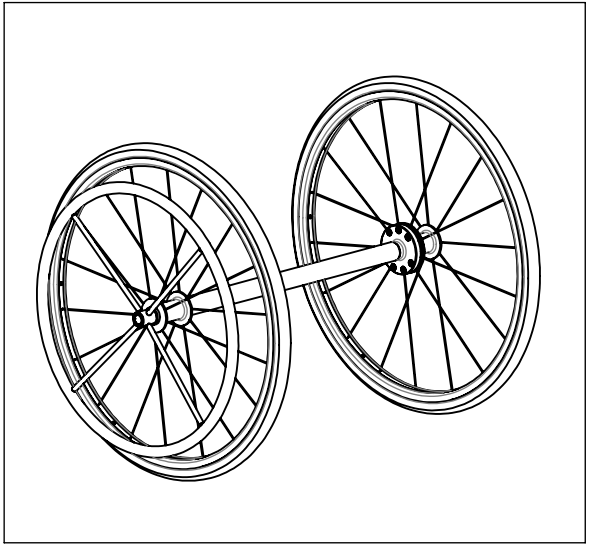


50.070.5610

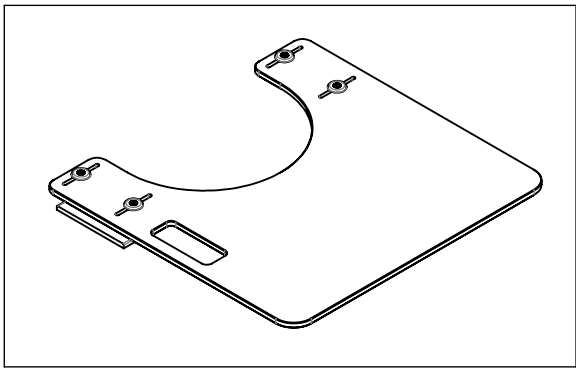


50.070.5620

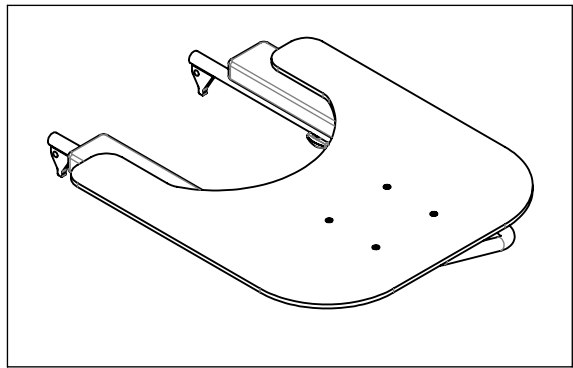


50.070.5700

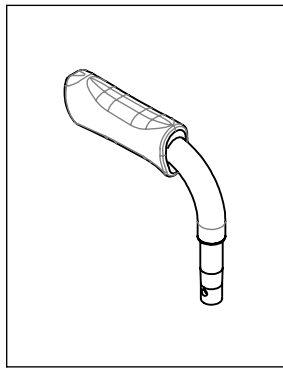


50.070.5710

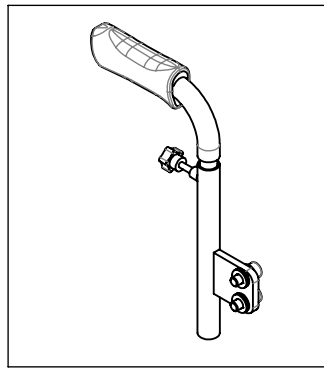


50.070.5800

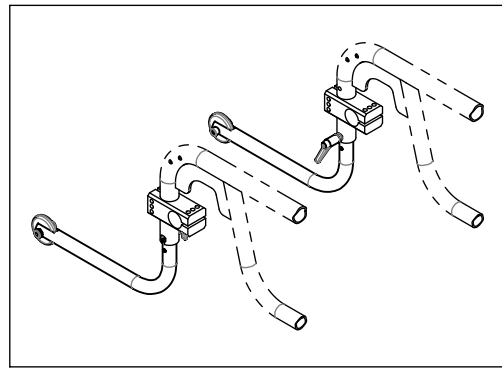


50.070.5900

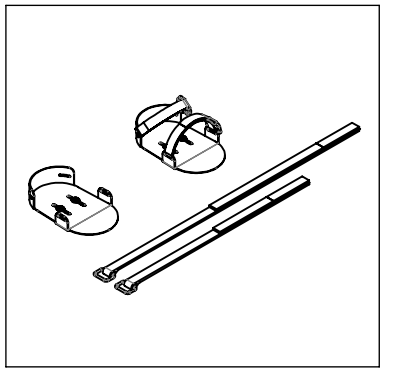


50.070.6000

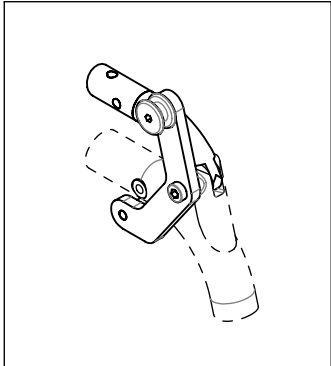


50.070.6100

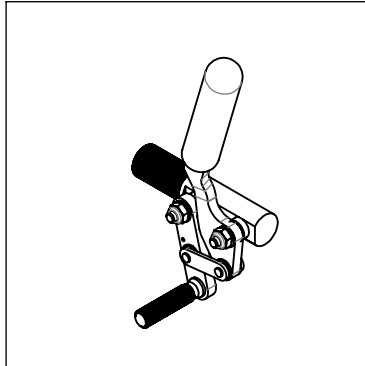


50.070.6200

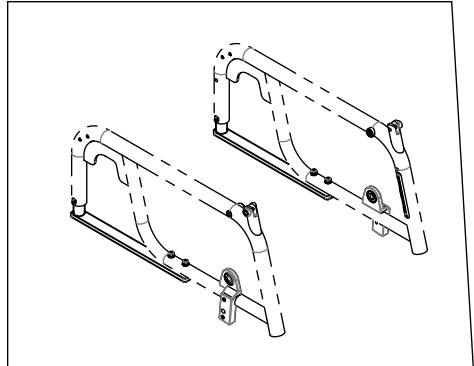


50.070.6400

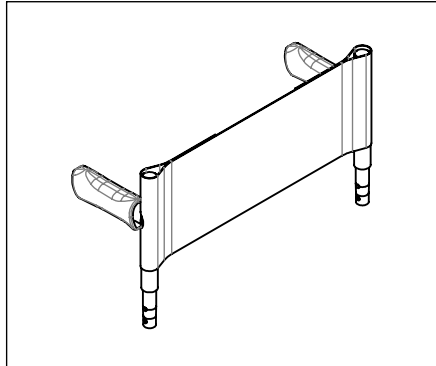


50.070.6500

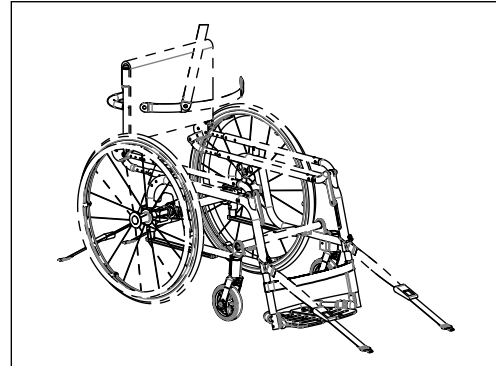


50.070.6700

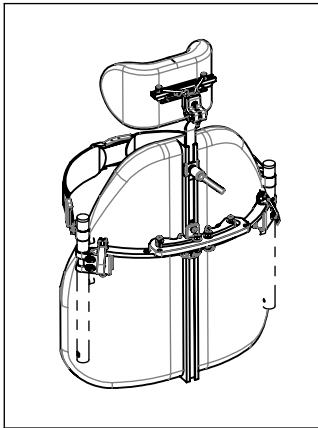

50.070.6800

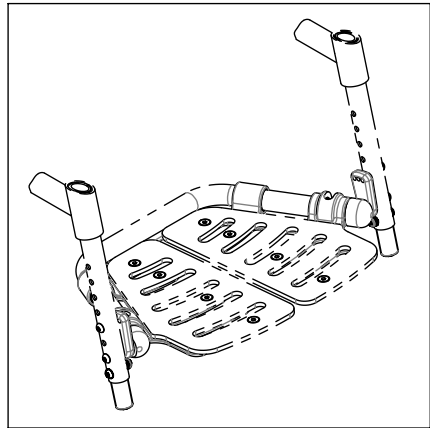

50.070.6900

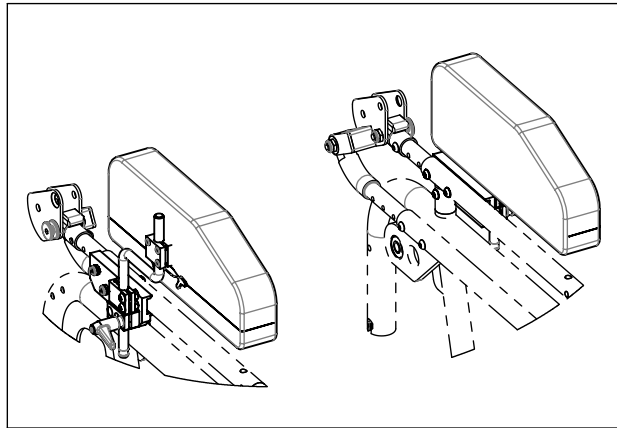

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 28.09.2007           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 19.03.2012           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 19.03.2012           | BM |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Optionen & Zubehör  
Overview options & accessories

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.5000**


Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

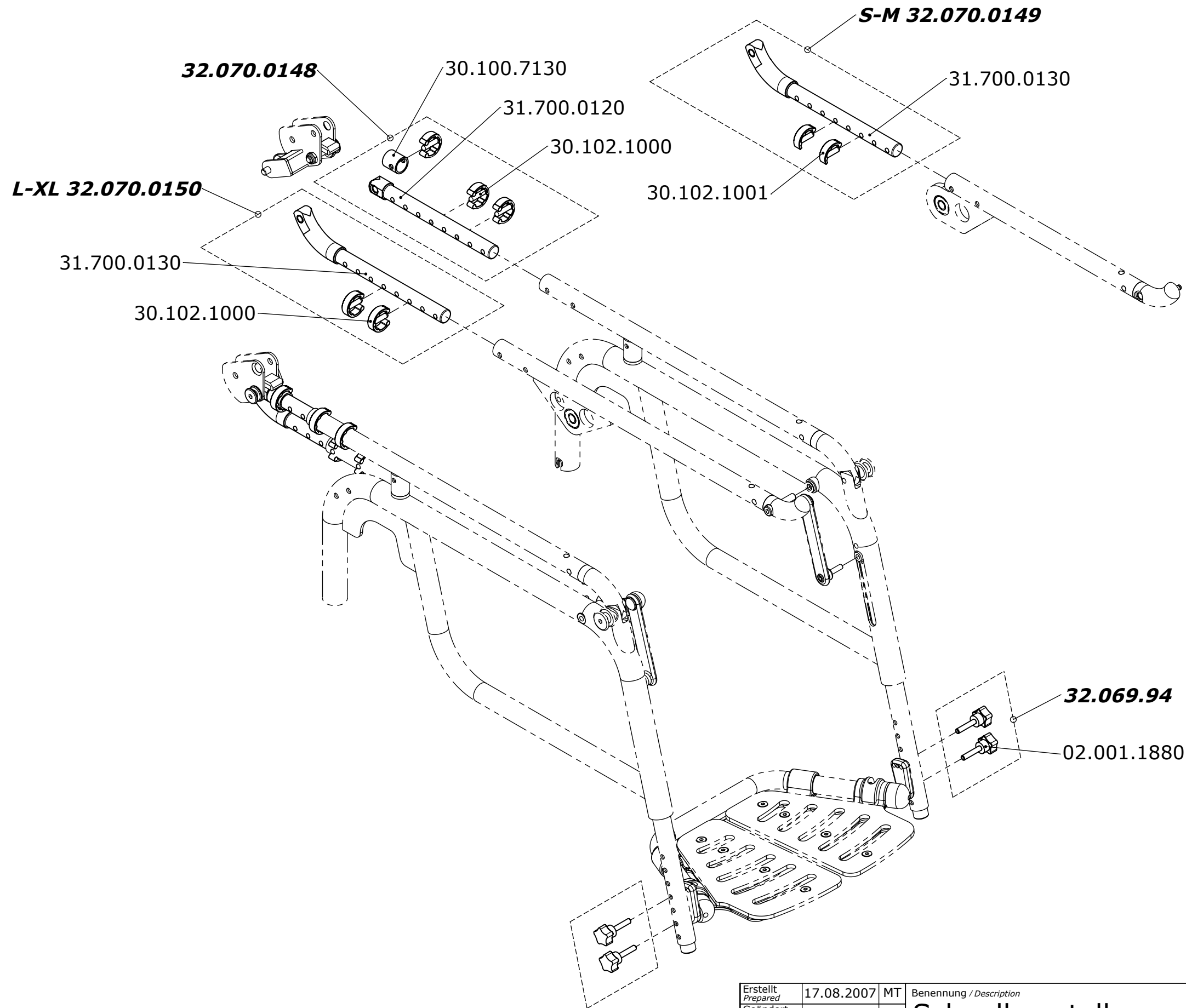

**Set:**  
**S-M 32.070.0401**  
**L-XL 32.070.0402**

|                                                                                                                                                                              |            |    |                                                                                 |                                                 |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                                                                                                                         | 17.08.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Schnellverstellung</b><br><b>Quick adjustment</b> |                                                 | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br>Modified                                                                                                                                                         |            | -  |                                                                                 |                                                 |                                                               |
| Gepr./Freig.<br>Approved                                                                                                                                                     | 30.04.2008 | TN |                                                                                 |                                                 |                                                               |
| Status<br>Status                                                                                                                                                             |            |    |                                                                                 |                                                 |                                                               |
| <b>LEVO</b>  <b>LEVO AG</b><br>THE EXPERTS IN STANDING<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><b>LCEV</b>                                          | Artikelnummer<br>Art. no.<br><b>50.070.5100</b> |                                                               |



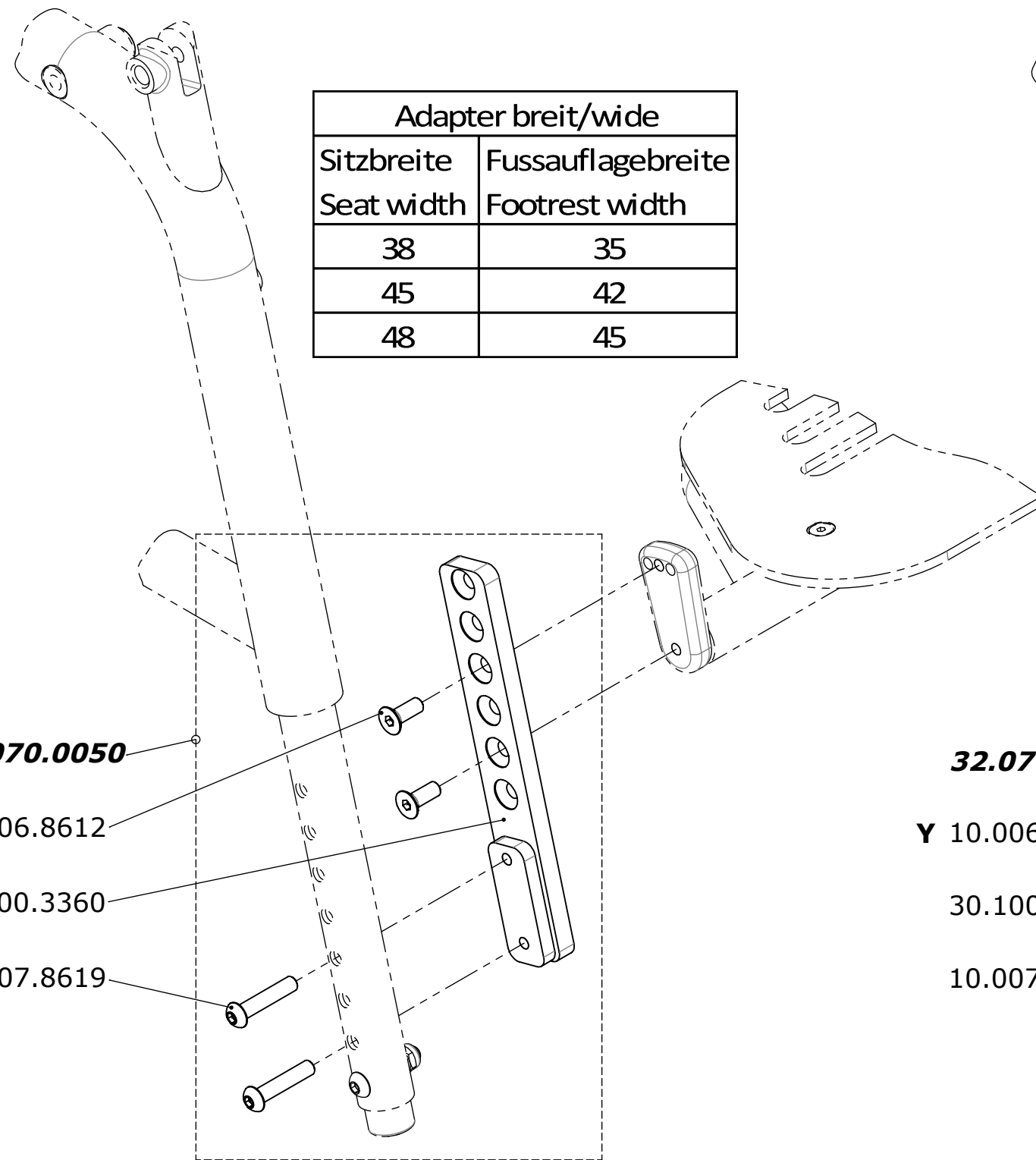

| Adapter breit/wide       |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sitzbreite<br>Seat width | Fussauflagebreite<br>Footrest width |
| 38                       | 35                                  |
| 45                       | 42                                  |
| 48                       | 45                                  |


**32.070.0050**

**X** 10.006.8612

30.100.3360

10.007.8619

**X: Für Easy transfer Fussauflage Artikel Nr. 10.006.8610**  
**For easy transfer footrest article no. 10.006.8610**

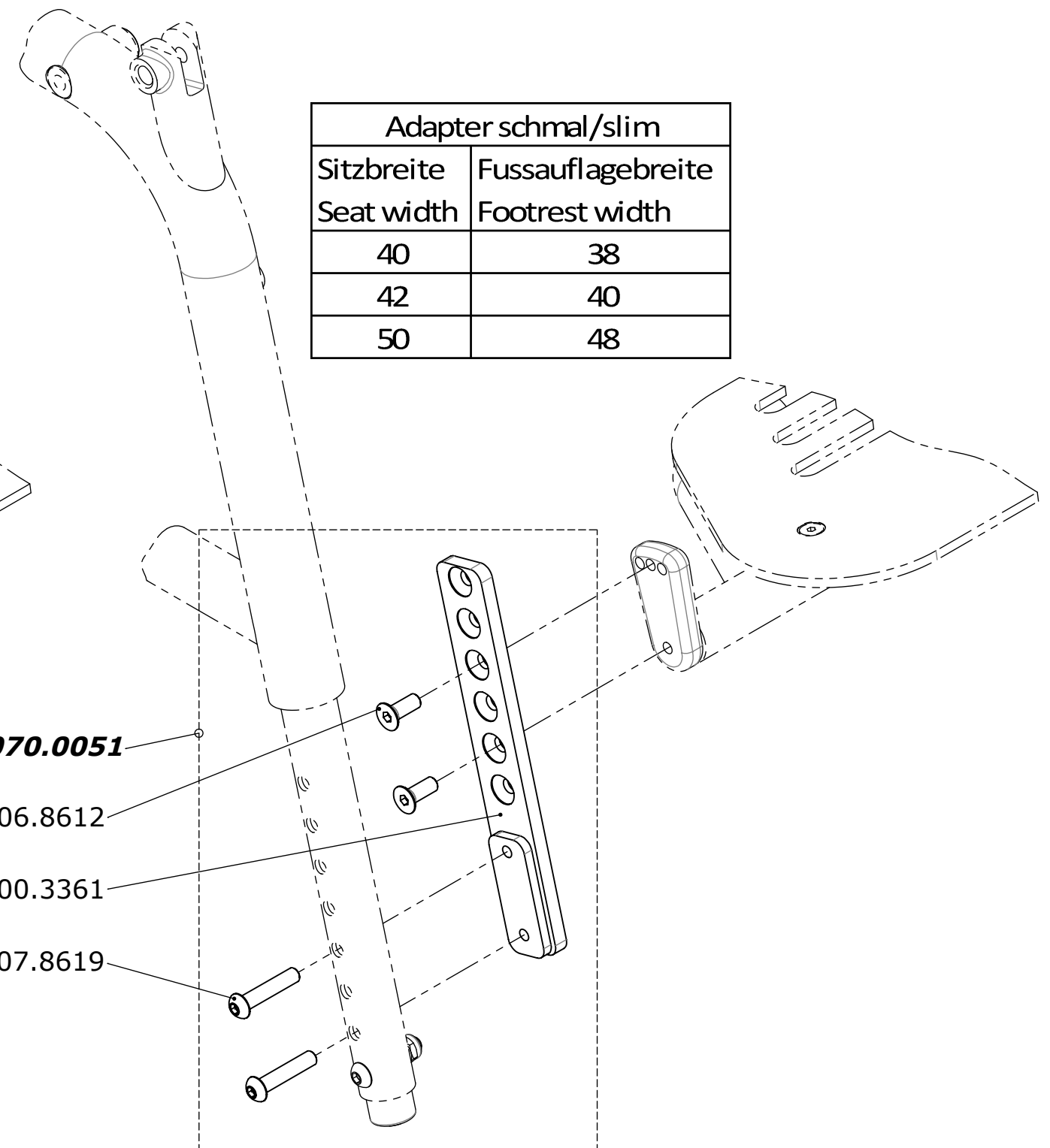

| Adapter schmal/slim      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sitzbreite<br>Seat width | Fussauflagebreite<br>Footrest width |
| 40                       | 38                                  |
| 42                       | 40                                  |
| 50                       | 48                                  |

**32.070.0051**

**Y** 10.006.8612

30.100.3361

10.007.8619



**Y: Für Easy transfer Fussauflage Artikel Nr. 10.006.4609**  
**For easy transfer footrest article no. 10.006.4609**

|                                                                                                                                                              |                      |    |                                                                                           |                                                     |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                  | 16.08.2007           | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br>Fussauflagenhöhenadapter<br>Footrest height adapter |                                                     |                                                                                              |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                  | 03.07.2015           | PW |                                                                                           |                                                     |                                                                                              |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                              | 03.07.2015           | FW |                                                                                           |                                                     |                                                                                              |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                      | freigegeben/approved |    |                                                                                           |                                                     |                                                                                              |
| <div>LEVO<sup>®</sup>  LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div> |                      |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV                                                | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.5200 | Blatt / <i>Anz</i><br><i>Sheet / no. of</i><br><br>1 / 1<br><br>Index / <i>Rev.</i><br><br>A |

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 38                       | 31.100.2610 |
| 40                       | 31.100.2640 |
| 42                       | 31.100.2710 |
| 45                       | 31.100.2700 |
| 48                       | 31.100.2650 |

02.001.1323

50.070.0730

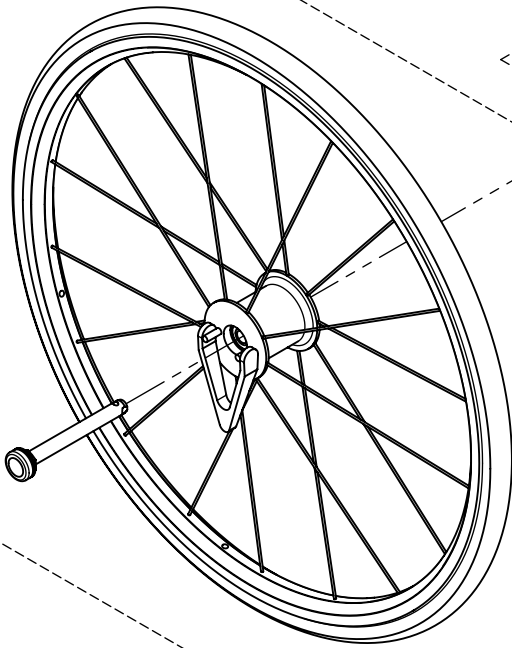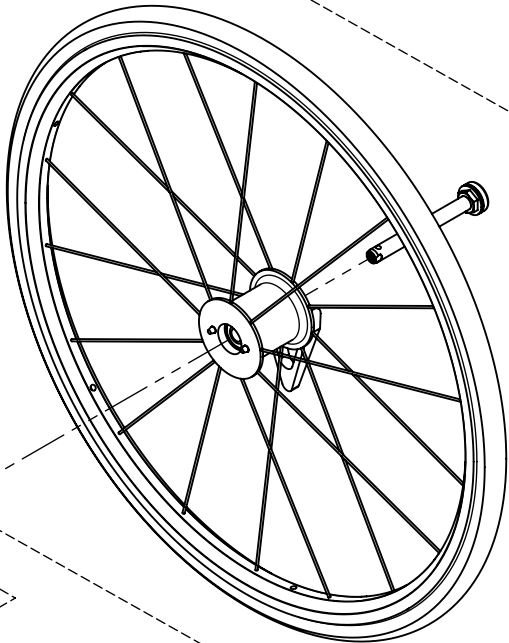

| <b>Sitzbreite<br/>Seat width</b> |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>38</b>                        | <b>32.070.0410</b> |
| <b>40</b>                        | <b>32.070.0420</b> |
| <b>42</b>                        | <b>32.070.0430</b> |
| <b>45</b>                        | <b>32.070.0440</b> |
| <b>48</b>                        | <b>32.070.0450</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |    |                                                                                               |  |  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.08.2007 | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Nabenfeststellbremse</b><br><b>Hub locking brake</b> |  |  |                                                          |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -  |                                                                                               |  |  |                                                          |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2008 | TN |                                                                                               |  |  | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><br><b>1 / 1</b> |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |                                                                                               |  |  |                                                          |
| <div><div><div>LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div></div><div><div>Rollstuhl<br/><i>Wheelchair</i></div><div>LCEV</div></div><div><div>Artikelnummer<br/><i>Art. no.</i></div><div>50.070.5300</div></div><div><div>Blatt / Anz<br/><i>Sheet / no. of</i></div><div>Index / <i>Rev.</i></div></div></div> |            |    |                                                                                               |  |  |                                                          |

Nur Achshalter XL  
Only axle holder XL

10.007.8609

30.103.2491

10.068.0100

02.010.0043

30.103.2492

links

rechts

10.007.8609

Nur Achshalter S/M/L  
Only axle holder S/M/L

02.068.0120

30.100.9030

02.068.0110

10.050.0046

10.068.0100

02.010.0043

Bei Montage Gewindeschneiden M6  
When mounting tapping M6

Büchse ausbohren Ø6  
Drill out bushing Ø6

10.007.8618

X

20.010.0122

X (1 : 2)

| Set<br>S/M/L | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 22"          | 32.070.0531             | 32.070.0534                  |
| 24"          | 32.070.0532             | 32.070.0535                  |
| 26"          | 32.070.0533             | 32.070.0536                  |

| Set | luftbereift<br>air tyre | pannensicher<br>airless tyre |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 22" | 02.010.0010             | 02.010.0015                  |
| 24" | 02.010.0020             | 02.010.0025                  |
| 26" | 02.010.0030             | 02.010.0035                  |

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikelnummer/<br>Article no. |
|--------------------------|-------------------------------|
| 35                       | 31.700.1101                   |
| 38                       | 31.700.1102                   |
| 40                       | 31.700.1103                   |
| 42                       | 31.700.1104                   |
| 45                       | 31.700.1105                   |
| 48                       | 31.700.1106                   |
| 50                       | 31.700.1107                   |

02.402.3000

02.010.0042

02.010.0040

30.101.1520  
Standard

30.101.0900  
Hoch/High  
+ 7cm

Erstellt  
Prepared 17.08.2007 BM  
Geändert  
Modified 04.08.2017 PW  
Gepr./Freig.  
Approved 04.08.2017 FW  
Status  
Status freigegeben/approved

Benennung / Description

Trommelbremse  
Drum brake

**LEVO** <sup>+</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.5400**


Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**D**

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 32.070.0139 |
| 38                       | 32.070.0140 |
| 40                       | 32.070.0141 |
| 42                       | 32.070.0142 |
| 45                       | 32.070.0143 |
| 48                       | 32.070.0144 |
| 50                       | 32.070.0145 |


| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.101.3656 |
| 38                       | 30.101.3651 |
| 40                       | 30.101.3652 |
| 42                       | 30.101.3653 |
| 45                       | 30.101.3654 |
| 48                       | 30.101.3655 |
| 50                       | 30.101.3657 |

30.101.3890

10.029.4416

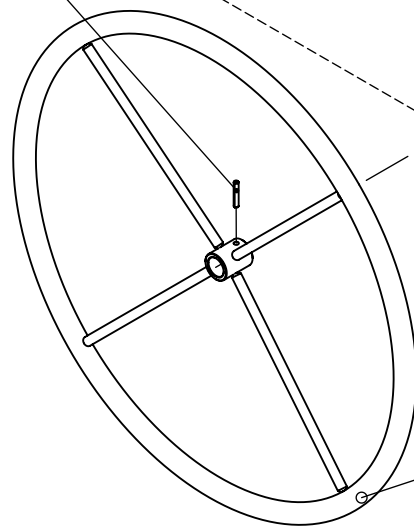


|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 30.102.0721 |
| 24" | 30.102.0722 |
| 26" | 30.102.0723 |

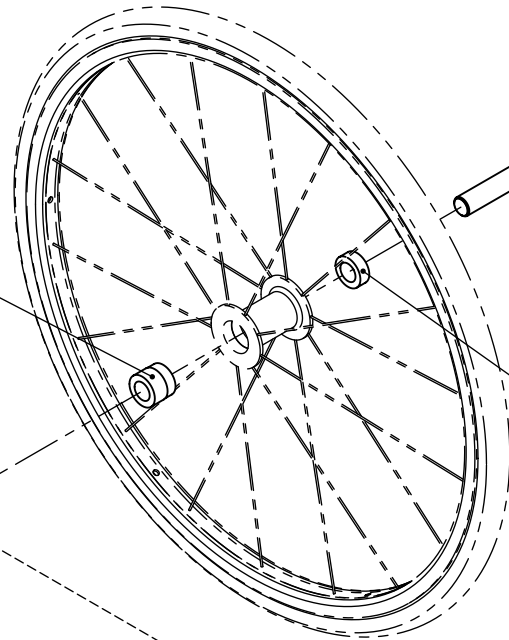

10.055.0509

02.001.1724

30.101.3670

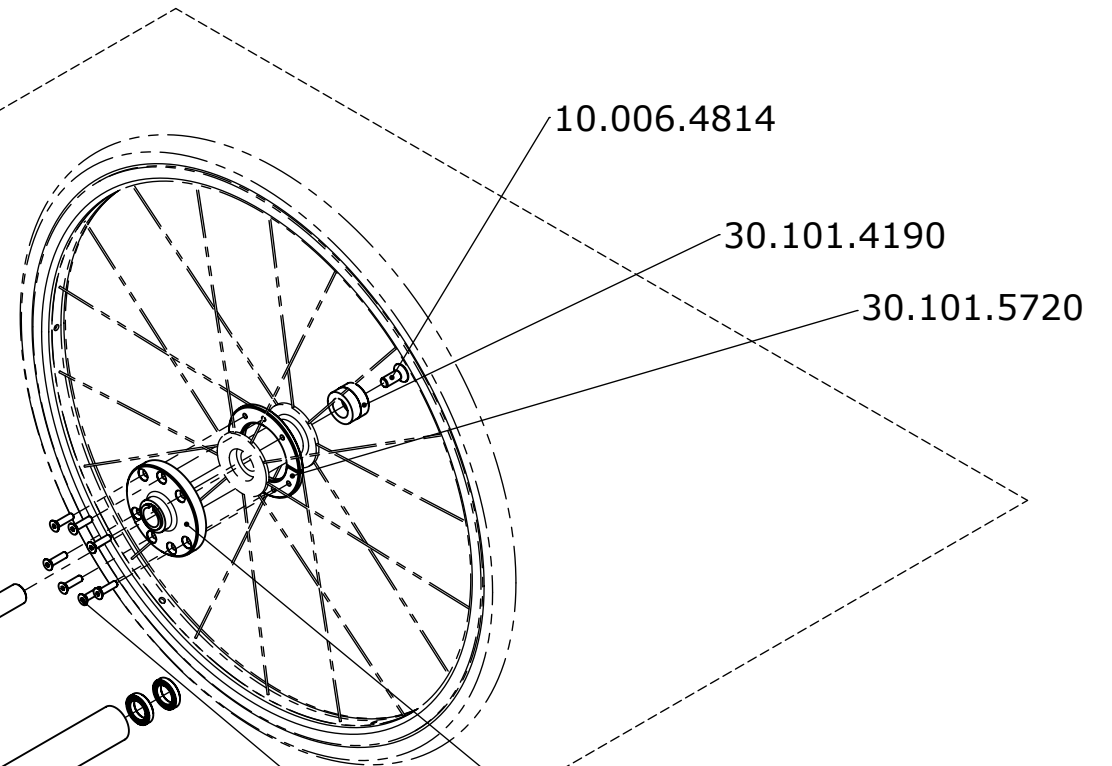

10.006.4814

30.101.4190

30.101.5720

30.101.4150

10.006.8514

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.101.3696 |
| 38                       | 30.101.3691 |
| 40                       | 30.101.3692 |
| 42                       | 30.101.3693 |
| 45                       | 30.101.3694 |
| 48                       | 30.101.3695 |
| 50                       | 30.101.3697 |

**Achtung:** Handrad und Laufräder müssen -größenabhängig- separat bestellt werden von 50.070.0710 !  
**Note:** Both, hand rim and main wheels need to be ordered separately and size-dependent from 50.070.0710 !


|                                                                                                                                           |                      |    |                                                                      |                                            |                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                               | 07.01.2019           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>Einarmantrieb<br>One arm drive |                                            |                                                     |                                                                           |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                               | 07.01.2019           | PW |                                                                      |                                            |                                                     |                                                                           |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                           | 07.01.2019           | HB |                                                                      |                                            |                                                     |                                                                           |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                   | freigegeben/approved |    |                                                                      |                                            |                                                     |                                                                           |
| <div>LEVO<sup>®</sup>  THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | <div>LEVO AG<br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div>                | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br>LCEV | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br>50.070.5500 | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br>1 / 2<br>Index / <i>Rev.</i><br>C |



|     |             |
|-----|-------------|
| 22" | 30.102.0721 |
| 24" | 30.102.0722 |
| 26" | 30.102.0723 |

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.101.3656 |
| 38                       | 30.101.3651 |
| 40                       | 30.101.3652 |
| 42                       | 30.101.3653 |
| 45                       | 30.101.3654 |
| 48                       | 30.101.3655 |
| 50                       | 30.101.3657 |

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.101.3696 |
| 38                       | 30.101.3691 |
| 40                       | 30.101.3692 |
| 42                       | 30.101.3693 |
| 45                       | 30.101.3694 |
| 48                       | 30.101.3695 |
| 50                       | 30.101.3697 |

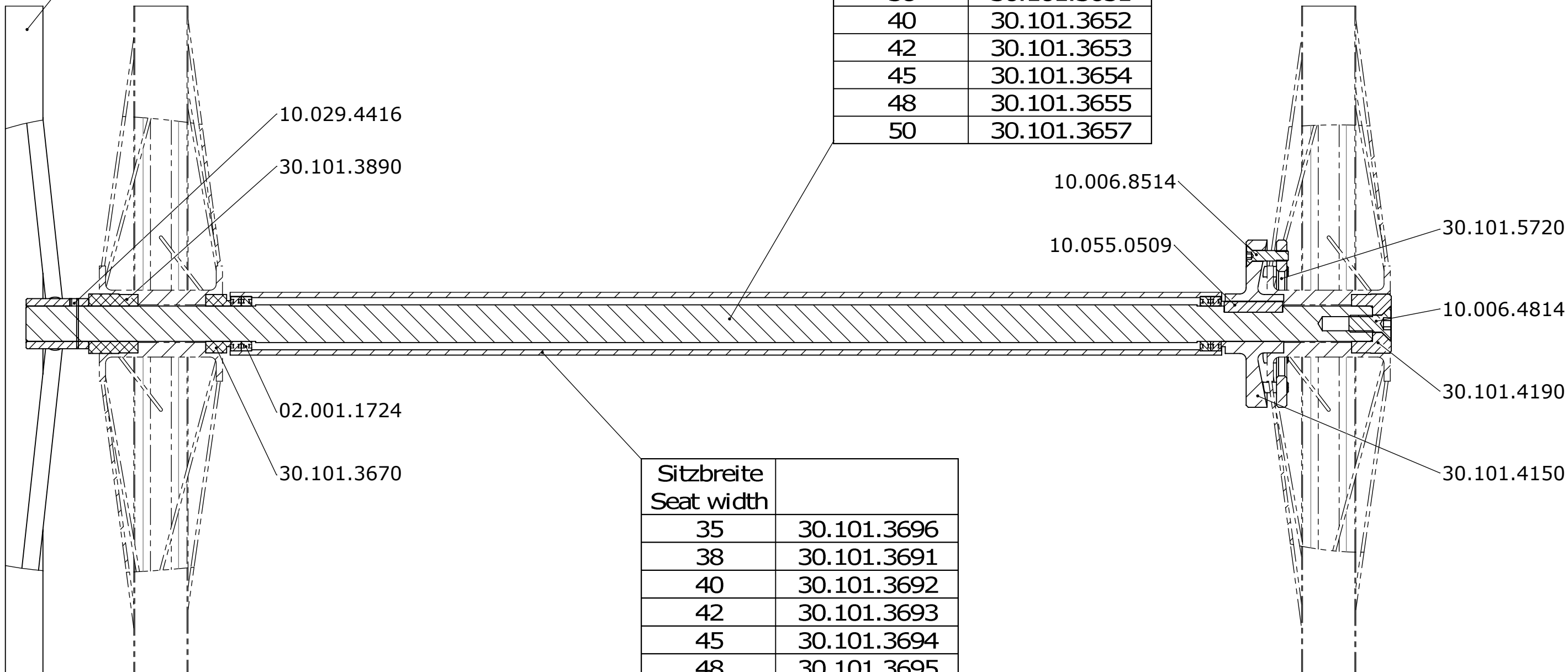

|                                 |                      |    |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br><i>Modified</i>     | 01.04.2014           | PW |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i> | 01.04.2014           | HB |
| Status<br><i>Status</i>         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Einarmantrieb**  
**One arm drive**

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
*Wheelchair*

**LCEV**

Artikelnummer  
*Art. no.*


**50.070.5500**

Blatt / Anz.  
*Sheet / no. of*  
**2 / 2**  
Index / Rev.  
**B**

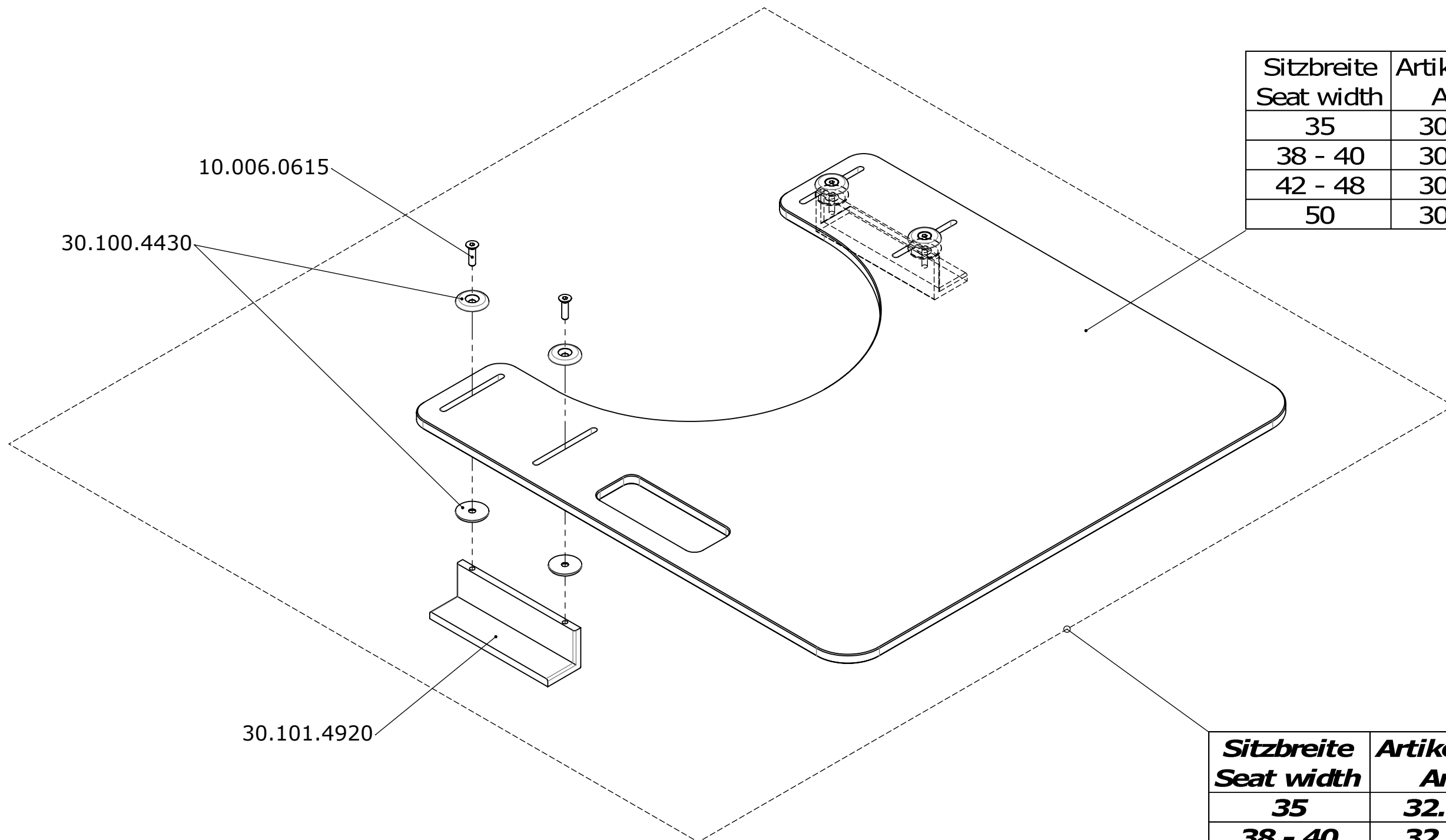

| Sitzbreite<br>Seat width | Artikelnummer /<br>Article no. |
|--------------------------|--------------------------------|
| 35                       | 30.101.5300                    |
| 38 - 40                  | 30.101.5250                    |
| 42 - 48                  | 30.101.5280                    |
| 50                       | 30.103.0490                    |

| <b>Sitzbreite</b><br><b>Seat width</b> | <b>Artikelnummer /</b><br><b>Article no.</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>35</b>                              | <b>32.070.0115</b>                           |
| <b>38 - 40</b>                         | <b>32.070.0116</b>                           |
| <b>42 - 48</b>                         | <b>32.070.0117</b>                           |
| <b>50</b>                              | <b>32.070.0158</b>                           |

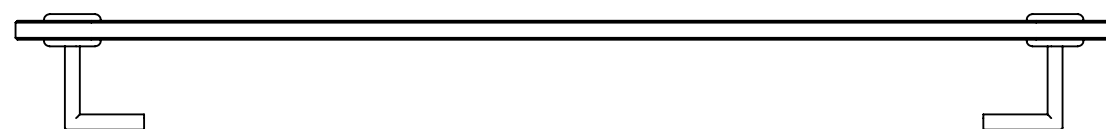

Je nach Typ kann der Halter auch nach innen gerichtet werden  
Depending on the type the holder can also be directed inwards

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 17.08.2007           | MT |
| Geändert<br>Modified     | 05.09.2014           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 05.09.2014           | HB |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Anstecktisch  
Table tray

**LEVO**<sup>®</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**



Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.5610**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

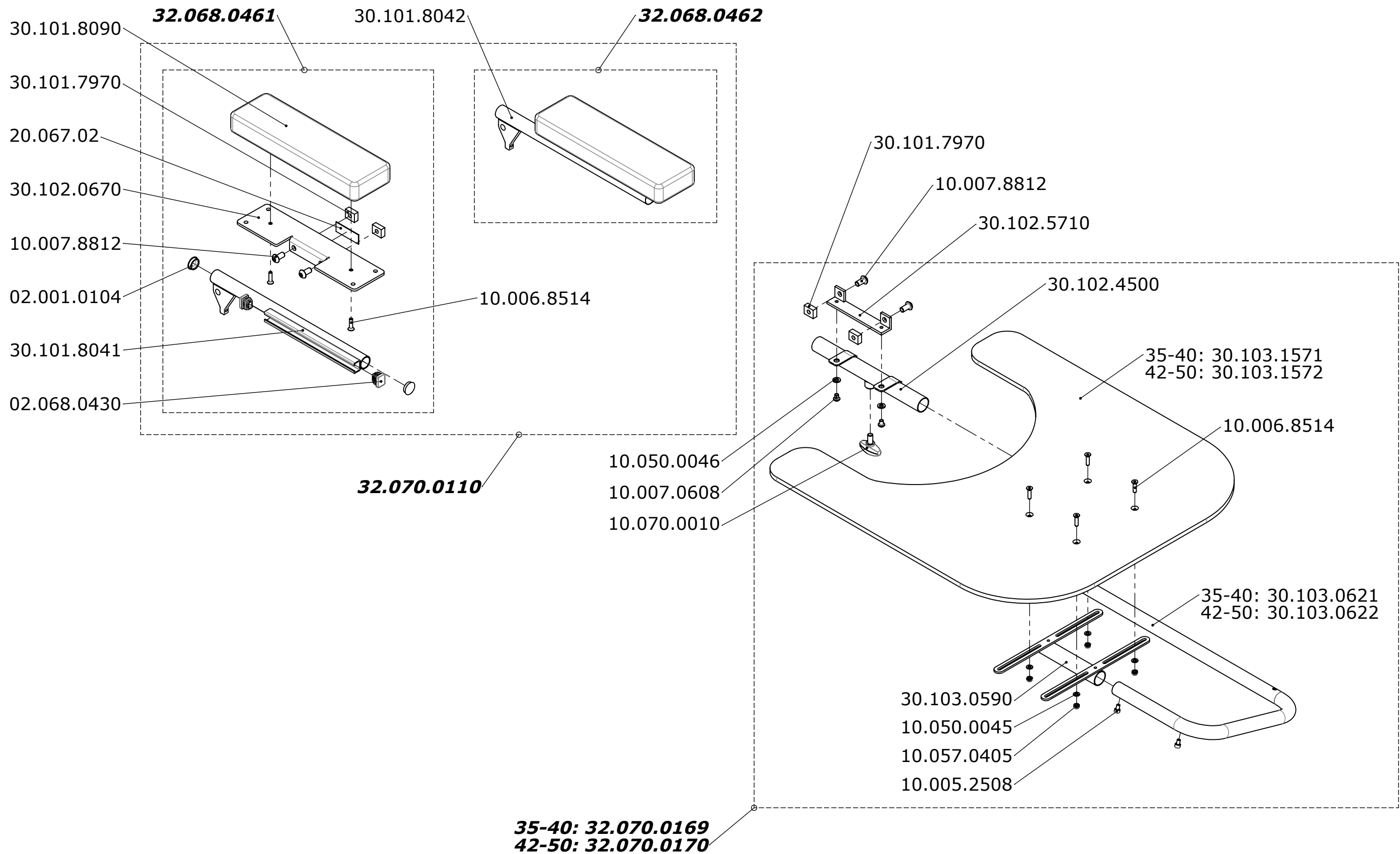


|                                                                  |                      |    |                                                                                        |                                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                      | 17.08.2007           | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br>Anstecktisch schwenkbar<br>Swing away table tray |                                                                     |                                                                                                        |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                      | 05.03.2015           | PW |                                                                                        |                                                                     |                                                                                                        |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                  | 05.03.2015           | FW |                                                                                        |                                                                     |                                                                                                        |
| Status<br><i>Status</i>                                          | freigegeben/approved |    |                                                                                        |                                                                     |                                                                                                        |
| <div>LEVO<sup>®</sup>dt</div> <div>THE EXPERTS IN STANDING</div> |                      |    | <div>Rollstuhl<br/><i>Wheelchair</i></div> <div>LCEV</div>                             | <div>Artikelnummer<br/><i>Art. no.</i></div> <div>50.070.5620</div> | <div>Blatt / Anz<br/><i>Sheet / no. of</i></div> <div>1 / 1</div> <div>Index / Rev.</div> <div>D</div> |

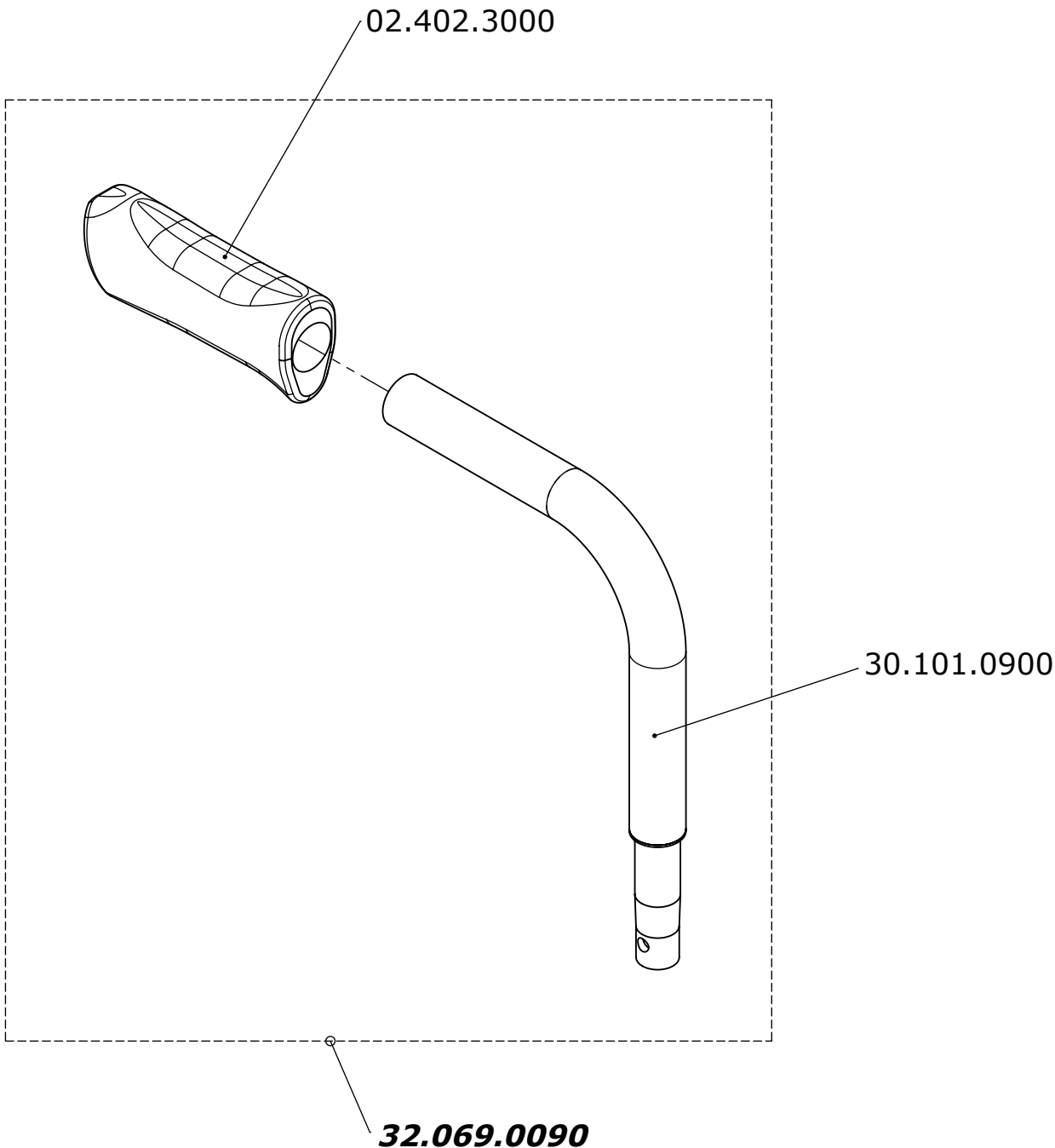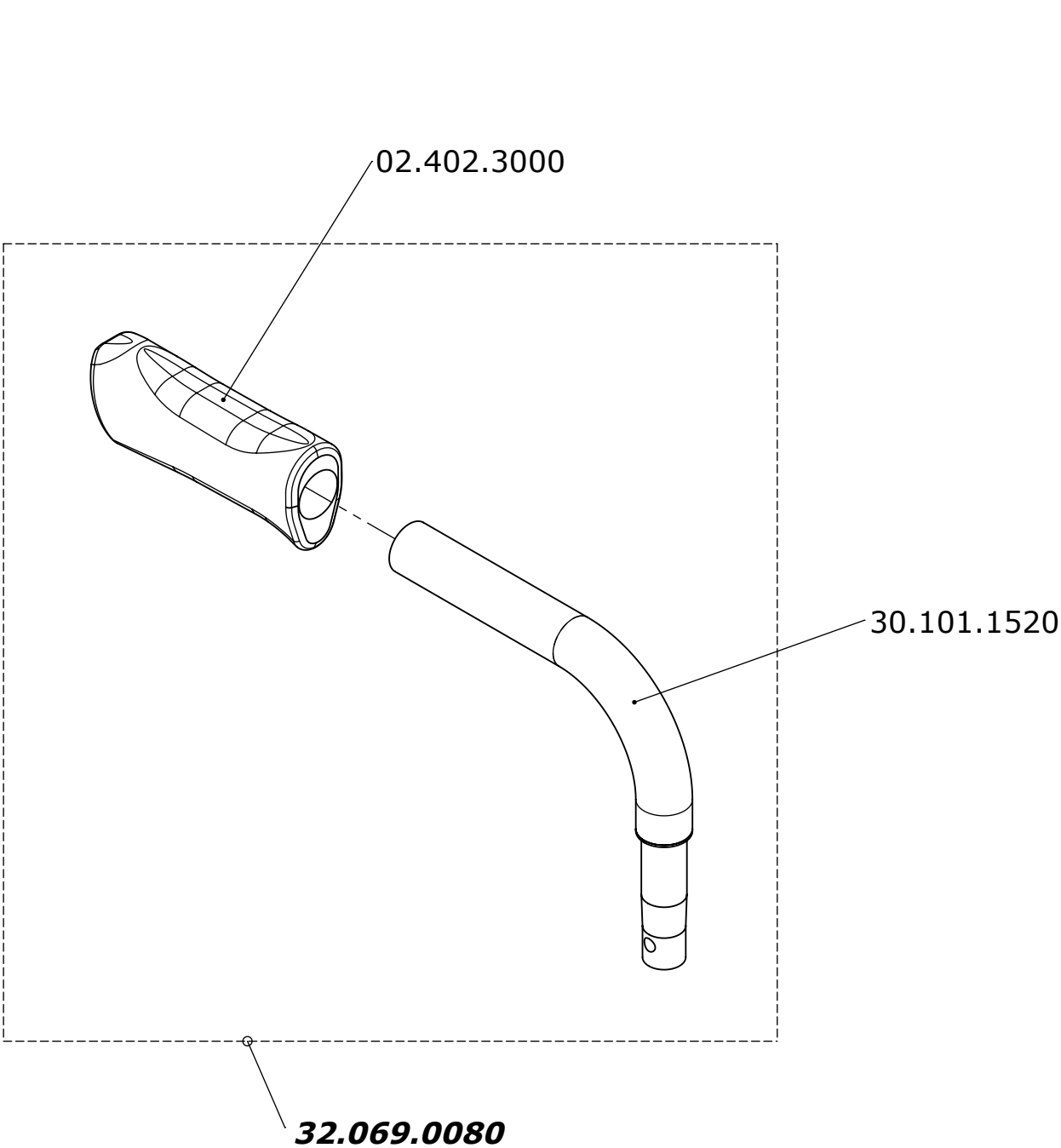

|                                                                                                                                                                              |            |    |                                                                        |                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                  | 17.08.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Schiebegriffe</b><br><b>Push handles</b> |                                                        | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                  |            | -  |                                                                        |                                                        |                                                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                              | 30.04.2008 | TN |                                                                        |                                                        |                                                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                      |            |    |                                                                        |                                                        |                                                                       |
| <b>LEVO</b>  <b>LEVO AG</b><br>THE EXPERTS IN STANDING<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><b>LCEV</b>                          | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><b>50.070.5700</b> |                                                                       |



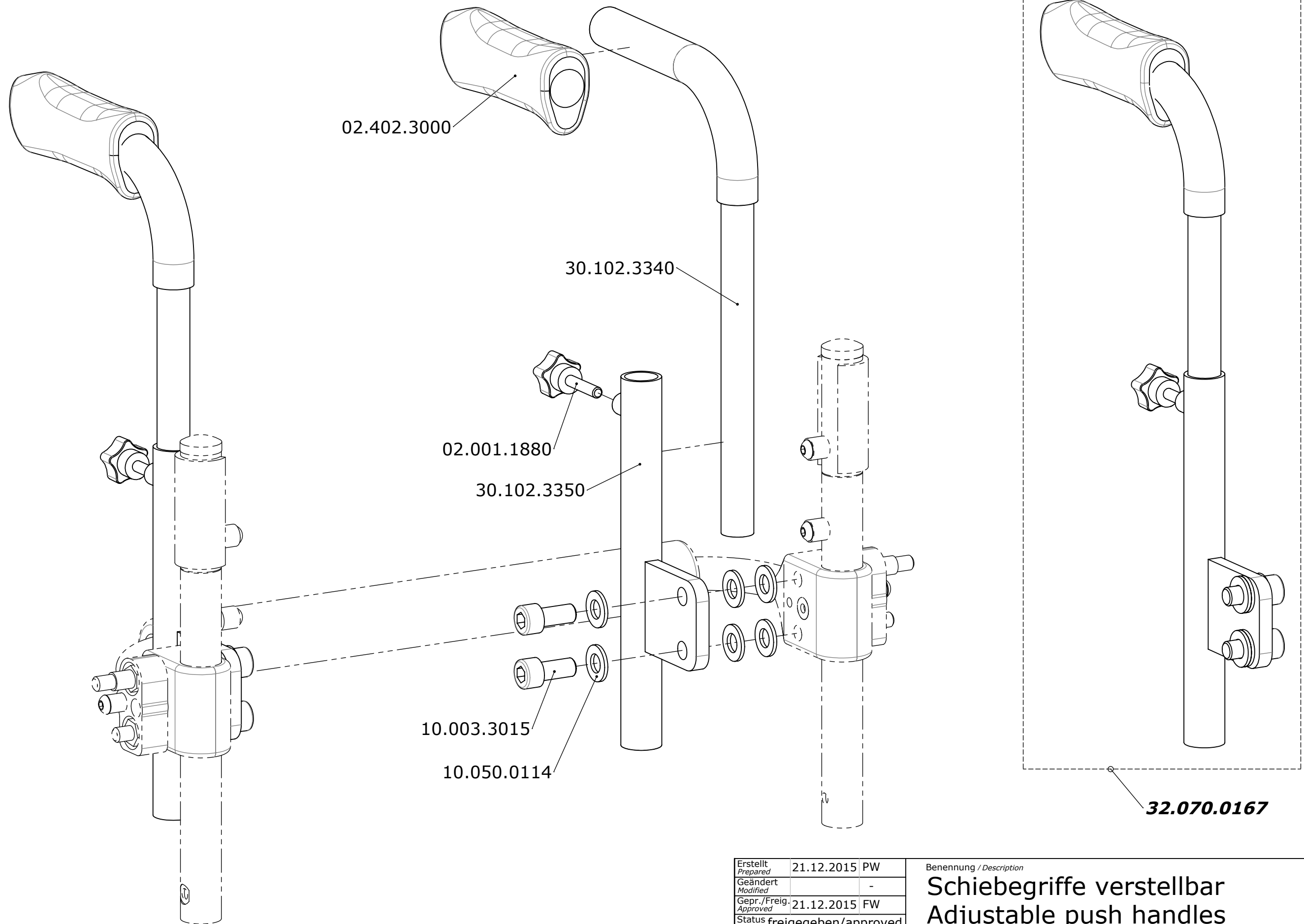

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 21.12.2015           | PW |
| Geändert<br>Modified     |                      | -  |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 21.12.2015           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Schiebegriffe verstellbar**  
**Adjustable push handles**

**LEVO** <sup>+</sup>  
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair


**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.


**50.070.5710**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of


**1 / 1**  
Index / Rev.  
-

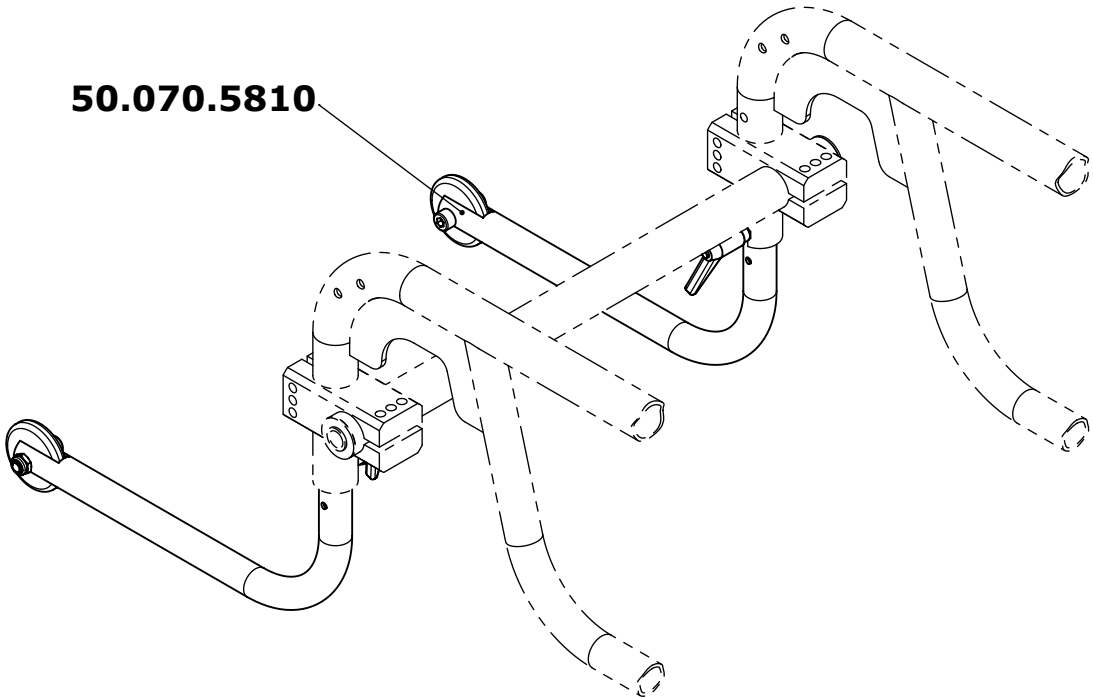

50.070.5810

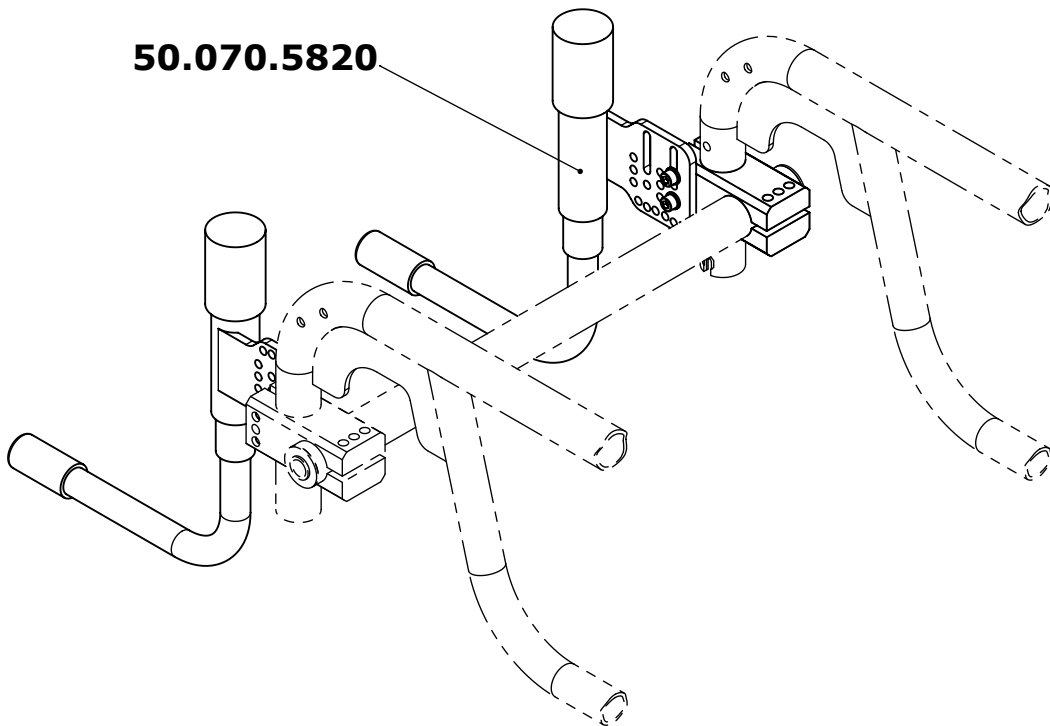


50.070.5820

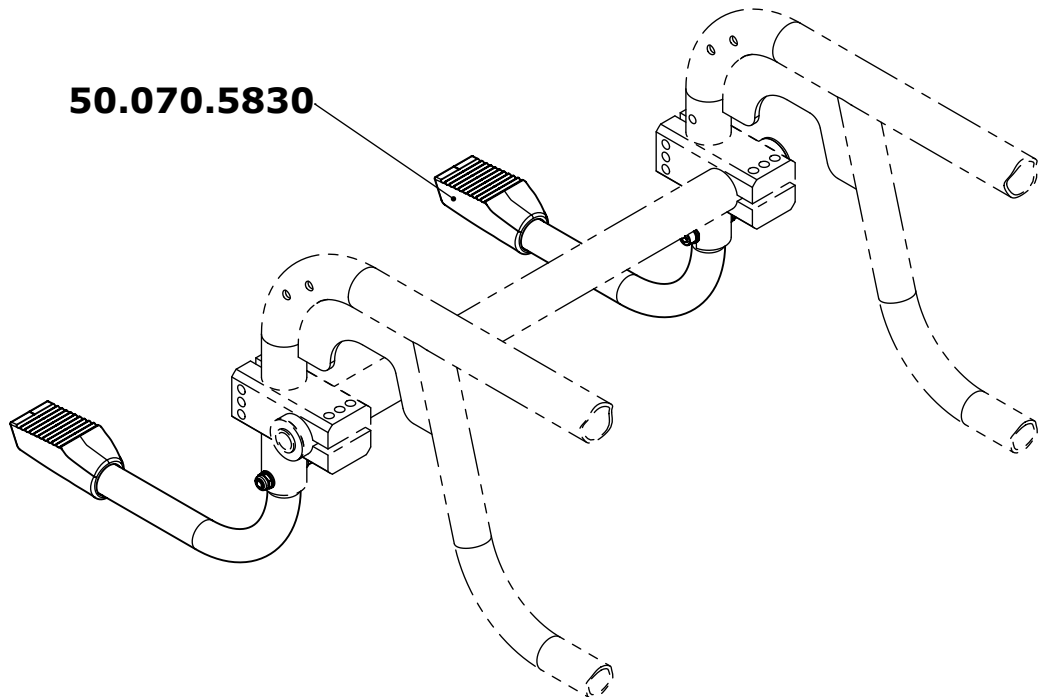

50.070.5830


|                                                                                                                                                   |            |    |                                                  |                                                        |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                       | 17.08.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Kippen<br/>Tip</b> |                                                        | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                       |            | -  |                                                  |                                                        |                                                               |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                   | 30.04.2008 | TN |                                                  |                                                        |                                                               |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                           |            |    |                                                  |                                                        |                                                               |
| <b>LEVO</b>  <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><b>LCEV</b>    | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><b>50.070.5800</b> |                                                               |

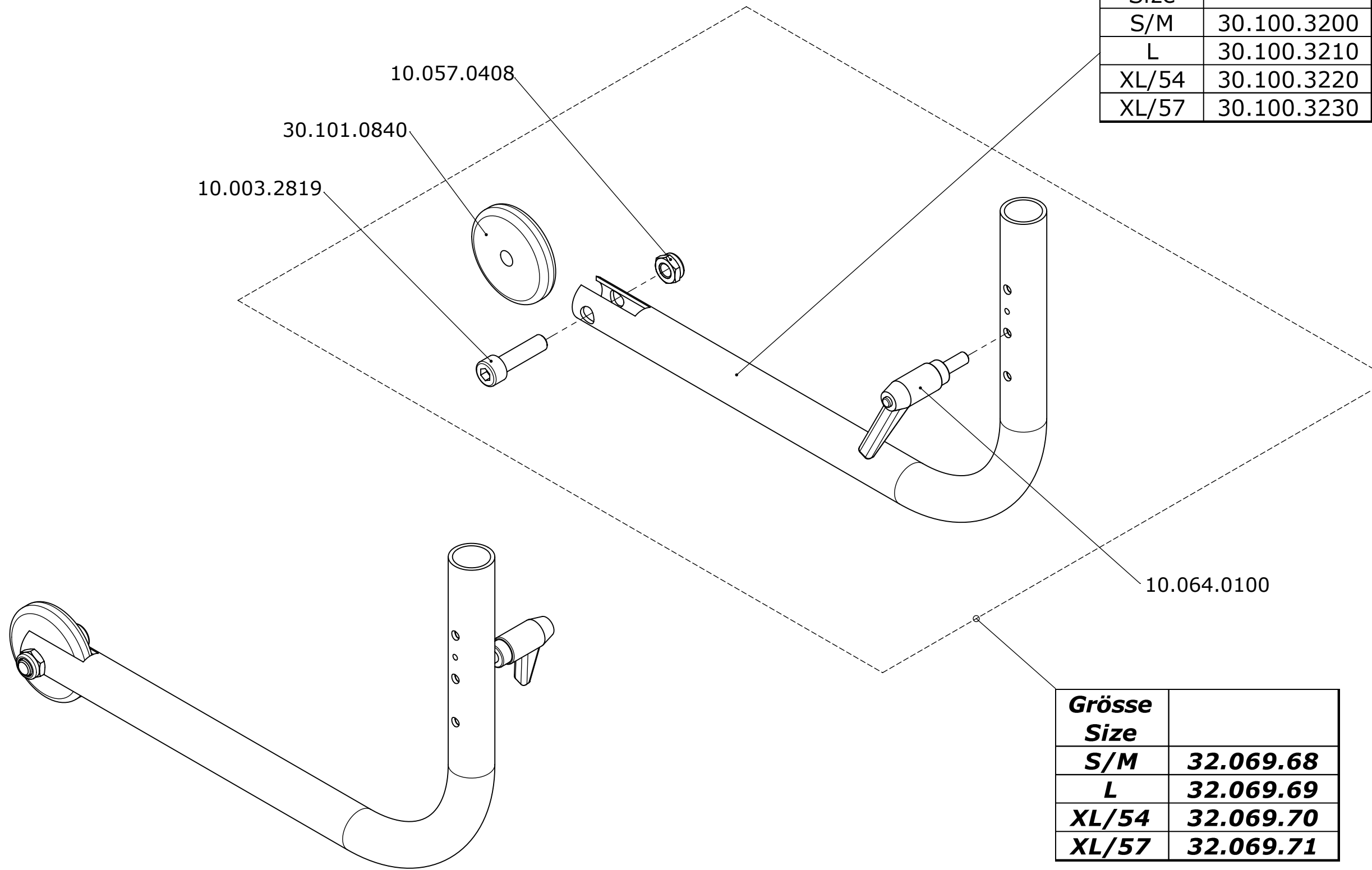

| Grösse<br>Size |             |
|----------------|-------------|
| S/M            | 30.100.3200 |
| L              | 30.100.3210 |
| XL/54          | 30.100.3220 |
| XL/57          | 30.100.3230 |


| <b>Grösse<br/>Size</b> |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>S/M</b>             | <b>32.069.68</b> |
| <b>L</b>               | <b>32.069.69</b> |
| <b>XL/54</b>           | <b>32.069.70</b> |
| <b>XL/57</b>           | <b>32.069.71</b> |

|                                                                                                                                                                              |            |    |                                                                           |                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                  | 17.08.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Antikipprollen</b><br><b>Anti-tip rolls</b> |                                                        |                                                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                  |            | -  |                                                                           |                                                        |                                                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                              | 30.04.2008 | TN |                                                                           |                                                        |                                                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                      |            |    |                                                                           |                                                        |                                                                       |
| <b>LEVO</b>  <b>LEVO AG</b><br>THE EXPERTS IN STANDING<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><b>LCEV</b>                             | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><b>50.070.5810</b> | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |

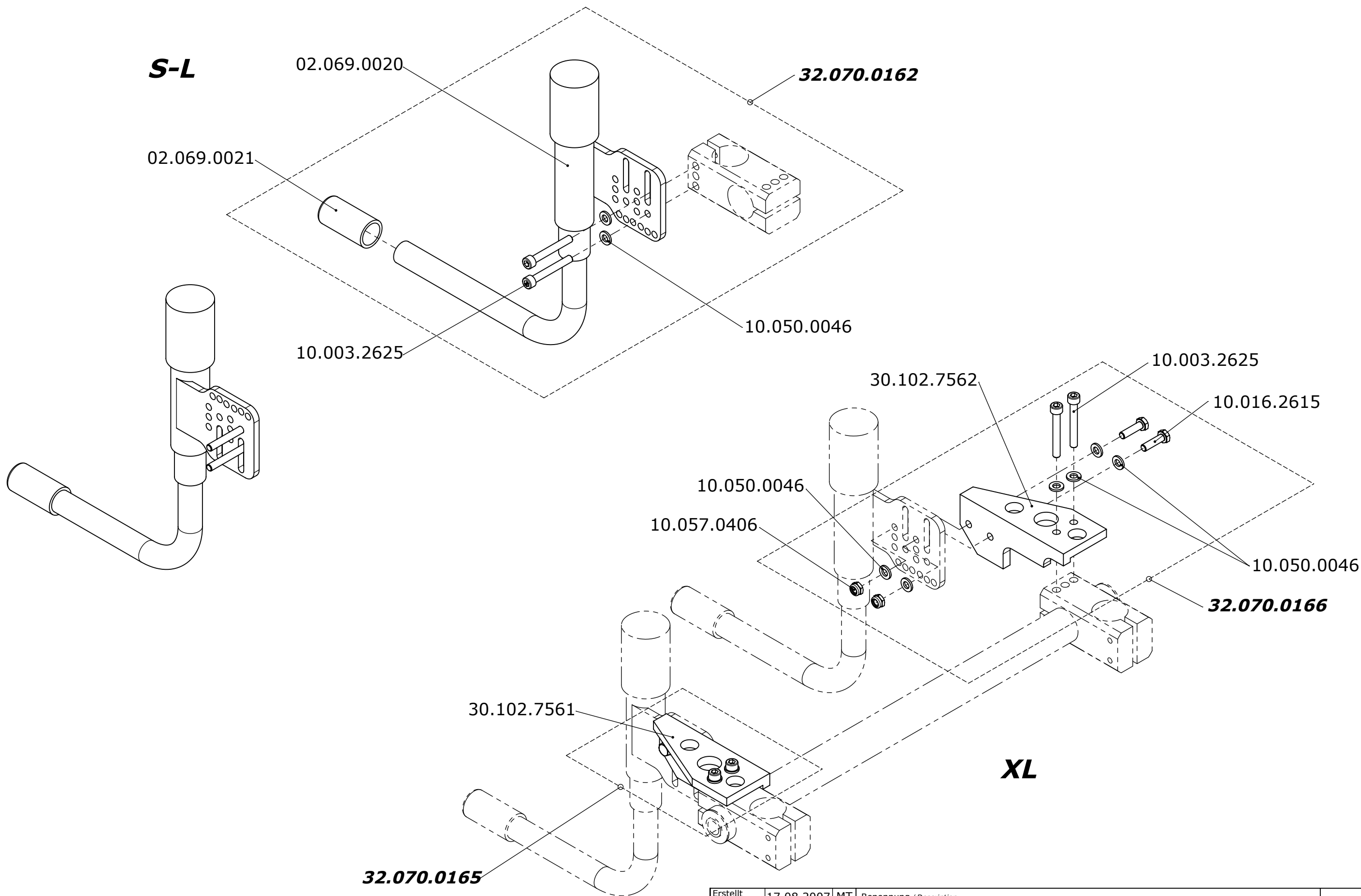


|                                                                                                                                       |            |    |                                                                                                                        |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                           | 17.08.2007 | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Antikipprolle/Kipphilfe schwenkbar "HC"</b><br><b>Tip aid swing away "HC"</b> |                                  |                                       |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                           |            | -  |                                                                                                                        |                                  |                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                       | 30.04.2008 | TN |                                                                                                                        |                                  |                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                               |            |    |                                                                                                                        |                                  |                                       |
|  <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i>                                                                                         | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i> | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i> |
|                                                                                                                                       |            |    | LCEV                                                                                                                   | 50.070.5820                      | 1 / 1<br>Index / Rev.                 |




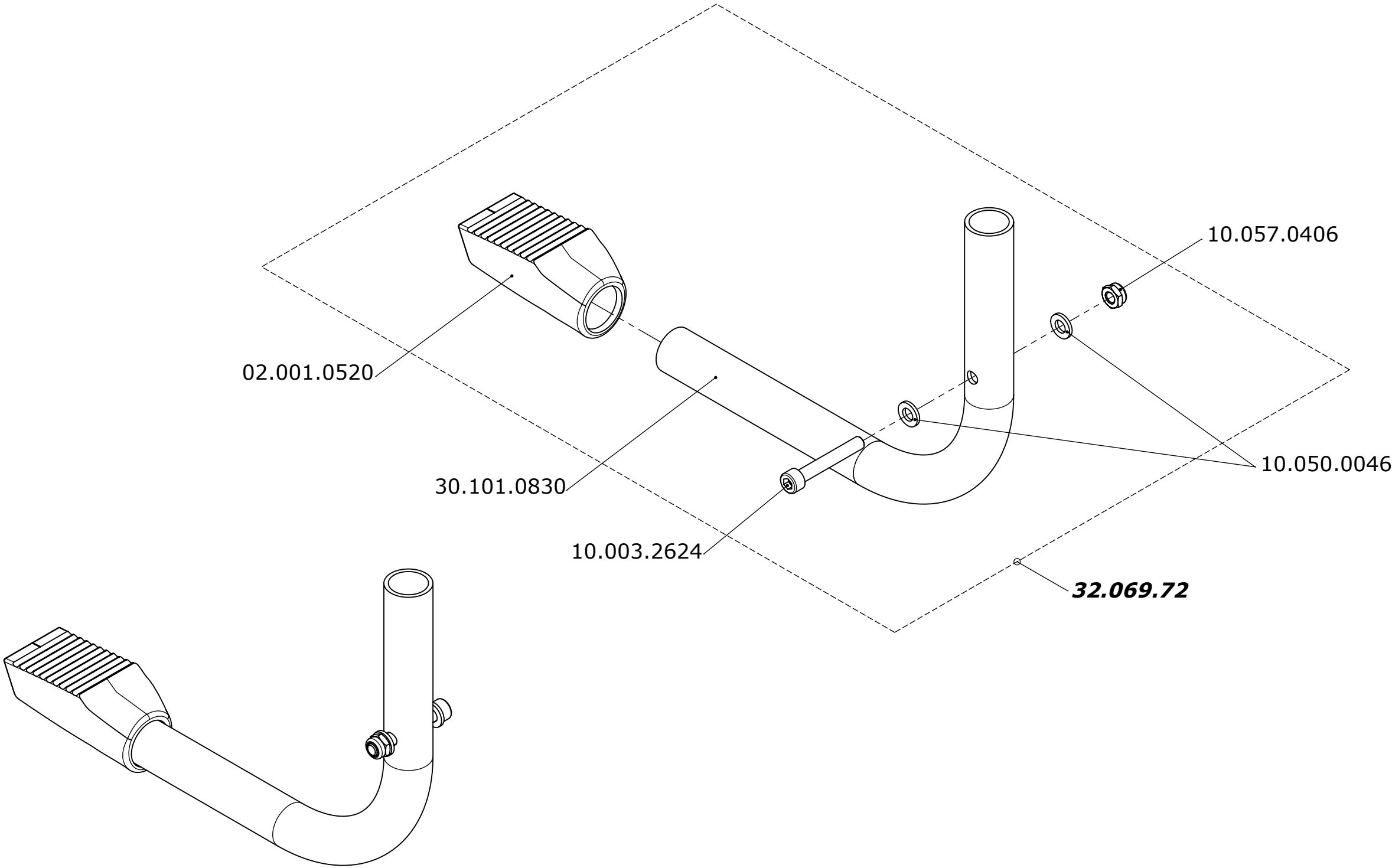

|                                                                                                                                                                              |            |    |                                                               |                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                  | 17.08.2007 | MT | Benennung / Description<br><b>Kipphilfe</b><br><b>Tip aid</b> |                                                        | Blatt / Anz.<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                  |            | -  |                                                               |                                                        |                                                                       |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                              | 30.08.2008 | TN |                                                               |                                                        |                                                                       |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                      |            |    |                                                               |                                                        |                                                                       |
| <b>LEVO</b>  <b>LEVO AG</b><br>THE EXPERTS IN STANDING<br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><b>LCEV</b>                 | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><b>50.070.5830</b> |                                                                       |

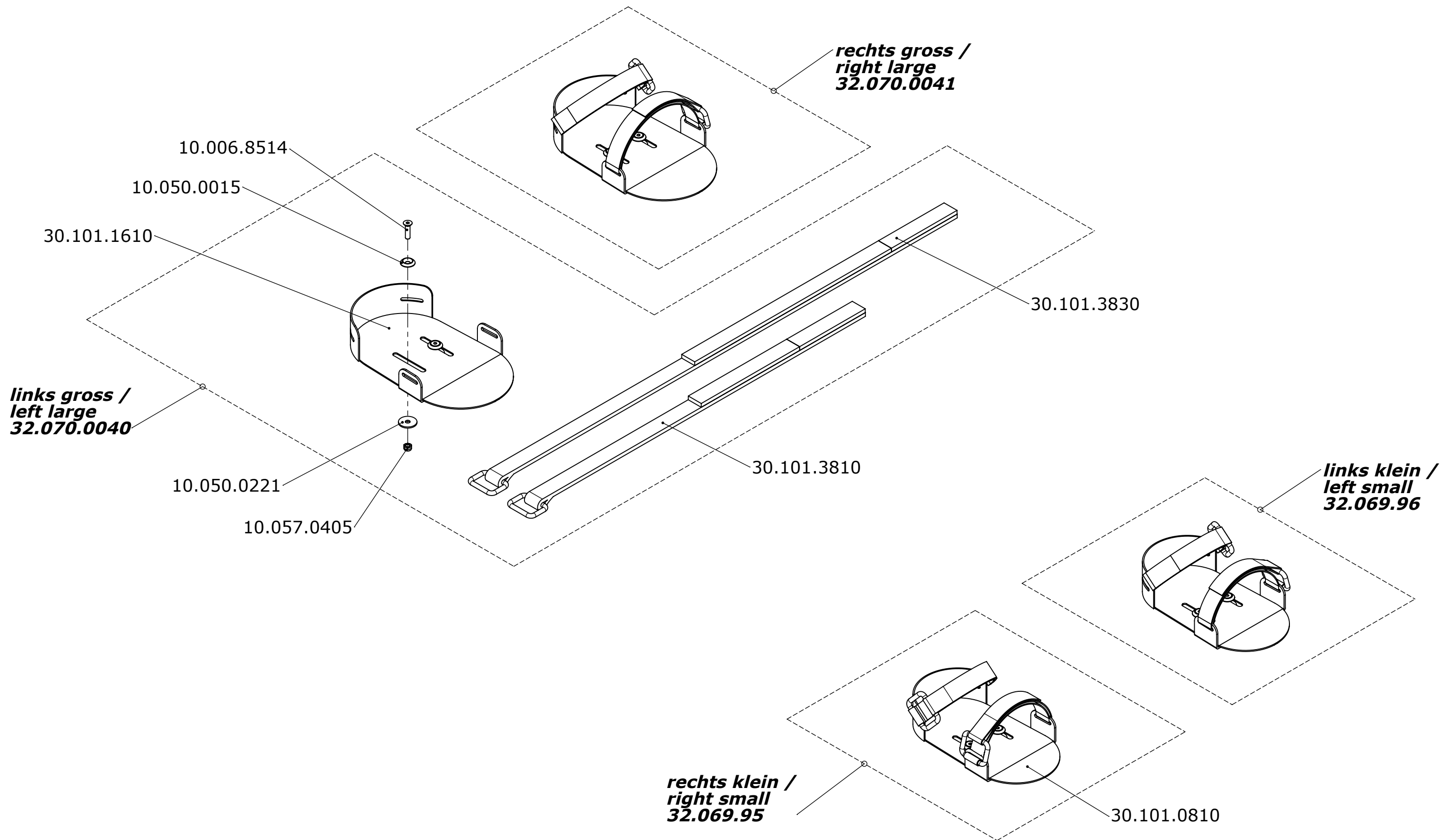

|                                                                                                                                       |            |    |                                                                         |                                  |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                           | 17.08.2007 | MT | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Fussführung<br/>Foot guide</b> |                                  |                                                      |  |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                           |            | -  |                                                                         |                                  |                                                      |  |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                       | 30.04.2008 | TN |                                                                         |                                  |                                                      |  |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                               |            |    |                                                                         |                                  |                                                      |  |
|  <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i>                                          | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i> | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b> |  |
|                                                                                                                                       |            |    | <b>LCEV</b>                                                             | <b>50.070.5900</b>               | Index / <i>Rev.</i>                                  |  |

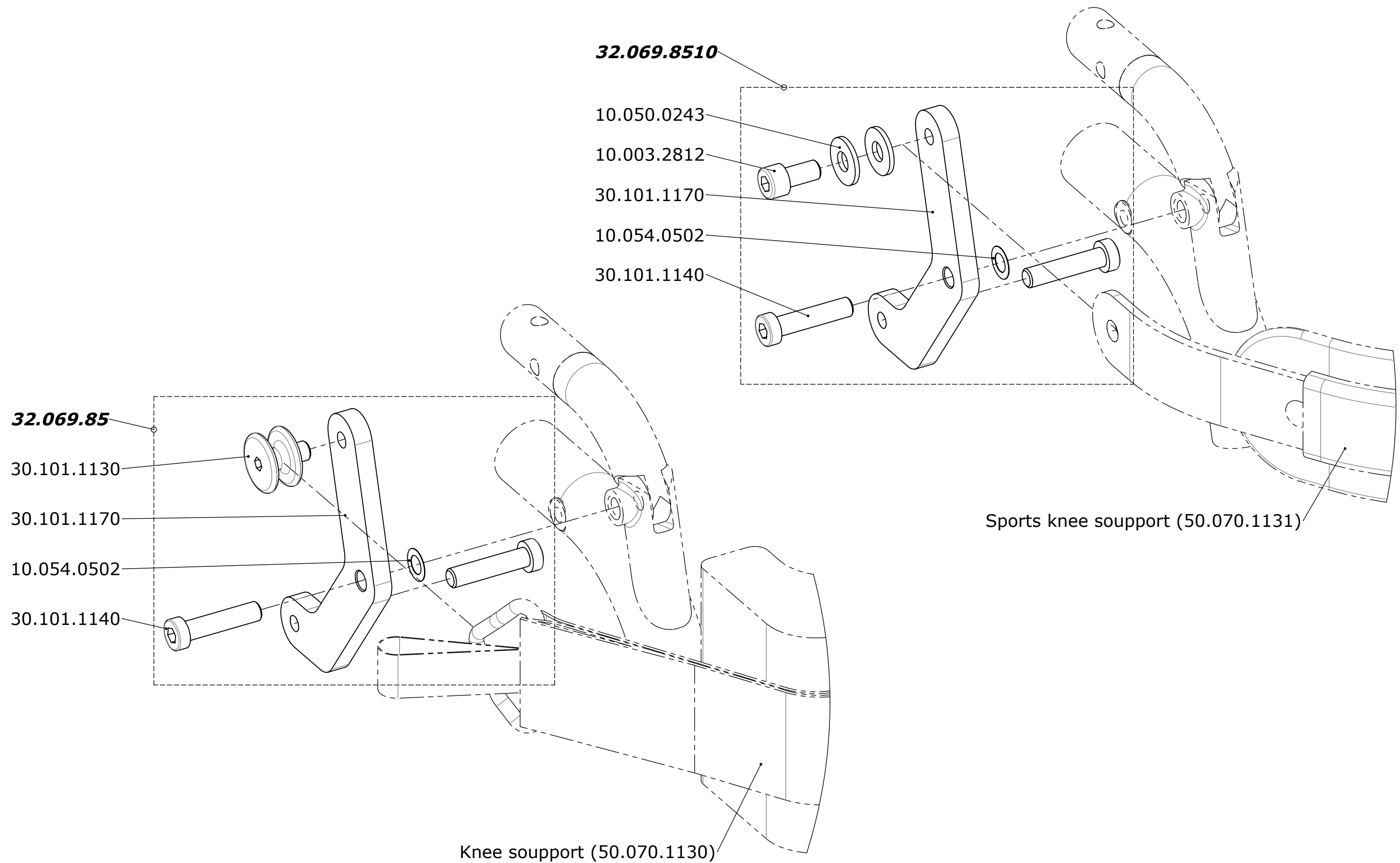

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 13.05.2008           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 19.08.2015           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 19.08.2015           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Kniehalterhöhenadapter**  
**Knee support height adapter**

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.


**50.070.6000**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**B**

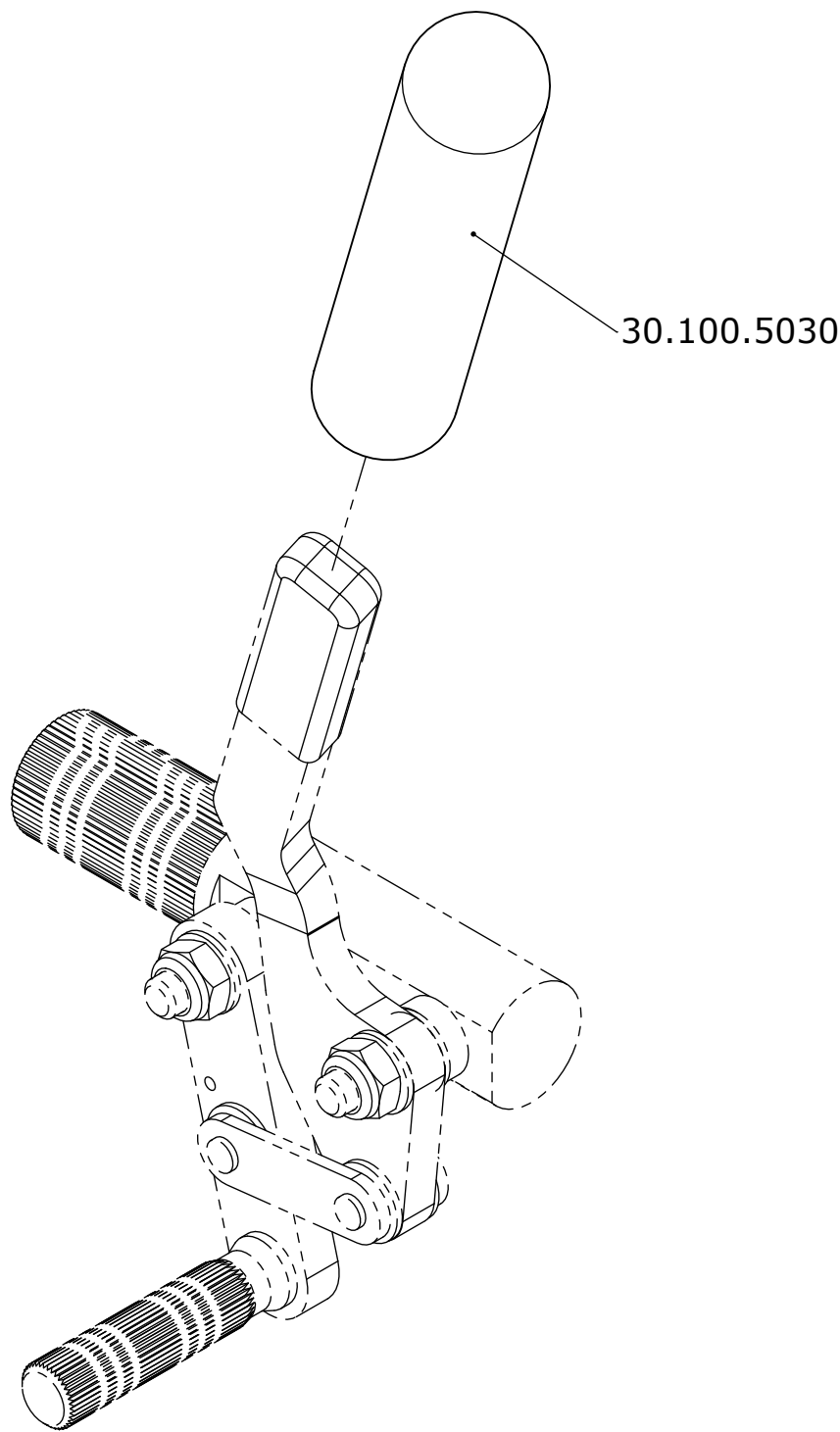


|                                                     |            |    |                                                                                                     |                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                         | 14.08.2007 | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Bremshebelverlängerung</b><br><b>Brake lever extension</b> |                                                   | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / <i>Rev.</i> |
| Geändert<br><i>Modified</i>                         |            | -  |                                                                                                     |                                                   |                                                                             |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                     | 30.04.2008 | TN |                                                                                                     |                                                   |                                                                             |
| Status<br><i>Status</i>                             |            |    |                                                                                                     |                                                   |                                                                             |
| <b>LEVO</b> <sup>®</sup><br>THE EXPERTS IN STANDING |            |    | <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch                                                     | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br><b>LCEV</b> | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br><b>50.070.6100</b>                  |



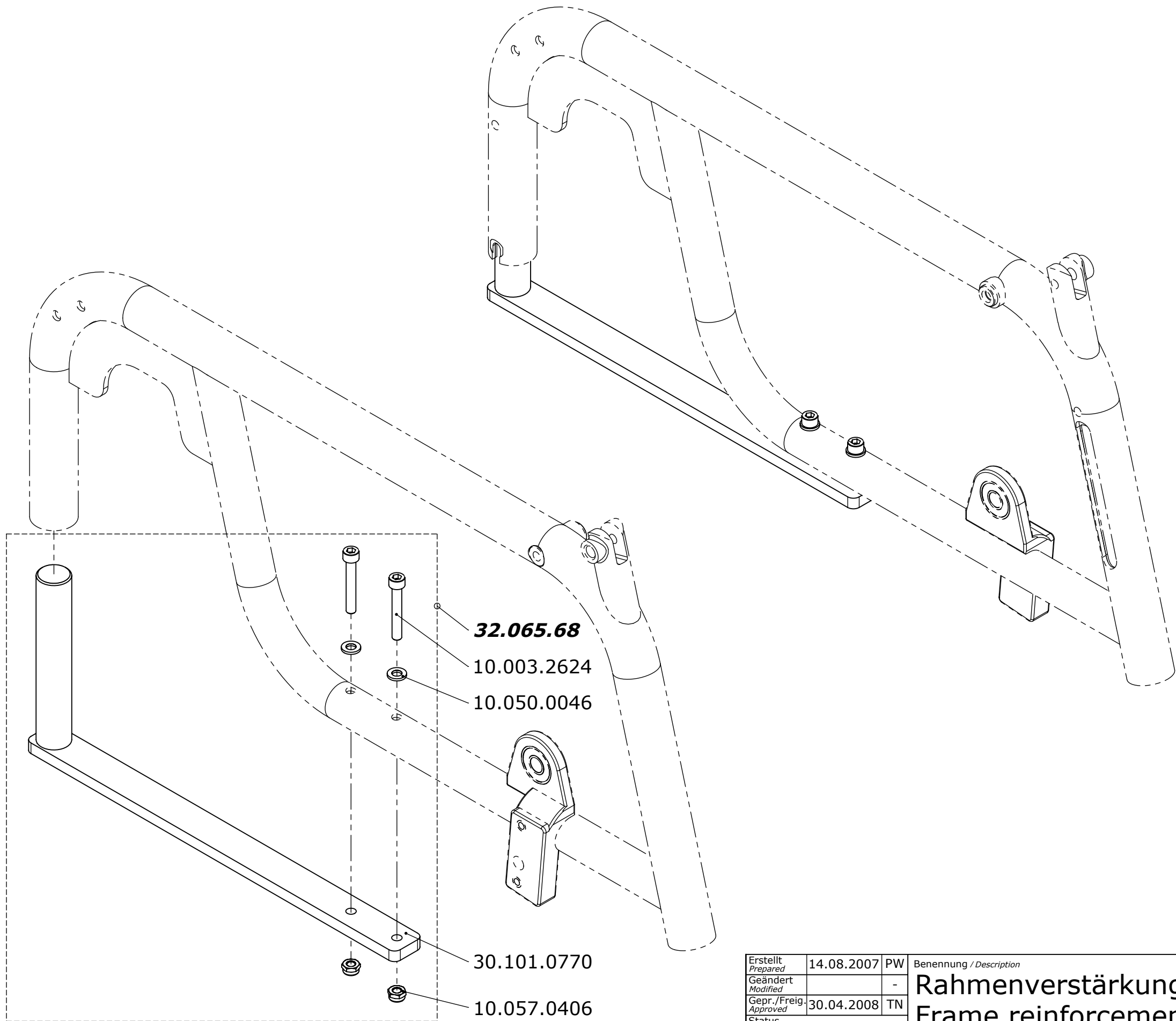


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                  |                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br><i>Prepared</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.08.2007 | PW | Benennung / <i>Description</i><br><br><b>Rahmenverstärkung für e-fix</b><br><b>Frame reinforcement for e-fix</b> |                                                            |                                                                             |
| Geändert<br><i>Modified</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -  |                                                                                                                  |                                                            |                                                                             |
| Gepr./Freig.<br><i>Approved</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2008 | TN |                                                                                                                  |                                                            | Blatt / Anz<br><i>Sheet / no. of</i><br><b>1 / 1</b><br>Index / <i>Rev.</i> |
| Status<br><i>Status</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |                                                                                                                  |                                                            |                                                                             |
| <div><div><div>THE EXPERTS IN STANDING</div></div><div><div> <b>LEVO AG</b><br/>CH-5610 Wohlen<br/>www.levo.ch</div></div></div> |            |    | Rollstuhl<br><i>Wheelchair</i><br><br><b>LCEV</b>                                                                | Artikelnummer<br><i>Art. no.</i><br><br><b>50.070.6200</b> |                                                                             |

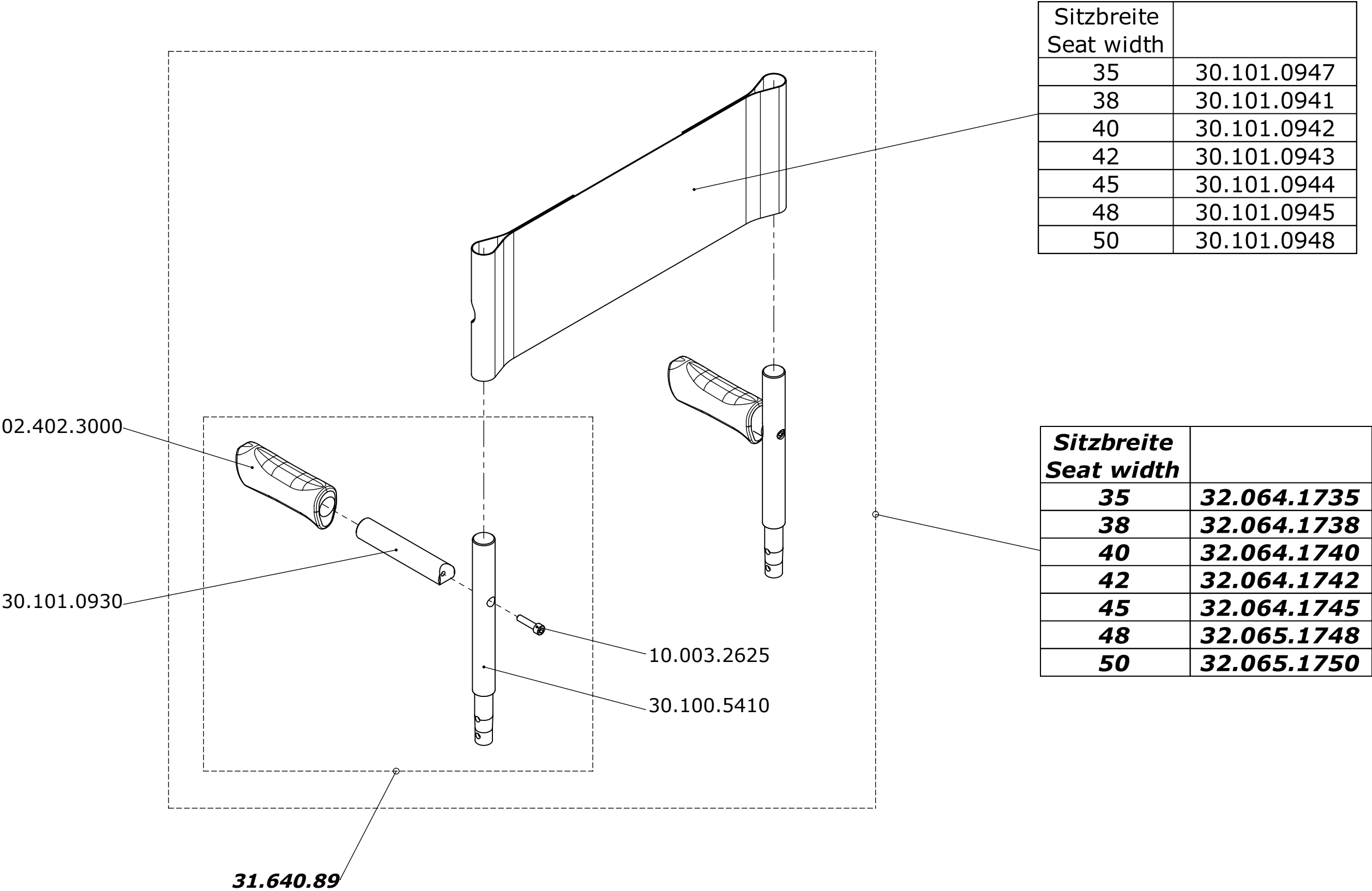


|                                                                               |            |    |                                                                            |                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                          | 30.08.2007 | PW | Benennung / Description<br><b>Rückensysteme</b><br><b>Backrest systems</b> |                                                 | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev. |
| Geändert<br>Modified                                                          |            | -  |                                                                            |                                                 |                                                               |
| Gepr./Freig<br>Approved                                                       | 30.04.2008 | TN |                                                                            |                                                 |                                                               |
| Status<br>Status                                                              |            |    |                                                                            |                                                 |                                                               |
| <b>LEVO</b> <small>dt</small> <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |            |    | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><b>LCEV</b>                                     | Artikelnummer<br>Art. no.<br><b>50.070.6400</b> |                                                               |


\* nicht im Lieferumfang  
not included in our shipment

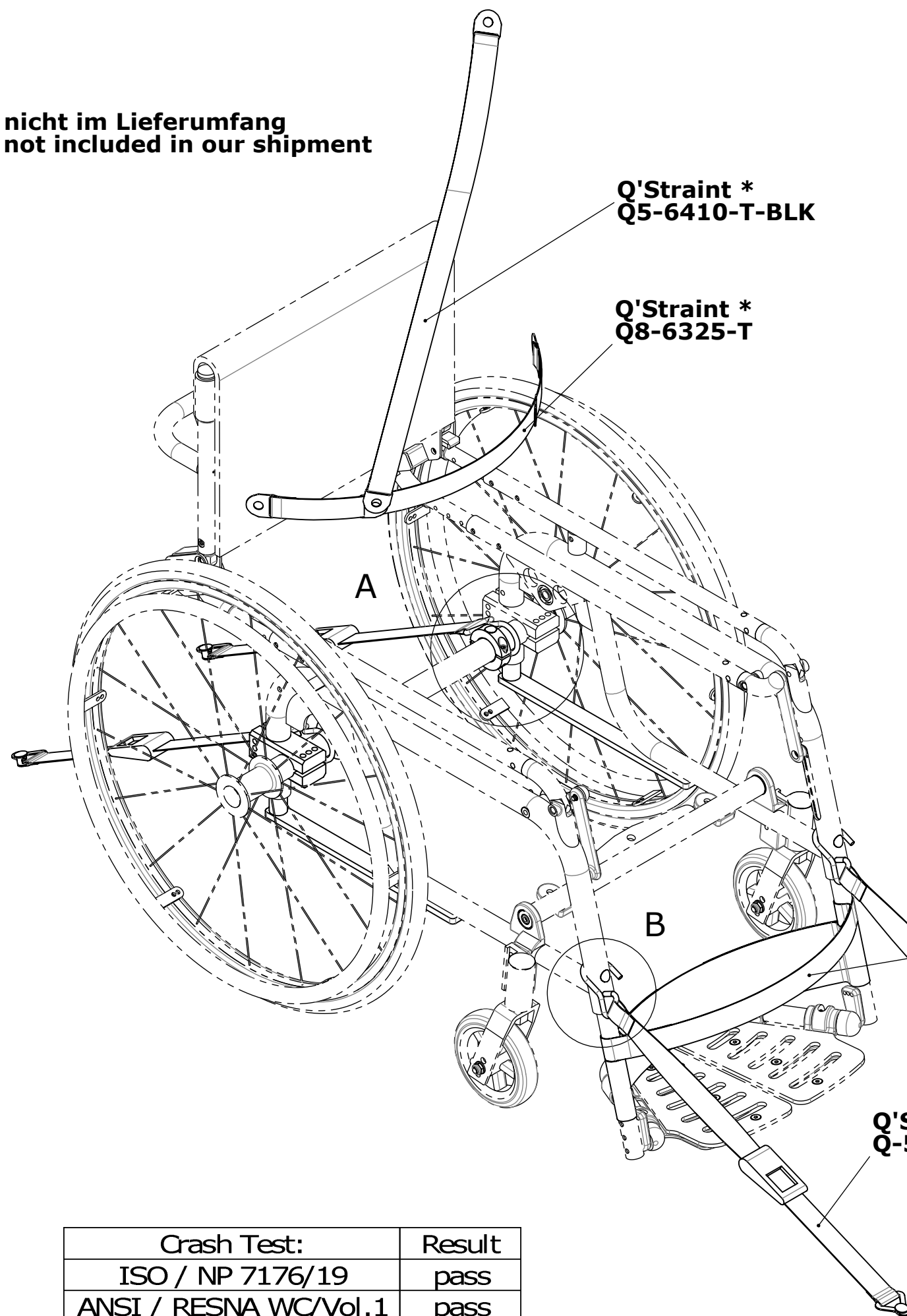

A (1 : 2)

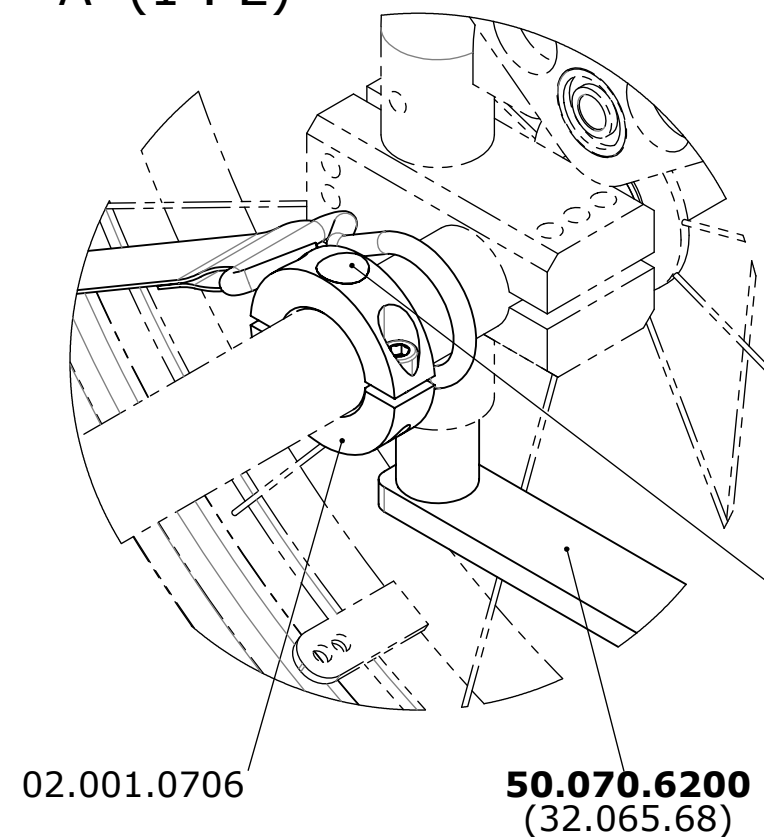

B (1 : 2)

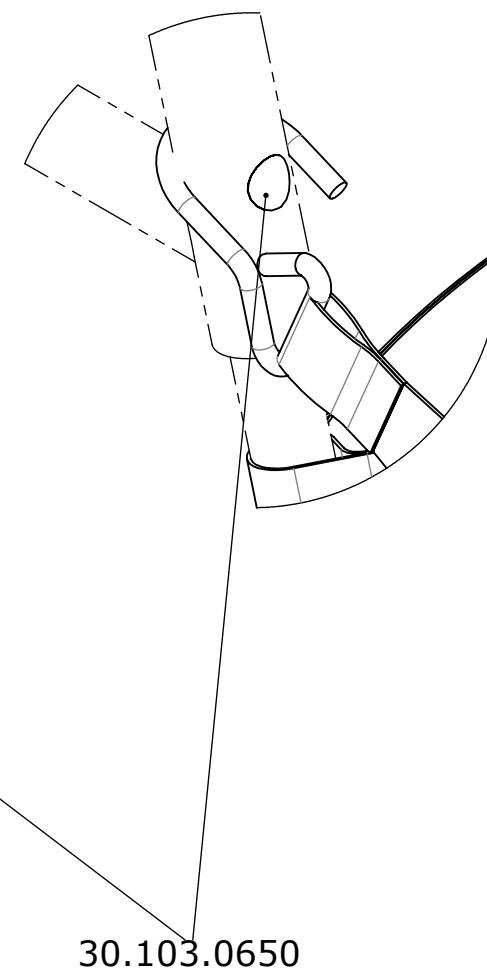

| Sitzbreite<br>Seat width |             |
|--------------------------|-------------|
| 35                       | 30.100.7701 |
| 38                       | 30.100.7702 |
| 40 - 42                  | 30.100.7703 |
| 45                       | 30.100.7704 |
| 48                       | 30.100.7705 |
| 50                       | 30.100.7706 |

| Set Transporthalterung<br>Tiedown-Set |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Sitzbreite<br>Seat                    | Artikelnummer<br>Article-no. |
| 35                                    | 32.070.0501                  |
| 38                                    | 32.070.0502                  |
| 40 - 42                               | 32.070.0503                  |
| 45                                    | 32.070.0504                  |
| 48                                    | 32.070.0505                  |
| 50                                    | 32.070.0506                  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Crash Test:           | Result |
| ISO / NP 7176/19      | pass   |
| ANSI / RESNA WC/Vol.1 | pass   |

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 25.05.2007           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 04.12.2013           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 04.12.2013           | FW |
| Status                   | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

Set Transporthalterung  
Tiedown-Set

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.6500**


Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**A**

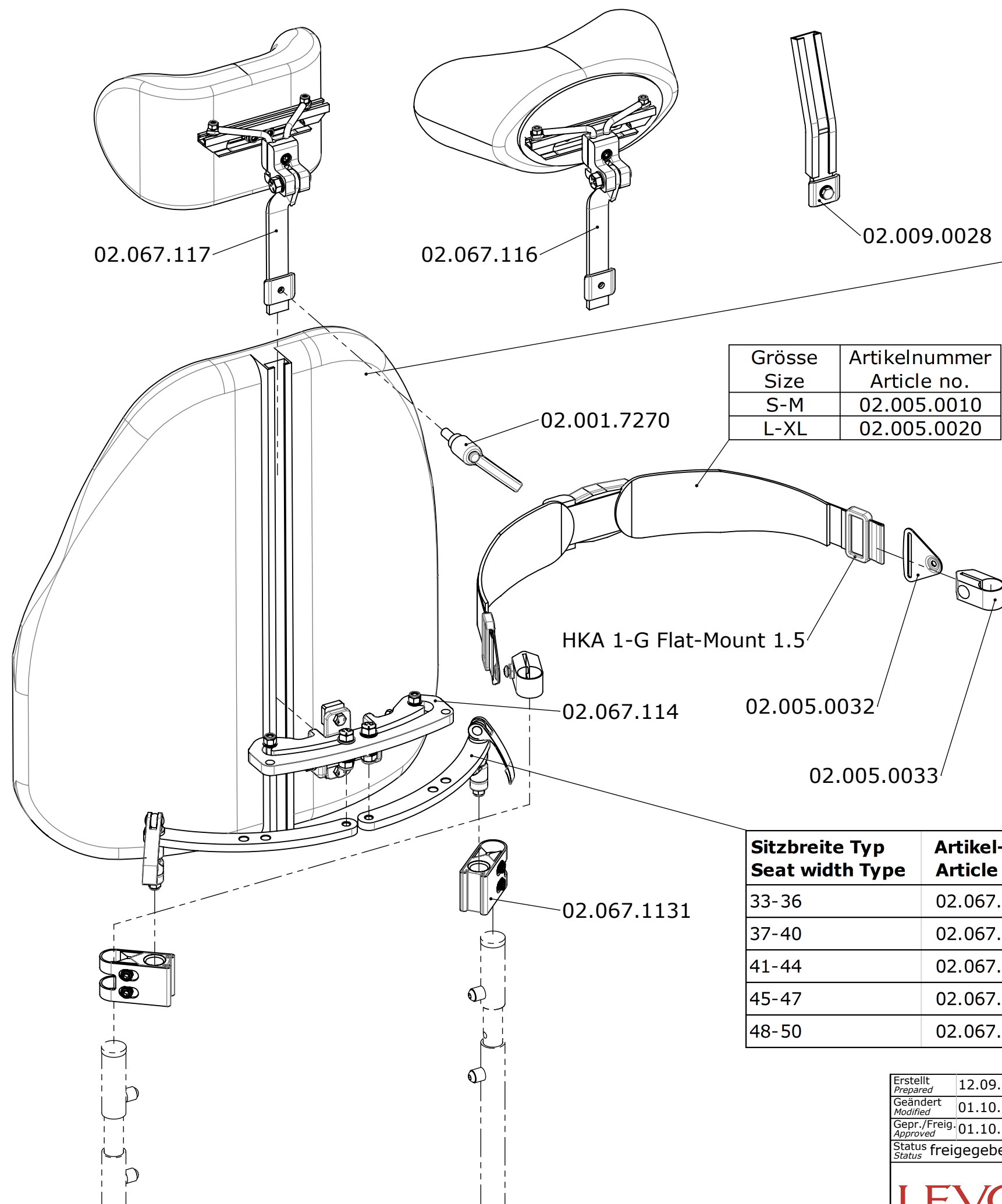

| Grösse<br>Size | Artikelnummer<br>Article no. |
|----------------|------------------------------|
| S-M            | 02.005.0010                  |
| L-XL           | 02.005.0020                  |

| Sitzbreite<br>Seat width | Rücken Typ<br>Backrest Type | Artikel-Nr.<br>Article no. | Bezeichnung<br>V-Trak AXXIS | Description<br>V-Trak AXXIS |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35                       | 26-33                       | 02.009.0100                | Niedrig                     | Low                         |
| 38 / 40                  | 30-38 M                     | 02.009.0101                | Niedrig                     | Low                         |
| 42 / 45                  | 40/44 L                     | 02.009.0102                | Niedrig                     | Low                         |
| 48 / 50                  | 48-52 XL                    | 02.009.0103                | Niedrig                     | Low                         |
| 38 / 40                  | 30-38 M                     | 02.009.0110                | Hoch                        | High                        |
| 42 / 45                  | 40/44 L                     | 02.009.0111                | Hoch                        | High                        |
| 48 / 50                  | 48-52 XL                    | 02.009.0112                | Hoch                        | High                        |
| 35                       | 30-38 S                     | 02.009.0100                | Reduziert                   | Reduced                     |
| 38 / 40                  | 30-38 M                     | 02.009.0116                | Reduziert                   | Reduced                     |
| 42 / 45                  | 40/44 L                     | 02.009.0117                | Reduziert                   | Reduced                     |
| 48 / 50                  | 48-52 XL                    | 02.009.0118                | Reduziert                   | Reduced                     |
| 35 / 38                  | M Deep contour              | 02.009.0051                | Hoch                        | High                        |
| 40 / 42 / 45             | L Deep contour              | 02.009.0052                | Hoch                        | High                        |
| 48 / 50                  | XL Deep contour             | 02.009.0053                | Hoch                        | High                        |
| 35 / 38                  | M Deep contour              | 02.009.0055                | Reduziert hoch              | Reduced high                |
| 40 / 42 / 45             | L Deep contour              | 02.009.0056                | Reduziert hoch              | Reduced high                |
| 48 / 50                  | XL Deep contour             | 02.009.0057                | Reduziert hoch              | Reduced high                |

| Sitzbreite Typ<br>Seat width Type | Artikel-Nr.<br>Article no. |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 33-36                             | 02.067.107                 |
| 37-40                             | 02.067.108                 |
| 41-44                             | 02.067.109                 |
| 45-47                             | 02.067.110                 |
| 48-50                             | 02.067.111                 |

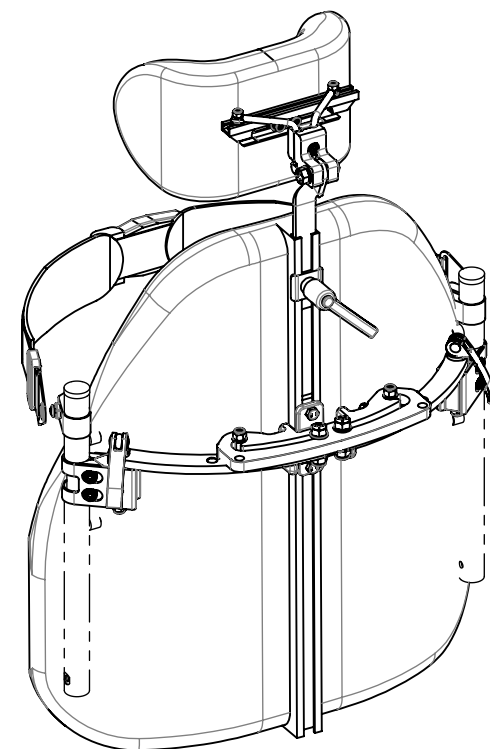

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 12.09.2016           | PW |
| Geändert<br>Modified     | 01.10.2018           | PW |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 01.10.2018           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

V-Track Rücken  
V-Track backrest

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch


Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.



**50.070.6700**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
**A**

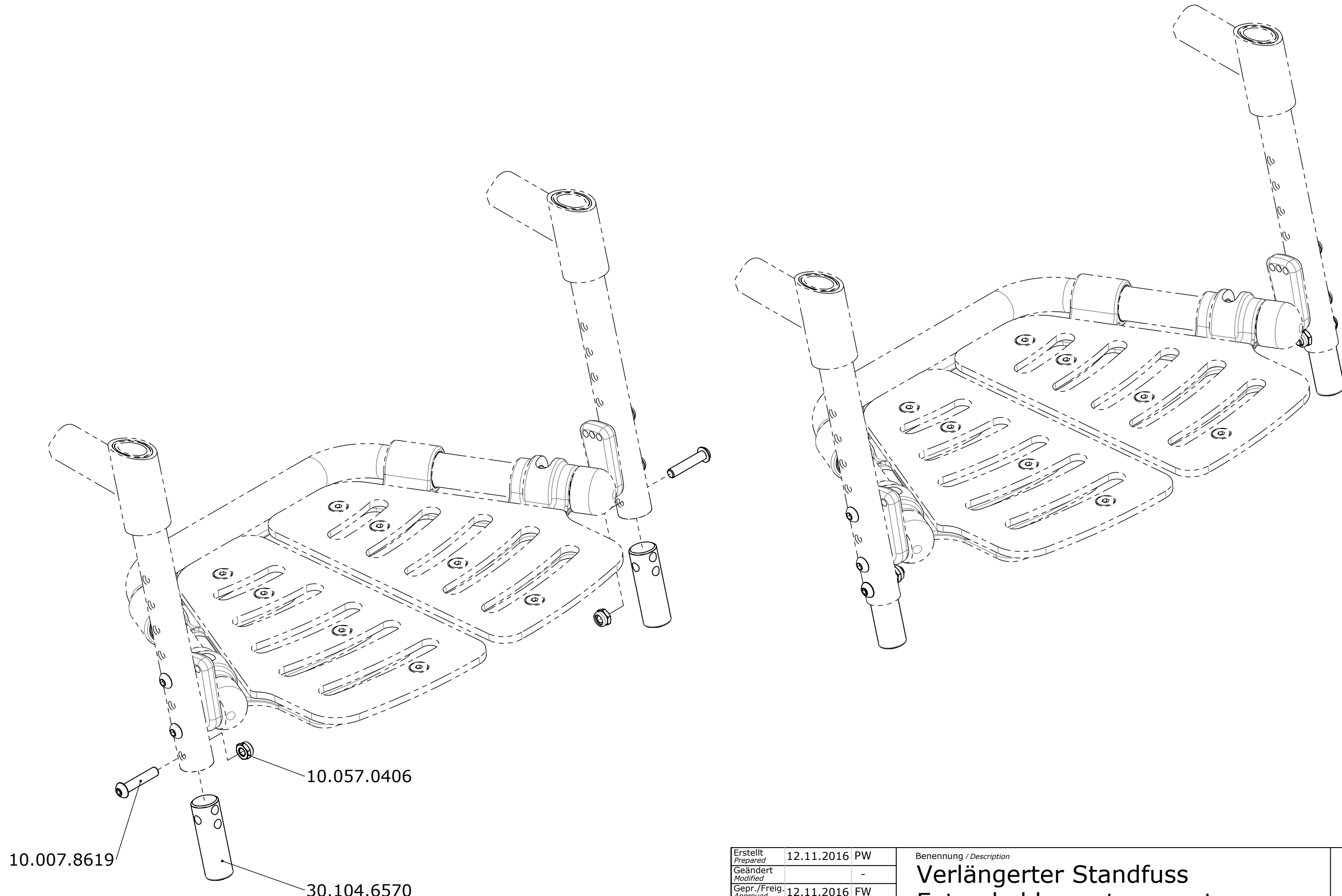


|                                                                                                                                       |                      |    |                                                                                                 |                                                     |  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| Erstellt<br>Prepared                                                                                                                  | 12.11.2016           | PW | Benennung / Description<br><br><b>Verlängerter Standfuss</b><br><b>Extended legrest support</b> |                                                     |  | Blatt / Anz<br>Sheet / no. of<br><b>1 / 1</b><br>Index / Rev.<br>- |
| Geändert<br>Modified                                                                                                                  |                      | -  |                                                                                                 |                                                     |  |                                                                    |
| Gepr./Freig.<br>Approved                                                                                                              | 12.11.2016           | FW |                                                                                                 |                                                     |  |                                                                    |
| Status<br>Status                                                                                                                      | freigegeben/approved |    |                                                                                                 |                                                     |  |                                                                    |
|  <b>LEVO AG</b><br>CH-5610 Wohlen<br>www.levo.ch |                      |    | Rollstuhl<br>Wheelchair<br><br><b>LCEV</b>                                                      | Artikelnummer<br>Art. no.<br><br><b>50.070.6800</b> |  |                                                                    |



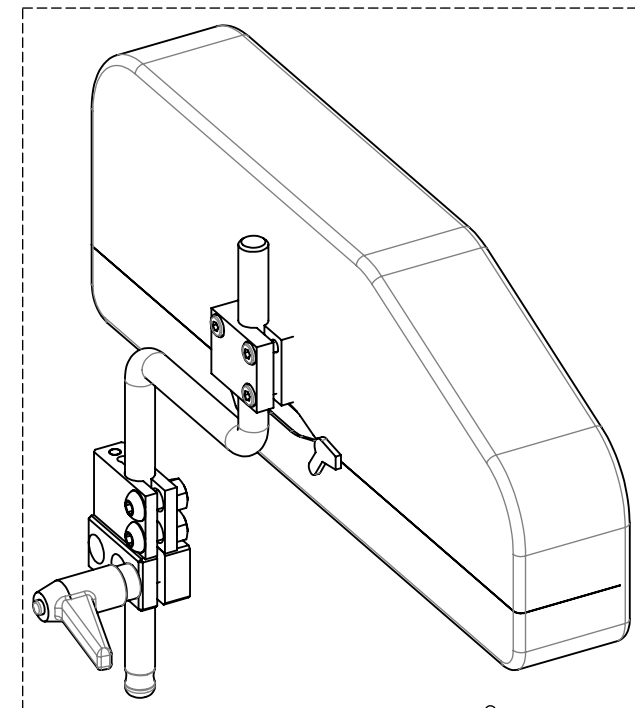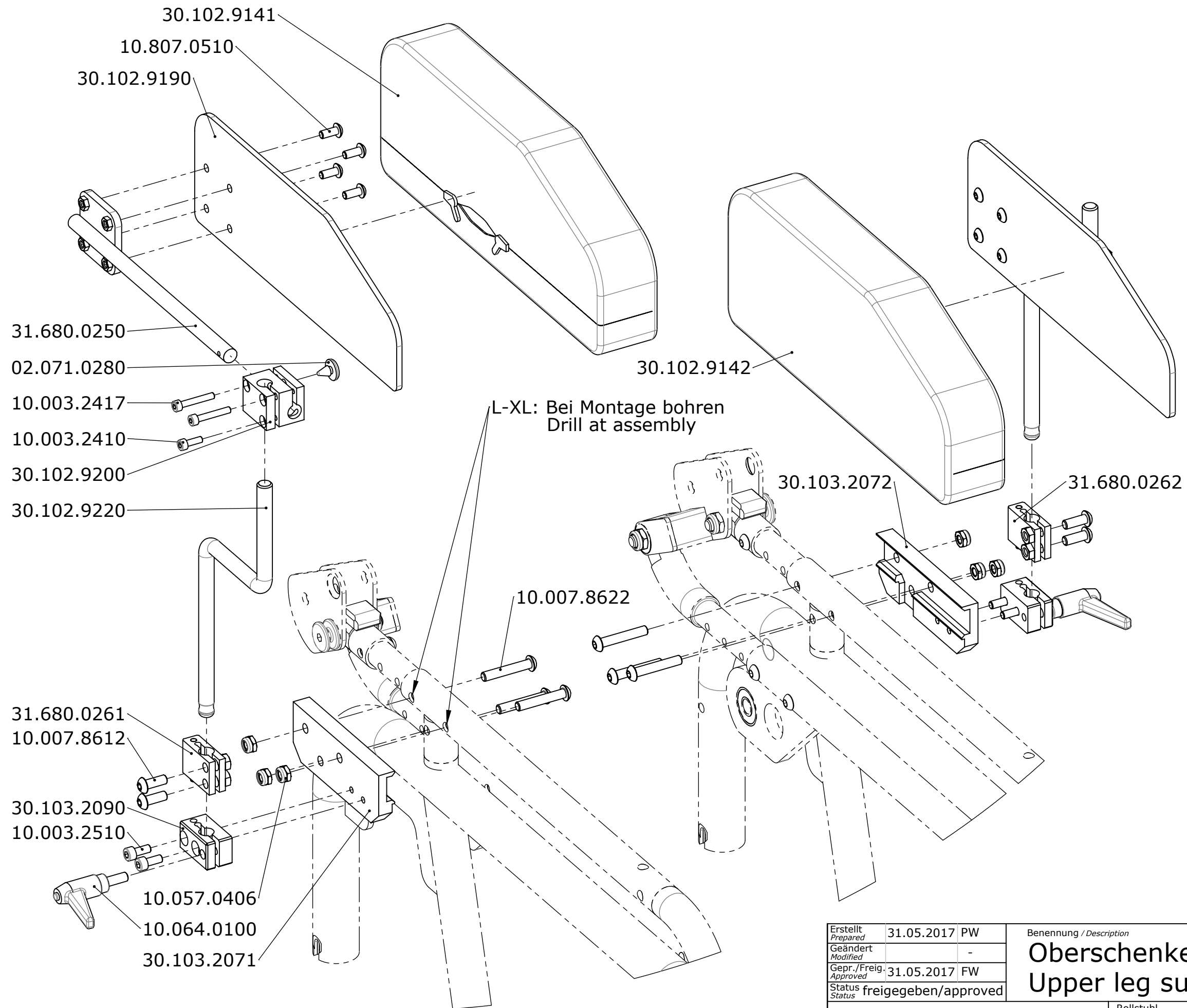

**rechts/right:**  
**32.070.0581**

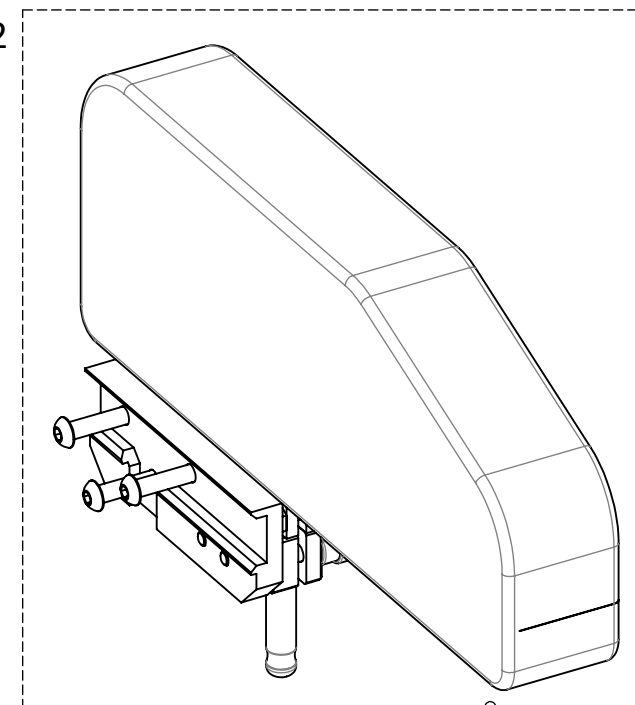

**links/left:**  
**32.070.0582**

|                          |                      |    |
|--------------------------|----------------------|----|
| Erstellt<br>Prepared     | 31.05.2017           | PW |
| Geändert<br>Modified     |                      | -  |
| Gepr./Freig.<br>Approved | 31.05.2017           | FW |
| Status<br>Status         | freigegeben/approved |    |

Benennung / Description

**Oberschenkelsupport**  
**Upper leg support**

**LEVO**   
THE EXPERTS IN STANDING

**LEVO AG**  
CH-5610 Wohlen  
www.levo.ch

Rollstuhl  
Wheelchair

**LCEV**

Artikelnummer  
Art. no.

**50.070.6900**

Blatt / Anz.  
Sheet / no. of  
**1 / 1**  
Index / Rev.  
-