

# Monteringsanvisning

## Ryggfästen J3 rygg på Etac Cross 5 och 6

1. Det finns en liten och en stor modell av fästena som följer med ryggen (bild 1). Oavsett vilken typ du har så börja med att montera isär dem (bild 2 alternativt bild 3). Delen med den lilla spärrhaken används vid monteringen men delen med klämman behövs inte vidare.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



2. Montera fast delen med spärrhaken på plåtfästet enligt bilderna nedan. Detta är silverfärgat på bilderna för tydlighetens skull men svart i verkligheten (bild 4 5 alternativt 6)

Bild 4



Bild 5



Bild 6



# Monteringsanvisning

## Ryggfästen J3 rygg på Etac Cross 5 och 6 - fortsättning

3. Se till att det finns lite avstånd mellan plåtfästet och rundstaven (bild 7). Tag loss ändavslutet (plastpluggen) i toppen på Crossrullstolens ryggrör och dra loss ryggklädseln uppåt. Trä därefter in fästet i den runda skåran (bild 8). Drag fast fästet med en 3 mm insexnyckel på önskad höjd (bild 9). Ratten på ryggrör som syns längst ner till vänster i bild 9 behöver i vissa fall av utrymmesskäl flyttas till utsidan istället för insidan av ryggröret. Efter montering skall ändavslutet återmonteras.

Bild 7



Bild 8



Bild 9



## Kombinationer

Sittbredd Cross 5	Bredd på Jay-rygg som kan monteras*
35cm	31cm
37,5cm	31cm alternativt 36cm
40cm	31cm alternativt 36cm
42,5cm	36cm alternativt 41cm
45cm	36cm alternativt 41cm
47,5cm	41cm alternativt 46cm
50cm	41cm alternativt 46cm

\*J3 ryggens bredd är densamma som dess artikelnummers två sista siffror

## Övrigt

Överstig inte rullstolens eller Jay-ryggens maximala brukarvikter vid användning.  
 Fästets artikelnummer: J3RFE5