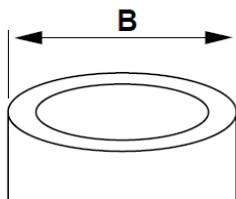


## Jay J3 rygg

**1**


### Avsett bruk av J3 rygg

J3 ryggarna är avsedda att monteras på diverse rullstolar av olika fabrikat\* och dess fästen är anpassade för detta. Fästena kan monteras på ryggrör med ytterdiameter från 1,9 till 2,85 cm (B)


**2**

### Att välja rätt bredd på J3 rygg

J3 ryggens fäste är justerbara i bredd, vilket gör att samma rygg kan användas till rullstolar av olika bredd. Ryggbredden är angiven i ryggstödet artikelnummer. Exempel J3SCMTS36 är ett 36 cm ryggstöd. Detta ryggstöd kan monteras på stolar som har sittbredd/ytermått mellan ryggrör (A) från 34,9 cm till 41,3 cm. Se figur 1 samt tabellen nedan


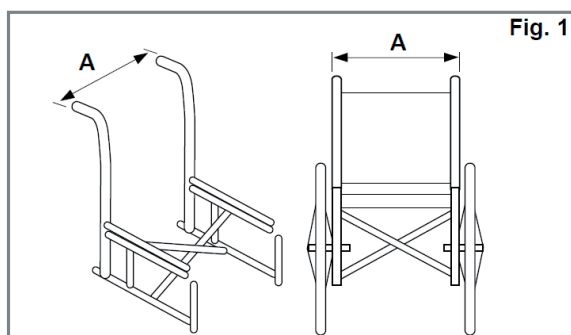


J3 Ryggdyna, bredd* (alla konturer)	Bredd på ryggrör, från utsida till utsida av rören (Fig. 1-A)			
	Min. bredd		Max. bredd	
	tum	cm	tum	cm
12" 31cm	11.7	29.7	14.3	36.3
14" 36cm	13.7	34.9	16.3	41.3
16" 41cm	15.7	40.0	18.3	46.4
18" 46cm	17.7	45.1	20.3	51.6
20" 51cm	19.7	50.1	22.3	56.5


\* För montering på Pantheras rullstolar S2, S3 och U2, U3 samt Etacs Cross och Next se separata monteringsanvisningar för dessa rullstolar.

**3** J3 ryggar är avsedda att ersätta rullstolens rygglädsel. Börja därför alltid med att montera av denna.

**4** Vid montering av J3 ryggen behövs en 4 mm insexnyckel samt en 10 mm blocknyckel. Ryggen motteras lättast då brukaren inte sitter i stolen. Efter att monteringen gjorts klar kan brukaren åter placeras i rullstolen och de personliga inställningarna kan då göras.

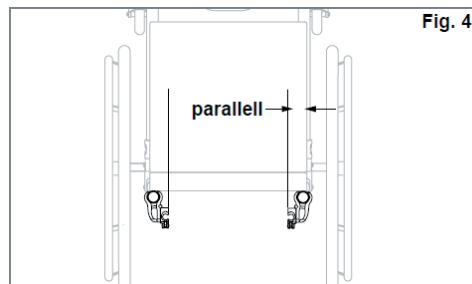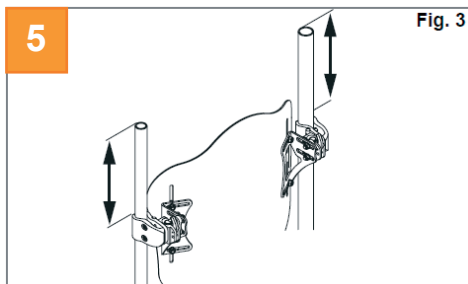


Fastställ önskad placering för fästena på stolens ryggrör. Fästena ska vara på ungefär samma höjd på vardera ryggrör (fig 3) och parallella med sitsramen (fig 4). Högre placering på ryggrören är generellt bättre.

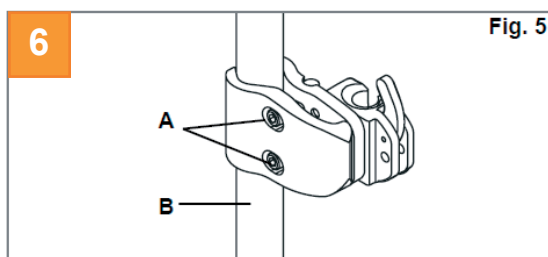

Montera fästena (fig 5)

- Lossa skruvarna (A) med medföljande 4 mm insexnyckel. OBS - För grövre rördiameter kan skruvarna behöva skruvas ut helt.
- Montera och rikta upp fästena på ryggrören (B)
- Handdra skruvarna (A)

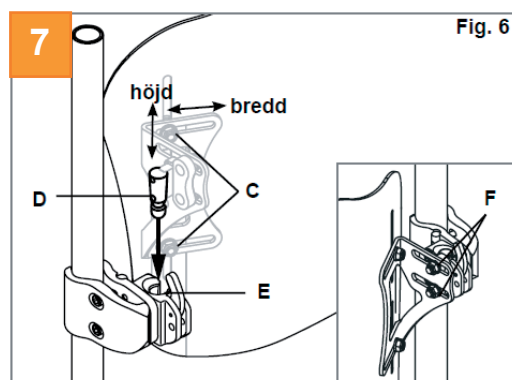

Montering och uppriktning av J3 rygg (fig 6)

- Lossa muttrarna (C) och monteringsstiftets muttrar (F) med 10 mm blocknyckel så att fästet kan föras fritt i alla riktningar.
- Montera J3 ryggen på fästena genom att sticka in vänster och höger monteringsstift (D) i respektive hållare (E).
- Sätt ryggstödet på plats
- Handdra muttrarna på insidan av monteringsstiften (F). OBS-ryggstödet djup och vinkel kan behöva ytterligare justering för att säkerställa korrekt anpassning för användaren.
- Handdra muttrarna (C). OBS-ryggstödshöjden kan kräva ytterligare justering för att säkerställa korrekt anpassning för användaren.
- Testa frigöringen genom att trycka frigöringsspakarna framåt och ta bort ryggstödet från stolen. Korrekt uppriktning av fästena och ryggstöd är uppnådd när friktionsfri isättning och frigöring lätt kan utföras.
- Om korrekt uppriktning inte föreligger, justera komponenterna till dess att de riktas upp korrekt.
- När korrekt uppriktning uppnåtts, dra åt alla skruvar.