

REKONDITIONERINGSANVISNING JAY SIT- OCH RYGGDYNOR

För att undvika ev. smittspridning, följ dessa rekommendationer

Överdrag dyna:

Avlägsna överdraget från dynan och vänd det ut och in. De luftgenomsläppliga överdragen samt stretchöverdragen kan maskintvättas i 70° C och inkontinensöverdragen i 60° C. Därefter torktumlas de på låg värme eller droptorkas.

Överdrag rygg:

Avlägsna överdraget genom att dra isär kardborren. Lossa överdraget från ryggskalet. Leta upp och öppna blixtlåset i överdragets botten. Ta ut skumgummit och vänd överdraget ut och in. Dra för säkerhets skull igen dragkedjan för att undvika revor. Maskintvätta i varmt vatten (60° C). Droptorka eller tumla torrt på låg värme.

Baser:

Alla baser och träplattan kan ytdesinficeras med t ex Virkon, eller liknande ytdesinficeringsmedel. Torkas sedan av med en fuktig trasa, den kan sedan lufttorkas eller torkas i torkskåp.

Följande baser kan även autoklaveras i 105°C: Combi soft P, Basic, Easy, Balance, Xtreme Active och GS.

Fluidinlägg:

Alla fluidinlägg kan ytdesinficeras med t ex Virkon, eller liknande ytdesinficeringsmedel. Tvättas sedan av med antibakteriell tvållösning och vatten. Torkas torr med torr trasa och lufttorkas.

Luftinlägg:

Desinficera luftinlägget.

För desinficering av luftinlägget ska du använda ett bakteriedödande medel som uppfyller smittskyddskraven.

Vi rekommenderar att du använder ett desinfektionsmedel med tuberculocida egenskaper. Följ tillverkarens spädningssanvisningar. För desinfektion hemma, använd en lösning av proportionerna 125 ml Klorin till 1 liter vatten.
























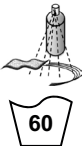
















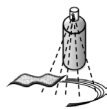


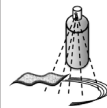
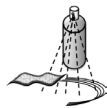


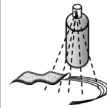
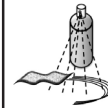
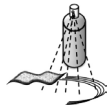
Låt klorinlösningen vara kvar på den rengjorda dynan i 10 minuter.

Skölj noga och torka.

Ryggskal:

Då produkten skall användas av en ny person måste den rengöras noga. Alla ryggskalen ska ytdesinficeras med t. ex Virkon, eller motsvarande godkänt alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Tvättas sedan av med antibakteriell tvållösning och vatten. Torkas torr med torr trasa och lufttorkas.

För mer detaljerad information, se nästa sida.

Godkänd rengöringsprocedur för JAY Dynor									
Produkt	JAY Lite	JAY J3	J2 GS	JAY Easy Visco	JAY Soft Combi P	JAY Xtreme Active	JAY Basic	JAY Easy	JAY Balance
Yttre överdrag (Mikroklimatisk och Stretch)									
(1). Maskintvätt 70°C 									
Yttre överdrag (Inkontinens)									
(2). Maskintvätt 60°C 									
Inre överdrag									
(3). Spraya och torka desinfektion  eller maskintvätta i 60°C 	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
Dynas kärna (skumbas)									
(4). Ångautoklav upp till 105 °C (1) 	✗	✗	✗	✗	✗				✗
Spraya och torka desinfektion 						✗	✗	✗	✗
(5). Nedsänkning desinfektion 				✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dynas delar									
Air inlägg Ej tillämpligt			Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
Positioneringsdelar Ej tillämpligt			Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
Fluidinlägg Ej tillämpligt			Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		Ej tillämpligt			

1. 70°C är maximalt rekommenderad temperatur.

2. 60°C är maximalt rekommenderad temperatur.

3. Xtreme Active och Balance inre överdrag kan tvättas i 60°C alternativt rengöras genom spraydesinficering eller avtorkning med desinfektionsmedel.

Missfärgning kan uppstå vid 60°C, men den funktionella aspekten för överdragen minskar inte.

4. En autoklav är en självläsande maskin som steriliseras med ånga under tryck.

5. Vid låg temperatur (< 30°C)

Produktgarantin gäller inte för produkter som skadats på grund av att dessa rengöringsinstruktioner inte följts eller av olämplig användning av rengöringsmedel.

Rekommenderade desinfektionsmedel

Alla desinfektionsmedel som är noterade och rekommenderas av Robert Koch-institutet: http://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html