

MANUELL  
RULLSTOL



# Helium

KORTBRUKSANVISNING



**QUICKIE®**

## Hantering

### Snabbkopplingsaxlar på drivhjul

Drivhjulen är utrustade med snabbkopplingsaxlar.

Hjulen kan följaktligen tas på och av utan användning av verktyg.

För att ta loss ett hjul trycker du helt enkelt ner snabbkopplingsknappen på axeln (1) och drar ut hjulet (Fig. 1).




### VIKTIGT:

Montera drivhjul genom att hålla snabbkopplingsknappen på axeln nedtryckt medan du för in axeln i ramen.

När du släpper knappen låses hjulet på plats. Knappen bör då hoppa tillbaks till utgångsläget.

### Transport av stolen


Det mest kompakta utförandet får stolen med drivhjulen avtagna. Du kan vika ned ryggstödet genom att dra i snöret (1) (se bild 3) som hänger i ryggstödet (Fig. 2 + 3).

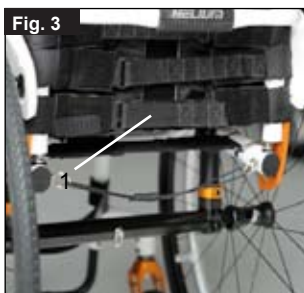

## Märkning

På rullstolens undre ramrör finns en märklapp som ser ut som exemplet nedan. På märklappen anges information så som max brukarvikt, mått på stolen, stolens serienummer samt tillverkningsdatum.

**Exempel**

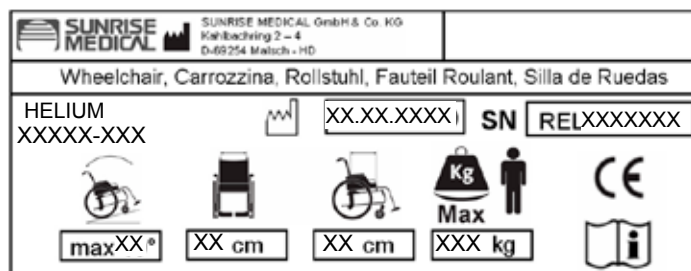

## Inställningar/funktioner – Tippskydd

Sunrise Medical rekommenderar att alla stolar ska vara utrustade med tippskydd. Vid montering av tippskydd, använd momentet 7 Nm.



1. Passa in tippskydden i spåren i infästningen:

a. Tryck på den bakre knappen på tippskyddsadaptern så att bägge låsstiften dras inåt

.b. Passa in tippskydden (1) i spåren i adaptern.

c. Vrid tippskydden nedåt tills låsstiften låses fast i infästningen.

d. Montera det andra tippskyddet på samma sätt.

2. Justera tippskydden

För att erhålla en lämplig markfrigång om ca 2,5 till 5 cm måste tippskydden höjas eller sänkas.

Tryck på frigöringsknappen på tippskyddet så att bägge låsstiften dras inåt. Flytta innerröret uppåt eller nedåt och lås fast det i de avsedda hålen. Släpp knappen. Montera det andra tippskyddshjulet på samma sätt. De två hjulen ska sitta på samma höjd. (Fig. 4).

### Fara!

Om tippskydden inte är påmonterade, eller om de monterats felaktigt, finns det risk för att stolen tippar med skador som följd.



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
435 41 Mölndal  
Tel: 031-748 37 00

e-post: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)