

Kortbruksanvisning Levo Summit EI

OBS: konsultera alltid den fullständiga Bruksanvisningen innan din rullstol tas i bruk.



Läs alltid den fullständiga bruksanvisningen innan du använder din rullstol! Underlåtenhet att följa anvisningar i den kan resultera i allvarlig personskada och/eller skada på rullstolen! Denna kortbruksanvisning är ett utdrag ur den fullständiga bruksanvisningen BRU_12300_2020-06-10. Om du har frågor eller problem, kontakta din Hjälpmedelscentral eller auktoriserade återförsäljare.

Tillverkare:

LEVO AG
Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen
Tel: +41 (0)56 618 44 11
Fax: +41 (0)56 618 44 10

Distributör:

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
031-748 37 00
post@sunrisemedical.se

Säkerhetsinformation

- a) LEVO Summit EL måste placeras på ett plant, fast underlag innan brukaren höjs till stående.
- b) Bromsarna på LEVO Summit EL måste aktiveras innan brukaren höjs till stående.
- c) Det är absolut nödvändigt att montera knästödet och bröstrem korrekt innan du använder ståfunktionen!

1. Knästödet

Det är absolut nödvändigt att montera knästödet och bröstrem korrekt innan du använder ståfunktionen! Knästödet håller underbenen på plats medan stolen höjs till stående position.



Varning: Du bör aldrig övergå till stående utan dessa säkerhetsanordningar på plats (olycksrisk).




VARNING:

- Placeringen av knäskyddet på skenbenet är viktigt för säkerhet och korrekt stående. Positionerad med brukare sittande i stolen är den korrekta placeringen.
 - Vertikalt läge – cirka 4 cm från toppen av knäskyddet till botten av knäskålen (patella). Detta är främst en följd av fotstöddets vertikala placering.
 - Framåt/Bakåtläge - med klienten sittande upprätt och höfterna så långt bak det går i stolen bör det finnas ett utrymme lika tjockt som en hand mellan underben och knäskydd. Detta är primärt en funktion av sittedjupet.
- Justera bara knästödet när brukaren är i sittande läge. Försök aldrig att göra det i stående position.

2. Bröstrommen

Det är absolut nödvändigt att montera knästöd och bröstrem korrekt innan du använder ståfunktionen! Bröstrommen håller överkroppen på plats medan stolen höjs till stående position. Remmarna ligger runt ryggrören och har två justeringsringar (se bild). Med hjälp av ringarna kan spännbanden förlängas eller förkortas för anpassning till olika brukare med olika storlekar. Det är även möjligt att flytta bröstremmen uppåt eller nedåt för att tillgodose olika behov. Se alltid till att remmarna går runt ryggstödets rör och sitter på ett korrekt sätt genom ringarna.

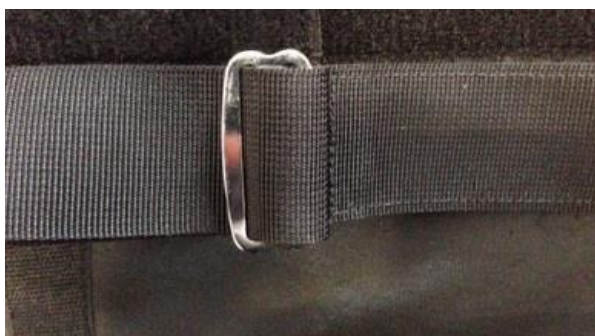

WARNING:



Se till att dra remmens ändå tillbaka mot mitten.

För att lossa bröstremmen, justera spännets hölje framåt och bort från bröstet.

För att minimera irritation, undvik att ha den direkt mot huden.

Endast när både knästöd och bröstrem är bekvämt och rätt monterat, är kunden förberedd för att stå upp på ett säkert sätt.

3. Stående

Med brytaren på armstödet (eller fjärrkontroll som tillval) kan du aktivera ståmekanismen antingen uppåt och nedåt.



Varning: Var uppmärksam och utför varje steg noggrant innan du påbörjar uppresning. Om detta inte görs, ökar risken för skador avsevärt.

4. Laddning av batteri

Använd endast originalbatteriladdare.

Om motorn används medan du laddar batteriet kan detta resultera i skador på elsystemet.

Anslut laddaren i vägguttaget och vänta tills lampan lyser grönt. För att ladda batteriet, dra ut laddarens kontakt från baksidan av ryggstödet bakom klädseln och anslut laddarens kabel i den. Lysdioden lyser rött för att påvisa att laddning pågår. När batteriet är fulladdat lyser dioden grönt och laddaren stängs av automatiskt. Detta tar vanligtvis cirka 1,5 timmar.

